Manuel Paramétrage DIANE

Version DIANE 4.14.2 - Version DM 4.1.2







BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Avertissement

© (Copyright BOW MEDICAL, 1999-2025)

Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de la société **BOW MEDICAL**. Une copie par Xérographie, photographie, film, support magnétique ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues notamment par la loi du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la protection des droits d'auteur.

Marques déposées. Toutes les informations connues ont été communiquées sur les marques déposées pour les produits, services et sociétés mentionnés dans ce document. Tous les autres noms de marques et de produits utilisés dans ce document sont des marques déposées ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1	Intro	oduc	tion	9
	1.1	Info	ormations réglementaires relatives au dispositif médical	9
	1.1.3		Destination du dispositif médical DIANE	
	1.1.2		ndication d'utilisation du dispositif médical	
	1.1.3	3 F	Règlements et normes appliqués au dispositif médical DIANE	9
	1.1.4	4 F	Précautions d'utilisation	. 10
	1.1.5	5 L	Liste des bénéfices attendus	. 12
	1.1.6	6 F	Risques résiduels	. 12
	1.1.7	7 F	Population cible	. 12
	1.1.8	8 ι	Utilisateurs cibles	. 13
	1.1.9	9 (Contre-indications	
	1.1.3	10	Instructions d'emploi sur support papier	
	1.1.3	11	Signaler un évènement indésirable lié au dispositif médical	
	1.1.3	12	Compatibilité des bases de données sur les médicaments	
	1.1.1	13	Liste des messages d'erreur ou d'avertissement	
	1.1.1		Retrait d'un utilisateur	
2	Gén		tés	
	2.1		sentation du module de configuration de l'application	
	2.2		cabulaire	
	2.3		tils du module de configuration (zone 1)	
	2.4		tils de la structure de l'hôpital (zone 2)	
	2.5		tils de configuration (zone 3)	
	2.6		tils de la liste des éléments disponibles (à droite)	
	2.7	Out	tils de la liste des éléments basculés	. 21



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

	2.8	Outil Liste des rapports d'erreur	22
	2.9	Outil d'Historique	23
	2.9.1	Historique des modifications apportées à la configuration	24
	2.9.2	Historique des accès et ouverture de dossiers patients	25
	2.10	ActiveX, ID de donnée et Tags d'impression	25
	2.10	1 Choisir un Active X / ID	27
	2.10	2 Outil Gestion des champs de données Diane	28
	2.10	Outil Gestion des champs de données DIANE depuis le composant	29
3	Le p	aramétrage dans DIANE – Généralités	30
	3.1	Les roues crantées	30
	3.1.3	Mettre en place une roue crantée :	30
	3.1.2	Supprimer une roue crantée :	31
	3.2	Quelques règles de paramétrage	31
	3.2.2	Zone de travail	31
	3.2.2	Astuces pour rechercher des éléments dans les listes	31
	3.2.3	Supprimer / Réintégrer un élément de la liste	32
	3.3	Les composants communs à tous les modules	32
	3.3.2	Le paramétrage commun à tous les composants	33
	3.3.2	Contexte à mettre à jour	36
	3.3.3	Les composants disponibles pour la configuration d'affichage et dans les Saisies Avancées .	38
4	Ong	ets de configuration	
	4.1	Affichage	52
	4.1.3	,	
	4.1.2	Spécificités de la consultation	64
	4.1.3		
	4.1.4	Configuration des composants de l'écran de synthèse et des bandeaux latéraux	71
	4.1.5	Ajouter un sous-onglet	83
	4.1.6	MD Onglet de prescription	84
	4.1.7	MD Plan de soins	94
	4.1.8	Onglet Configuration	116
	4.1.9	Onglet surveillance (DIANE ANESTHESIE) / Bloc (DIANE REA)	118
	4.1.3	0 Historique des modifications	124
	4.2	Autres Listes.	125
	4.3	Boutons	126
	4.4	Chronomètres	127
	4.5	Contenants volumiques	128
	4.6	Correspondants	129



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.7	Drive	ers	129
4.8	Elém	ents de soins	130
4.8.1	L Fe	nêtre d'édition d'un élément de soins	131
4.8.2	2 Fe	nêtre d'édition d'un formulaire de soins	134
4.9	Evén	ements	135
4.10	Foso	s : Feuille d'ouverture de salle et Fiche inter patient	136
4.10	.1	Configuration des feuilles d'ouverture de salle et des fiches inter-patients	136
4.10	.2	Paramétrage des feuilles d'ouverture de salle et des fiches inter patient	137
4.11	Labo	ratoire	139
4.12	Lettr	es type	142
4.12	.1	Emplacement des boutons d'édition des lettres-types dans les Modules	142
4.12	.2	Création d'une lettre	145
4.13	Liste	S	184
4.13	.1	Configuration d'une liste	185
4.13	.2	Code couleur des éléments de liste	186
4.14	Livre	t thérapeutique	186
4.14	.1	Import du livret thérapeutique	187
4.14	.2	Rapport d'import du livret thérapeutique	188
4.14	.3	Edition du livret thérapeutique	189
4.14	.4	Substitutions de produits pharmaceutiques	192
4.14	.5	Dilution obligatoire	192
4.14	.6	Produits marqués comme diluants	195
4.14	.7	Couleurs des médicaments d'anesthésie	195
4.15	Méd	icaments	197
4.15	.1	Présentation de l'onglet Médicaments	197
4.15	.2	Création, modification et suppression des posologies	198
4.15	.3	Création, modification et suppression des prescriptions	200
4.15	.4	Associer un volume à un culot	201
4.15	.5	Associer des couleurs aux médicaments	201
4.16	Para	métrages	203
4.17	MD	Favoris Pres./Ordo./Medic	203
4.17	.1	Favoris	205
4.17	.2	Protocoles	206
4.17	.3	Validation/Approbation des favoris de prescription	207
4.17	.4	Relais (traitement) // Arrêt (traitement)	208
4.17	.5	Produits en administration directe	210
4.17	.6	Favoris pour administration à la demande	214
4.18	Proto	ocoles (PostOp)	214
,,,,		BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur I Version DIANE: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2	DIANE



Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102 Version du document : 1

	4.18	8.1 Créer une nouvelle configuration de prescription	214
	4.18	8.2 Créer un nouveau protocole / une nouvelle prescription	216
	4.18	8.3 Créer un protocole POST OP	217
	4.19	Répétitions	220
	4.20	Ressources	220
	4.20	0.1 Activer un entête personnalisé sur les impressions HTML	221
	4.21	Saisies avancées (SA)	226
	4.21	1.1 Généralités sur les saisies avancées	226
	4.21	1.2 Particularités de la saisie avancée de type Bilan	230
	4.21	1.3 Particularités de la saisie avancée de type examens spécifiques	230
	4.21	1.4 Particularités de la saisie avancée de type Scores	230
	4.21	1.5 Modes d'affichage des saisies avancées dans la consultation	232
	4.21	1.6 Modes d'affichage des saisies avancées dans Visual et dans DIANE REA	235
	4.21	1.7 Impressions des saisies avancées	240
	4.22	Saisies multiples	241
	4.23	Référentiels	243
5	Para	amétrages	245
	5.1	Principales clés de paramétrage	245
	5.1.1	.1 Consultation	245
	5.1.2	.2 DianeRea	253
	5.1.3	.3 Visual	266
	5.2	Configuration de l'export en mode dégradé	270
	5.3	Configurer les actions importantes	274
	5.3.1	.1 Feuille d'ouverture / Fiche Inter Patient	276
	5.3.2	.2 Signatures	277
	5.3.3	.3 Personnels présents	278
	5.3.4	.4 Informations du dossier	280
	5.3.5	.5 Événements	280
	5.3.6	.6 Saisies avancées	282
	5.3.7	.7 Enregistrement des modifications	284
	5.4	Modifier la durée maximale d'une intervention	285
	5.5	Paramétrage des données transmises à la base de données sur les médicaments	285
	5.6	Configuration du mécanisme de reprise (Consultation)	286
	5.6.1	.1 Le niveau de reprise et reprise manuelle	286
	5.6.2	.2 Paramétrer le Mécanisme de Reprise	288
	5.7	Configuration du module de saisie rapide	289
	5.7.1	.1 Ouverture de la configuration	289
	5.7.2	.2 Présentation de la fenêtre de configuration	291



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

5.7	7.3	Configuration des filtres	292
5.8	Pá	aramétrage du DiaReport	293
5.9	G	estion des verrous	294
5.9	9.1	Introduction	294
5.9	9.2	Outil de Gestion des verrous	296
5.9	9.3	Configuration liée aux verrous	298
5.9	9.4	Problèmes connus	301
5.10	Pa	aramétrage CIM10, CCAM et NGAP	303
5.2	10.1	Configuration de la CIM10 et de la CCAM	303
5.2	10.2	Paramétrage de DIANE REA (CCAM)	304
5.2	10.3	Paramétrage des codes CIM10, CCAM et NGAP	306
5.11	Pa	aramétrage des alertes de modification à distance des champs Ax	311
5.12	N	Paramétrage de la balance liquidienne	311
5.2	12.1	Définir l'heure de début de calcul de la balance liquidienne	
5.2	12.2	Définir l'heure de fin de calcul de la balance liquidienne	312
5.2	12.3	Remise à zéro de la balance liquidienne à l'entrée du patient dans un nouveau service	313
5.2	12.4	Cacher la date et l'heure des éléments dans la balance liquidienne	313
5.2	12.5	Valeur par défaut pour l'affichage de la balance liquidienne des X dernières heures	313
5.2	12.6	Case à cocher De la veille cochée par défaut	313
5.13	Pa	aramétrage des mots de passe	313
5.2	13.1	Expiration des mots de passe	314
5.2	13.2	Durée de validité des mots de passe	314
5.2	13.3	Taille minimale des mots de passe	315
5.2	13.4	Nombre de chiffres minimum dans le mot de passe	315
5.2	13.5	Nombre de lettres minuscules minimum dans le mot de passe	315
5.2	13.6	Nombre de lettres majuscules minimum dans le mot de passe	315
5.2	13.7	Nombre de caractères spéciaux minimum dans le mot de passe	315
5.2	13.8	Permettre de changer de mot de passe par l'utilisateur	316
5.2	13.9	Nombre de tentatives avant que le compte soit bloqué	316
5.2	13.10	Historisation du mot de passe	316
5.14	Pa	aramétrage du cockpit pour l'anesthésie	316
5.2	14.1	Activation de l'icône VPA	316
5.2	14.2	Configuration des saisies avancées VPA	316
5.15	Pa	aramétrage des saisies multiples	317
5.2	15.1	Activation de la synchronisation	317
5.2	15.2	Activation de la case à cocher Conserver cette saisie multiple	317
5.16	Pa 31	aramétrage des informations au survol de l'icône des informations contextuelles complém L7	entaires



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

	5.17	Paramétrage de l'exclusion d'affichage des données d'autres services	318
	5.18	Paramétrage des traitements et prémédications	319
	5.19	Paramétrage des scores intégrés (IGS II, CRIB II)	322
	5.19	Type d'admission par défaut des patients en réanimation pour le calcul du score IGS2	322
	5.19 Dian	2 Alimenter automatiquement le champ "Maladies chroniques" à partir de la saisie dans le ce MALADIES_CHRONIQUES (AX Info patient/Id de donnée 38)	•
	5.19	3 Configuration des paramètres des fréquences cardiaques	322
	5.20	Paramétrage de l'âge réel	323
	5.21	Paramétrage de l'ordre d'affichage des résultats de laboratoire	323
	5.22	Impression des étiquettes médicamenteuses	324
6	Conf	iguration des utilisateurs (et structure de l'établissement)	325
	6.1	Vocabulaire	325
	6.2	Configuration d'un utilisateur	326
	6.2.1	Créer un compte utilisateur	327
	6.2.2	Modifier un compte utilisateur	329
	6.2.3	Supprimer un compte utilisateur	330
	6.2.4	Utiliser la fonctionnalité de Signature d'utilisateur	330
	6.2.5	Créer des catégories d'utilisateurs	331
	6.2.6	Modifier une catégorie d'utilisateurs	333
	6.2.7	Supprimer une catégorie d'utilisateurs	334
	6.2.8	Les roues crantées	335
	6.2.9	Gestion des droits	336
	6.3	Configuration de la structure de l'établissement	338
	6.3.1	Organisation de l'arborescence	338
	6.3.2	Ajouter un poste	338
	6.3.3	Ajouter une entité dans l'arborescence de l'établissement	339
	6.3.4	Rechercher un poste, une salle ou un utilisateur	340
	6.3.5	Ajouter un utilisateur pour le module Rendez-Vous	341
	6.3.6	Inspecter l'historique d'un poste	341
	6.3.7	Supprimer un poste ou une salle	342
7	ANN	EXES	343
	7.1	Composants exclusivement utilisés dans les saisies avancées	343
	7.1.1	Sous-score	343
	7.1.2	Sous-score (affichage intégré)	343
	7.1.3	Bouton de valeurs prédéfinies	344
	7.1.4	·	
	7.1.5	Composants exclusivement utilisés en configuration d'affichage	345
	7.2	Liste des ActiveX et Id de données	



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

	7.2.1	Liste des ActiveX	. 368
	7.2.2	Liste des Id de données	. 368
	7.3	Listes des champs calculés	. 392
	7.3.1	Données de la consultation	. 392
	7.3.2	Données liées à l'obstétrique	. 395
	7.4 L	istes des Tags	. 411
	7.4.1	Tags d'impression	. 411
	7.4.2	Tags des informations affichées dans le portail DIANE REA (versions antérieures à la V4.8)	. 413
	7.4.3	Tags des informations affichées dans la barre de titre de Visual/DIANE REA/ DIANE OBSTETRI 414	QUE
	7.4.4	Tags des informations affichées dans le bandeau Visual/DIANE REA/ DIANE OBSTETRIQUE	. 415
	7.4.5	Tags pour les entêtes des documents intégrés (Evolutions, Synthèse)	. 416
	7.5 L	istes des paramètres physiologiques	. 416
8	Définit	ions des pictogrammes	. 418

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

1 Introduction

1.1 Informations réglementaires relatives au dispositif médical

1.1.1 Destination du dispositif médical DIANE

Les données gérées et affichées par le logiciel **DIANE** peuvent amener l'utilisateur à prendre des décisions à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, notamment grâce à son moteur de prescription et aux calculs des différents scores que **DIANE** propose.

D'après la réglementation en vigueur, ce moteur de prescription et les calculs permettant de répondre à

cette destination sont marqués dispositifs médicaux. Les modules concernés sont tagués MD dans le présent manuel.

1.1.2 Indication d'utilisation du dispositif médical

Le dispositif médical **DIANE** est un logiciel utilisé dans les unités de soins critiques en établissement de santé, destiné à être utilisé par les professionnels de santé tels que les médecins anesthésistes et réanimateurs, les infirmiers et les pharmaciens.

Le logiciel est utilisé lors de la prise en charge du patient, avant, pendant, et après une anesthésie, ainsi que durant tout son séjour en service de réanimation, U.S.I. ou U.S.C, dans les services d'anesthésie et les réanimations.

Le dispositif médical **DIANE** aide l'utilisateur à prendre des décisions à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, notamment grâce à son moteur d'aide à la prescription et ses scores/données calculées.

Le dispositif médical **DIANE** permet entre autres de détecter les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives lors de la prescription.

Le plan de soins permet de suivre les étapes clés de la prise en charge notamment les administrations médicamenteuses. Ce qui permet le suivi régulier de l'évolution du patient.

La solution intègre la balance liquidienne qui permet la collecte des entrées et sorties de liquides corporels chez un patient.

Le système permet d'échanger des données de façon bidirectionnelle avec d'autres systèmes d'information hospitaliers et permet de lire des données en provenance de dispositifs médicaux matériels, sans influencer leur indication d'utilisation.

Le système est en grande partie paramétrable afin de permettre d'adapter le logiciel aux besoins des différents types d'utilisateurs et aux spécificités des différents établissements de soins.

1.1.3 Règlements et normes appliqués au dispositif médical DIANE

1.1.3.1 Règlements appliqués au dispositif médical DIANE

- Directive 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
- Règlement (UE) sur les dispositifs médicaux 2017/745
- Règlement UE: 2016/679 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- Règlement d'exécution (UE) 2021/2226 du 14 décembre 2021 : les instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

1.1.3.2 Normes appliquées au dispositif médical DIANE

- IEC 62304 : 2006 Cycle de vie d'un logiciel dispositif médical
- ISO 13485 : 2016 Exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux.
- ISO 14971 : 2019 Gestion des risques des dispositifs médicaux
- IEC 62366:2015 Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux
- ISO 20417 :2021 Dispositifs médicaux Informations à fournir par le fabricant
- ISO 15223-1 :2021 Dispositifs médicaux Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant Partie 1 : Exigences générale
- Le règlement (UE) 207/2012 relatif aux instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2021-2226 pour lequel BOW MEDICAL est conforme.

1.1.4 Précautions d'utilisation

1.1.4.1 Installation conforme

La suite logicielle DIANE doit être installée conformément au guide d'installation (BM-INS-PR-003).

1.1.4.2 Utilisation conforme

L'utilisation des fonctionnalités dispositif médical de ce module est réservée aux professionnels de santé.

Toute utilisation inappropriée est interdite.

L'utilisateur doit :

- N'utiliser que des produits non défectueux.
- Protéger les patients, les tiers, les autres opérateurs, les assistants et eux-mêmes de tout danger.

L'utilisateur doit vérifier la sécurité de fonctionnement du dispositif avant chaque utilisation.

L'utilisateur doit vérifier que le dispositif est opérationnel en tout temps et le maintenir dans de bonnes conditions de travail.

1.1.4.3 Consignes de sécurité



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Le produit est strictement destiné à des professionnels de santé, tout usage des informations issues du dispositif médical DIANE par une personne non autorisée engage la sécurité du patient.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour tout nouvel utilisateur, il est fortement recommandé de suivre une formation, avant d'utiliser le module d'aide à la prescription, afin de réduire le risque d'erreur d'utilisation.



BOW MEDICAL SAS 43. Avenue d'Italie 8000

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 10 / 419

PRECAUTIONS D'UTILISATION



Les alertes ou informations transmises par les fonctions n'ont pas pour but de se substituer aux décisions de l'utilisateur du dispositif médical DIANE.

Ce dernier, en sa qualité de professionnel de santé, reste responsable de l'usage et des interprétations qu'il fait des informations obtenues par le dispositif médical DIANE et des actes et conseils qu'il en déduit ou émet. Chaque prescription doit être vérifiée par le professionnel de santé avant signature.

1.1.4.4 Informations importantes avant utilisation

Lors de l'utilisation du dispositif médical DIANE, il est important de suivre toutes les indications ci-dessous. Toute action contraire à ces indications peut affecter l'exactitude et les performances du dispositif.

En cas de besoin d'aide pendant la mise en place, l'utilisation ou la maintenance, veuillez consulter BOW MEDICAL.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas installer de module ou d'add-on complémentaire sans avoir reçu l'autorisation de BOW MEDICAL.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Toute modification du réseau IT et/ou de sa configuration dans une configuration différente de celle indiquée dans le manuel d'installation est susceptible de causer des altérations ou dysfonctionnements du logiciel.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Tout logiciel ou équipements compatibles avec le présent logiciel sont listés dans le manuel d'installation. Toute utilisation d'un logiciel ou équipement ne figurant pas sur cette liste est susceptible de causer des altérations ou dysfonctionnements des performances du logiciel.

1.1.4.5 Dysfonctionnements

BOW MEDICAL apporte un soin tout particulier à la qualité de ses produits et services. Néanmoins si un dysfonctionnement ou une erreur dans l'information fournie est constaté :

- Arrêter immédiatement d'utiliser le dispositif médical DIANE et les informations émises.
- Essayer d'identifier ou d'éliminer la cause en utilisant la description de ce document (Liste des messages d'erreur ou d'avertissement).
- S'il n'est pas possible d'identifier ou d'éliminer la cause à l'aide de ce document, arrêter d'utiliser le produit et appeler le service support.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

1.1.5 Liste des bénéfices attendus

- 1. Limiter les erreurs de prescription de manière générale
- Limiter les erreurs de prescription en matière de dosage, de doublon, de concentration/titration et de posologie maximale
- 3. Limiter les prescriptions incomplètes
- 4. Amélioration de la prise en charge du patient par le calcul de scores permettant :
 - L'évaluation de la gravité des conditions médicales,
 - La prédiction du risque et l'issue clinique,
 - Le suivi de l'état de santé et de la progression de la maladie,
 - L'aide à la prise de décision (en post op par exemple).

1.1.6 Risques résiduels

1. Mauvais fonctionnement dû à des problèmes du logiciel ou de sa mise à jour

Des problèmes liés à **DIANE** ou sa mise à jour pourraient se produire. Il est recommandé de se conformer aux vérifications et mises à jour préconisées par le fabricant **BOW MEDICAL** afin d'éviter que les fonctionnalités Dispositif Médical (prescription, plan de soins, scores, balance liquidienne) de **DIANE** ne soient impactées, et par conséquent, les soins apportés aux patients.

2. Mauvais fonctionnement de la Base de Données sur les Médicaments (BDM)

La mise à jour du logiciel **DIANE** et de la BDM est une condition de la qualité des fonctionnalités du dispositif médical.

Il est de la responsabilité de l'exploitant/utilisateur final de s'assurer que les mises à jour requises dont il est informé sont réalisées correctement, ou de les effectuer le cas échéant.

3. L'utilisateur(trice) néglige de consulter les alertes remontées par la Base de Données sur les Médicaments (BDM)

L'utilisateur(trice) doit s'assurer de prendre en compte les éventuelles notifications d'alerte générées par la base de médicament pour un traitement en cours de prescription vis à vis de possibles allergies, posologies non adaptées et contre-indications/interactions médicamenteuses.

4. L'utilisateur(trice) ne peut pas distinguer 2 homonymes

L'utilisateur doit s'assurer qu'il est positionné sur le bon dossier en prenant en compte les différents éléments caractérisant le patient

1.1.7 Population cible

• Anesthésie : tout patient nécessitant une prise en charge anesthésique



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 12 / 419

• Réanimation : tout patient de tout âge hospitalisé en service de réanimation, quel que soit le type de réanimation (adulte, néonatale, chirurgicale, réanimation cardiaque, soins continus, etc...)

1.1.8 Utilisateurs cibles

Le dispositif médical **DIANE** est exclusivement destiné à des professionnels de santé. Une utilisation par d'autres personnes n'est pas raisonnablement prévisible.

Professionnels de santé pouvant utiliser le dispositif médical **DIANE** : médecins anesthésistes et médecins anesthésistes réanimateurs, médecins réanimateurs, infirmiers, infirmiers anesthésistes et les pharmaciens.

L'onglet de prescription est destiné à être utilisé par des médecins détenteurs du diplôme d'état de docteur en médecine.

L'onglet de plan de soins peut être utilisé par les professionnels de santé tels que les infirmiers diplômés d'état.

1.1.9 Contre-indications

Le dispositif médical **DIANE** ne doit pas être utilisé en dehors des indications spécifiées dans la rubrique *Indication d'utilisation*, notamment chez des patients :

- pris en charge dans des services autres que l'anesthésie, la réanimation ou les soins continus,
- ne nécessitant pas une prise en charge en soins critiques,
- dont la prise en charge ne nécessite pas d'une aide à la décision thérapeutique ou diagnostique dans le cadre des soins critiques.

1.1.10 Instructions d'emploi sur support papier

En accord avec le règlement 2021/2226, à la demande d'un utilisateur, BOW MEDICAL peut fournir des manuels utilisateur des dispositifs médicaux sur un support papier sans frais supplémentaires pour l'utilisateur dans le délai établi dans l'évaluation des risques soit au plus tard dans les 7 jours civils suivant la réception de la demande de l'utilisateur, ou à la livraison du dispositif si la demande a été faite au moment de la commande.

1.1.11 Signaler un évènement indésirable lié au dispositif médical

Le moteur de prescription **DIANE** est un dispositif médical selon la réglementation en vigueur.

Tout comportement anormal du dispositif médical **DIANE** provoquant un risque ou un incident ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la dégradation grave de l'état de santé du patient doit être signalé sans délai à Bow Médical et à l'autorité compétente de votre pays.

En cas de version corrective de sécurité critique, **BOW MEDICAL** vous contactera par courriel pour vous demander de réaliser la mise à jour dans les plus brefs délais.

1.1.12 Compatibilité des bases de données sur les médicaments

DIANE s'interface avec les bases de données Vidal et BCB.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 13 / 419

Version minimale requise pour Vidal: 2020.5.3 Version minimale requise pour BCB: 20180702

1.1.13 Liste des messages d'erreur ou d'avertissement

DIANE affiche des messages sous forme de splashscreen pour informer les utilisateurs.



La position du message indique la nature de l'information :

- En haut au centre : message de traitement en cours
- En haut à droite : messages d'information (par exemple : connecteurs d'interopérabilité comme les imports de labo) ou interruption de la réception des données biomédicales
- En haut à gauche : message de redémarrage des applications (automatique ou demandé par un utilisateur)
- Milieu au centre : Gestion des verrous + Saisies invalides + Mise à jour SIH
- En bas à gauche : Attentes RPC
- En bas au centre : Erreur en général + Signature des prescriptions réalisée

En cas d'erreur, la première mesure à prendre est de relancer **DIANE** avec **DIANE Manager**. Dans ce cas où cette opération ne règle pas le problème, veuillez bien noter l'erreur et contacter le service support de **BOW MEDICAL**.

Pour les messages type "Dialogue", il peut y en avoir de plusieurs types :

• Information :



Confirmation :



Avertissement :



• Erreur :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



1.1.14 Retrait d'un utilisateur

Si un utilisateur configuré dans DIANE quitte l'établissement, il ne disparaît pas complètement : il est simplement désactivé. Garder à disposition les utilisateurs désactivés permet de garder la cohérence d'affichage et d'archivage des dossiers.

Pour supprimer un utilisateur, un administrateur doit désactiver son compte dans le module de configuration des utilisateurs.

Un compte désactivé peut être réactivé par un administrateur.

2 Généralités

L'outil de paramétrage est disponible depuis le portail **DIANE** en cliquant sur le bouton **config. application**. Le paramétrage n'est accessible qu'aux référents **DIANE** pour lesquels les droits ont été débloqués (voir *Configuration des utilisateurs (et structure de l'établissement)*).

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



Ce module permet de configurer les applications **DIANE ANESTHÉSIE** (**Consultation** et **Visual** (PerOp et PostOp)), **DIANE OBSTETRIQUE** et **DIANE REA**.

Les captures d'écran contenues dans ce manuel sont informatives.

2.1 Présentation du module de configuration de l'application

A l'ouverture du module de configuration, la fenêtre suivante s'ouvre :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 16 / 419

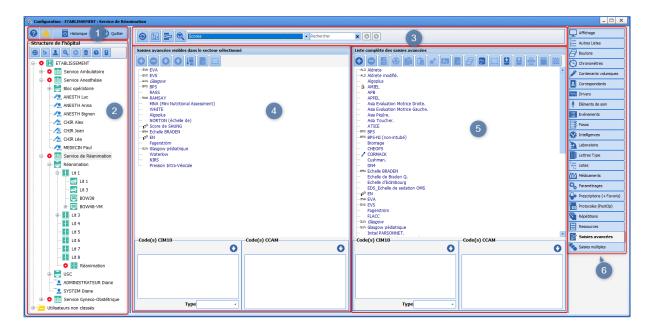

La zone 1 permet d'accéder à des fonctionnalités générales de type **gestion des champs de données DIANE** ou Historique des dernières actions réalisées dans ce module. (Chapitres « outils Liste des rapports d'erreur » et « Gestion des champs de données DIANE »).

La colonne **Structure de l'hôpital** (zone 2) représente l'arborescence de l'établissement telle que paramétrée dans la "*configuration des utilisateurs*". Chaque ligne peut disposer de sa propre configuration, représentée par une "*roue crantée*".

La colonne de droite (zone 5) représente l'ensemble des éléments disponibles.

La colonne du milieu (zone 4) représente le ou les éléments de la colonne de droite appliqués à l'entité et ses descendants par le biais d'une roue crantée.

Lors des sessions de paramétrage, il est souvent nécessaire de redémarrer DIANE. Pour optimiser le temps dédié à ces sessions de paramétrage, les filtres d'affichage, onglets et sous-onglets sélectionnés sont restaurés automatiquement.

2.2 Vocabulaire

Roue Crantée	L'icône représente une configuration : toutes les entités peuvent disposer de leur propre « roue crantée ».
Entités de l'établissement Entités: Hôpital Département Bloc Salle Lut Lut avec une mauvaise configuration des drivers Ordinateur	Chaque entité peut disposer de sa propre configuration (roue crantée). Chaque entité n'ayant pas de configuration propre dépend de la première configuration rencontrée en remontant dans l'arborescence.
Configuration	Module de configuration des différents modules de DIANE.
Configuration des utilisateurs	Module de configuration des utilisateurs, de leurs droits sur les modules et de l'arborescence de l'établissement.
Menu de Configuration	La plupart des onglets de configuration disposent d'un menu



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 17 / 419

(Zone 3)	déroulant permettant de sélectionner un élément à configurer. Par exemple, pour l'onglet Affichage
	Veual Paramètres de configura Obstétrique Réanimation
Onglet de configuration (Zone 6)	Ce sont les onglets à droite de l'interface de configuration. Ils permettent de paramétrer le comportement et l'aspect des modules DIANE
Elément basculé	Les éléments basculés sont les éléments disponibles, visibles ou utiles à l'utilisation des modules DIANE dans l'entité dans laquelle le poste se trouve.
Colonne des entités de l'établissement (Zone 2)	La colonne de gauche contient l'arborescence des Entités de l'établissement porteuses des Roues crantées .
Liste des éléments disponibles (Zone 5)	La colonne de droite contient tous les éléments utilisables pour l'ensemble des Roues crantées . Pour être utilisé et disponible, il faut que cet élément soit basculé dans la colonne de visibilité au milieu.
Liste des éléments configurés dans l'entité (Zone 4)	La colonne du milieu contient les Eléments basculés .
Informations de configuration des composants	Un composant dont les données sont destinées à être incluses dans Dossier patient : doit avoir un ActiveX et un ID de donnée . Ce couple d'informations est utilisé dans certains onglets de configuration.
Dossier patient	Un Dossier patient est une collection de cases contenant des informations saisies par les utilisateurs dans les Ecrans DIANE .
Ecran DIANE	Un écran DIANE contient une partie des composants - du dossier patient - organisés en onglets. La quasi-totalité des composants des Ecrans DIANE possèdent des Informations de configuration sous forme d'un ActiveX.
ActiveX	Indissociable de l' ID de donnée , permet aux données entrées par l'utilisateur dans un composant d'être conservé dans le Dossier patient.
ID de donnée	Indissociable de l' ActiveX , permet aux données entrées par l'utilisateur dans un composant d'être conservées dans le Dossier patient.
Lien contextuel	Lien permettant d'afficher une page web ou un autre programme.

2.3 Outils du module de configuration (zone 1)

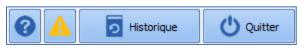

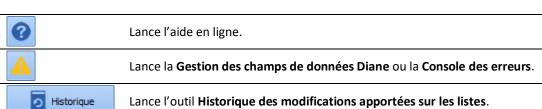



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE** : 4.14.2 Version du dispositif médical : 4.1.2

UDI : (01)3760404900005(10)040102

Permet de quitter l'application.

2.4 Outils de la structure de l'hôpital (zone 2)



- Permet d'actualiser l'arborescence l'établissement.

 Permet de déployer l'arborescence de l'établissement.

 Permet de masquer et faire apparaître les utilisateurs insérés dans l'arborescence.


 Permet de rechercher une entité avec tout ou partie de l'intitulé.

 Permet de créer une configuration : une roue crantée apparaît sur l'entité sélectionnée.

 Permet de supprimer la configuration liée à l'entité sélectionnée

 Permet de faire apparaître la légende des icones utilisés dans l'arborescence logique de
- l'établissement
- Permet d'exporter l'arborescence actuelle dans un fichier.

2.5 Outils de configuration (zone 3)

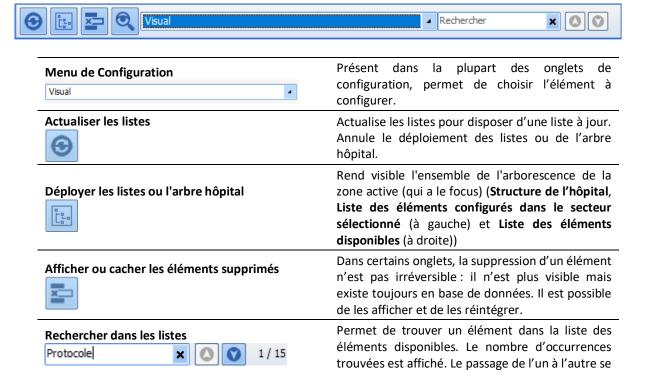



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Afficher un aperçu de la feuille d'ouverture configurée (Onglet Fosos)

Permet de visualiser la feuille d'ouverture configurée.

Prévisualiser la lettre type sélectionnée (Onglet Lettres type)


Permet d'avoir un aperçu de la structure du document.

Ajouter un root (Onglet Listes)

Permet de créer une nouvelle liste : une nouvelle ligne s'ajoute dans le menu déroulant.

2.6 Outils de la liste des éléments disponibles (à droite)

Les boutons sont actifs en fonction de leur disponibilité pour l'onglet sélectionné.

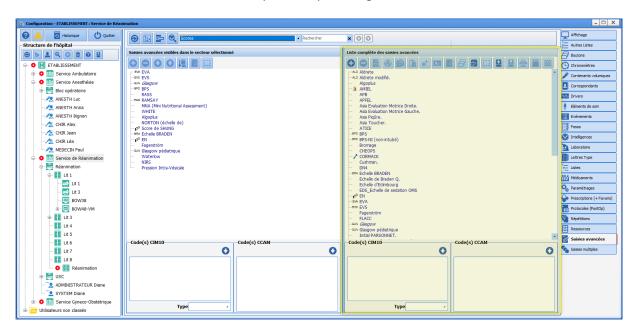




Créer un nouvel élément.



Supprimer un ou plusieurs éléments.

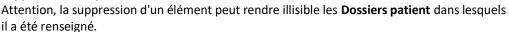



Réintégrer un ou plusieurs éléments supprimés et leurs éventuels éléments associés.



Editer l'identifiant externe de l'élément : permet de modifier des paramètres internes destinés aux logiciels vers lesquels cet élément est envoyé.



Copier un ou plusieurs éléments.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

	Coller un ou plusieurs éléments : la copie n'est possible que si l'élément parent est un sélecteur.
•	Basculer l'élément en sélecteur ou non (Un sélecteur est un élément permettant de rassembler d'autres éléments sans apparaitre à l'utilisation).
AA	Renommer l'élément.
B	Editer l'élément.
	Basculer un ou plusieurs éléments parmi les éléments configurés dans l'entité en cours de configuration.
	Ne sélectionne aucun élément.
	Importer un ou plusieurs éléments préalablement exportés.
	Exporter un ou plusieurs éléments.
출	Ajouter un séparateur à la racine (pour améliorer la lisibilité).
	Définir un en-tête pour le ou les documents sélectionnés (onglet Lettres type)
	Assigner un fond de page aux documents sélectionnés (onglet Lettres type).
→ ▼	Générer des éléments à partir de codes CCAM (onglet Evénements).
	Associer l'élément à un bouton configurable.
	Substitutions de produits thérapeutiques (onglet Livret thérapeutique).
10	Affecter une couleur au(x) médicament(s) sélectionné(s) (onglet Médicaments).
×	Effacer la couleur du/des médicament(s) sélectionné(s) (onglet Médicaments).
XHL	Editer un XML Ambucare (onglet Ressources).

2.7 Outils de la liste des éléments basculés

Les boutons sont actifs en fonction de leur disponibilité pour l'onglet sélectionné.

Pour faciliter la recherche, un double-clic sur un élément de cette liste permet de le sélectionner automatiquement dans la liste des éléments disponible (liste de droite). La recherche d'un élément se fait également via le menu déroulant **rechercher** situé en haut de la fenêtre.



 $C\epsilon$

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1


43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

BOW MEDICAL SAS


Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

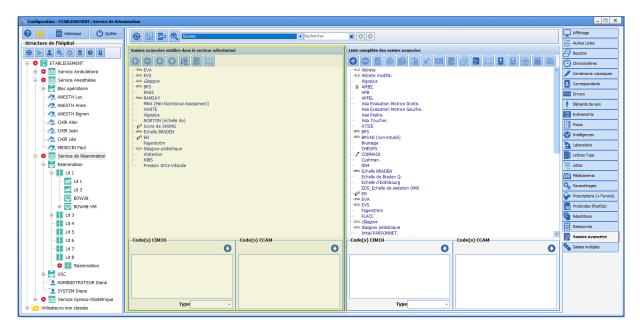

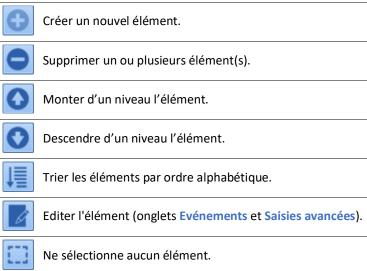

2.8 Outil Liste des rapports d'erreur

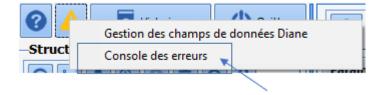

Cet outil, accessible via ____, puis en choisissant **Console des erreurs**, permet de retrouver des informations portant sur les erreurs rencontrées afin de faciliter la résolution de problèmes.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

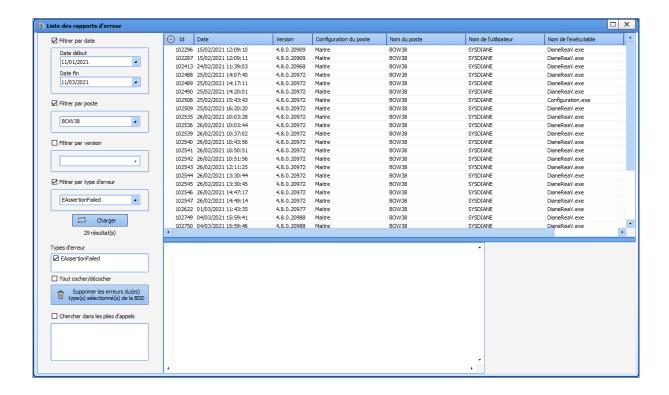

2.9 Outil d'Historique



Cet outil accessible via le bouton permet d'avoir une traçabilité concernant les modifications de la configuration (Modification sur les listes), l'accès des utilisateurs, l'accès aux dossiers patient, les resynchronisations, les verrous et l'accès aux différents modules.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2.9.1 Historique des modifications apportées à la configuration

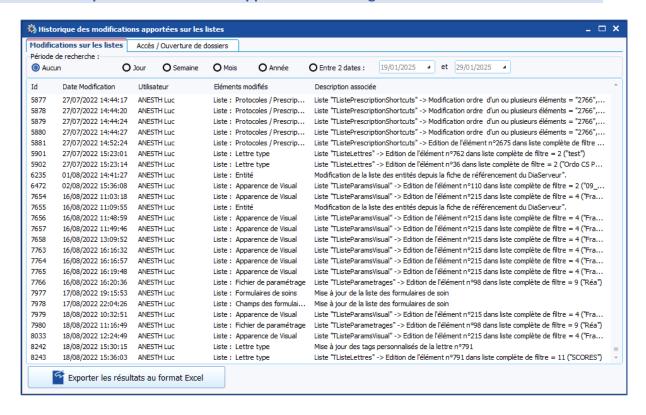

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2.9.2 Historique des accès et ouverture de dossiers patients

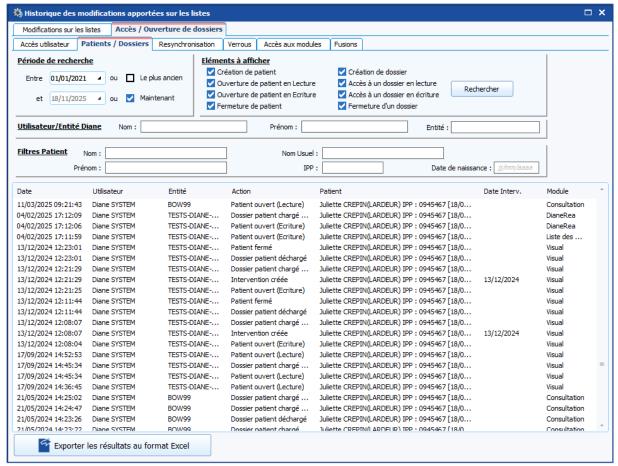

Cette fenêtre permet de visualiser les historiques de :

- Accès des utilisateurs,
- Accès aux dossiers patients,
- Resynchronisations,
- Verrous,
- Accès aux modules,
- Fusions.

2.10 ActiveX, ID de donnée et Tags d'impression

Afin de pouvoir stocker les informations saisies dans les dossiers, le logiciel **DIANE** a besoin de les stocker en base de données. Pour cela chaque composant a besoin d'un couple d'Active X / Id données (Ax/Id) (hormis les saisies avancées, les feuilles d'ouverture de salle, les lettres types, les boutons ainsi que les composants « éditeurs de texte Diane » …).

Un ActiveX correspond à un ensemble de données (les antécédents, par exemple).

Chaque donnée est identifiée par son Id de donnée (antécédents anesthésiques, par exemple).

Un Tag d'impression est associé à chaque Ax/Id : cela permet de récupérer les données pour les intégrer dans les lettres-type.

Lorsque deux champs ont le même AX/Id, qu'ils sont paramétrés de manière identique à différents endroits



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

de l'application, les données saisies d'un côté le seront également de l'autre.

Un clic droit sur le composant permet d'accéder au menu suivant pour configurer le couple AX/Id :

L'icône indique que le composant n'a pas d'Ax/ld.



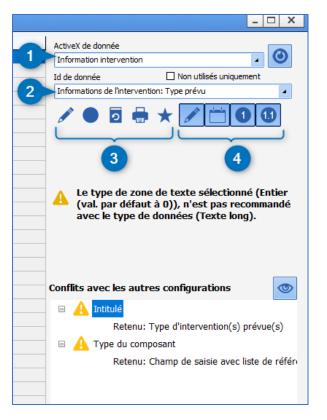

- 1. ActiveX du composant
- 2. Id de donnée du composant
- 3. Paramètres de l'Id de donnée :
 - indique le type de données (Texte, Date/Heure, Entier ou Décimal)
 - Indique le type de données (Normale ou Calculée/Automatique)
 - 2 : indique que la donnée est historisée
 - Tag d'impression (indiqué au survol à la souris)
 - Id de donnée utilisé (le survol à la souris indique le (ou les) composant(s) qui utilise(nt) la donnée)
- 4. Filtres de sélections des Id de données (Texte, Date/Heure, Entier ou Décimal)



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2.10.1 Choisir un Active X / ID

Une partie des AX/Id a un objectif dédié. Les autres peuvent être utilisés pour tout type de composant et surtout peuvent jouer un rôle différent de celui de leur nom.

La liste des Ax/Id est fournie en annexe de ce document. Les Id sont classés par Ax. Pour chacun, le tag d'impression mais aussi les particularités sont mentionnées.

Une vigilance doit être apportée sur les Id ayant un nom particulier. Il est possible qu'un comportement associé soit paramétré.

Par exemple, tous les Id de la liste Ax = **Visite pré anesthésique** sont liés les uns aux autres. Compléter l'un des composant de cette liste va remplir automatiquement les composants ayant l'Id « fait par » et « le ».

Autre exemple : l'Ax/Id dédié à l'IMC (Information patient / BMI) attend le résultat de ce calcul. Il doit donc être réservé pour cet usage.

Pour aider au choix d'un Ax/Id, un outil nommé « Gestion des champs données DIANE » (accessible depuis la page principale du module configuration application ou directement dans la fenêtre de paramétrage du composant (en cliquant sur l'œil) permettra de repérer facilement si ce couple Ax/Id est utilisé et de voir son paramétrage dans les autres configurations.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowr

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2.10.2 Outil Gestion des champs de données Diane

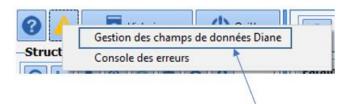

Cet outil, accessible via en choisissant **Gestion des champs de données Diane**, permet de retrouver d'éventuelles différences de configuration des champs de données **DIANE**.

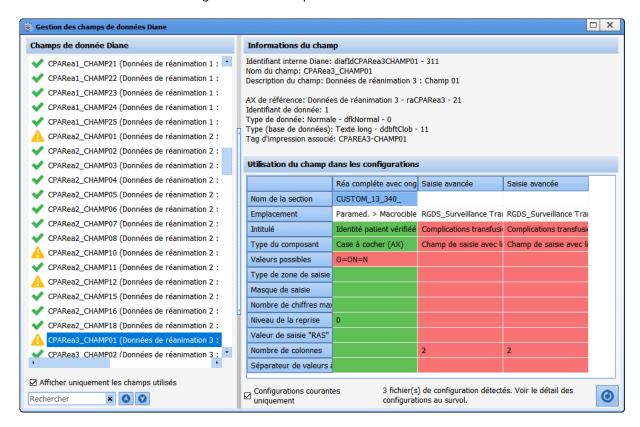

Lorsque deux champs utilisent le même couple Ax / Id, les données entre les deux champs seront partagées. Il est nécessaire que la configuration soit similaire (Ex : un champ de saisie simple et un menu déroulant ne peuvent pas avoir le même couple Ax/Id car les informations saisies dans ces champs n'ont pas le même format). Cet outil permet de visualiser les conflits entre les champs comprenant le même couple Ax/Id afin d'éviter les erreurs.

La colonne de gauche liste l'ensemble des champs présents et les champs présentant des conflits sont marqués par une icône . Lors de la sélection d'un couple Ax/Id, la partie droite de la fenêtre met en évidence les discordances trouvées par la couleur rouge.

Lorsque la case **configuration courantes uniquement** est cochée, la comparaison se fait uniquement pour les configurations déployées. Décocher cette case permettra de faire la comparaison avec toutes les configurations existantes.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2.10.3 Outil Gestion des champs de données DIANE depuis le composant.

Cet outil de gestion est aussi accessible depuis la fenêtre de paramétrage d'un composant.

Pour cela, il faut cliquer sur situé dans la partie inférieure droite de la fenêtre. Le clic sur l'œil permettra d'ouvrir la fenêtre vue dans le chapitre précédent.

Il est possible de voir des informations en accès direct. Dans l'exemple ci-dessous, l'intitulé n'est pas strictement le même. Pour appliquer directement l'intitulé suggéré, il faut faire un double clic sur la proposition.

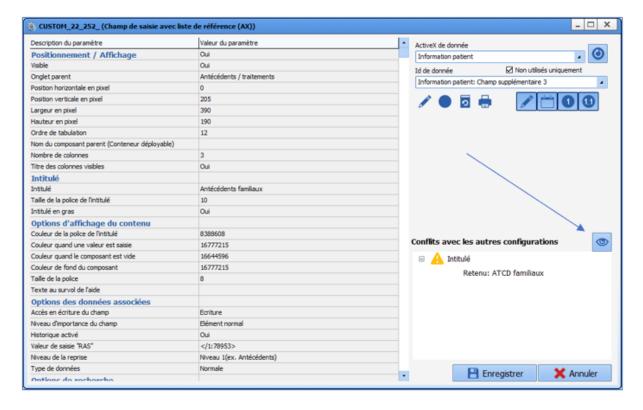

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


3 Le paramétrage dans DIANE - Généralités

Le paramétrage dans le logiciel **DIANE** se fait en suivant toujours le même déroulé :

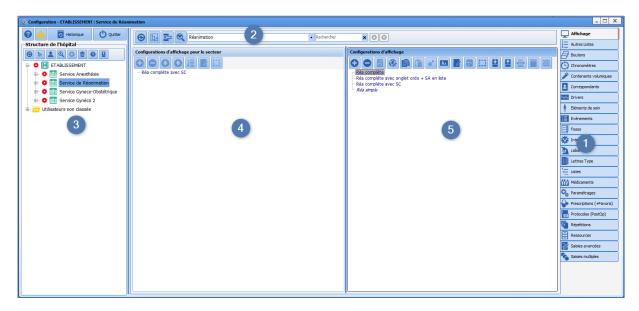

- 1 Choix de l'onglet
- Si présence d'un menu déroulant 2, spécifier le type de paramétrage
- Choix dans l'arborescence 3 de l'endroit concerné par le paramétrage
- Au centre :
- 4. Eléments mis à disposition du secteur sélectionné en 3.
- 5. Liste exhaustive des éléments disponibles dans le logiciel

3.1 Les roues crantées

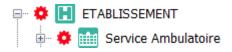

Appliquer une roue crantée sur un secteur, va permettre d'isoler ce secteur et de différencier le paramétrage et/ou la configuration de cette zone.

Les roues crantées principales ont été mises en place au moment du paramétrage initial. Il est possible qu'il soit nécessaire d'en ajouter lorsque la configuration sur un secteur évolue, mais aussi pour tester une nouvelle configuration sans impacter tout le secteur. Dans ce dernier cas, il sera opportun de penser à la supprimer à la fin des tests.

La roue crantée peut être appliquée pour un secteur entier ou juste sur une salle. Elle peut aussi être appliquée sur les utilisateurs.

3.1.1 Mettre en place une roue crantée :

Fax: +33 9 72 29 34 87

Clic droit sur l'emplacement voulu >> Créer une nouvelle configuration



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 30 / 419


- Valider la demande de confirmation
- Accepter de récupérer une copie de la première version trouvée.

3.1.2 Supprimer une roue crantée :

Clic droit sur le secteur portant la roue crantée >> Supprimer la configuration

Cette suppression aura pour effet de remettre le secteur, la salle voire le poste au même niveau de configuration que celui juste au-dessus.

Quelques règles de paramétrage

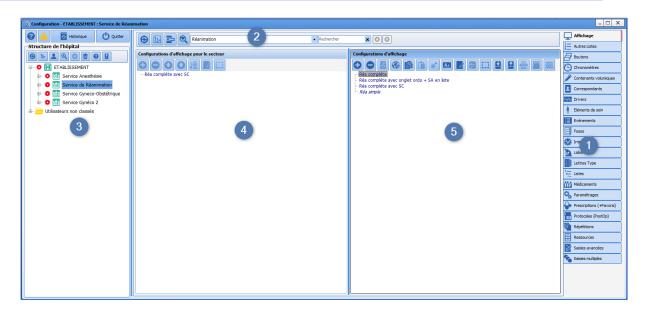

3.2.1 Zone de travail

Le travail s'effectue sur la zone centrale de droite (zone 5). C'est dans cette colonne que les éléments pourront être créer, éditer pour les configurer...

La colonne centrale de gauche (zone 4) est juste l'affichage de ce qui est mis à disposition du secteur sélectionné dans l'arborescence (zone 3). Dans cette colonne, il est possible :

- D'intégrer des éléments de la liste de droite,
- De supprimer les éléments inutiles pour le secteur sélectionné
- De réagencer l'ordre d'affichage en utilisant



De classer les éléments par ordre alphabétique en utilisant 🞩



Astuces pour rechercher des éléments dans les listes 3.2.2

Un double clic sur un élément de la colonne de gauche (zone 4) permet de sélectionner directement l'élément dans la partie de droite (zone 5).

(près de la zone 2) permet que la liste de droite n'affiche que les éléments déployés dans le Un clic sur secteur sélectionné (zone 3). La liste de droite devient strictement identique à la liste déployée.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 31 / 419

3.2.3 Supprimer / Réintégrer un élément de la liste

La suppression d'un élément ne le fait pas disparaître de la base de données afin de pouvoir visualiser les informations des anciens dossiers pour lesquels cet élément aurait été utilisé. Il sera possible de le réintégrer si nécessaire.

Il est impératif de s'assurer que l'élément n'est pas utilisé dans une autre configuration ou par un autre service. Lorsque plusieurs services se côtoient, il est vivement conseillé de ne plus supprimer d'éléments.

Avant de supprimer un élément, il est préférable de le renommer afin de libérer le nom et pouvoir le réutiliser. En effet, avoir plusieurs éléments de même nom peut être trompeur, il est conseillé de ne pas avoir de doublon. Pour cela, il faut le renommer en le précédant de plusieurs Z.

Outre ce cas particulier, il ne faut pas renommer un élément surtout pour l'affecter à un autre but. Cela pourrait corrompre les anciennes informations. Ainsi l'item « Extraction des dents de sagesse » ne peut être renommé en « appendicectomie ». Pour cela, il faut préférer créer un nouvel élément.

3.2.3.1 Pour supprimer un élément :

- Sélectionner l'élément indésirable
- Renommer l'élément en précédant le nom par des Z.
 Cette action permettra de pouvoir réutiliser le nom pour un nouvel élément.
- Cliquer en haut de la colonne
- Et confirmer l'opération dans la fenêtre qui s'affiche.

3.2.3.2 Pour réintégrer un élément :



Cliquer sur le bouton permettant d'afficher les éléments supprimés Rendre visible les éléments supprimés

Les éléments supprimés intègrent la liste. Afin de les différencier, ils sont grisés et barrés.

- Sélectionner l'élément à réintégrer
- Réintégrer l'élément supprimé en cliquant sur

3.3 Les composants communs à tous les modules

Quelle que soit la configuration, les composants disponibles sont principalement les mêmes. Certains composants peuvent être spécifique à un module particulier, ils seront alors présentés par module.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 32 / 419

La façon d'ajouter un nouveau composant sera abordé dans chaque module. Le paramétrage se fait composant par composant.

Via un clic droit sur un composant, il est possible d'accéder à son paramétrage. Chaque fenêtre de paramétrage correspond au type de composant sélectionné. Une partie des éléments est commune, l'autre partie est spécifique.

Il est à noter que l'enregistrement se fait pas à pas. Ainsi, il sera parfois nécessaire d'enregistrer à différents endroits les modifications réalisées.

Par exemple, il sera nécessaire d'enregistrer la modification d'un composant puis enregistre la configuration complète de l'endroit où ce composant est appliqué.

3.3.1 Le paramétrage commun à tous les composants

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowr

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

POSITIONNEMENT / AFFICHAGE

« Visible »: permet de rendre visible le composant. Pouvoir rendre un composant invisible permet de le préparer sans l'afficher pour l'utilisateur. (Composant en cours de paramétrage par exemple)

Le symbole de l'œil barré sera alors présent sur le composant





« *Onglet parent* » : référence l'onglet dans lequel le composant est positionné.

Via un clic dans la case, un menu déroulant propose les autres onglets disponibles.

Nécessaire lors de l'adaptation d'une configuration, cela permet de déplacer le composant d'onglet sans avoir à le recréer.

« Position horizontale en pixel » « Position verticale en pixel »

Permettent de déterminer la position du composant par rapport aux bords de l'onglet. Ces paramètres permettront d'ajuster un emplacement pour s'assurer d'un bon alignement par exemple. Peu voire non utilisé car le positionnement du composant peut aussi se faire par un glisser déposer.

« Largeur en pixel » « Hauteur en pixel »

Permettent de saisir la largeur et la hauteur du composant. Il est possible aussi d'ajuster ces paramètres en saisissant le coin ou la ligne inférieur du composant.

Saisir ces informations permet d'uniformiser le visuel plus facilement.

« *Ordre de tabulation* » : permet de gérer l'ordre de tabulation des composants de l'onglet.

« Nom du composant parent (conteneur déployable) » : non utilisé

escription du paramètre	Valeur du paramètre
Positionnement / Affichage	
Visible	Oui
Onglet parent	Administratif
Position horizontale en pixel	930
Position verticale en pixel	160
Largeur en pixel	160
Hauteur en pixel	22
Ordre de tabulation	27
Nom du composant parent (Conteneur déployable)	
Intitulé	
Intitulé	Profession
Emplacement de l'intitulé	A gauche
Taille de la police de l'intitulé	9
Options d'affichage du contenu	
Couleur de la police de l'intitulé	0
Couleur quand une valeur est saisie	16777215
Couleur quand le composant est vide	-16777211
Couleur de fond du composant	16777215
Taille de la police	9
Texte d'aide à la saisie	
Suffixe (par exemple "kg")	
Options des données associées	
Accès en écriture du champ	Ecriture
Type de zone de saisie	Normal
Masque de saisie	
Valeur maximale (entier, 0=désactivé)	0
Valeur minimale (entier, 0=désactivé)	0
Affiche des "0" pour compléter le nombre de chiffres max.	(Non
Nombre de chiffres maximal avant la virgule	7
Nombre de chiffres maximal après la virgule	2
Niveau d'importance du champ	Elément normal
Historique activé	Oui
Valeur de saisie "RAS"	
Niveau de la reprise	Niveau 1(ex. Antécédents)
Type de données	Normale



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

INTITULE

« Intitulé » : titre du composant

« Emplacement de l'intitulé » : un clic dans la case permet d'accéder à un menu déroulant proposant les différents emplacements possibles du titre par rapport au composant (Audessus / En dessous / A gauche / A droite.)

Disponible pour le champ de saisie simple, le champ de saisie multilignes, le menu déroulant

« Taille de la police de l'intitulé » : permet déterminer la taille de la police du titre du composant

Description du paramètre	Valeur du paramètre
Positionnement / Affichage	
/isible	Oui
Onglet parent	Administratif
Position horizontale en pixel	930
Position verticale en pixel	160
argeur en pixel	160
lauteur en pixel	22
Ordre de tabulation	27
iom du composant parent (Conteneur déployable)	
intitulé	
intitulé	Profession
Emplacement de l'intitulé	A gauche
Taille de la police de l'intitulé	9
Options d'affichage du contenu	
Couleur de la police de l'intitulé	0
Couleur quand une valeur est saisie	16777215

OPTIONS D'AFFICHAGE DU CONTENU

- « Couleur de la police de l'intitulé »
- « Couleur quand une valeur est saisie »
- « Couleur quand le composant est vide »
- « Couleur de fond du composant »:

Permettent de déterminer la couleur de fond du composant et la couleur de l'intitulé. Par défaut = blanc et noir. En cliquant en bout de ligne, une palette de couleur s'ouvre permettant de faire le choix par un clic.

« Taille de la police » : permet de déterminer la taille de la police du texte saisi par l'utilisateur. Par défaut = 11

Disponible pour tous les composants ayant du contenu

« Texte d'aide à la saisie » : permet de saisir un texte qui apparaîtra dans le composant en italique et en grisé afin de guider l'utilisateur sur le type de texte attendu.

Disponible pour le champ de saisie simple et le champ de saisie multilignes

Code postal 80 090

« Suffixe » : permet de positionner l'unité attendue afin de guider l'utilisateur.

Disponible pour le champ de saisie simple

Taille 80 kg

escription du paramètre	Valeur du paramètre
Positionnement / Affichage	
/isible	Oui
Onglet parent	Administratif
Position horizontale en pixel	930
Position verticale en pixel	160
argeur en pixel	160
Hauteur en pixel	22
Ordre de tabulation	27
Nom du composant parent (Conteneur déployable)	
Intitulé	
intitulé	Profession
Emplacement de l'intitulé	A gauche
Taille de la police de l'intitulé	9
Options d'affichage du contenu	
Couleur de la police de l'intitulé	0
Couleur quand une valeur est saisie	16777215
Couleur quand le composant est vide	-16777211
Couleur de fond du composant	16777215
aille de la police	9
Texte d'aide à la saisie	
Suffixe (par exemple "kg")	
Options des données associées	
Accès en écriture du champ	Ecriture
Type de zone de saisie	Normal
Masque de saisie	
/aleur maximale (entier, 0=désactivé)	0
/aleur minimale (entier, 0=désactivé)	0
Affiche des "0" pour compléter le nombre de chiffres	max. (Non
Nombre de chiffres maximal avant la virgule	7
Nombre de chiffres maximal après la virgule	2
liveau d'importance du champ	Elément normal
fistorique activé	Oui
/aleur de saisie "RAS"	
liveau de la reprise	Niveau 1(ex. Antécédents)
Type de données	Normale



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

OPTIONS DES DONNEES ASSOCIEES

Il s'agit de la partie qui diffère le plus d'un composant à l'autre. Sera revu par type de composant

« Accès en écriture du champ » : permet de déterminer si le champ est accessible en écriture ou en lecture seule.

Le choix se fait via le menu déroulant accessible au clic.

Ecriture / Toujours lecture seule / Toujours écriture (non fonctionnel)

« Type de zone de saisie » : possibilité de déterminer le format de la donnée (date, nom, ...). Ces différents choix sont présentés ultérieurement.

« Niveau d'importance du champ » : permet de déterminer l'importance du champ au moment de l'enregistrement et de la clôture du dossier.

Quatre niveaux : Normal / Avec avertissement / Important / bloquant.

« Historique activé » : permet de tracer les modifications de saisie dans le champ.

« Valeur de saisie RAS » : Correspond à la valeur qui sera proposé pour la saisie rapide.



« Niveau de la reprise » : permet de déterminer si le champ sera repris lors d'une reprise du dossier.

Quatre niveaux: Jamais repris / Niveau 1 (qui ne varie pas) / Niveau 2 (qui varie peu) / niveau 3 (qui varie beaucoup)

« Remise à zéro » : permet de libérer le champ lors de l'ouverture du dossier à la suite d'un transfert dans un nouveau service.

Options des données associées	
Accès en écriture du champ	Ecriture
Type de zone de saisie	Non renseigné
Masque de saisie	
Valeur maximale (entier, 0=désactivé)	0
Valeur minimale (entier, 0=désactivé)	0
Accepte les valeurs positives et/ou négatives (entier, 0=to	Tout
Affiche des "0" pour compléter le nombre de chiffres max. (Non
Nombre de chiffres maximal avant la virgule	7
Nombre de chiffres maximal après la virgule	2
Niveau d'importance du champ	Elément normal
Historique activé	Oui
Valeur de saisie "RAS"	
Niveau de la reprise	Jamais repris
Type de données	Normale
Remise à zéro	Oui

3.3.2 Contexte à mettre à jour

Le contexte à mettre à jour est un paramétrage qui concerne les cases à cocher, les menus déroulants et les groupes de boutons radio. En fonction des valeurs de ces composants, il est possible d'afficher ou non d'autres composants.

3.3.2.1 Accéder à la fenêtre de contexte à mettre à jour

- Editer le composant (clic droit sur le composant) qui déclenchera cette action
- Sélectionner la ligne contexte à mettre à jour



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Cliquer sur le bouton
- Configurer le dispositif
- Enregistrer via le bouton **Enregistrer** en bas à droite
- Enregistrer via le bouton de la fenêtre de paramétrage du composant
- Enregistrer la configuration d'affichage.

3.3.2.2 Paramétrer le contexte à mettre à jour

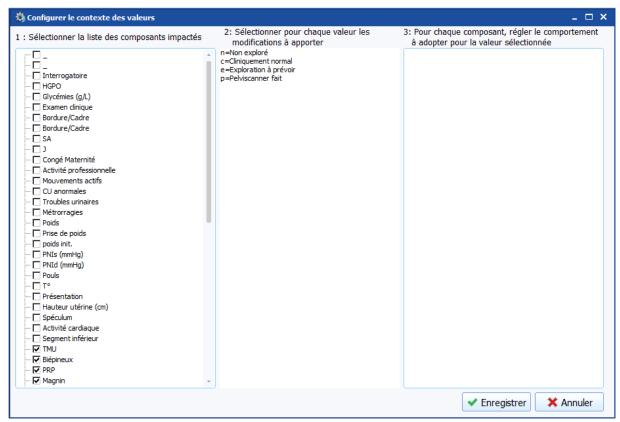

La colonne 1 liste tous les composants disponibles et pouvant être utilisés pour le contexte à mettre à jour.

Dans une saisie avancée, seuls les composants de la saisie avancés seront proposés. En consultation, il est possible d'agir sur tous les composants de la consultation. Dans Visual ou en Réanimation, il sera possible d'agir sur les composants d'un onglet.

La colonne 2 correspond à toutes les valeurs du composant déclencheur.

La colonne 3 permet de déterminer la visibilité des composants.

Marche à suivre :

- Sélectionner les composants concernés dans la colonne 1
- Sélectionner la première valeur de la colonne 2
- Définir pour chacun des composants de la colonne 3 s'ils sont visible ou non (1 = Oui / 0 = Non)
- Sélectionner la deuxième valeur de la colonne 2
- Définir pour chacun des composants de la colonne 3 s'ils doivent être visible ou non.
- Reproduire cela pour chacune des valeurs de la colonne 2.
- Enregistrer



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

3.3.2.3 Visualiser les composants associés à des contextes à mettre à jour

Dans la fenêtre listant les composants d'une configuration d'affichage ou d'une saisie avancée, les composants **déclencheurs** (ceux dont le choix impacte l'affichage d'autres champs), sont affichés en gras.

Le clic sur un composant **déclencheur** (1) liste les composants *conditionnels* (ceux qui sont affichés uniquement en fonction du composant déclencheur) dans la zone **Contexte**. Tous les éléments *conditionnels* sont aussi affichés en italique dans la liste à gauche.

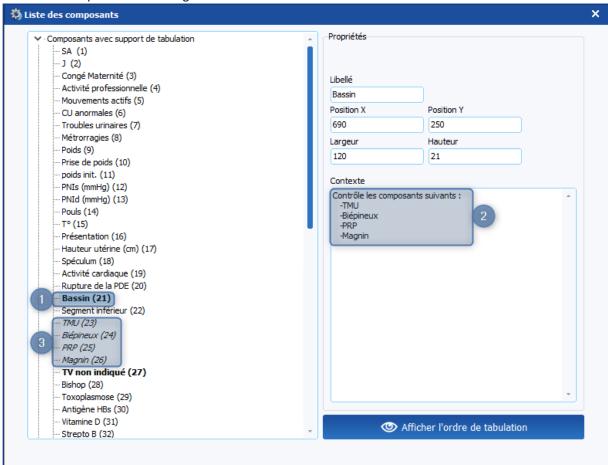

3.3.3 Les composants disponibles pour la configuration d'affichage et dans les Saisies Avancées

- Le libellé
- La case à cocher
- Le champ de saisie simple
- Le champ de saisies multilignes
- Le menu déroulant
- Le groupe de bouton radio
- Le groupe de cases à cocher
- Le champ de saisie avec liste de référence (Dialist memo)
- Le DiaAllergie
- Le container
- Onglet / composant traitement
- Score d'intubation



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Schéma dentaire
- Le bouton d'action
- Le bouton Switch

3.3.3.1 Libellé

Ce composant permet d'écrire du texte que l'utilisateur ne peut modifier. Cela permet notamment d'écrire des explications destinées à faciliter la compréhension de la page.

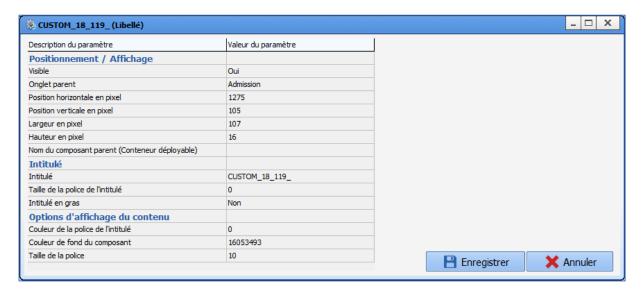

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent et Intitulé.

La dimension ne s'adapte pas automatiquement au contenu, il faut l'étirer manuellement pour que le texte soit correctement affiché. Pour cela, il faut saisir l'angle du composant et l'étirer ou saisie manuellement la largeur dans la ligne « Largeur en pixel »

Configurations d'affichage :

Le composant n'est pas multilignes : pour afficher plusieurs lignes de texte, il faut créer autant de libellés que de lignes à afficher.

• Configurations de saisies avancées :

Le composant est multiligne.

3.3.3.2 Case à cocher

☐ Identité patient vérifiée



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 39 / 419

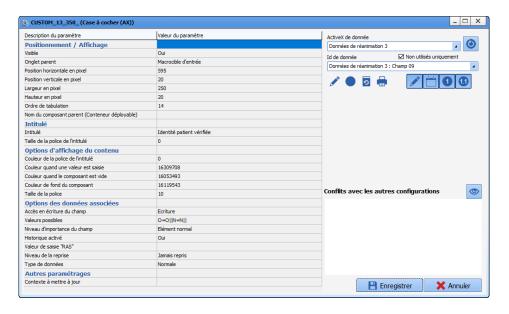

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent, Intitulé et Valeurs possibles. Le champ Valeurs possibles n'est pas modifiable.

3.3.3.3 Champ de saisie simple



Ces composants servent à recenser des informations courtes.

Il va être possible de paramétrer un texte d'aide à la saisie qui permettra de guider l'utilisateur sur les attentes du champ. (En grisé et en italique dans les exemples ci-dessus).

Un suffixe peut être aussi mis en place pour que tous les utilisateurs utilisent le même format. (Taille en cm Poids en kg)

Choisir un champ de type date permettra de mettre un calendrier à disposition de l'utilisateur.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

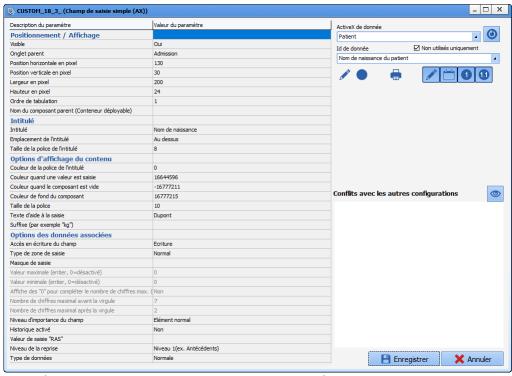

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent et Intitulé.

Paramétrages optionnels : Emplacement de libellé, Texte d'aide à la saisie, Suffixe et Type de zone de saisie.

Il existe plusieurs types de zone de saisie :

- Normal: permet de saisir sans contrainte de format.
- Entier (val. Par défaut à 0) : ne permet de saisir que des nombres entiers.
- Décimal (val. Par défaut à 0) : ne permet de saisir que des nombres décimaux.
- Date: ne permet de saisir que des dates.
- **Prénom**: transforme automatiquement le premier caractère en Majuscule. (Exemple: bow => Bow).
- Nom: transforme automatiquement les caractère-lettres en MAJUSCULE. (Exemple: Bow => BOW).
- Date future : permet de saisir une date postérieure à la date actuelle.
- Date de naissance : permet de saisir une date de naissance, obligatoirement antérieure à la date actuelle.
- Date Passée : permet de saisir une date antérieure à la date actuelle.
- Non renseigné: permet de saisir sans contrainte de format (comme le type Normal).
- Entier (val. Par défaut à -1) : ne permet de saisir que des nombres entiers.
- Décimal (val. Par défaut à -1) : ne permet de saisir que des nombres décimaux.
- Jour, mois et heure: permet de saisir une date courte (jour et mois) et une heure.
- **Heure : Minute** : permet de saisir une heure.
- Adresse IP: permet de saisir une adresse IP.
- Adresse Mail: permet de saisir un courriel valide.
- Date et heure : permet de saisir une date (jour, mois et année) et une heure.

Il est possible de configurer un masque de saisie, excepté pour les champs de type date et/ou heure.

Pour les nombres (entiers et décimaux), une valeur minimale et/ou une valeur maximale sont paramétrables (ces bornes doivent être des nombres entiers).

D'autres paramétrages sont disponibles pour les nombres décimaux :

Afficher des « 0 » pour compléter le nombre de chiffres max. (ex : 001,20)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Nombre de chiffres maximal avant la virgule (utilisé si le paramétrage précédent est activé)
- Nombre de chiffres maximal après la virgule

3.3.3.4 Champ de saisie multilignes


Ce composant permet à l'utilisateur de saisir du texte libre.

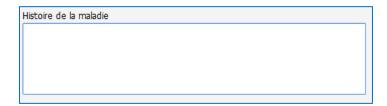

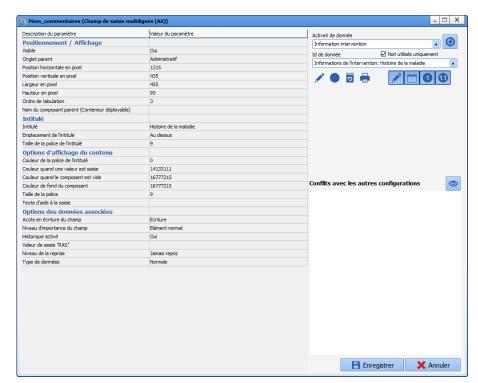

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent et Intitulé. Paramétrages optionnels : Texte d'aide à la saisie.

3.3.3.5 Menu déroulant

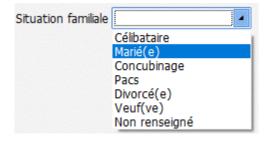

Le menu déroulant offre plusieurs choix à l'utilisateur et ne permet qu'un seul choix de réponse.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

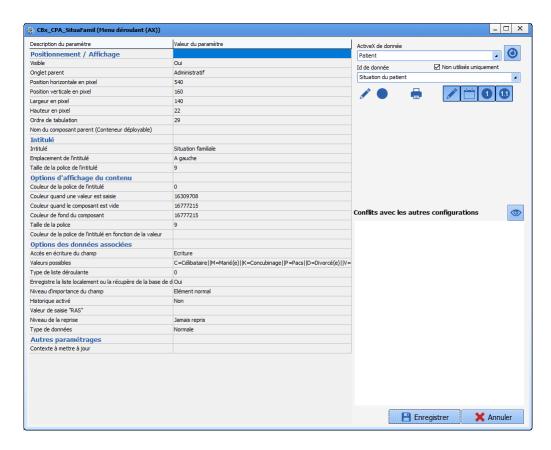

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent, Intitulé et Valeurs possibles.

3.3.3.6 Groupe de boutons radio

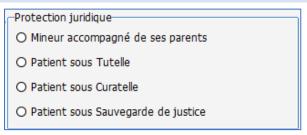

Avec le groupe de boutons radio, plusieurs choix sont proposés à l'utilisateur. Une seule réponse peut être saisie.

Les différences avec le menu déroulant sont :

- Possibilité de proposer le choix « Autre » qui donnera accès à un champ de saisie en regard du choix.
- Les différentes propositions sont visibles sans clic.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

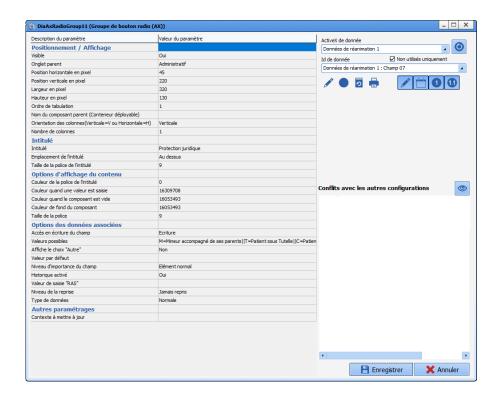

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent, Nombre de colonnes, Orientation des colonnes, Intitulé, Valeurs possibles.

Paramétrages optionnels: Orientation des colonnes, nombre de colonnes et afficher le choix « Autre ».

3.3.3.7 Groupe de cases à cocher

—Couverture Sociale ☐ Assuré(e) social(e)	ouverture Sociale Assuré(e) social(e) 🗌 Sans prise en charge		
☐ Prise en charge 100%☐ Patient non résident payant			
☐ Mutuelle	☐ Autre		

Le groupe de case à cocher permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs réponses.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

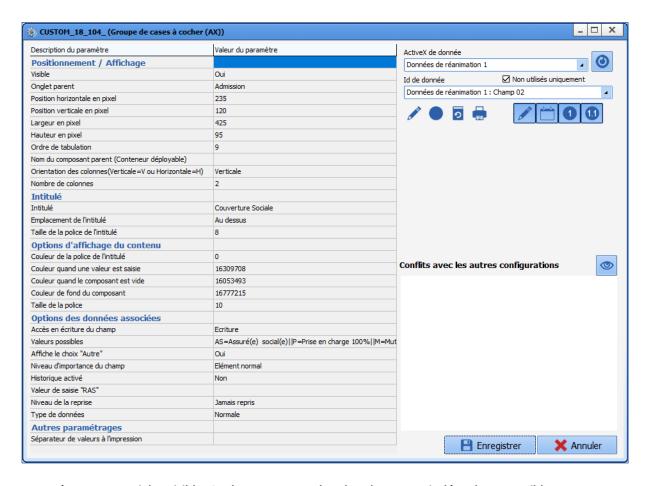

Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent, Nombre de colonnes, Intitulé, Valeurs possibles.

Paramétrages optionnels : Orientation des colonnes, nombre de colonnes et afficher le choix « Autre ».

3.3.3.8 Champ de saisie avec liste de référence (DiaList Mémo)



Le champ de saisie avec liste de référence est un composant qui permet de faire un mixte entre la saisie manuelle et la saisie structurée. Ce fonctionnement fait appel à une liste gérée dans l'onglet **Listes** du module de configuration.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

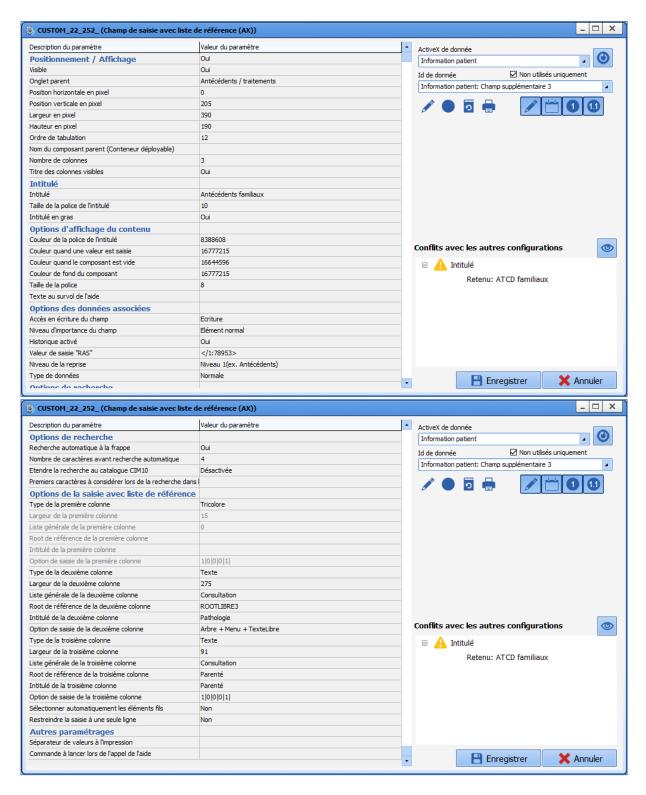

Ce composant dispose de paramétrages spécifiques :

Nombre de colonnes : doit être compris entre 2 et 4 (la première colonne étant obligatoirement de type **Tricolore** et les suivantes de type **Texte**)

• Titre des colonnes visibles : affiche ou non le titre des différentes colonnes.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Recherche automatique à la frappe : active ou non la complétion automatique à partir de X caractères saisis (X étant défini par le paramètre Nombre de caractères avant recherche automatique).
- Etendre la recherche au catalogue CIM10 :



- o **Désactivée** : la recherche n'est pas étendue au catalogue CIM10.
- Activée : la recherche est étendue au catalogue CIM10.
- Activée et restriction de saisie aux codes CIM10: la recherche est restreinte au catalogue CIM10 (les éléments saisis qui ne sont pas associés à un code CIM10 ne sont pas enregistrés).
- Liste générale de la nième colonne : détermine le type liste utilisé pour la liste de référence parmi les choix suivants :
 - Consultation ⇒ Onglet Listes
 - Evénement de Visual ⇒ Onglet Evénements
 - Complément

 → Onglet Autres listes
 - o Médicament ⇒ Onglet Médicaments

 - Correspondants ⇒ Onglet Correspondants
- Root de référence de la nième colonne : détermine la liste utilisée pour la liste de référence (dépend du paramètre précédent)
- Option de saisie de la nième colonne : détermine le mode de saisie des éléments parmi les choix suivants :
 - Arbre (ne peut concerner qu'une colonne du composant) : permet de saisir via l'icône te la fenêtre ci-dessous



o Menu: permet de saisir via le menu ci-dessous, accessible par un clic droit



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

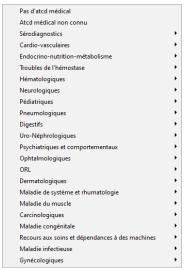


- Texte Libre : permet la saisie directement au clavier
- Sélectionner automatiquement les éléments fils : si ce paramétrage est activé, le fait de cocher un élément parent coche automatiquement tous les éléments fils



Dans cet exemple, l'utilisateur coche **Hernie discale** et les éléments **lombaire** et **cervicale** sont automatiquement cochés

- Restreindre la saisie à une seule ligne : si ce paramétrage est activé, il n'est possible de saisir qu'une seule ligne
- Historique activé: permet la visualisation par les utilisateurs des différentes actions sur le champ.

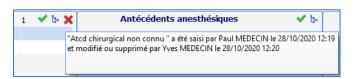


La croix rouge indique à l'utilisateur qu'une entrée saisie dans une session précédente (éventuellement par un autre utilisateur) a été modifiée ou supprimée. Il est donc possible, au survol de cette croix rouge, de voir qui a saisi quoi et quand.

• Valeur de saisie « RAS » : si ce paramètre est rempli, une coche verte est affichée en haut à droite du composant. Cette coche verte permettra à l'utilisateur de renseigner la valeur pré sélectionnée en configuration.

Pour réaliser ce paramétrage, il faut que la configuration soit faite et particulièrement la sélection du root de référence. Il peut être nécessaire d'enregistrer le paramétrage du composant puis revenir sur la fenêtre de paramétrage.

- Sélectionner la ligne Valeur de saisie RAS

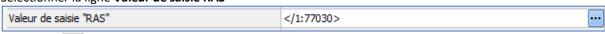

- Cliquer sur 🛄
- L'arborescence paramétrée s'affiche
- Sélectionner la ou les valeurs du RAS.
- Valider la sélection par **OK** en bas à droite de la fenêtre
- Enregistrer la modification du composant par le bouton **Enregistrer** en bas à droite de la fenêtre de paramétrage



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

• Commande à lancer lors de l'appel à l'aide : il est possible de renseigner une adresse URL d'un site web ou d'une adresse intranet. Au clic sur le point d'interrogation, l'utilisateur aura accès au site défini.



3.3.3.9 Bordure / Cadre

Ce composant permet de regrouper des composants fonctionnant autours d'une même notion. Ce regroupement visuel permet de faciliter la lecture et la compréhension de la page.

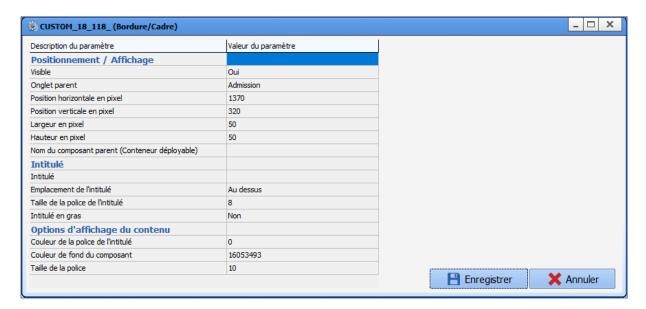

Attention, ce composant n'est pas un container, il ne prend pas en charge les composants placés à l'intérieur : ce n'est qu'un élément visuel pour organiser l'affichage et en faciliter la lecture.

3.3.3.10 Bouton / Bouton (AX)

Ce composant permet de créer des boutons pour lancer une impression de lettre-type, démarrer un exécutable ou accéder directement à un site Web.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

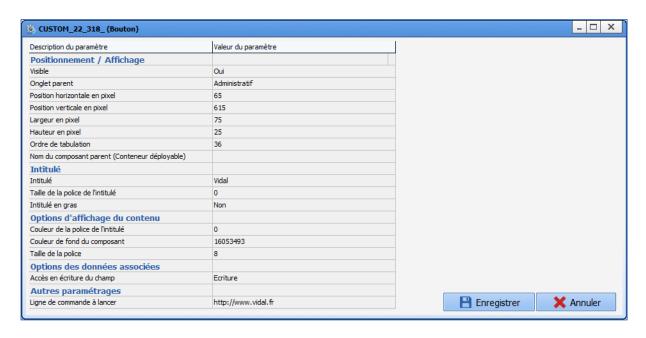


Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent, Intitulé et Ligne de commande à lancer.

Le paramètre important de ce composant est Ligne de commande à lancer :

Pour paramétrer une impression, il faut cliquer sur le bouton

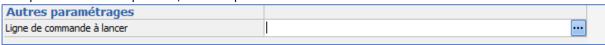

La fenêtre suivante s'affiche pour configurer la ou les lettres type à imprimer, par un glisser-déposer dans la colonne de droite.

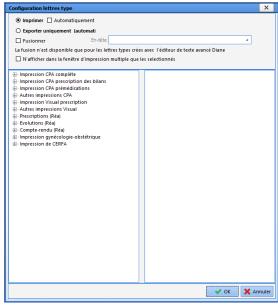

 Pour paramétrer un exécutable, il faut indiquer son chemin complet dans le champ Ligne de commande à lancer. Ce paramétrage est mis à disposition par le service interface de BOWMEDICAL.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 50 / 419

 Pour accéder directement à un site Web, il faut indiquer son adresse complète dans le champ Ligne de commande à lancer.




3.3.3.11 Saisie d'événement via bouton

Ce composant permet de configurer un bouton pour ajouter un élément de type **Evénement**. Ce composant permet de saisir un **Evénement** depuis le formulaire de saisie avancée.



3.3.3.12 Bouton Switch

Ce composant possède 3 états :

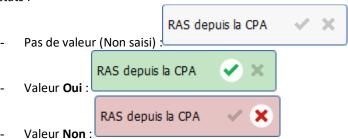



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



Paramétrages essentiels : Visible, Onglet parent et Intitulé.

Le champ Valeurs possibles n'est pas modifiable.

4 Onglets de configuration

4.1 Affichage

Cet onglet de configuration permet de modifier l'aspect et le fonctionnement des écrans présentés aux utilisateurs de DIANE ANESTHÉSIE (Consultation et Visual (PerOp et PostOp)), DIANE OBSTETRIQUE et DIANE REA.

Visual permet de configurer les modules **DIANE ANESTHÉSIE Visual** (PerOp et PostOp). Si aucune configuration n'est définie pour le module **Réanimation**, c'est cette configuration qui est appliquée.

Consultation : permet de configurer le module **DIANE ANESTHÉSIE Consultation**.

Obstétrique : permet de configurer le module **DIANE OBSTETRIQUE**.

Réanimation : permet de configurer le module **DIANE REA**. Si aucune configuration n'est définie pour ce module, c'est la configuration de **Visual** qui est appliquée.

Chaque secteur DOIT avoir une configuration appliquée pour chaque module. En effet, afin de pouvoir visualiser des dossiers d'anesthésie lors des consultations, le module de per-op a besoin de savoir avec quelle configuration l'ouvrir.

Il n'est possible de basculer qu'une seule configuration d'affichage.

L'affichage en italique indique que la configuration d'affichage n'a été déployée sur aucune roue crantée.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.1 Présentation de la configuration d'affichage (hors Consultation)

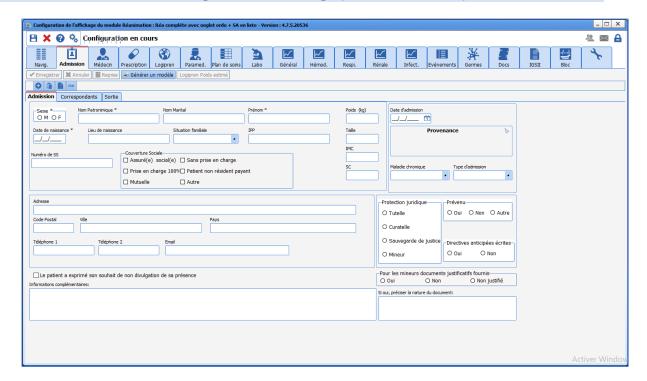

Pour **DIANE ANESTHÉSIE Visual** (PerOp et PostOp), **DIANE OBSTETRIQUE** et **DIANE REA**, la présentation est commune. En haut à gauche se trouvent des boutons :



Sauvegarde et ferme la configuration d'affichage

Ferme la configuration d'affichage sans sauvegarder

Affiche l'aide en ligne

Ouvre la fenêtre de configuration générale du module

4.1.1.1 Fenêtre de configuration générale : onglet configuration générale



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

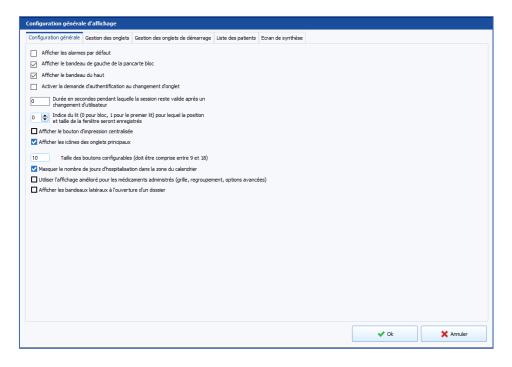

Cet onglet **Configuration générale** offre le choix d'afficher ou non par défaut le bandeau de gauche et le bandeau supérieur.

C'est à cet endroit qu'il va être possible d'**Activer la demande d'authentification au changement d'onglet.** Cette option permet de limiter l'accès en écriture à certains rôles. Les autres intervenants auront accès à l'onglet concerné seulement en lecture seule.

Pour activer cette option:

- Cocher la case Activer la demande d'authentification au changement d'onglet,
- Aller sur l'onglet Gestion des onglets,
- Sélectionner l'onglet configuré concerné,
- Décocher la case Autoriser tous les profils
- Sélectionner dans la liste les profils ayant un accès en écriture.

Les onglets pour lesquels l'utilisateur connecté l'a pas les droits apparaissent en « grisé » :



Afficher le bouton d'impression centralisée permet aux utilisateurs d'avoir accès à l'impression centralisée depuis le bandeau supérieur.

Afficher les icônes des onglets principaux permet d'afficher ou non les icônes des boutons des onglets de **Visual** ou de **DIANEREA**.



Taille des boutons configurables permet de modifier la taille de la police des boutons pour les rendre plus visibles.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



Masquer le nombre de jours d'hospitalisation dans la zone du calendrier permet de masquer l'affichage du nombre de jours d'hospitalisation du patient

mar. 08 août 2023 🛕 🕽 43 mer. 21 févr. 2024

Utiliser l'affichage amélioré pour les médicaments administrés (grille, regroupement, options avancées) permet l'affichage amélioré des médicaments, produits sanguins et balance liquidienne à la place de l'affichage historique.

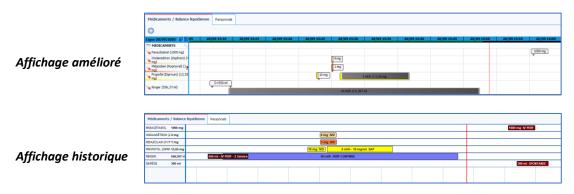

Afficher les bandeaux latéraux à l'ouverture d'un dossier permet de déployer automatiquement le ou les bandeaux latéraux paramétrés.

4.1.1.2 Fenêtre de configuration générale : onglet « Gestion des onglets »

L'onglet Gestion des onglets permet de définir les onglets à afficher et leur ordre.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

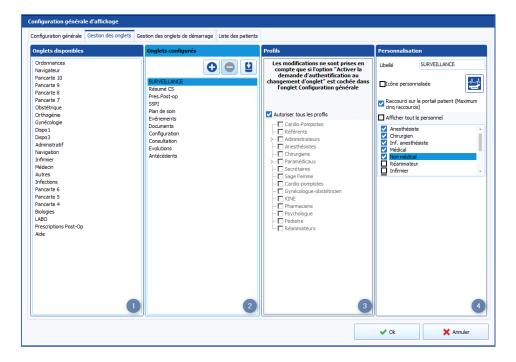

- 1. Onglets disponibles : l'ajout d'un onglet disponible se fait par un glisser-déposer.
- 2. Onglets configurés :
 - L'ordre des onglets se fait par un glisser-déposer.
 - Il est possible de supprimer un onglet configuré par un glisser-déposer vers la zone Onglets disponibles.
 - Il est uniquement possible de créer de nouveaux onglets de type « Surveillance » via le bouton . La suppression d'un onglet se fait en cliquant sur le bouton .
 - En cliquant sur le bouton , il est possible d'importer un onglet de n'importe quelle configuration d'affichage (Visual, Réanimation ou Obstétrique) pour remplacer l'onglet courant.



Il est possible d'importer un onglet du même type (**Plan de soins**, **Prescription**, **Bloc**, Pancarte 3, onglet configurable). Les onglets de type **Aide**, **Documents**, **Evénements**, **Navigateur**, **Navigation**, **Ordonnances** ne sont pas concernés par l'import de configuration.

3. **Profils**: Pour chaque onglet configuré, il est possible de définir les rôles d'utilisateurs qui y auront accès en écriture. Les autres utilisateurs auront accès à l'onglet en lecture seule. Cette fonctionnalité nécessite que l'option **Activer la demande d'authentification au changement d'onglet** soit cochée dans l'onglet **Configuration générale**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version DIANE: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Personnalisation:


- Il est possible de renommer l'onglet et de modifier l'icône associée (au choix parmi un
- Il est possible d'afficher un raccourci sur le portail patient (liste des patients), dans la limite de 5 onglets au maximum.



Cas particulier de l'onglet SURVEILLANCE de DIANE Anesthésie : il est possible de sélectionner les rôles à afficher dans le sous-onglet Personnels. La case à cocher Afficher tout le personnel permet de cocher toutes les cases en un clic.

4.1.1.3 Fenêtre de configuration générale : onglet « Gestion des onglets de démarrage »

L'onglet Gestion des onglets de démarrage permet de déterminer, pour chaque profil d'utilisateur, l'onglet et éventuellement le sous-onglet de démarrage du module. Cette option n'est disponible que sur le paramétrage DIANE ANESTHÉSIE Visual (PerOp et PostOp).

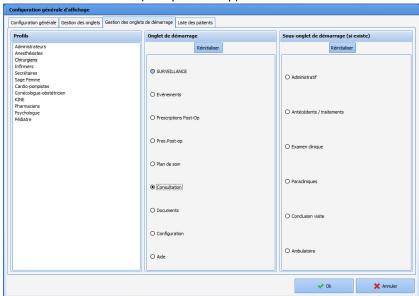

- Sélectionner le profil concerné
- Sélectionner l'onglet voulu au démarrage

Si des sous onglets sont disponibles pour l'onglet choisi précédemment, ils s'affichent sur la droite.

Sélectionner le sous onglet désiré.

Dans le cas où ce paramétrage n'est pas réalisé, la session s'ouvrira sur le premier onglet.

4.1.1.4 Fenêtre de configuration générale : onglet « Liste des patients »

La configuration d'affichage de la liste des patients se fait directement dans le module concerné, au niveau de la fenêtre de configuration générale du module (accessible au clic sur les engrenages) grâce à l'onglet Liste des patients.



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

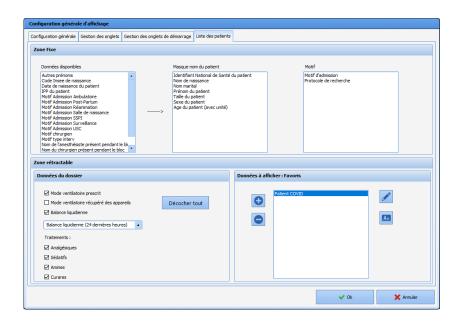

• La zone fixe correspond à l'identité du patient et au motif d'admission.

Lit n4 0945467 CREPIN LARDEUR Juliette F 48 ans 170 cm 56 Kg J 0 Pneumopathie

Les différentes données disponibles peuvent être affichées sur la première ligne (Masque nom du patient) ou sur la deuxième (Motif) en les glissant-déposant dans les zones souhaitées. Elles peuvent ensuite être ordonnées en les glissant-déposant au sein d'un même cadre. Pour ne plus afficher une information, il suffit de la glisser-déposer dans la zone Données disponibles.

Liste des données disponibles :

- Age du patient (avec unité)
- Autres prénoms
- Code Insee de naissance
- Date de naissance du patient
- Identifiant National de Santé du patient
- IPP du patient
- Motif Admission Ambulatoire
- Motif Admission Post-partum
- Motif Admission Réanimation
- Motif Admission Salle de naissance
- Motif Admission SSPI
- Motif Admission Surveillance
- Motif Admission USC
- Motif chirurgien
- Motif d'admission
- Motif type interv
- Nom de l'anesthésiste présent pendant le bloc
- Nom de naissance
- Nom du chirurgien présent pendant le bloc
- Nom marital
- Poids du patient



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Prénom du patient
- Protocole de recherche
- Sexe du patient
- Taille du patient
- La zone rétractable se décompose en 3 zones (en utilisation) dont 2 sont configurables :

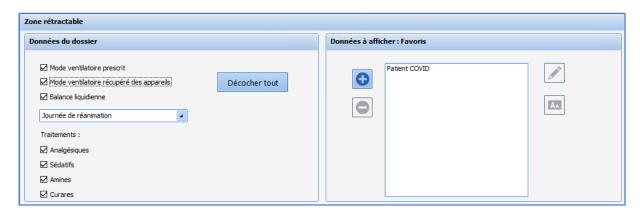

- A gauche, des informations relatives aux **données du dossier** : Mode ventilatoire, Balance liquidienne et Traitements.

Pour le mode ventilatoire, il est possible de choisir le **Mode ventilatoire prescrit** et/ou le **Mode ventilatoire récupéré des appareils** connectés.

Pour la balance liquidienne, 3 plages temporelles sont disponibles :

- o 24 dernières heures
- Journée de réanimation (en cours)
- Journée de réanimation précédente

Les traitements affichés dans cette zone peuvent être :

- Analgésiques : Affiche Analgésique sur le portail si le patient a une prescription d'analgésiques en cours sur le plan de soin (Codes ATC : N01AH et N02AB)
- Sédatifs: Affiche Sédation sur le portail si le patient a une prescription de sédatifs en cours sur le plan de soin (Codes ATC: N01AF, N01AX et N05CA).
- Amines: Affiche Amines sur le portail si le patient a une prescription d'amines en cours sur le plan de soin (Codes ATC : C01CA)
- Curares: Affiche Curares sur le portail si le patient a une prescription de curares en cours sur le plan de soin (Codes ATC: M03AB et M03AC)

Les informations au sujet du traitement sont indexées sur les classes ATC des médicaments. Dès lors qu'un médicament ayant la classe ATC des curares est prescrit, alors le terme **Curare** apparait sur le portail.

Il en va de même pour les autres classes médicamenteuses mentionnées.

- Au centre de la zone rétractable, se trouvent les données saisissables à la volée, non paramétrables en configuration. Ces données sont juste informatives et ne sont pas stockées dans le dossier.
- A gauche, des **données à afficher** peuvent être personnalisées : il est possible de configurer des favoris pour ajouter en un clic les informations les plus souvent à afficher parmi les catégories suivantes :
 - O Score : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Libellé du score : score + unité + (Date/Heure de saisie du score).

Exemple: Apgar: 3 (01/02 15:20)

Données Diane : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée
 Nom de la constante liée à la donnée Diane + Donnée saisie

Exemple: Pathologie: Douleurs

Paramètres physiologiques : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée
 Libellé du param : valeur + unité + (Date/Heure de saisie du paramètre)

Exemple: FC: 95 bpm (16:22)


La date de saisie de score s'affiche seulement si ce n'est pas la date du jour.

- Evènements : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée
 Libellé de l'événement + Heure occurrence
- Complications : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée
 Libellé de la complication + Heure occurrence
- Chronos : Affichage sur le portail si la donnée est renseignée :
 Durée + Libellé du Chrono

Si plusieurs chronos du même type sont en cours, ils sont tous affichés sur le portail. Un chrono disparait du portail 24h après son arrêt.

Eléments de soins: Liste les éléments de soins de type Voies d'abord, Drainages, Pansements,
 Autres: Affiche sur le portail uniquement le soin planifié suivi de sa date de planification. Le soin disparait du portail à la suite de sa réalisation.

Configuration des données à afficher :

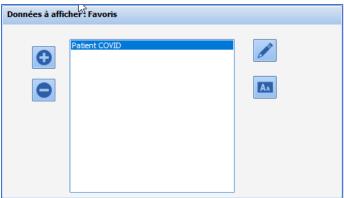

Le bouton permet la création d'un nouveau favori. La fenêtre **Configuration des données à afficher** s'ouvre et permet de sélectionner les données à afficher. En utilisation, il sera possible d'ajouter d'autres données et/ou de retirer des données configurées dans les favoris. De même, si une même donnée est configurée dans plusieurs favoris, elle ne sera affichée qu'une fois sur le portail.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

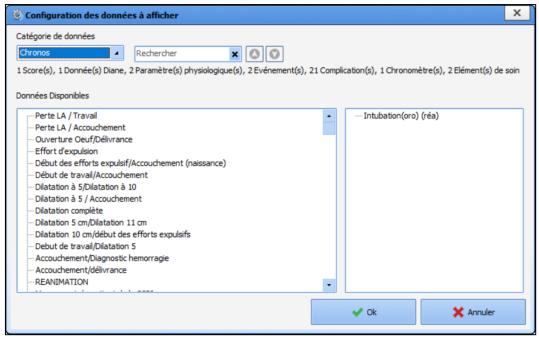

Les données peuvent être ajoutées en les glissant-déposant de la zone **Données disponibles** vers la zone de droite. Le retrait des donnés configurées se fait en glissant-déposant les données dans le sens inverse. Pour chaque catégorie de données, le nombre d'éléments configurés est affiché.

Le champ **Rechercher** permet de trouver les données de la catégorie sélectionnée. Les éléments correspondants à la recherche sont mis en surbrillance, la navigation d'un élément au suivant ou au précédent se fait au clic sur les flèches à droite de la zone de recherche. Le nombre d'éléments trouvés est indiqué.

Un favori existant peut être supprimé avec le bouton ou modifié en cliquant sur le bouton ouvre la fenêtre **Configuration des données à afficher**. Le bouton permet de renommer le favori.

4.1.1.5 Fenêtre de configuration générale : onglet « Ecran de synthèse »

L'écran de synthèse est une spécificité de **DIANE REA** (le dossier du patient doit nécessairement être chargé dans **DIANE REA**). Il s'agit d'une pancarte de synthèse qui permet à l'ensemble des intervenants de réanimation d'avoir accès aux informations essentielles du dossier médical du patient. Cette pancarte permet aux IDE de faire des transmissions efficientes et aux médecins de mieux appréhender la situation clinique afin de prendre les décisions les plus adéquates pour le patient.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

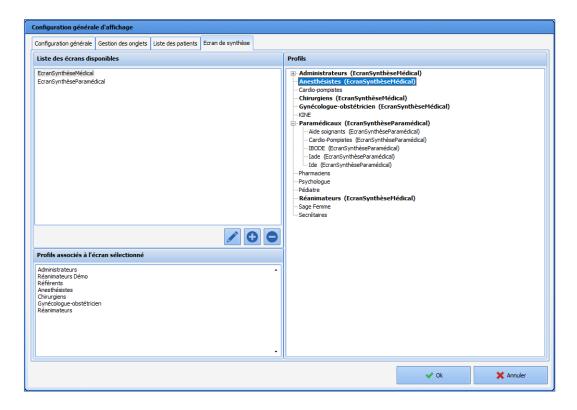

4.1.1.5.1 Ajouter un écran de synthèse

L'ajout d'un nouvel écran de synthèse se fait en cliquant sur le bouton ①. Une fenêtre permet alors de saisir le nom : il est possible de renommer l'écran de synthèse ultérieurement.

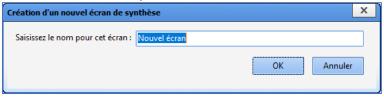

Une fois le nom saisi et validé au clic sur le bouton OK, la fenêtre **Configuration de l'écran de synthèse** s'affiche.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

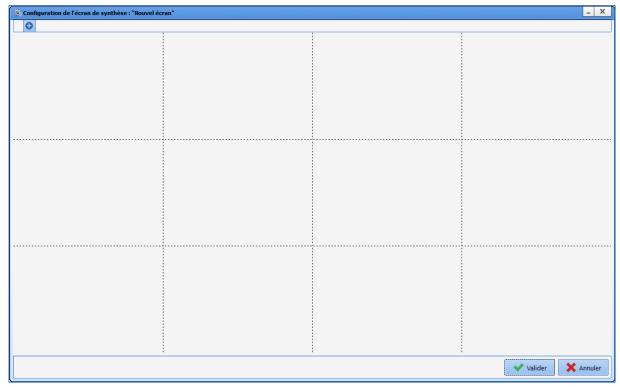

Le titre de la fenêtre reprend le nom de l'écran : **Nouvel écran** dans l'exemple ci-dessus.

Le bouton permet d'ajouter un composant via un menu :

<u>D</u>onnées de surveillance <u>E</u>léments importants <u>V</u>isualisation des champs de données V<u>i</u>sualisation des résultats de laboratoire <u>B</u>alance liquidienne <u>P</u>rescriptions en cours <u>Vi</u>gualisation des conclusion du staff <u>Visualisation des transmissions ciblées</u> Suivi des disp<u>o</u>sitifs

4.1.1.5.2 Editer un écran de synthèse

Pour éditer un écran de synthèse, il suffit de le sélectionner puis de cliquer sur le bouton . Il est également possible de faire un double-clic sur le nom, ou de faire un clic droit sur son nom puis sur **Editer**.



4.1.1.5.3 Supprimer un écran de synthèse

Pour supprimer un écran de synthèse, il suffit de le sélectionner puis de cliquer sur le bouton . Il est également possible de faire un clic droit sur son nom puis sur **Supprimer**.





BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.1.5.4 Renommer un écran de synthèse

Pour renommer un écran de synthèse, il est possible de faire un clic droit sur son nom puis sur Renommer.



Il suffit ensuite de saisir le nouveau nom Nouvel écran. Il est également possible de le renommer en le sélectionnant puis en faisant un clic gauche.

4.1.1.5.5 Affecter un écran de synthèse à un profil d'utilisateurs

Pour affecter un écran à un utilisateur, il faut glisser-déposer l'écran de la zone **Liste des écrans disponibles** vers le profil choisi dans la zone **Profils**.

Il est possible d'affecter un seul écran de synthèse par profil d'utilisateur. Pour les profils ayant des sous-profils, l'écran de synthèse configuré par défaut pour le sous-profil est identique à celui du profil parent. Il est toutefois possible d'affecter un écran de synthèse différent.

4.1.2 Spécificités de la consultation

Contrairement aux autres modules, il n'est pas possible de créer de nouveaux composants dans l'application DIANE ANESTHÉSIE Consultation: les onglets inutilisés à l'affichage constituent des onglets de stock. Un composant ne se crée pas et ne se supprime pas: il se déplace depuis ou vers les onglets de stock. Il n'est pas non plus possible de créer des onglets. Il est possible de masquer des onglets s'ils ne sont pas utilisés.

4.1.2.1 Onglets disponibles pour la consultation

La version fournie lors de l'installation est ensuite paramétrée pour s'adapter aux habitudes des utilisateurs. Classiquement, la version d'origine est présentée comme suit :

Administratif	Cet onglet recense les informations " Administratives " du patient ainsi que la partie concernant l'intervention prévue. Si l'interface " patient mouvement " est installée, les composants concernant l'identité du patient sont automatiquement remplis. Si l'interface « programmation /planning de bloc » est installée, les composants concernant la chirurgie prévue, la date prévue et le nom du chirurgien se compléteront aussi automatiquement.
Antécédents / Traitements	Cet onglet est classiquement utilisé pour renseigner les antécédents ainsi que le traitement du patient.
Exam. cliniques	Cet onglet est souvent dédié pour tracer les informations recueillies au cours de la consultation.
Paraclinique	Par défaut, cet onglet présente les composants permettant de réaliser les ordonnances pour les bilans, de les imprimer et d'en indiquer voire de visualiser



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

2	les résultats.	
_	Si une interface laboratoire est en place, il est possible de visualiser directement les résultats de laboratoires.	
Conclusion / Visite	Cet onglet sert pour renseigner les informations les consignes transmises au patient ainsi que la conclusion de la consultation.	
Ambulatoire	Cet onglet permet de renseigner les phases amont et aval de l'ambulatoire de patient. Il est possible d'avoir une interaction avec le module Ambucare. Il est possible de dédier cet onglet pour les infirmiers coordinateur du parcour de soins.	
Divers	Cet onglet sert normalement de réserve de composants. Dans l'application DIANE ANESTHÉSIE Consultation, un composant ne se crée ni se supprime : il se déplace depuis ou vers les onglets de stock. Cet onglet peut être renommé et rendu visible si besoin d'un onglet supplémentaire.	
Libre 1	Cet onglet sert normalement de réserve de composants. Dans l'application DIANE ANESTHÉSIE Consultation, un composant ne se crée ni se supprime : il se déplace depuis ou vers les onglets de stock. Cet onglet peut être renommé et rendu visible si besoin d'un onglet supplémentaire.	
Libre 2	Cet onglet sert normalement de réserve de composants. Dans l'application DIANE ANESTHÉSIE Consultation, un composant ne se crée ni se supprime : il se déplace depuis ou vers les onglets de stock. Cet onglet peut être renommé et rendu visible si besoin d'un onglet supplémentaire.	
Comptabilité	Cet onglet n'est pas modifiable il est en connexion avec le module de comptabilité de DIANE . Il est juste possible de le masquer s'il n'est pas utilisé.	
Résumé	Cet onglet possède des composants synchronisés avec les composants d'autres onglets. Il permet de visualiser la consultation de façon synthétique.	
Documents	Cet onglet liste les documents Comptes Rendus, Ordonnances, Scans ou images sauvegardés. Le schéma dentaire de cet onglet peut-être très avantageusement remplacé par le composant schéma dentaire.	
Navigateur	Cet onglet contient un composant permettant d'afficher des pages Web ou intranet comme certains outils web médicaux.	
Traitements et Prémédication	Cet onglet permet de remplacer les composants Traitements et Relais de l'onglet ATCD / Traitement .	

4.1.2.1.1 Paramétrer les onglets

Pour accéder au paramétrage d'un onglet, il faut faire un clic droit sur l'entête de l'onglet ou dans l'onglet (en dehors d'un composant).



43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

BOW MEDICAL SAS

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

L'option « **Visible** » permettra de déterminer si l'onglet sera visible par l'utilisateur.

Afin de guider l'utilisateur, il est conseillé d'ajuster l'intitulé en fonction du contenu. (Ligne « **Intitulé** »)

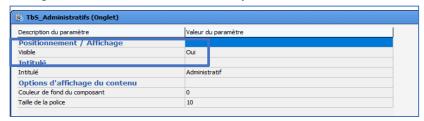

Pour gérer l'ordre d'affichage des onglets, il faudra cliquer sur situé en haut à gauche de l'écran. Le classement se fera alors via un glisser/déposer des onglets. Lorsque cette action est réalisée, un clic sur **OK** permet de revenir sur la fenêtre de paramétrage de l'affichage de la consultation.

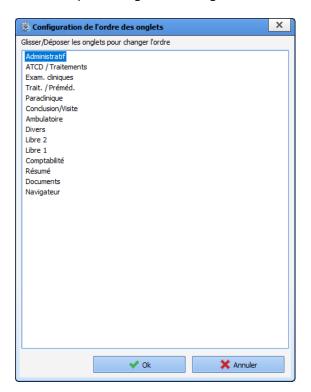

4.1.2.2 Les composants utilisables en consultation

Les composants disponibles dans la consultation sont les suivants :

- Case à cocher
- Groupe de case à cocher
- Champ de saisie simple
- Champ de saisie multilignes
- Menu déroulant
- Groupe de boutons radio
- Champ de saisie avec liste de référence



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Bouton
- Libellé
- Composant Résultats de laboratoire

4.1.2.2.1 Rappel des paramétrages pour chaque composant

Détails au chapitre les composants communs à tous les modules.

Les paramétrages à gérer :

- Visible (Oui ou Non)
- Onglet parent (onglet présentant le composant)
- Ordre de tabulation (à faire quand le paramétrage de l'onglet est réalisé)
- Intitulé (du composant)
- Niveau d'importance du champ (Normal, Avec avertissement ♥, Important ♥ ou Bloquant ♥)
- Niveau de la reprise :

Jamais repris

Niveau 1 (exemple : les antécédents = qui ne varie pas)

Niveau 2 (exemple : la taille = qui varie peu)

Niveau 3 (exemple : le poids = qui peut beaucoup varier)

Pour les cases à cocher, les groupes de cases à cocher, les menus déroulants et les groupes de boutons radio :

Valeurs possibles (menus déroulants, groupes de cases à cocher, groupes de boutons radio)

Clé1=Valeur1||Clé2=Valeur2|| ... ||

CléX peut être une ou plusieurs lettres (sans espace) ou un nombre

ValeurX est l'option qu'a à choisir l'utilisateur

Les deux | s'obtiennent avec la combinaison de touches [AltGr] + 6



Pour les cases à cocher, les menus déroulants et les groupes de boutons radio :

• Contexte à mettre à jour

Pour les groupes de cases à cocher et les groupes de boutons radio :

- Orientation des colonnes (Verticale=V ou Horizontal= H)
- Nombre de colonnes
- Affiche le choix "Autre" (si elle est sélectionnée, cette option ajoute un choix « Autre » qui permet à l'utilisateur de saisir un texte pour préciser son choix)

Type de donnée doit être configuré à Normale : Mère ou Enfant sont utilisés pour le module DIANE OBSTETRIQUE.

4.1.2.2.2 Le composant des résultats de laboratoire

Le paramétrage de ce composant n'est pas accessible, il est mis en place par le service interface de BOWMEDICAL. Il est uniquement possible de modifier la taille et l'emplacement.





BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


4.1.2.3 Gérer l'ordre de tabulation des composants

La gestion de l'ordre de tabulation des composants au sein de l'onglet sera <u>réalisée APRES la fin de la constitution</u> <u>de l'onglet</u>.

- Ouvrir la fenêtre de paramétrage d'un composant
- Sélectionner la ligne **Ordre de tabulation**
- Cliquer sur le bouton en bout de ligne
- Déplier l'onglet à ordonner
- Prendre chaque composant dans la liste et le positionner par glisser-déposer
- Cliquer sur le bouton **ENREGISTRER** en bas de la fenêtre

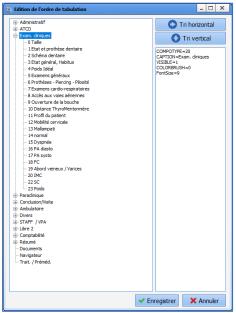

4.1.3 Spécificités de la réanimation

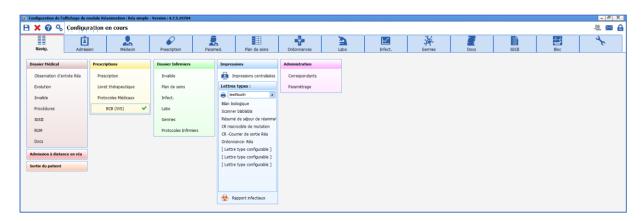

L'onglet **Navigation** est propre au module de réanimation. Il est constitué de pavés de liens configurables. En configuration, l'ensemble des liens est visible : les liens non-visibles en utilisation apparaissent en italique.

La configuration des boutons se fait via un clic gauche sur le lien. Il est possible de définir l'affichage ou non du bouton, ainsi que son action.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.3.1 Naviguer sur un onglet

Cette action est un raccourci vers un autre onglet du module, et éventuellement un sous-onglet, si l'onglet en dispose.



4.1.3.2 Afficher les procédures de service

Cette action ouvre la fenêtre **Procédures**. Les procédures du services concernées sont paramétrables dans la partie "**Ressources** | **Procédures** (*.rtf)".



4.1.3.3 RUM

Cette action ouvre le formulaire de saisie des codes CCAM et CIM10.



4.1.3.4 Afficher le livret thérapeutique utilisé

Cette action est affiche le livret thérapeutique.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.3.5 Afficher les protocoles médecin

Cette action ouvre la fenêtre **Protocoles Médicaux**.

Les procédures du services concernées sont paramétrables dans la partie "Ressources | Protocoles Médicaux (*.rtf)".



4.1.3.6 Afficher les protocoles infirmiers

Cette action ouvre la fenêtre **Protocoles Infirmiers**.

Les procédures du services concernées sont paramétrables dans la partie "Ressources | Protocoles Infirmiers (*.rtf)".



4.1.3.7 Afficher la liste des correspondants

Cette action ouvre le module de configuration. Ce lien n'est visible et disponible qu'aux référents.



4.1.3.8 Lancement de l'outil de paramétrage

Cette action ouvre le module de configuration. Ce lien n'est visible et disponible qu'aux référents.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.3.9 Lettres types

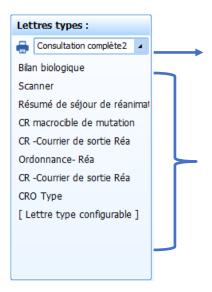

4.1.4 Configuration des composants de l'écran de synthèse et des bandeaux latéraux

Chaque type de composant est configurable de façon spécifique. Leur configuration est disponible au clic sur les « engrenages ».

4.1.4.1 Configuration des composants communs à l'écran de synthèse (DIANE REA) et aux bandeaux latéraux (DIANE REA et VISUAL)

4.1.4.1.1 Eléments importants

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

® GC_CUSTOM6_0_	□ ×
	Position X: 3 Largeur: 290 Position Y: 3 Hauteur: 207
	Types de documents
	☐ Evolution médicale Réa
	☐ Synthèse médicale Réa
	☐ Synthèse médicale USC
	Synthèse médicale autre
	☐ Evolution paramédicale Réa
	☐ Synthèse paramédicale Réa
	Synthèse paramédicale USC
	Synthèse paramédicale autre
	☐ Examen clinique à l'admission
	☐ Examens paracliniques
	☐ CR sortie Réa
	☐ CR sortie USC
	☐ CR sortie Anesth
	☐ CR sortie autre
	☐ Histoire de la maladie Réa
	CR d'obstétrique
	☐ Evolutions obstétriques
	☐ Conduite à tenir (Obstétrique)
	☐ Histoire de la maladie USC
	☐ Histoire de la maladie Anesthésie
	Evolution paramédicale USC
	Evolution paramédicale Anesthésie
	☐ Evolution médicale USC
	Evolution médicale Anesthésie
	Titre
	✓ Enregistrer X Annuler

Il est possible de choisir les documents pour lesquels les éléments marqués comme importants doivent apparaître dans le composant parmi la liste des documents éditables depuis une zone d'édition des documents. Pour afficher le contenu d'un type de document dans le composant de visualisation des éléments importants, il suffit de cocher la case qui précède son nom.

La zone **Titre** permet de choisir le libellé du composant affiché dans l'écran de synthèse. Si ce champ est vide, le titre par défaut est **Eléments importants**.

4.1.4.1.2 Visualisation des résultats de laboratoire

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

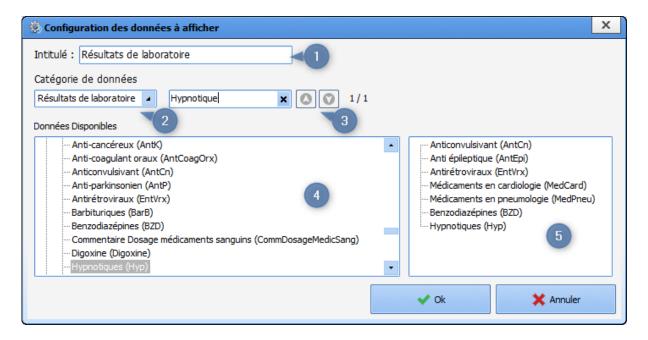

La configuration de ce composant permet de choisir le nom du composant affiché dans l'écran de synthèse dans la zone de saisie **Intitulé** (1). Par défaut, l'intitulé prend la valeur suivante : **Résultats de laboratoire**.

Le menu déroulant (2) (Résultats de laboratoire ou Paramètres physiologiques) permet de choisir d'afficher la liste des données de laboratoire ou les paramètres manuels dans la colonne de gauche (4).

Les données sont affichées en reprenant les catégories déjà présentes en configuration. Pour les rendre visible en utilisation, il faut glisser/déposer la donnée vers la colonne de droite (5). Il est possible de réorganiser la liste des éléments configurés à l'aide d'un glisser/déposer. L'ordre de configuration sera l'ordre d'affichage repris dans l'écran de synthèse.

Une zone de recherche (3) permet d'effectuer une recherche textuelle parmi la liste des données présentes dans la zone (4). Les flèches permettent de naviguer d'un élément à l'autre.

Il n'est pas possible de basculer une branche complète (catégorie) de résultats de laboratoire : seuls les éléments « fils » sont basculables.

4.1.4.1.3 Suivi des dispositifs

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bown

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102




La configuration de ce composant permet de choisir le nom du composant affiché dans l'écran de synthèse dans la zone de saisie **Intitulé** (1). Par défaut, l'intitulé prend la valeur suivante : **Suivi des dispositifs**.

La zone (2) affiche la liste des catégories de dispositifs : Voies d'abord, Drainages, Pansements, Autres. Cette zone permet d'organiser l'ordre d'affichage des éléments dans l'écran à l'aide des flèches à droite.

4.1.4.1.4 Paramètres physiologiques

Le composant de visualisation des paramètres physiologiques permet d'afficher un ou deux paramètres.

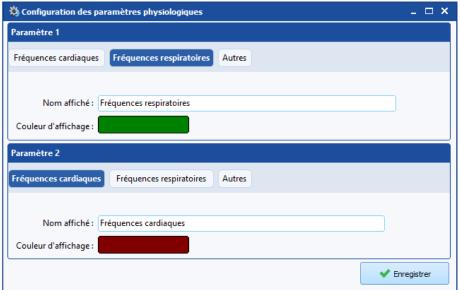

Pour les fréquences cardiaques et les fréquences respiratoires, le paramétrage se fait en un clic, via le bouton raccourci Fréquences cardiaques Fréquences respiratoires . Pour afficher un autre paramètre, il faut utiliser le choix Autres. Un champ de recherche est alors disponible pour saisir le paramètre à afficher.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com

 ϵ

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Paramètre 1		
Fréquences cardiaques	Fréquences respiratoires	Autres
Pression non		
Pression non définie (Groupe) - PND		
Pression non invasive continue (Groupe) - PNIC		
Pression non invasive continue diastolique - PNICd		
Pression non invasive continue moyenne - PNICm		
Pression non invasive continue systolique - PNICs		

Le nom affiché en utilisation est paramétrable, dans la limite de 20 caractères. La couleur peut également être paramétrée.


4.1.4.2 Configuration des composants spécifiques de l'écran de synthèse (DIANE REA)

4.1.4.2.1 Données de surveillance

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

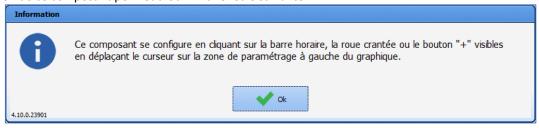

Le clic sur la barre horaire du composant affiche la fenêtre de configuration suivante :

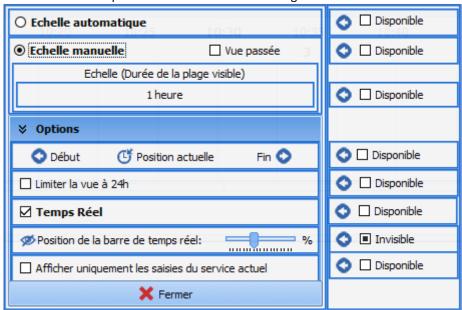

Le clic sur le bouton \odot de la zone d'affichage des données physiologiques affiche la fenêtre de configuration suivante :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

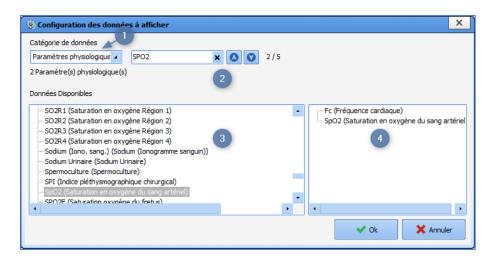


Le menu déroulant **Catégorie de données** (1) permet de choisir les paramètres à afficher dans la bande (paramètres physiologiques ou paramètres énumérés).


La zone (3) est la liste complète des paramètres physiologiques. Pour les rendre visible en utilisation, il faut glisser/déposer la donnée vers la colonne de droite (4). Il est possible de réorganiser la liste des éléments configurés à l'aide d'un glisser/déposer. L'ordre de configuration sera l'ordre d'affichage repris dans l'écran de synthèse.

Une zone de recherche (2) permet d'effectuer une recherche textuelle parmi la liste des données présentes dans la zone (3). Les flèches permettent de naviguer d'un élément à l'autre.

Le clic sur le bouton 4 de la zone d'affichage des données physiologiques affiche la fenêtre de configuration suivante :

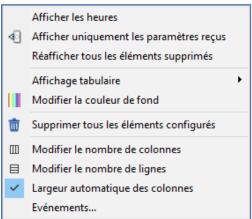

Pour chaque donnée, il est possible de configurer l'apparence en faisant un clic droit sur son étiquette :

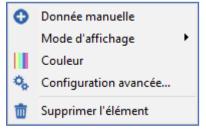

Le choix Configuration avancée... affiche la fenêtre suivante :



43,

2025-11-07 Cou

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 76 / 419

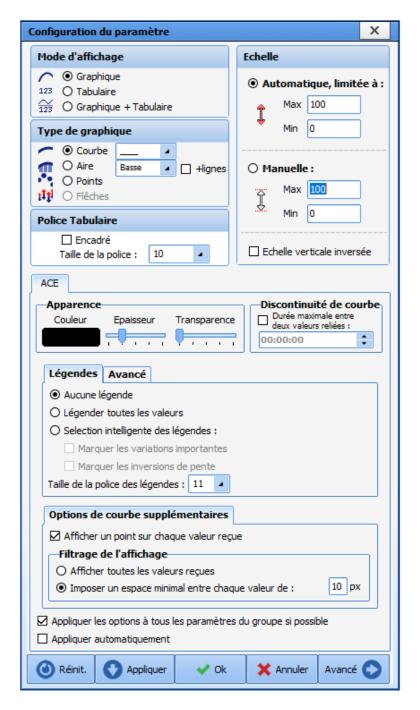

4.1.4.2.2 Visualisation des champs de données

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

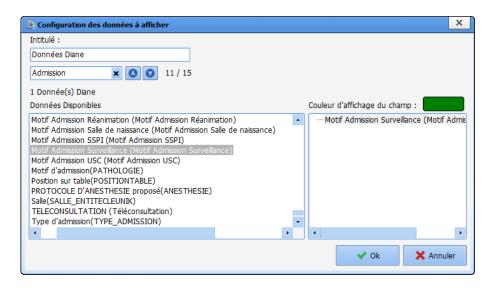

La configuration de ce composant permet de choisir le nom du composant affiché dans l'écran de synthèse dans la zone de saisie **Intitulé** (1). Par défaut, l'intitulé prend la valeur suivante : **Données Diane**.

La colonne de gauche (3) liste la liste des champs de données Diane. Pour les rendre visible en utilisation, il faut glisser/déposer la donnée vers la colonne de droite (4). Il est possible de réorganiser la liste des éléments configurés à l'aide d'un glisser/déposer. L'ordre de configuration sera l'ordre d'affichage repris dans l'écran de synthèse.

Une zone de recherche (2) permet d'effectuer une recherche textuelle parmi la liste des données Diane. Les flèches permettent de naviguer d'un élément à l'autre.

Chaque donnée configurée peut avoir une couleur spécifique. Le clic sur la donnée affiche un carré de la couleur de la police (5) (la couleur par défaut est le noir). Le clic sur ce carré permet de choisir une autre couleur de police. Après validation, le carré prend la couleur choisie.



4.1.4.2.3 MD Balance liquidienne

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 78 / 419

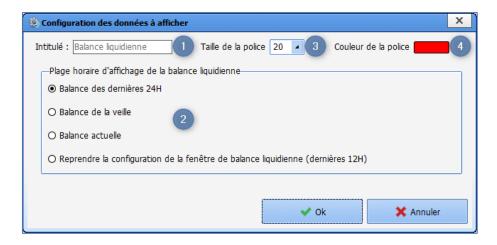

L'intitulé de la zone (1) est en lecture seule car non repris dans l'affichage de l'écran de synthèse. Il a pour valeur **Balance liquidienne**.

La plage horaire de la balance liquidienne qui sera affichée dans l'écran de synthèse est configurable à l'aide du groupe de bouton radios (2) :

- **Balance des dernières 24H** : correspond à la balance liquidienne des dernières 24h en prenant comme date de référence la date actuelle.
- **Balance de la veille** : balance de la journée de réanimation précédente.
- **Balance actuelle** : balance de la journée de réanimation actuelle.
- Reprendre la configuration de la fenêtre de balance liquidienne (dernières X heures): X correspond à la valeur de la clé de paramétrage **DefaultValueTimeFilter**. La fenêtre de configuration affiche la valeur de X qui a été configurée.

Le menu déroulant (3) permet de choisir la taille de la police parmi les valeurs suivantes : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36 et 48.

Le clic sur le carré (4) permet de choisir une autre couleur de police. Après validation, le carré prend la couleur choisie. Par défaut, la couleur est le noir.

4.1.4.2.4 MD Prescriptions en cours

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

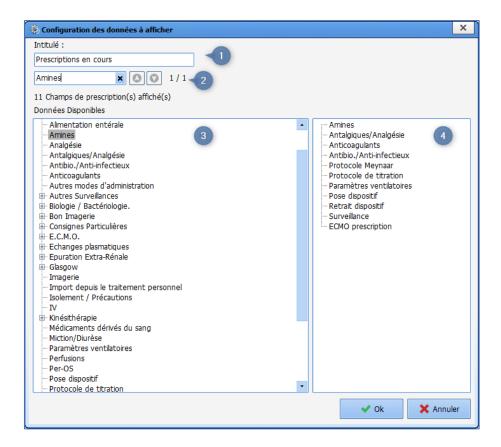


La configuration de ce composant permet de choisir le nom du composant affiché dans l'écran de synthèse dans la zone de saisie **Intitulé**. Par défaut, l'intitulé prend la valeur suivante : **Prescription en cours**.

Une zone de recherche (2) permet d'effectuer une recherche textuelle parmi la liste des données présentes dans la zone (3). Les flèches permettent de naviguer d'un élément à l'autre.

La colonne de gauche (3) liste les champs de prescriptions présents dans l'onglet de prescription lié à la configuration en cours d'édition. Si le champ de prescriptions est lié à des saisies avancées, chaque saisie avancée est listée sous ce champ de prescription. Pour les rendre visible en utilisation, il faut glisser/déposer la catégorie vers la colonne de droite (4). Il est possible de réorganiser la liste des éléments configurés à l'aide d'un glisser/déposer. L'ordre de configuration sera l'ordre d'affichage repris dans l'écran de synthèse.

4.1.4.2.5 Conclusion du staff

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

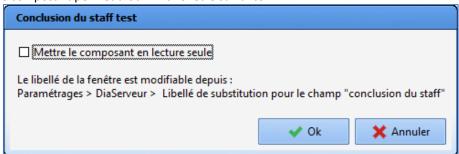

Le titre se configure dans la section paramétrages/DiaServeur via la clé **Libellé de substitution pour le champ** « **Conclusion de staff** ».



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Par défaut, le titre du champ est : Conclusion du staff.

Pour afficher le composant sans permettre aux utilisateurs d'effectuer des modifications, il faut cocher la case **Mettre le composant en lecture seule**.

4.1.4.2.6 Transmissions ciblées

L'édition de ce composant permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

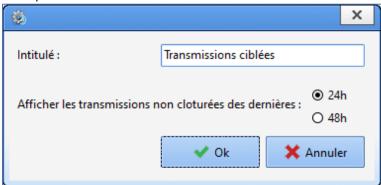

La configuration de ce composant permet de choisir le nom du composant affiché dans l'écran de synthèse dans la zone de saisie **Intitulé**. Par défaut, l'intitulé prend la valeur suivante : **Transmissions ciblées**.

Afficher les transmissions non clôturées des dernières : 24h / 48h permet de définir la période d'affichage des transmissions dans le composant.

La période d'affichage par défaut est de 24 heures.

4.1.4.3 Configuration des composants spécifiques des bandeaux latéraux (DIANE REA et VISUAL)

4.1.4.3.1 Chronomètres primaire / secondaire

Le composant de visualisation des chronomètres affiche les différents chronomètres en-cours du dossier. Le paramétrage reprend par défaut ce qui a été configuré dans l'onglet **Chronomètres**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

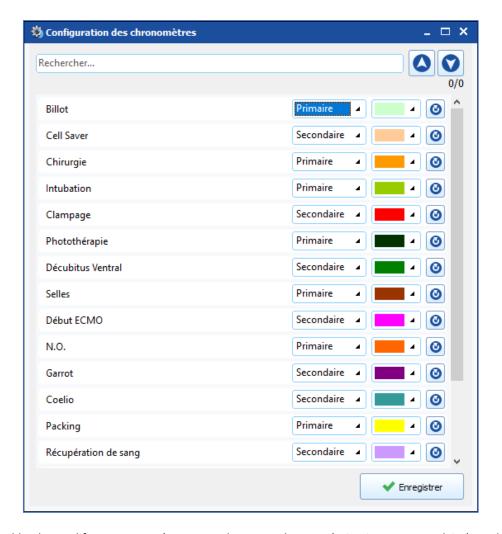

Il est possible de modifier ce paramétrage en changeant le type (primaire ou secondaire) ou la couleur d'affichage. Dans ce cas, L'icône est présente en début de ligne. Le bouton permet de recharger la configuration par défaut.



4.1.4.3.2 MD Balance liquidienne filtrée

Le composant de balance liquidienne filtrée affiche les entrées de 6 catégories de produits (cristalloïdes, colloïdes, CGR, PFC, CPA et Fibri) ainsi que les sorties de sang et d'urines. Ces catégories doivent en amont être configurées dans l'onglet Médicaments ou dans l'onglet Livret thérapeutique en fonction des produits.

Le paramétrage du composant consiste à définir la couleur d'affichage des différentes catégories ainsi qu'à déterminer la plage horaire à afficher (depuis l'entrée dans le service ou les 1 à 72 dernières heures).

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

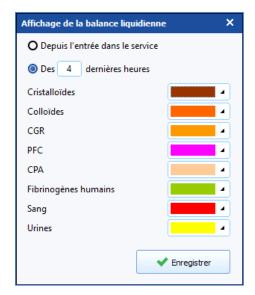


4.1.5 Ajouter un sous-onglet

Dans certains onglets, excepté pour la **Consultation**, il est possible de créer un sous-onglet en cliquant sur le bouton • et choisir **Sous-onglet**.

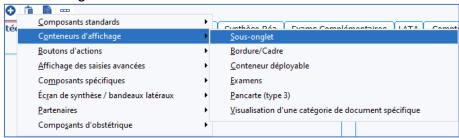

La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Le titre du sous-onglet est à renseigner dans la ligne : Intitulé à la place de CUSTOM_12_151_

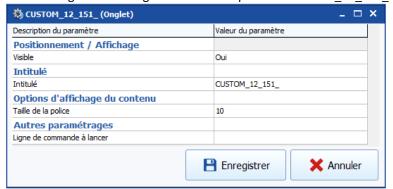

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

MD Onglet de prescription

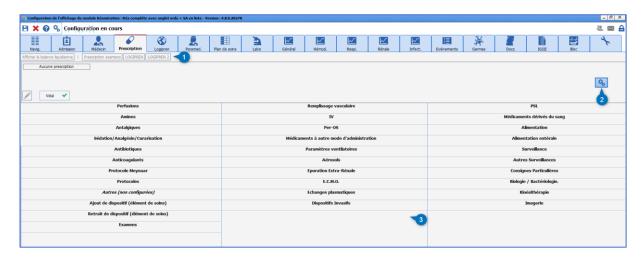


La zone 1 correspond aux boutons paramétrés dans l'onglet Configuration. Le bouton (2) permet de configurer l'aspect et le fonctionnement de l'onglet Prescription.

La zone 3 correspond à l'affichage tel qu'il sera visible en utilisation.

4.1.6.1 Configuration du tableau des catégories de prescription

Le nombre de colonnes et l'ordre des éléments de l'onglet Prescription est paramétrable grâce au bouton de l'onglet Prescription.

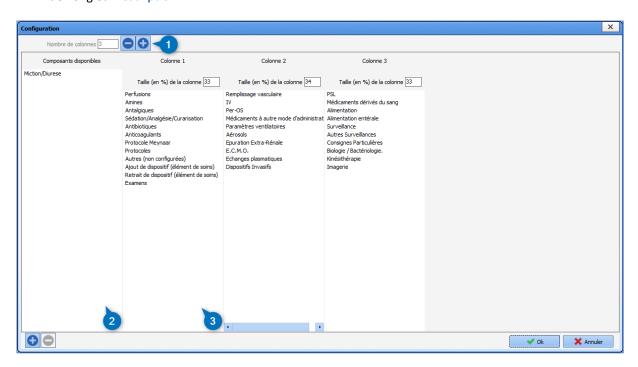

La zone 1 permet de définir le nombre de colonnes souhaité (3 par défaut). Si ce nombre est diminué, les composants présents dans les colonnes supprimées sont automatiquement basculés dans la liste des composants disponibles (zone 2). Les composants sélectionnés peuvent être repositionnés dans la zone 3



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

par glisser-déposer. Pour ajouter un composant disponible, il faut le déplacer dans la zone 3 par glisser-déposer.

De nouveaux composants de prescriptions peuvent être créés en cliquant sur le bouton en bas à gauche. La fenêtre suivante apparaît :

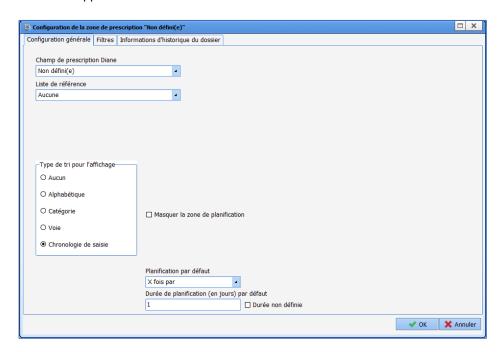

4.1.6.2 Configuration d'une catégorie de prescription

Pour éditer une catégorie de prescription existante, il faut double-cliquer sur son intitulé.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

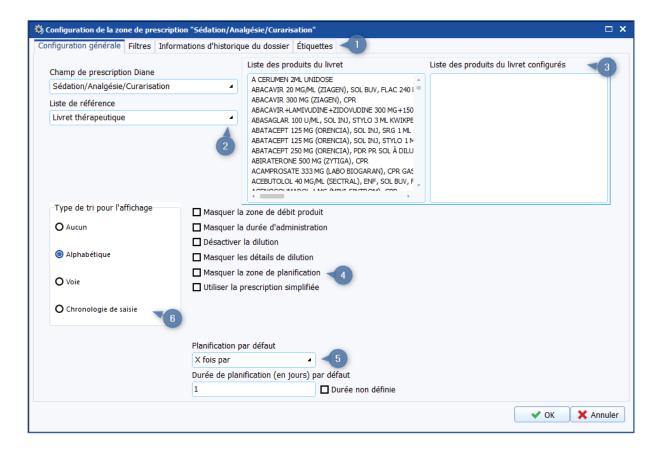

- 1. Onglets de la fenêtre de configuration
- 2. Champ de prescription Diane et Liste de référence

Champs de prescription Diane :

Examens PFR-OS Adjuvants Pose dispositif Administrations demandées Examens prévus oralement Fauteuil / Levé Première perfusion Aérosols Imagerie Prévention NVPO Alimentation **Immunosuppresseurs** Prévention Thrombo -Alimentation entérale **Embolique** Import depuis le traitement Alimentation entérale (LGP) personnel Prévention Ulcère GD et RGO Alimentation parentérale Import depuis les Produits dérivés du sang **Amines** Protocole de titration prémédications Analgésie Insuline selon protocole Protocole Meynaar Analgésie Locorégionale Insulines **Protocoles** Analgésie systémique Interface ventilation PΙS Analgésie / Sédation / Isolement / précautions Quatrième perfusion Recherche clinique Curares (LGP) Kinésithérapie Antalgiques Remarques du pharmacien Antalgiques / Analgésie Limitation de soin Remplissage Antibio. / Anti-infectieux Médicaments autres (LGP) Remplissage vasculaire Médicaments cardio (LGP) Retrait dispositif Anticoagulant Anticoagulants/Antiagrégants Médicaments **Antidotes** cardiologiques Saisies avancées Sédation Antiinfectieux (LGP) Médicaments dérivés du **ATB** Sédation/Analgésie/Curarisation sang Autres Médicaments digestifs Seringues électriques

Miction Diurèse



Autres (LGP)

BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Solutés

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Autres modes
 d'administration
 Bio / Bactério
 Chimiothérapie
 Commentaires

ContentionsCurares/ Antagonisassions

Deuxième perfusionDispositifs invasifs

Diurétiques

DiversDrains

Neuroleptiques Non défini

NIP
NPS
Nutrition

Oxygénothérapie et ventilation

PansementsParaclinique

Paramètres ventilatoires

PCA, PCEAPerfusions

Sonde gastrique

Sous-cutané

Stupéfiants

SurveillanceThérapeutique

Traitement anti HTA

- Traitement hémorragie et


anémie

Troisième perfusion

Ventilation

Listes de référence :

- Aucune
- Liste de consultation (Menu déroulant Root (ou élément parent) permettant de choisir la liste de consultation à utiliser)
- **Liste des événement** (Menu déroulant **Root (ou élément parent)** : Evènements / Environnements Patient / Prélèvements)
- Liste des médicaments Diane (Menu déroulant Root (ou élément parent): Balance liquidienne / Médicaments / Produits Sanguins). Il est possible de configurer les options suivantes au niveau de la fenêtre de prescription:
 - Masquer la zone de débit produit,
 - Masquer la durée d'administration,
 - o Désactiver la dilution,
 - Masquer les détails de la dilution.
- Livret thérapeutique: permet de choisir quels éléments du livret pourront être prescrit dans cette zone.
 Les produits pouvant être prescrit dans cette zone de prescription doivent être glissés de la zone Liste des produits du livret vers la zone Liste des produits du livret configurés. Si aucun élément n'est glissé dans la zone de droite, tous les produits du livret pourront être prescrits.

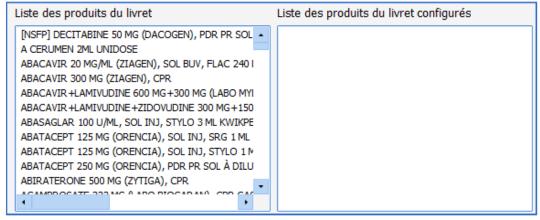

Paramètres manuels: zone de prescriptions permettant de prescrire la surveillance de paramètres manuels parmi la liste disponible dans l'onglet Paramètres.
 Les paramètres pouvant être surveillés doivent être glissés de la zone Liste des paramètres disponibles vers la zone Liste des paramètres configurés. Si aucun élément n'est glissé dans la zone de droite, tous

les paramètres pourront être surveillés.

BOW MEDICAL SAS

Tél : +33 3 60 03 24 68 Fax : +33 9 72 29 34 87

2025-11-07

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

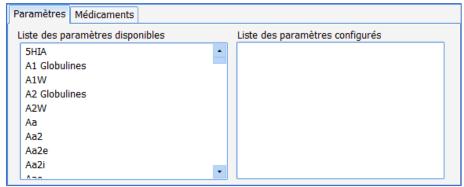

La surveillance de paramètres manuels peut aussi concerner les médicaments Diane de type Balance liquidienne.

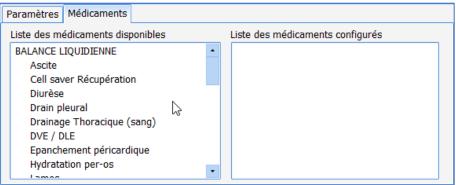

Les fréquences de surveillance des paramètres proposés dans la fenêtre de prescription sont configurables dans ce même onglet :

Fréquences de surveillance disponibles	0	
/h /2h		
/3h		
/4h		
/6h		

Le bouton permet l'ajout d'une nouvelle fréquence en saisissant un nombre entier suivi de **h** pour heures ou de **min** pour minutes :



Le bouton permet la suppression d'une fréquence.

- Saisies Multiples : permet de choisir quelles saisies multiples pourront être prescrites dans cette zone :

BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

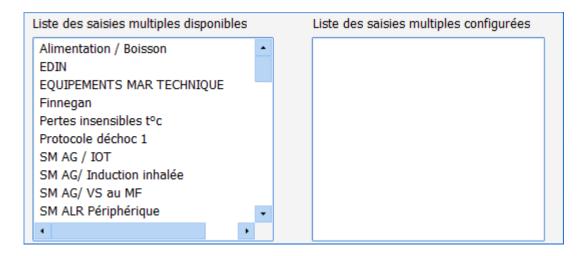

Les saisies multiples pouvant être prescrites dans cette zone de prescription doivent être glissées de la zone Liste des saisies multiples disponibles vers la zone Liste des saisies multiples configurées. Si aucun élément n'est glissé dans la zone de droite, toutes les saisies multiples pourront être prescrites.

- Liste des éléments de soins

- Liste des produits (pour la liste de référence Livret thérapeutique), liste des paramètres et médicaments (pour la liste de référence Paramètres manuels) ou liste des saisies multiples (pour la liste de référence Saisies Multiples)
- Configuration de l'apparence de la fenêtre de prescription
 L'option Utiliser la prescription simplifiée affiche une fenêtre de prescription plus adaptée aux traitement Per OS.

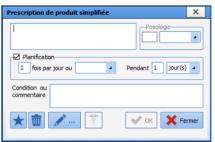

5. Planification par défaut

Il est possible de configurer une planification par défaut qui sera automatiquement reprise dans la fenêtre de prescription par la suite :



Planification par défaut : Liste déroulante avec les options suivantes :

- Manuelle
- Unique
- X fois par
- X fois tous(tes) les
- X fois sur
- En continu



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Durée de planification (en jours) par défaut : zone de saisie numérique, optionnelle si la case à cocher **Durée non définie** est cochée, initialisée à 1.


La zone de planification peut être masquée si la case à cochée **Masquer la zone de planification est cochée**.

6. Paramétrage du tri pour l'affichage

Pour chaque champ de prescription Diane, il est possible de choisir un type de tri pour l'affichage parmi les tris suivants :

- Aucun
- Alphabétique
- Catégorie
- Voie
- Chronologie de saisie

Les données affichées au survol de l'œil sont paramétrables dans l'onglet **Informations d'historique du dossier**.

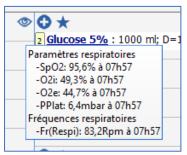

La sélection des scores, résultats et paramètres à afficher se fait par un glisser-déposer dans la zone inférieure.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68


Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

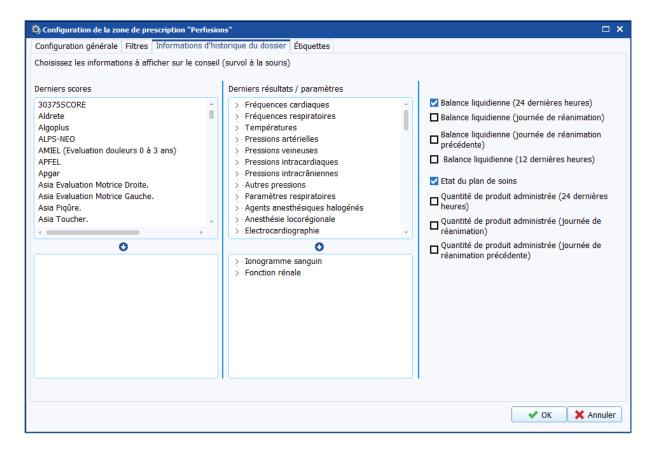

Les étiquettes de la fenêtre de prescription guidée se configurent dans l'onglet **Etiquettes**. Elles permettent de saisir en un clic les produits les plus utilisés dans le champ de prescription.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

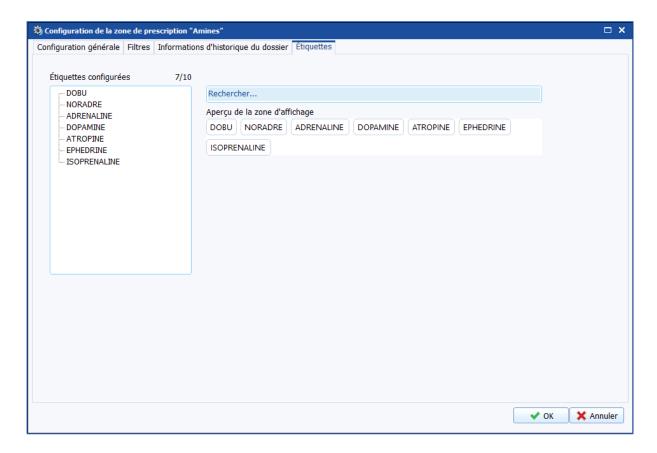


Jusqu'à 10 étiquettes peuvent être paramétrées. Pour ajouter une étiquette, il faut saisir le nom du produit et le sélectionner parmi la liste proposée.

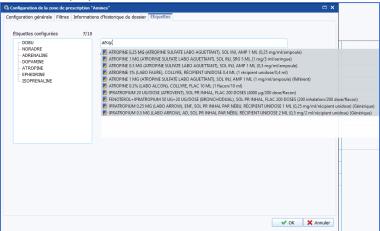

Il faut ensuite valider le nom (12 caractères au maximum) et l'étiquette s'ajoute automatiquement.



Le survol à la souris de l'étiquette affiche le nom du produit.

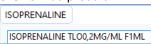



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Pour renommer ou supprimer une étiquette, il suffit de faire un clic droit sur le libellé de l'étiquette concernée dans la partie de gauche **Etiquettes configurées**.



4.1.6.3 Affichage des saisies avancées sur le cockpit (liste des patients)

4.1.6.3.1 Affichage dans la colonne Autre de la zone rétractable

Pour afficher le libellé des saisies avancées en cours avec une planification de type continue sur la liste des patients, il faut se rendre dans la configuration visuelle du module, onglet **Prescription** et double-cliquer sur la zone contenant les saisies avancées à afficher.

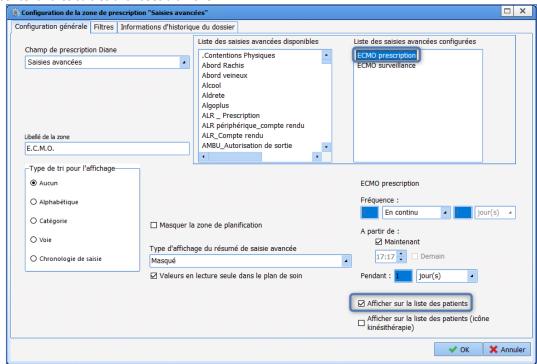

La case à cocher **Afficher sur la liste des patients** est liée à chaque élément présent dans la zone **Liste des saisies avancées configurées** et permet de choisir si la saisie avancée doit-être affichée ou non.

4.1.6.3.2 Affichage de l'icône Kinésithérapie

Pour afficher l'icône de kinésithérapie sur le portail patient, il faut se rendre dans la configuration visuelle du module, onglet Prescription et double-cliquer sur la zone contenant les saisies avancées à afficher puis configurer les saisies avancées liées à la kinésithérapie à l'aide de la case à cocher Afficher sur la liste des patients (icône kinésithérapie).



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

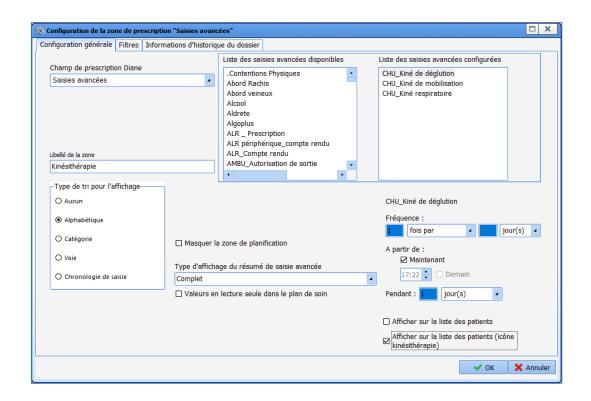

4.1.7 MD Plan de soins

4.1.7.1 Paramétrage du plan de soins

Accès au paramétrage du plan de soins via les roues crantées situées en haut à droite

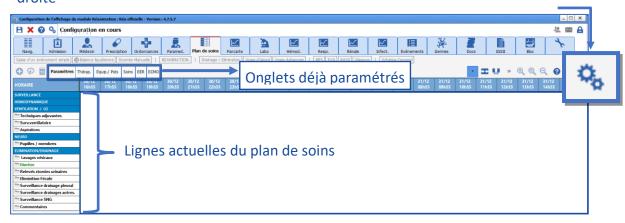



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

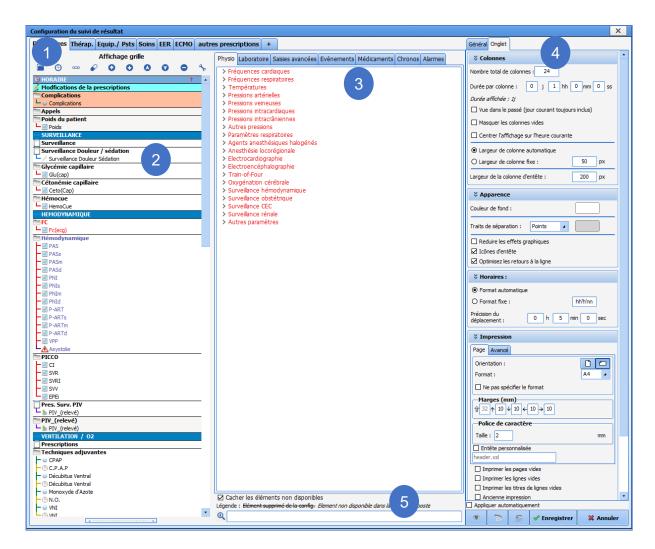

1. Onglets paramétrés.


Au clic droit, un menu permet d'agir sur l'onglet



Le bouton situé à droite des onglets permet d'en créer un nouveau.

- 2. Lignes configurées dans l'onglet sélectionné.
- 3. Eléments configurables classés par catégories.
- 4. Paramétrage des lignes, des onglets et du plan de soins (Général).
- 5. Zone de recherche d'un élément de la liste configurable.

Plusieurs boutons permettent de configurer l'affichage :

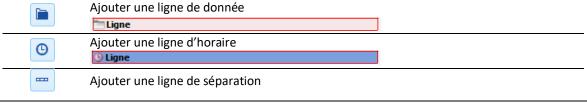



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

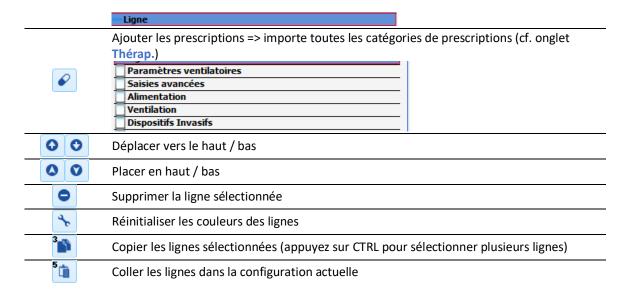

La copie de lignes permet de copier des paramétrages entre différentes configurations d'affichage : il est par exemple possible de copier tout ou partie du plan de soin utilisé dans un service pour le coller dans le plan de soins d'un autre service et ainsi gagner du temps.

4.1.7.1.1 Onglet nommé "Général"

Permet de configurer l'affichage général du plan de soins. Les différentes couleurs sont modifiables et peuvent être différentes en fonction du paramétrage.


Plan de prescription :



Couleurs d'état des éléments prescrits :



Prescriptions modifiées:

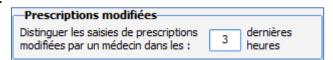

Lorsqu'une prescription est modifiée, les lignes du plan de soin concernées sont repérables grâce à l'icône 💛.



Déplacement autorisé :



Validation de l'état non réalisé :



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

—Validation de l'état non réalisé :	
Commentaire obligatoire	4
Commentaire possible (non obligatoire)	
- Commentaire désactivé	-
Commentaire obligatoire	

Sauvegarde automatique:

Sauvegarde automatique : ☐ Après chaque modification ☐ Automatiquement toutes les 60 minute(s)				
Format de fichier : HTML Mode Login Mot de passe		Mot de passe		
file Passive mode (FI	TP)			
Export vers Masque de fichier \\share-server\dossiers\ani PlanDeSoin_ <patientnom< td=""></patientnom<>				
Inclure 0 jour(s) passé(s) et 0 jour(s) futur(s)				

La sauvegarde automatique permet d'exporter le plan de soins automatiquement pour prévenir une défaillance du réseau informatique et/ou pour la traçabilité. Il est conseillé d'exporter le fichier au format PDF.

Configuration mode FTP:

- o Paramétrer la liste déroulante **Mode** à la valeur **FTP**.
- Renseigner le login et le mot de passe associé au compte FTP. Le mot de passe doit être inséré en clair.
- Ajouter l'adresse IP du serveur dans la section Exporter vers....
- o Le mode passif du FTP peut être activé en cochant la case prévue à cet effet.
- o Il est possible d'utiliser du FTPS en ajouter « ftps:// » devant l'IP du serveur renseignée.

Configuration mode File:

- o Paramétrer la liste déroulante Mode à la valeur File.
- o Ajouter le chemin du dossier cible dans la section **Exporter vers...**..

Par défaut, le plan de soins du jour en cours est exporté. Il est possible d'y inclure les jours précédents ainsi que le plan de soins des jours à venir. Il est conseillé d'exporter 72h glissantes, c'est-à-dire les 24h en cours, les 24h précédentes et les 24h à venir.

Il est possible de créer un sous-dossier par patient et d'y intégrer l'ensemble de ses exports dégradés. Dans le cadre d'un export FTP, il faut ajouter à l'adresse IP les tags suivants :


/<PATIENTNOMPATRO>_<PATIENTPRENOM>(<IPP>)

Dans le cadre d'un export de fichier, il faut ajouter au chemin les tags suivants :

\<PATIENTNOMPATRO>_<PATIENTPRENOM>(<IPP>)

Attention : le sens du slash varie selon le mode de transport des fichiers

Dispositions:

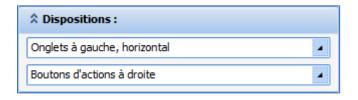



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

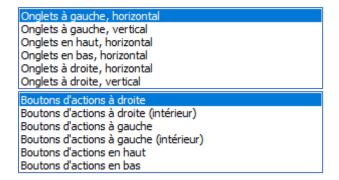

Eléments saisis présentant une durée :

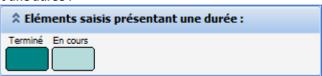


Couleurs d'éléments externes :

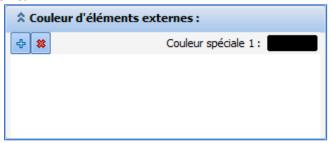

4.1.7.1.2 Onglet nommé "Onglet"

Permet de configurer l'affichage de chaque onglet.

Colonnes:

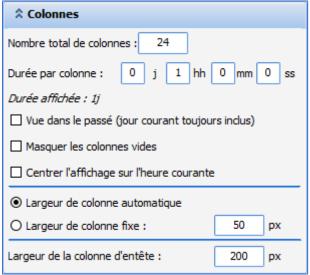

La zone **Colonnes** permet de choisir le nombre de colonnes à afficher ainsi que la durée associée à une colonne. **Masque les colonnes vides** : Masque les colonnes sans occurrences.

Centrer l'affichage sur l'heure courante : centre l'affichage de l'onglet sur l'heure courante



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Apparence:

↑ Apparence		
Couleur de fond :		
Traits de séparation : Points		
☐ Reduire les effets graphiques		
☑ Icônes d'entête		
☑ Optimisez les retours à la ligne		
☑ Plan de soin : afficher le plan de prescription correspondant au survol		

Couleur de fond : Non fonctionnel

Traits de séparation: Permet de choisir l'apparence des traits de séparation des colonnes. Il est possible d'afficher des points, des traits continus ou aucune séparation. La couleur de la séparation peut être personnalisée.

Icônes d'entête : Si cochée, on affiche au début de chaque ligne l'icône correspondante à la donnée affichée.

Horaires:

↑ Horaires:		
Format automatique		
O Format fixe : hh'h'nn		
Précision du déplacement : 0 h 5 min 0 sec		

Permet de choisir si les horaires affichés sont au format auto (Plus la plage horaire affichée est petite plus l'heure est précise) ou au format fixe.

Précision du déplacement permet de choisir la précision à apporter à la replanification d'une occurrence présente sur le plan de soin lorsqu'elle est replanifié à l'aide d'un glisser-déposer.

Impression:



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68


Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

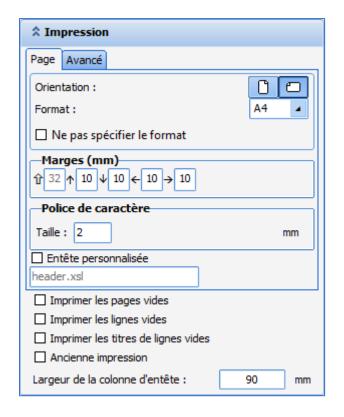


Zone de résultats non configurés :

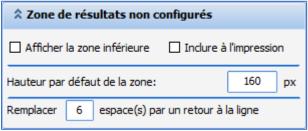

4.1.7.1.3 Onglet nommé "Ligne"

Onglet disponible uniquement si une ligne est précédemment sélectionnée.

Affichage des valeurs : colonnes

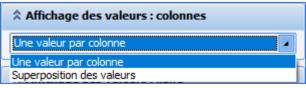

Affichage des valeurs : lignes



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 100 / 419

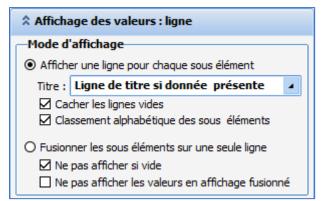

Permet de choisir un affichage en ligne pour chaque élément ou un affichage fusionné des sous-éléments. Si l'utilisateur choisir un affichage en ligne pour chaque sous élément, il est possible de choisir d'afficher le titre de la ligne ou non via le menu déroulant **Titre**. **Ligne de titre toujours affichée** permet la saisie manuelle. Aucun titre ne permet pas de saisie manuelle.

Aucun titre Ligne de titre toujours affichée Ligne de titre si donnée présente


Il est possible de masquer les lignes vides (case à cocher Cacher les lignes vides)

La case à cocher **Classement alphabétique des sous éléments** permet de classer les éléments présents dans une catégorie par ordre alphabétique, si non-cochée, les éléments sont affichés par ordre d'ajout.

Filtre d'affichage:



Zone permettant de choisir les informations à afficher dans la ligne. Le menu déroulant du haut contient les données suivantes :

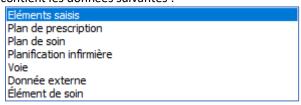

- **Eléments saisis** : Permet de choisir d'afficher les éléments saisis.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 101 / 419



 Plan de prescription: Permet de choisir d'afficher le plan de prescription lié à un champ de prescription sélectionnable dans la liste déroulante Issus du champ de prescription.
 Attention ce mode ne permet pas de valider les occurrences. Il permet uniquement d'afficher les prescriptions.



 Plan de soin : Permet de choisir d'afficher le plan de soins et le plan de prescription liés à un champ de prescription sélectionnable dans la liste déroulante Issus du champ de prescription. Les cases à cocher Les éléments de plan de soin à réaliser et qui sont en retard sont accessibles. La case à cocher « Non configurées dans cet affichage du type » est non cochée et grisée.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

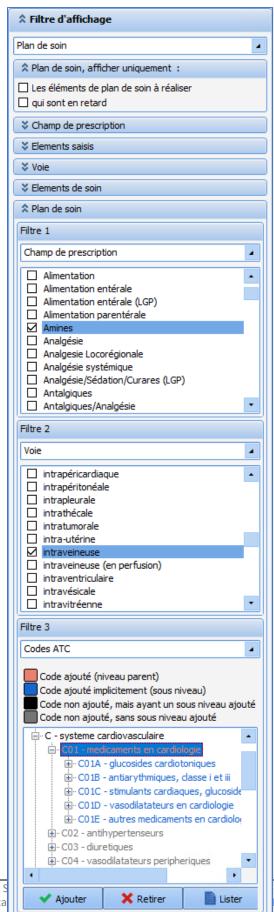

2025-11-07

BOW MEDICAL S 43, Avenue d'Ita Tél: +33 3 60 03

Fax: +33 9 72 29

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

Donnée externe

-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

DIANE: 4.14.2

du dispositif médical : 4.1.2 .)3760404900005(10)040102

Plusieurs filtres d'affichage sont disponibles et applicables par ligne : Champ de prescription, Voie et Code ATC. Ainsi, il est possible d'avoir un affichage décorrélé de la prescription qui n'est pas figée sur les Champs de prescriptions.

Comment paramétrer cet affichage?

Prenons l'exemple d'une ligne d'affichage ne reprenant que les « OPIOÏDES » en affichage, qui sont prescrits depuis le champ de prescription IV.


Pour cela:

Filtre d'affichage : sélectionner Plan de soin

Filtre 1 : sélectionner Champ de prescription

Filtre 2 : sélectionner Classe ATC. Puis, sélectionner la catégorie à afficher.

Dans ce second temps, sur la ligne d'affichage ne faisant référence qu'au champ de prescription **IV**, il faut aller pour cette ligne exclure les « Opioïdes », afin de ne pas générer de doublons d'affichage.

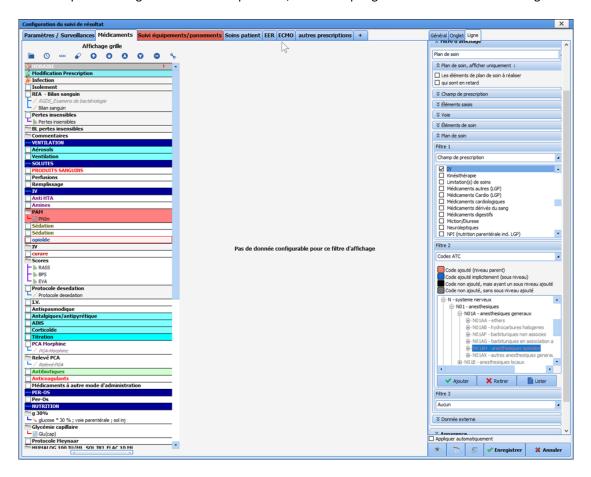

- Planification infirmière : Permet d'afficher la planification infirmière.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



- Voie:

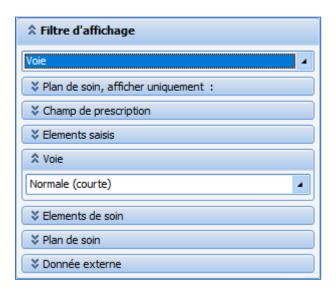

- Donnée externe : Permet d'afficher une donnée externe parmi celles sélectionnable dans le menu déroulant Source de l'encart Données externes : Plan de soins externe (Maincare) / Fichier PN13 / Plan de soins externes (Logipren)

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

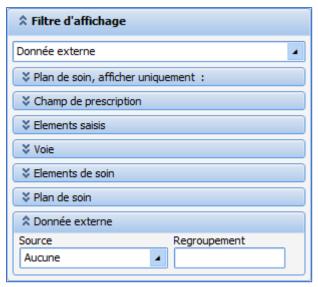

Elément de soin : Affiche les soins planifiés depuis le schéma corporel. La catégorie de l'élément de soin à afficher se sélectionne dans le menu déroulant Eléments de soin parmi les choix suivants : Voies d'abord / Drainages / Pansements / Autres.

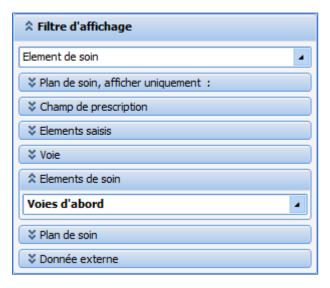

Apparence:



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

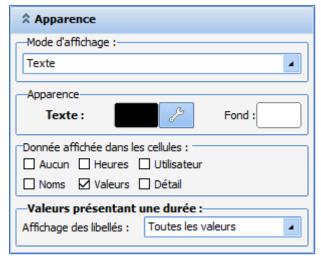


- **Mode d'affichage :** permet de choisir le mode d'affichage de la donnée.



- Apparence : permet de définir la police, sa couleur ainsi que la couleur du fond de la ligne.
- **Données affichées dans les cellules:** permet de configurer les informations à afficher sur les occurrences. Le choix **Aucun** prend le dessus sur les autres choix.
- Valeurs présentant une durée : permet de choisir d'afficher toutes les valeurs ou uniquement celles en cours.



Divers:

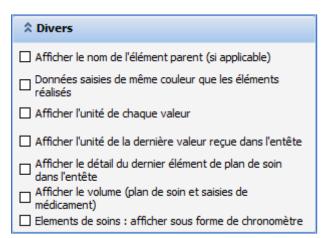

Impression:



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

☆ Impression		
Donnée imprimée dans les cellules :		
☐ Aucun ☐ Heures ☐ Utilisateur		
☐ Noms ☑ Valeurs ☐ Détail		
Imprimer le détail en annexe si le texte dépasse :		
☑ Intercaler la prescription avec le plan de soin		
☐ Placer les annexes en dessous de la ligne		

4.1.7.2 Ajout d'un nouvel onglet

Pour ajouter un nouvel onglet dans le plan de soins, il faut cliquer sur le bouton + situé à droite des onglets existants et nommer le nouvel onglet.




- 1. Commencer par ajouter une ligne horaire.
- 2. Ajouter une ligne de séparation
- 3. Ajouter une ou plusieurs lignes de données



4.1.7.2.1 Création d'une ligne d'éléments saisis

Par défaut, la ligne de données est de type Eléments saisis.

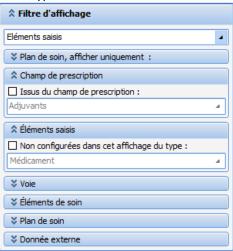

Ce type de ligne permet d'afficher, par un glisser-déposer, un élément au choix parmi les paramètres physio, les données de laboratoire, les saisies avancées, les évènements, les médicaments, les chronos et les



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 108 / 419

alarmes.



Par exemple, pour créer une ligne qui fait apparaître la PA du scope, il faut glisser-déposer le groupe de pressions artérielles dans la ligne.

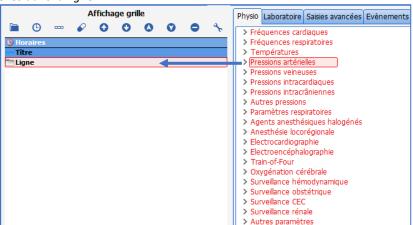

La procédure est la même pour les résultats de labo, les saisies avancées, les évènements ...

Par exemple, pour les codes examens, chaque élément doit être glissé dans une nouvelle ligne. Il n'est pas autorisé de glisser, dans une même ligne, un élément issu de la catégorie **Codes examens** et un élément issu d'une des autres catégories.

Il est possible de renommer le libellé de la ligne.

Cas des administration directes :

Pour afficher à la fois les administrations qui ne proviennent pas d'un favori et celles qui proviennent d'un favori non configuré, il faut cocher la case **Non configurées dans cet affichage du type :** et sélectionner **Admin. Directe non affichée ou sans favori**.

☆ Éléments saisis
 ✓ Non configurées dans cet affichage du type :
 Admin. directe non affichée ou sans favori

4.1.7.2.2 Création d'une ligne Plan de soin

Ce type de ligne permet d'afficher les prescriptions médicales par catégorie (champs de prescription) Par exemple : les amines



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@howme

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 109 / 419



A

Attention, il ne faut utiliser que les catégories paramétrées dans l'onglet Prescriptions.

Cas particuliers:

1. La prescription d'évènements :

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 110 / 419

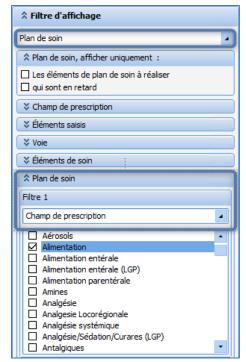

Ex : dans le champ alimentation, ne faire apparaître que l'évènement **A jeun**, il faut utiliser la colonne centrale, onglet **Evènement** et glisser-déposer uniquement ce que l'on veut afficher (**A jeun**)

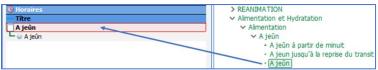

2. La prescription de saisies avancées :

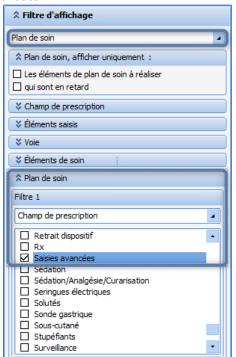



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 111 / 419

 Il faut utiliser la colonne centrale listant toutes les SA disponibles et glisser-déposer celles désirées.


Ex: les prescriptions EER

Attention, il faut penser à glisser-déposer toutes les SA paramétrées dans l'onglet Prescriptions, si la SA n'est pas dans le plan de soins la prescription n'apparaîtra pas.

2. Il est possible d'extraire un champ de la SA et de l'afficher dans une nouvelle ligne.

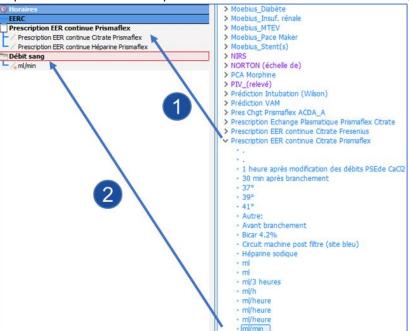

3. La prescription des surveillances :

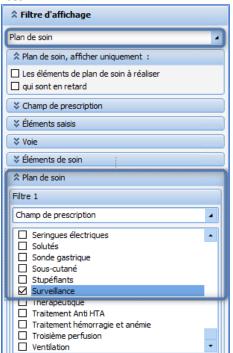

Permet d'afficher TOUTES les surveillances prescrites (paramètres physio ET balance liquidienne).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 112 / 419

Possibilité d'afficher uniquement les surveillances de balance liquidienne (la diurèse, par exemple) en utilisant la colonne centrale onglet médicaments.

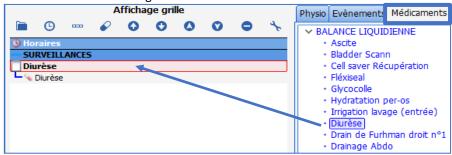


4.1.7.2.3 Création d'une ligne Planification infirmière


La planification infirmière concerne les SA et les EVENEMENTS.



A l'utilisation, cela permet d'obtenir cette fenêtre :

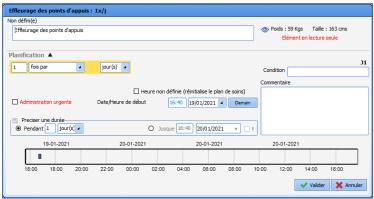

Ex : l'évènement prévention d'escarres et le score de Braden

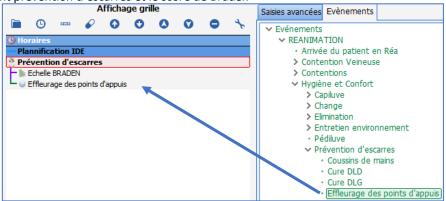

4.1.7.2.4 Création d'une ligne Eléments de soins

Ce type de lignes permet d'afficher les dispositifs et la programmation des formulaires de suivi du schéma corporel.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 113 / 419

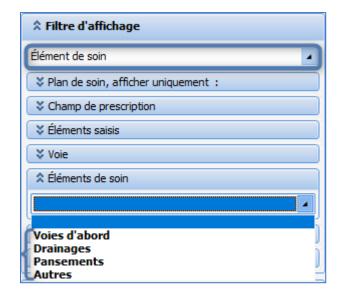

Chaque ligne peut correspondre à une catégorie d'éléments de soins (Voies d'abord, Drainages, Pansements et Autres). Il est nécessaire de configurer une ligne de données pour chaque type d'élément de soin dans la configuration de l'affichage du plan de soin.

A la création d'un onglet **Schéma corporel** dans le plan de soin, il peut être utile d'avoir une ligne **Plan de prescription et plan de soins** reprenant les PM de poses et de retraits de dispositifs.



Affichage sous forme de chronomètres

Dans la zone **Filtre d'affichage**, l'utilisateur doit sélectionner l'option **Élément de soin** puis choisir la catégorie de l'élément de soin à afficher dans la liste déroulante **Éléments de soin**.

Il est possible d'afficher les éléments de soin sous forme de chronomètre dans le plan de soin. Pour cela, il faut



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 114 / 419

cocher la case **Afficher sous forme de chronomètre** dans la section **Divers**. Elle est visible uniquement pour l'affichage des éléments de soin :

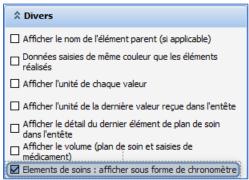


La liste élément de soin est alimentée avec les différents types d'éléments de soins (Voies d'abord, Drainages, Pansements, Autres).

Pour chaque élément de soin configuré à afficher dans le plan de soin, l'affichage est le suivant :




4.1.7.2.5 Création d'une ligne Modifications de prescriptions

Cette ligne permet de voir le nom du prescripteur et les modifications qu'il a apportées.

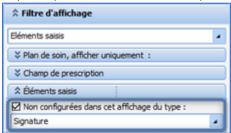

Dans filtre d'affichage, cocher la case **Non configurées dans cet affichage du type :** et choisir **Signature** dans le menu déroulant situé au-dessous.

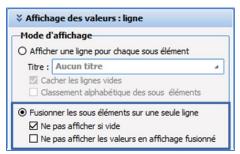

Pour une meilleure visualisation, il est conseillé de choisir les options de mode d'affichage ci-dessus.

4.1.7.2.6 Création d'une ligne Infections

Cette ligne permet de voir les infections en cours du patient si celles-ci ont été renseignées par le médecin dans l'onglet Germes.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

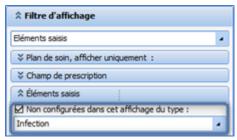


Dans filtre d'affichage, cocher la case **Non configurées dans cet affichage du type :** et choisir **Infections** dans le menu déroulant situé au-dessous.

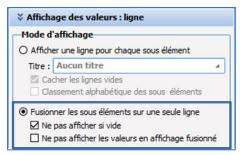

Pour une meilleure visualisation, il est conseillé de choisir les options de mode d'affichage ci-dessus.

4.1.8 Onglet Configuration

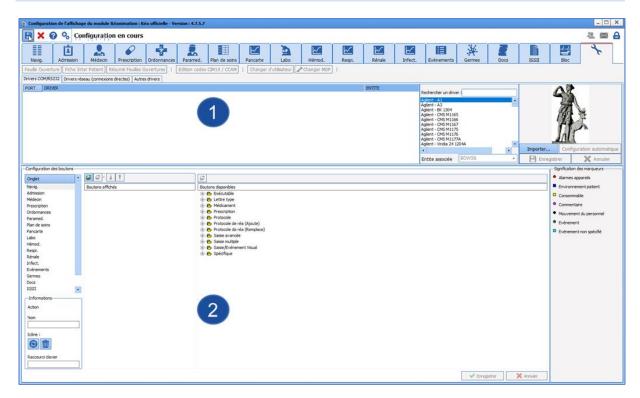

La zone permet l'attribution des drivers. La zone onglet.

permet le paramétrage des boutons onglet par



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 116 / 419

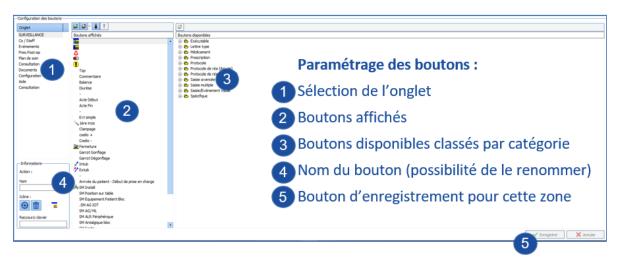

Il est nécessaire d'enregistrer une deuxième fois via le bouton d'enregistrement de la configuration de l'affichage.

© Configuration de l'affichage

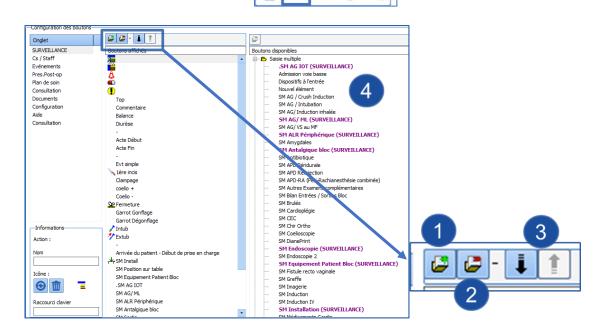

- 1. Ajouter un séparateur.
- 2. Supprimer le bouton sélectionné.
- 3. Déplacer le bouton sélectionner (vers le haut ou vers le bas).
- 4. Liste des boutons : les boutons utilisés sont en violet, et les onglets les affichant sont indiqués entre parenthèses.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.9 Onglet surveillance (DIANE ANESTHESIE) / Bloc (DIANE REA)

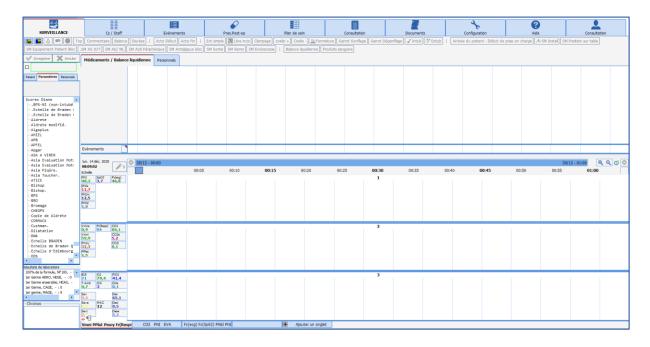

4.1.9.1 Graphe des médicaments

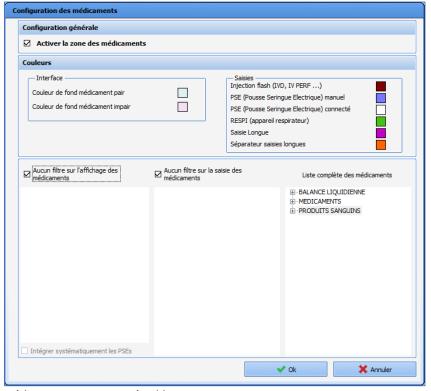

Le graphe des médicaments est paramétrable :

- Visible ou non.
- Les couleurs sont modifiables : : afin de personnaliser les couleurs des médicaments, se référer au paragraphe *Médicaments DIANE*



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 118 / 419

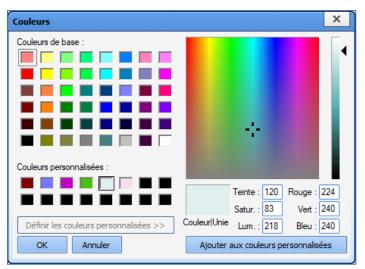

• L'affichage et la saisie des médicaments peuvent être filtrés.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.1.9.2 Zone des événements

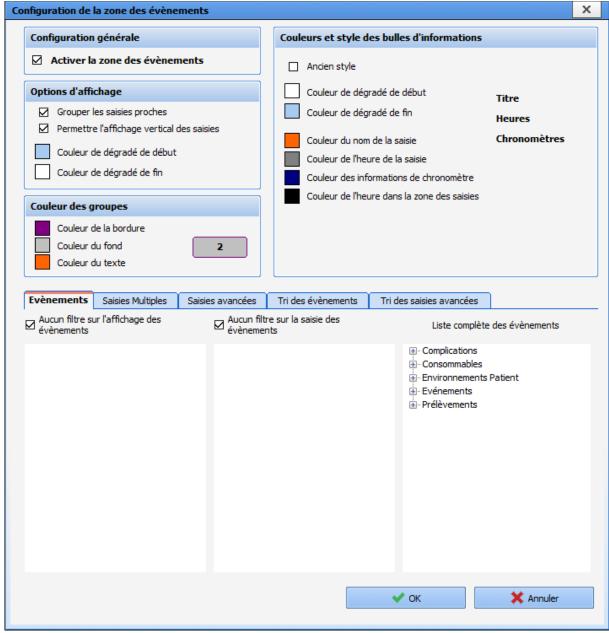

La zone des événements est également paramétrable :

- Visible ou non.
- Les couleurs sont modifiables.
- L'affichage et la saisie des événements, des saisies avancées et des saisies multiples peuvent être filtrés.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


4.1.9.3 Onglets inférieurs

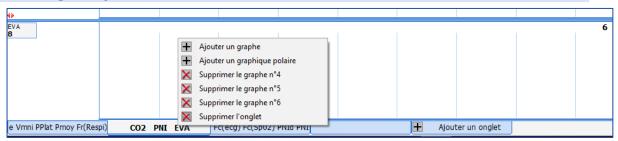

Les onglets inférieurs sont configurables :


- Pour chaque onglet, il est possible d'ajouter ou de supprimer un graphe via un clic droit sur l'onglet.
- Il est possible d'ajouter un onglet en cliquant sur le bouton Ajouter un onglet.

4.1.9.3.1 Paramétrage des paramètres à afficher

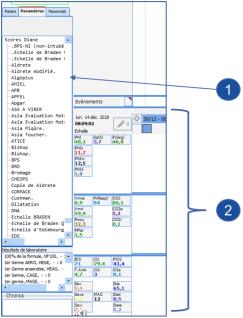

- 1. Choisir le paramètre à afficher dans la liste de gauche
- 2. Glisser-déposer le paramètre sélectionné dans l'une des trois zones de droite

Un clic droit sur un paramètre affiche sa configuration d'affichage.

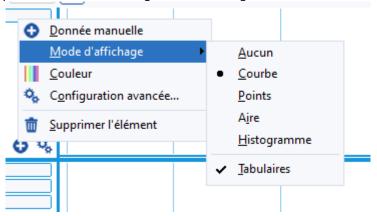



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

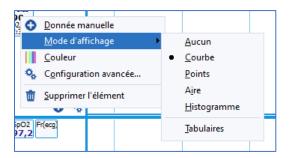

Mode d'affichage propose les affichages classiques (Courbe, Points, Aire, Histogramme ou Aucun pour l'affichage graphique et Tabulaire pour l'affichage numérique).

Configuration avancée... affiche une fenêtre de paramétrage offrant plus de possibilités.



4.1.9.3.2 Affichage des débits et des quantités sous forme de graphe

Le paramétrage peut être fait dans l'outil de configuration afin que celui-ci soit pérenne, mais il également possible d'ajouter au cours de l'intervention (dans ce cas le paramétrage n'est pas sauvegardé).

Cet affichage concerne les médicaments DIANE, les produits sanguins et les sorties de la catégorie **Balance liquidienne**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 122 / 419

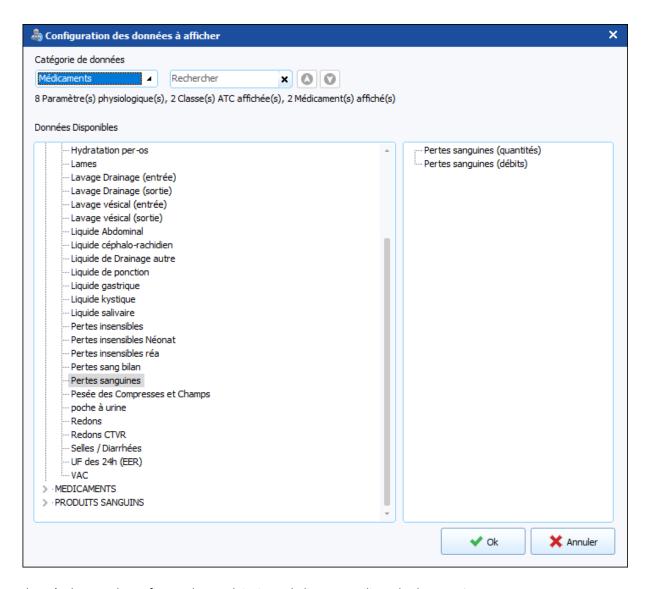

Il est également de configurer des produits issus du livret en utilisant la classe ATC.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

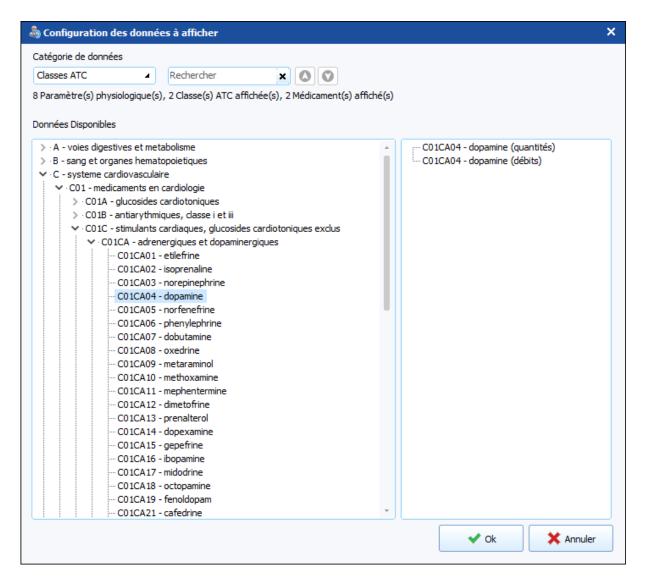

Pour ajouter un produit ou une classe ATC, il faut glisser-déposer l'élément dans la partie droite de l'affichage : cela crée automatiquement deux lignes (quantités et débit). Pour supprimer un élément de la partie droite, il faut le glisser-déposer dans la partie gauche.

4.1.10 Historique des modifications

Le clic droit sur une configuration d'affichage permet de visualiser l'historique du fichier. Cela permet de restaurer une configuration fonctionnelle à la suite d'une mauvaise manipulation lors du paramétrage.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

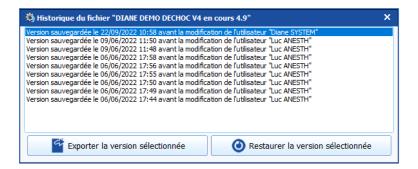

4.2 Autres Listes

Le menu déroulant de cet onglet possède trois entrées :

CONDITION : permet de configurer une liste utilisée dans l'onglet **Prescription PostOp** du module **DIANE ANESTHESIE** (au retour de bloc, le matin, matin et soir, etc.).

CONDITION REA : permet de configurer une liste utilisée uniquement dans l'outil **Prescription** du module **DIANE REA**.

DUREE: permet de configurer une liste utilisée dans l'onglet **Prescription PostOp** du module **DIANE ANESTHESIE** (jusqu'à demain matin, pdt 3 semaines, etc.).

En utilisation, la liste **CONDITION REA** est accessible à la frappe ou au double-clic dans le champ **Condition** de la fenêtre de prescription.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 125 / 419

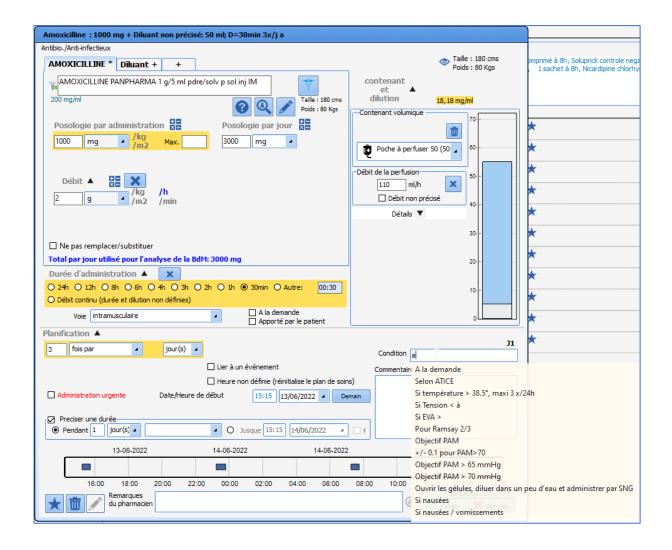

4.3 **Boutons**

ATTENTION: Cet onglet de configuration ne permet pas de créer des boutons (sauf exceptions) il permet

juste de les renommer ou de les supprimer. La création se fait au moyen du bouton l'élément à un bouton configurable) dans les onglets de configurations des éléments compatibles.

	Description	Onglet de création
Exécutable	Boutons de type "Lien Contextuel". Ce sont les seuls boutons qu'il est possible de créer dans l'onglet Boutons.	Boutons
Lettre Types	Boutons permettant d'ouvrir une lettre type (ordonnance, compte-rendu,).	Lettres Type
Médicament	Boutons permettant de documenter un médicament - ou la listes des médicaments d'une catégorie - dans le module DIANE Médicaments Anesthésie (PerOp et PostOp).	
Prescription	Boutons permettant de documenter des prescriptions pour l'onglet Prescription PostOp du module DIANE Anesthésie (PerOp et PostOp).	Protocoles (PostOp)
Protocole	Boutons permettant de documenter des protocoles pour	Protocoles



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2

UDI: (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 126 / 419

	l'onglet Prescription PostOp du module DIANE Anesthésie (PerOp et PostOp).	(PostOp)
Protocole de réa (Ajoute)	Boutons permettant de documenter la prescription Charger une prescription (Ajout) dans l'onglet Prescription .	Prescription (+ Favoris)
Protocole de réa (Remplace)	Boutons permettant de documenter la prescription Charger une prescription (Remplace) dans l'onglet Prescription .	Prescription (+ Favoris)
Saisies avancées	Boutons permettant d'ouvrir une saisie avancée (ou un score).	Saisies Avancées
Saisies multiples	Boutons permettant d'ouvrir une saisie multiple.	Saisies Multiples
Saisie / Evénement Visual	Boutons permettant de documenter des événements, des complications, des consommables ou des environnements Patients.	Evénements
Spécifique	Boutons permettant des actions diverses Il n'est pas possible de modifier cette liste.	

4.4 Chronomètres

Cet onglet permet de configurer les chronomètres utilisés dans les modules **DIANE ANESTHESIE**, **DIANE OBSTETRIQUE** et **DIANE REA**.

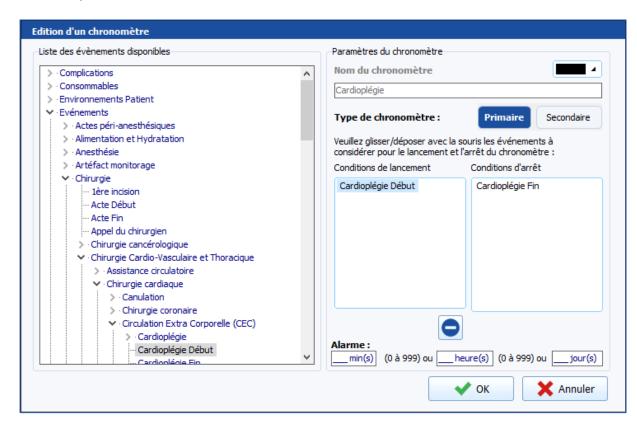

Dans la zone **Liste des événements disponibles**, se trouvent tous les éléments disponibles et pouvant être inclus dans un chronomètre. Ces événements sont utilisables comme condition de lancement ou d'arrêt au moyen d'un glisser-déposer. Il faut au minimum une condition de lancement et une condition d'arrêt pour créer un chronomètre. Un chronomètre peut avoir plusieurs conditions de lancement et/ou d'arrêt.

Avant de créer un chronomètre, il est nécessaire de s'assurer de l'existence des évènements qui seront utilisés comme conditions d'arrêt et de lancement.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Une couleur peut être associée au chronomètre pour l'affichage dans le composant **Chronomètres** des bandeaux latéraux. Pour configurer l'affichage dans ce composant, il est possible de déterminer le type de chronomètre (primaire ou secondaire).

Une alarme peut être associée au chronomètre. La donnée prise en compte est la durée en minutes. Les durées en heures et en jours sont utiles pour saisir une durée sans devoir la convertir en minutes.

4.5 Contenants volumiques


Ce menu permet de configurer les contenants volumiques de type seringue et poche.

Seringue : permet de configurer les contenants volumiques de la prescription des médicaments dans l'onglet **Prescription** du module **DIANE REA**.

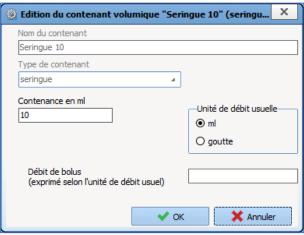

Il faut saisir la contenance de la seringue, l'unité de débit usuelle et éventuellement de débit de bolus (l'unité du débit de bolus est l'unité de débit usuelle, renseignée juste au-dessus).

Poche : La page correspondante permet de configurer les contenants volumiques de la prescription des médicaments dans l'onglet **Prescription** du module **DIANE REA**.

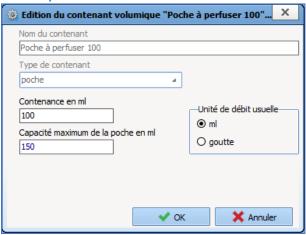

Il faut saisir la contenance de la poche, son volume maximal et l'unité de débit usuelle.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.6 Correspondants

Cet onglet permet de configurer les correspondants utilisés dans DIANE.

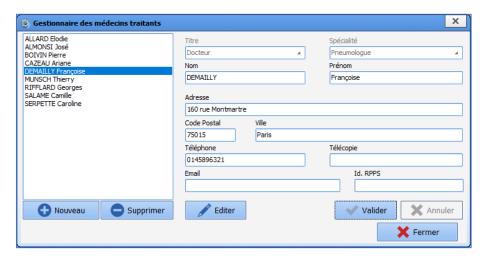


Cet onglet de configuration ne s'appuie pas sur les entités de l'établissement : la liste des correspondants est unique et générale pour tout l'établissement.

4.7 Drivers

La liste complète des appareils biomédicaux n'est pas modifiable, elle se génère automatiquement par la présence des fichiers **AppXYZ.exe** dans le répertoire d'installation de **DIANE**.



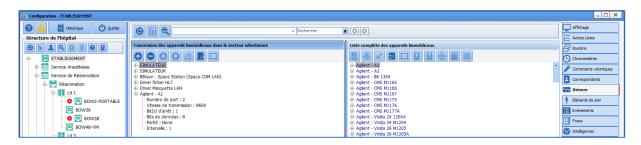

Au niveau de la **structure de l'hôpital**, la configuration (roue crantée) se crée automatiquement quand la liste des appareils basculés est modifiée.

Le paramétrage des drivers ne doit pas être modifié. Le paramétrage est garant du bon fonctionnement du driver. Il peut être demandé aux référents d'accéder à ces fonctionnalités lors de dysfonctionnement. Cela se fait en étant accompagné par le service technique de BOWMEDICAL.

Editer une configuration de drivers dans la liste des appareils basculés permet, pour le poste considéré, de modifier les paramétrages.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 129 / 419

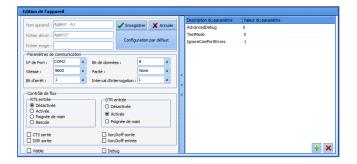

4.8 Eléments de soins



- 1. Catégories des dispositifs.
 - Voies d'abord
 - Drainages
 - Pansements
 - Autres
 - Ventilation
- 2. Liste complète des dispositifs pour la catégorie choisie.
- 3. Liste des dispositifs basculés pour le secteur choisi (roue crantée).
- 4. Création d'un nouveau dispositif (clic sur le bouton).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 130 / 419

4.8.1 Fenêtre d'édition d'un élément de soins

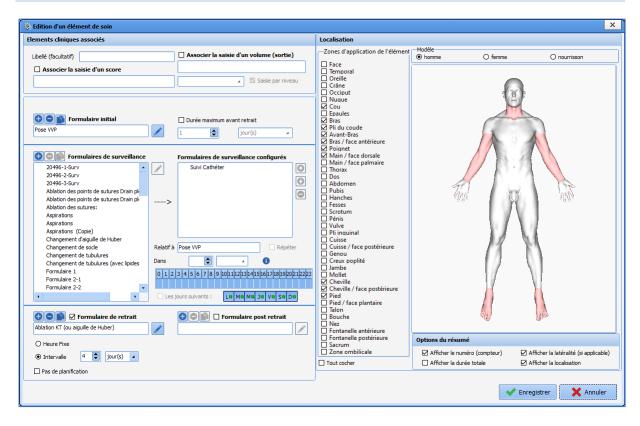

La zone Localisation permet de préciser les localisations possibles du dispositif.

L'option **Afficher le numéro (compteur)** permet de différencier les dispositifs identiques (*exemple :* VVP n°1, VVP n°2).

L'option **Afficher la durée totale** est un chronomètre qui permet de savoir depuis combien de temps un dispositif est en place.

L'option Afficher la latéralité (si applicable) permet de différencier gauche/droite.

L'option Afficher la localisation permet d'afficher la zone d'application du dispositif.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

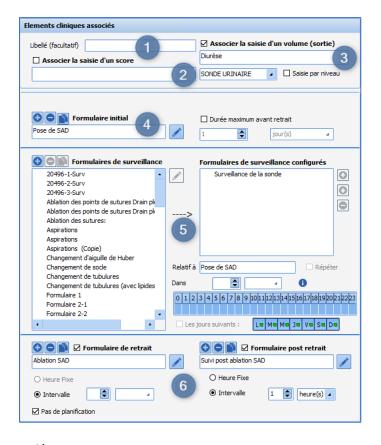

Eléments cliniques associés :

- 1. Afficher un libellé pour remplacer le nom de l'élément de soins
- 2. Associer la saisie d'un score au formulaire (ex : sonde intubation associé au Cormack).
- 3. Associer la saisie d'un volume au formulaire = sortie de la balance liquidienne. Il est possible de choisir l'élément de la balance liquidienne correspondant dans la liste déroulante se trouvant en dessous. La case à cocher Saisie par niveau permet de saisir ce volume par niveau.

Protocole de surveillance :

- 4. Zone du formulaire initial (pose) : il est possible de définir une durée maximale de pose (ex : SV => durée max 30 J).
- 5. Zone des formulaires de suivi, à gauche les formulaires disponibles, à droite les formulaires utilisés pour le dispositif. Il est possible de définir une planification par défaut. Il est possible de :
 - Planifier un formulaire de surveillance par rapport au formulaire initial.
 - Planifier un formulaire de surveillance par rapport à un autre formulaire de surveillance (dans l'exemple ci-dessous, la planification du formulaire **Pansements des drains** est relative au formulaire **Suivi des drains**). Dans ce cas, la planification dépend de la réalisation ou non du formulaire « père » (ici, le formulaire **Pansements des drains** ne sera planifié que si le formulaire **Suivi des drains** est réalisé).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

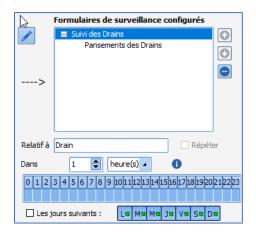


Dans le cas d'une planification non répétée, il est possible de planifier le formulaire :

- avec un intervalle défini en jours, heures ou minutes par rapport au formulaire de référence :



- à une heure fixe :

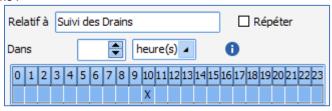


Il est également possible de répéter la planification :

- avec un intervalle défini en jours, heures ou minutes par rapport au formulaire de référence :



- à des heures fixes :

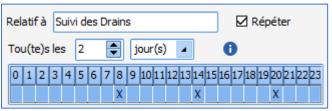

Il est également possible de programmer la planification à certains jours. Dans ce cas, il n'est pas possible de planifier avec un intervalle en jours : seuls les intervalles en heures et en minutes sont possibles.



6. Zone des formulaires de retrait et post retrait. Il est possible de définir une planification par défaut.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 133 / 419



outon 🖭 permet de dupliquer un formulaire afin de faciliter la création de formulaires similaires.

4.8.2 Fenêtre d'édition d'un formulaire de soins

Les quatre types de formulaires disponibles pour la planification du suivi des éléments de soins (initial, surveillance, retrait et post-retrait) se configurent à travers la fenêtre suivante accessible au clic sur le bouton

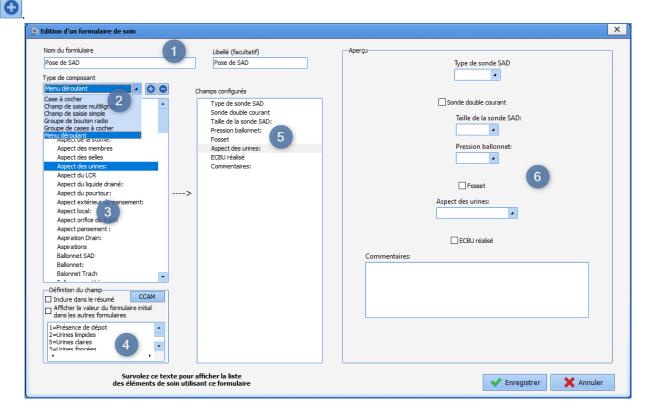

- 1. Nom du formulaire (possibilité d'utiliser un libellé plus court pour alléger l'affichage).
- 2. Type de composants.
- 3. Liste des composants disponibles pour le type choisi.
- Création d'un composant du type choisi.
- 4. Définition du champ: zone des valeurs possibles pour les groupes de cases à cocher, de boutons radio ou les menus déroulant. Il est possible également de choisir le type associé à un champ de saisie simple.

La case à cocher **Inclure dans le résumé** permet d'afficher les informations saisies dans le champ au niveau du résumé du dispositif.

La case à cocher Afficher la valeur du formulaire initial dans les autres formulaires permet de visualiser, dans les formulaires de surveillance, les informations saisies dans le champ lors de la saisie du formulaire initial.

Pour les éléments de types case à cocher, groupe de boutons radio, groupe de cases à cocher ainsi que menu déroulant, il est possible d'associer un code CCAM à une valeur renseignée dans formulaire :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 134 / 419



- 5. Champs configurés : composants du formulaires, l'ordre se change par le glisser-déposer.
- Aperçu du formulaire (les composants sont centrés, les uns au-dessous des autres, seul l'ordre est modifiable).



4 Un élément de soin utilisé en production ne peut être modifié, il faut le copier pour le retravailler.

4.9 **Evénements**

Les événements sont des items organisés sous forme de listes destinés à permettre aux utilisateurs de documenter les dossiers patients. Ils sont disponibles directement au clic dans la zone de saisie des modules DIANE ANESTHESIE (PerOp et PostOp) et DIANE OBSTETRIQUE ainsi que dans les trois types de pancarte dans le module **DIANE REA**.

L'affichage en italique indique qu'un identifiant externe a été configuré pour l'événement par l'intermédiaire du bouton 🥰 .

Les intitulés de cette liste ne peuvent pas et ne doivent pas être modifiés



Il est possible d'agir et de configurer les éléments dans les catégories suivantes :

- Complications
- Consommables
- **Environnements Patient**
- Evénements
- Prélèvements



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 135 / 419

Les autres catégories ne sont pas modifiables dans cet onglet.


Balance Liquidienne, Médicaments et Produits Sanguins sont modifiables dans l'onglet Médicaments.


Saisies avancées et Saisies Multiples sont modifiables dans les onglets du même nom.

Pour rappel, l'item Commentaires permet à l'utilisateur d'ouvrir une fenêtre de saisie libre.

Les fenêtres de données manuelles et de Paramètres de ventilation sont configurables dans l'onglet Paramétrage.

Lors de la validation du nom, il est proposé d'associer une icône mais aussi de gérer certains comportements.

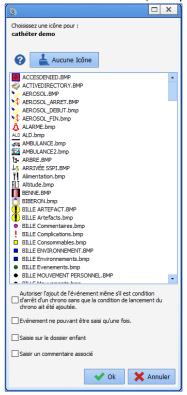

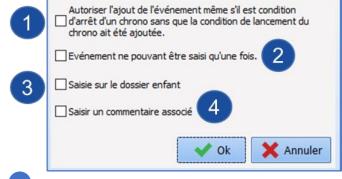

Pertinent pour certains éléments. Il peut parfois être nécessaire de pouvoir extuber un patient qui est arrivé intubé, ou le dégonflage d'un garrot qui aurait été posé en préhospitalier.

- Permet d'éviter la double saisie par erreur.
- Utilisé pour le module d'obstétrique.
- Ouvre automatiquement une fenêtre de commentaire libre, commentaire qui viendra s'associer à l'élément saisi.

4.10 Fosos : Feuille d'ouverture de salle et Fiche inter patient

L'onglet de configuration Fosos permet de configurer les feuilles d'ouverture et les fiches inter-patients.

4.10.1 Configuration des feuilles d'ouverture de salle et des fiches inter-patients

Ces feuilles sont organisées en zones (checklists) ce qui permet de segmenter les feuilles, d'avoir des titres, des paragraphes et pouvoir réutiliser ce qu'il y a de commun entre plusieurs feuilles d'ouverture ou plusieurs fiches inter-patients.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

La feuille d'ouverture affichée se compose des zones basculées. Il est possible de définir l'ordre de ces zones par un glisser-déposer ou avec les boutons .

Attention aux titres des checklists : ils sont repris dans la mise en page des Fosos.

L'édition de checklists destinées aux feuilles d'ouverture et aux fiches inter-patients se rapproche de l'édition des saisies avancées. Toutefois, les composants disponibles sont moins nombreux et ne peuvent pas être associés à des **ActiveX-Id de données**. La présentation est également différente de l'édition de saisies avancées. Le fonctionnement de ces composants est décrit en *annexe*.

La	Ajoute du texte dans la Foso.
Ajouter un titre	Rappel : le nom de la checklist est affiché dans la Foso.
Ajouter une zone de saisie cochée	Ajoute une case à cocher.
Ajouter une zone de saisie simple	Ajoute un champ de saisie simple. Il est possible de configurer le type de donnée (Texte, Date/Heure, Entier, Décimal,).
Ajouter une zone de commentaire	Ajoute un champ de saisie multilignes.
Ajouter un menu déroulant	Ajoute un menu déroulant : ce composant permet de choisir une option parmi une liste.
Ajouter une zone de saisie optionnelle	Ajoute un groupe de boutons radio : tout comme le menu déroulant, ce composant permet de choisir une option parmi une liste.
Ajouter une bordure	Permet de regrouper d'autres composants dans un cadre pour améliorer la lisibilité.
Ajouter un séparateur	Ce composant ne doit pas être utilisé, il est présent pour des questions de rétrocompatibilité.

4.10.2 Paramétrage des feuilles d'ouverture de salle et des fiches inter patient

Le paramétrage se fait dans l'onglet **Paramétrages**, **Feuille d'ouverture et fiche interpatient** et **Actions importantes** pour chacune des applications **DIANE REA**, **DIANE OBSTETRIQUE** et **DIANE ANESTHESIE** (**Visual**).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

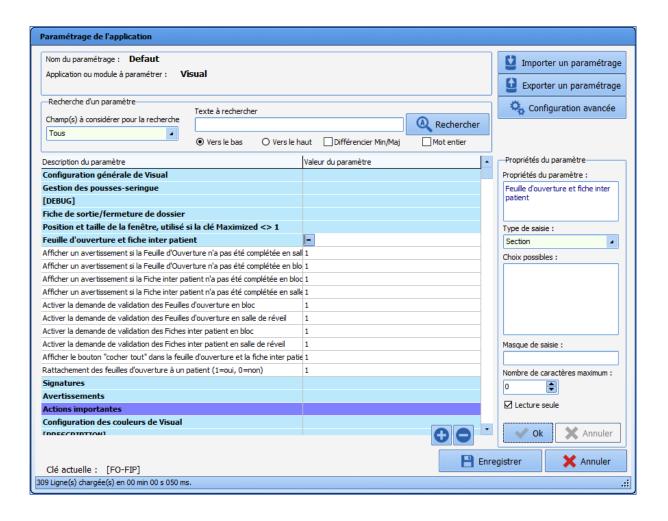



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

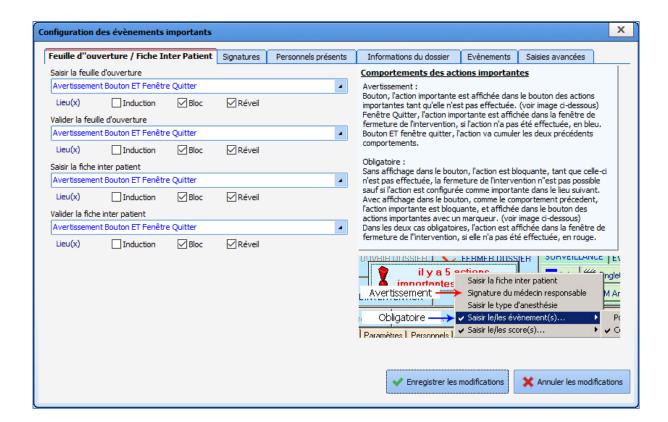

4.11 Laboratoire

Cet onglet permet d'associer les codes de résultats de laboratoire avec le type d'analyse. L'association des éléments transmis par le laboratoire en donnée brute aux éléments de **DIANE** permet d'utiliser ces données dans différentes parties de **DIANE** par exemple : l'**Œil** dans la prescription

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

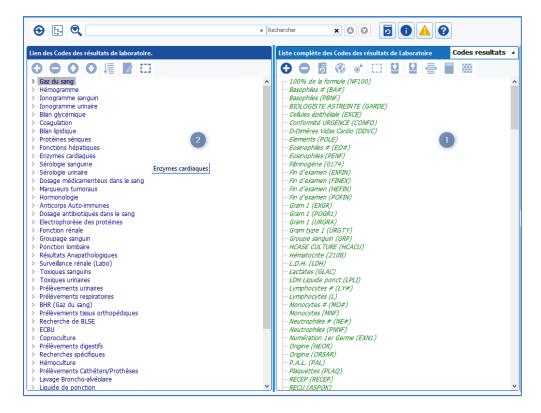

1. Liste complète des Codes des résultats de Laboratoire : colonne intégrant via un flux d'interface les données brutes transmises par le laboratoire. Chaque ligne correspondant à un code d'analyse exemple : bilirubine totale (BILI).

2. Lien des codes des résultats de Laboratoire : Colonne listant les catégories Diane des résultats.

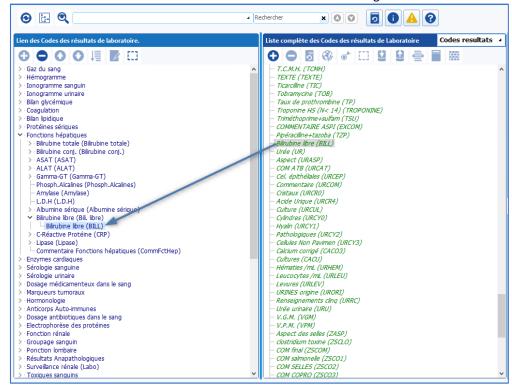

Pour effectuer la liaison, les codes résultats doivent être associés par un glisser-déposer à la catégorie



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 140 / 419

Diane correspondante. Exemple : Bilirubine libre (BILI) associée à l'élément Bilirubine libre (Bil. Libre) dans la catégorie Fonction Hépatique.

Lorsqu'un élément est de couleur verte cela signifie qui est lié à un élément Diane. Le clic sur cet élément permet de le retrouver facilement dans la colonne de gauche. Lorsqu'un élément est bleu cela indique qu'il n'est pas lié.

Les codes Examens sont de grandes catégories qui permettent de lier toute la catégorie en une fois. Exemple : Gaz du sang.

Cette liaison inclut l'intégralité des éléments qui vont être transmis par le laboratoire relatif au gaz du sang, y compris les commentaires.

Lorsque le laboratoire est en mesure de transmettre les codes examens, il est possible de les associer directement avec les catégories Diane. Ainsi, l'intégralité des codes résultats liés au code examen seront automatiquement paramétrés.

Note : Le mapping n'est nécessaire que si l'interface Laboratoire est disponible dans le centre.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.12 Lettres type

4.12.1 Emplacement des boutons d'édition des lettres-types dans les Modules

La localisation des différentes catégories de lettres-types permet de retrouver rapidement le(s) document(s) à créer ou modifier. Le menu déroulant est composé de catégories de lettres, liés à un module ou une fonctionnalité particulière. Les emplacements sont présentés à titre indicatif compte tenu de la possibilité de modification de l'affichage d'un centre.

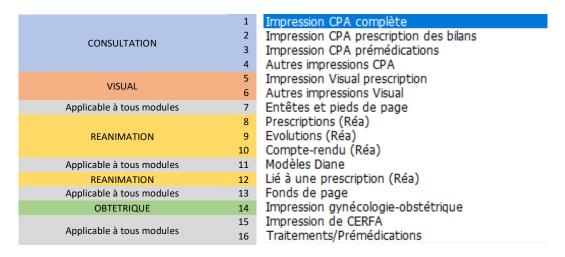

4.12.1.1 Impression du module de consultation

4.12.1.1.1 Impression de la CPA complète (Cat. 1):

Emplacement: Module CONSULTATION - Bouton d'impression principale.



4.12.1.1.2 Impressions CPA prescriptions des bilans

Emplacement : Module CONSULTATION - Onglet Paraclinique



4.12.1.1.3 Impression CPA Prémédications et autres impressions CPA

Emplacement: Module CONSULTATION - Onglet Conclusion/Visite



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 142 / 419

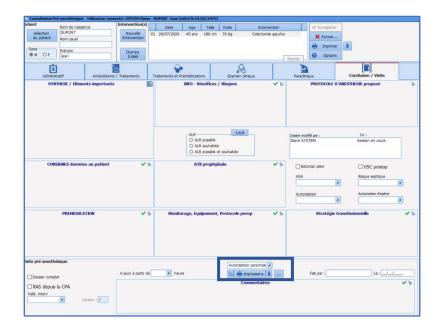


4.12.1.2 Impression dans le module VISUAL

Le module VISUAL comprend les phases :

- D'induction
- Per opératoire
- Post-opératoire

4.12.1.2.1 Impression Visual prescriptions

Emplacement : Module PER-OPERATOIRE - Onglet Prescriptions Post-Op.

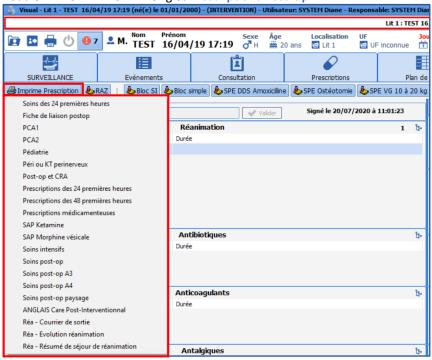

4.12.1.2.2 Autres impressions VISUAL

Emplacement: Module PER OPERATOIRE - Onglet CONFIGURATION



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 143 / 419

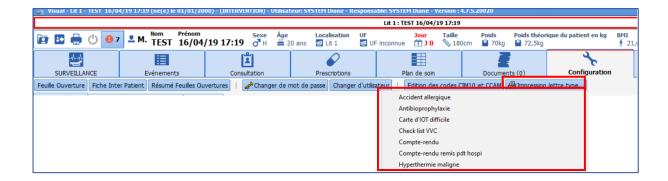

4.12.1.3 Impression dans DIANE Réanimation


4.12.1.3.1 Paramétrage des modèles DIANE

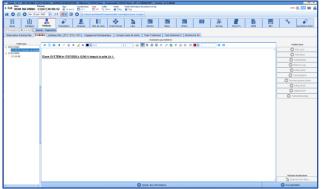

A l'utilisation, les modèles **DIANE** sont utilisés pour préremplir certains onglets avec une mise en forme et un texte automatique. (Ici onglet **Médecin**, sous onglet **Evolution**, dans le module de réanimation). Leurs créations ou modifications s'effectuent comme une lettre type au format de l'éditeur intégré **DIANE** (Cf. Les lettres types au format éditeur intégré **DIANE**)

4.12.1.3.2 Impressions du module de réanimation

Emplacement: Module Réanimation – Onglet Navigation

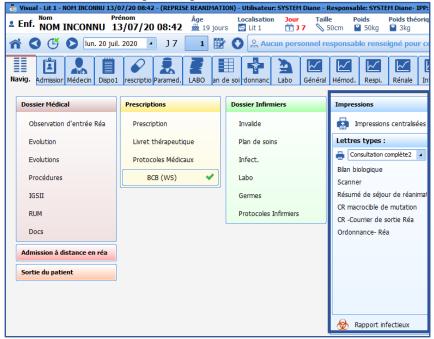



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 144 / 419

4.12.1.4 Impression du composant Traitements/Prémédications

La lettre-type **Traitements/Prémédications** s'imprime à partir du bouton **Editer...** dans le composant **Traitements/Prémédications.**

4.12.2 Création d'une lettre

Le paramétrage de lettre types est accessible depuis la configuration application, onglet Lettre type, puis en sélectionnant la catégorie souhaitée dans le menu déroulant.

Cliquer sur le bouton de création de lettre-type :

Dans un premier temps, il faut choisir le format utilisé pour cette lettre.

Dans ce document, les formats suivants seront présentés :


- WORD97 ou supérieur
- Éditeur de texte avancé DIANE

L'éditeur de texte **DIANE** est un éditeur de texte simplifié, rapide et simple à paramétrer.

Une fois le format sélectionné, cliquer sur d'édition simplifiée.





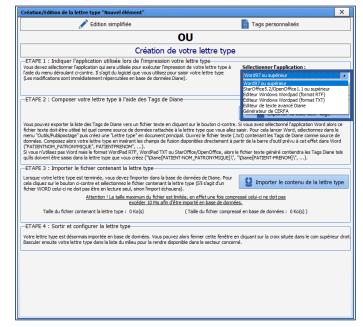

4.12.2.1 Trouver les tags

Les tags sont liés aux ActiveX et Id de données des composants présents dans tous les modules de DIANE.

Cette information est accessible en cliquant sur le composant à explorer tout en maintenant appuyées les touches **CTRL et Maj** (à gauche du clavier). Le composant doit avoir une bordure verte avant le clic pour que cela fonctionne. Cette fenêtre est également accessible au clic droit lors du paramétrage de l'affichage d'un module.

La fenêtre qui s'ouvre est la même que celle utilisée en paramétrage (affichage) mais elle n'est pas modifiable (lecture seule).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 145 / 419

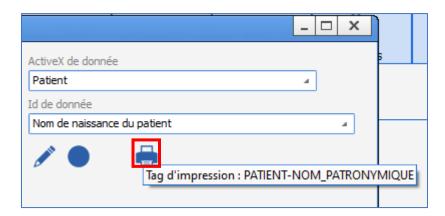

Au survol du pictogramme d'imprimante, le tag correspondant au composant dont la valeur est à renseigner dans la lettre-type apparaît.

4.12.2.2 Créer des tags personnalisés

Un tag est un champ de publipostage. C'est un emplacement spécial dans le document capable de recevoir la donnée particulière du dossier patient en cours. Il y a deux catégories de tags. Les **tags dits fixes** sont liés aux **ActiveX – ID de données** des composants de **DIANE**.

Il existe également les **tags personnalisés**, ce sont des tags générés par la plupart des outils tels que les saisies avancées, les paramètres physiologiques, les résultats de laboratoires, les évènements, les chronomètres, les médicaments et la balance liquidienne. Ces catégories de **tags personnalisés** seront présentées ci-après.

Dans la configuration application, onglet LETTRE TYPE, choisir la catégorie dans le menu déroulant, sélectionner la lettre souhaitée dans la colonne de droite puis l'éditer.





Pour créer ou modifier des " tags personnalisés " (Champs de Fusion) cliquer sur le bouton.



Les tags personnalisés ne dépendent pas de l'outil d'édition utilisé. En revanche, ils sont liés exclusivement à la lettre type sélectionnée. Si une **lettre-type** est dupliquée, les **tags personnalisés** sont dupliqués également.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 146 / 419

4.12.2.2.1 Les tags personnalisés de Saisies Avancées

Lorsque l'outil de création de tags personnalisés s'ouvre, l'onglet des tags de saisies avancées s'affiche.

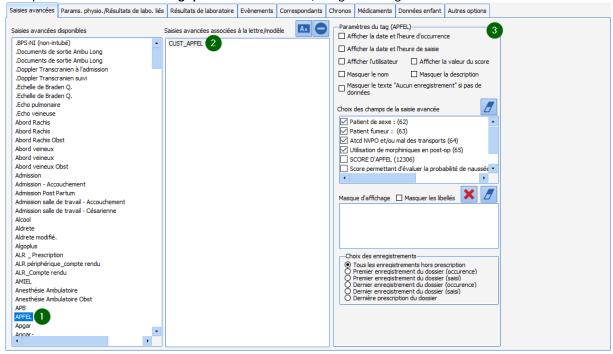

Une page de gestion de tag personnalisé fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock de toutes les saisies avancées.
- La colonne du centre contient les tags personnalisés précédemment créés. Glisser-déposer la saisie avancée souhaitée dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un tag personnalisé est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un tag personnalisé à tout moment sans avoir à modifier la lettre-type.

Les options de paramétrage du tag personnalisé de saisie avancée :

- Afficher la date et l'heure d'occurrence : date et heure visible dans le dossier patient.
- Afficher la date et l'heure de saisie : date et heure réelle de saisie.
- Afficher l'utilisateur : prénom et nom.
- Afficher la valeur du score : valeur du calcul, présent que pour les saisies avancées de type score.
- Masquer le nom : nom de la saisie avancée ou du score.
- Masquer la description : description de la saisie avancée ou du score.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information.
- Choisir le choix des enregistrements dans le dossier : entre six possibilités de tous les enregistrements hors prescription à dernière prescription du dossier.
- Choix des champs de la saisie avancée : Tous les composants sont listés de manière à composer le tag avec les informations importantes à imprimer dans la lettre-type.

Il est possible de décocher toutes les cases grâce au bouton





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 147 / 419

Masque d'affichage :

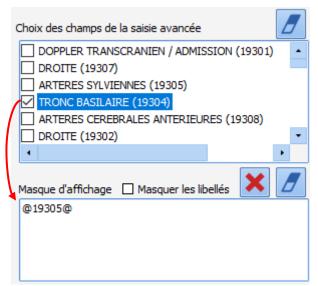

Le masque d'affichage permet de structurer le rendu des champs de la saisie avancée dans la lettre-type.

Dans l'image ci-contre, l'information « TRONC BASILAIRE » de la saisie avancée apparaît de la manière suivante :

TRONC BASILAIRE: Valeur

NOTE : Il n'est possible de glisser-déposer que les informations préalablement cochées.

Si la case Masquer les libellés est cochée, seule la valeur apparaît. Il est également possible d'ajouter du texte et de la mise en page qui sera reprise dans la lettre-type

efface la zone de masque d'affichage.

Le clic sur le bouton efface ce qui a été ajouté depuis l'ouverture de l'outil.

NOTE : lorsqu'une saisie avancée ou un score est modifié par copier-coller, il faut penser à refaire les tags à partir de la nouvelle saisie avancée, puis remplacer ce tag dans la lettre-type.

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

4.12.2.2.2 Les tags personnalisés de paramètres physio et résultats de labo

A l'aide du deuxième onglet, il est possible d'ajouter des tags personnalisés de paramètres physiologiques et de résultats de laboratoire.

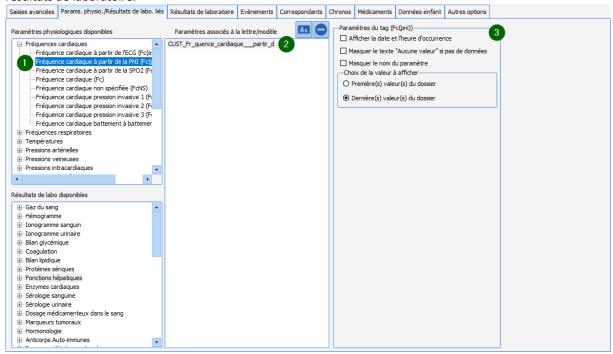

Cliquer sur le deuxième onglet de l'outil. Une page de gestion de **tag personnalisé** fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock de paramètres physiologiques ainsi que les résultats de labo disponibles.
- La colonne du centre contient les **Tags personnalisés** précédemment créés. Glisser-déposer le paramètre physiologique à voir dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un tag personnalisé est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un tag personnalisé à tout moment sans avoir à modifier la lettre-type.

Les options de paramétrage du tag personnalisé de paramètres physiologiques :

- Afficher la date et l'heure d'occurrence : date et heure visible dans le dossier patient.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information.
- Masquer le nom du paramètre.
- Première ou dernière valeur du dossier.

Les options de paramétrage du tag personnalisé de résultats de labo :

- Afficher la date et l'heure d'occurrence : date et heure visible dans le dossier patient.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information.
- Masquer le nom du paramètre.
- Première ou dernière valeur du dossier. Si un résultat de labo est sélectionné dans la colonne du milieu,
 la colonne de droite change et se présente comme ci-contre.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

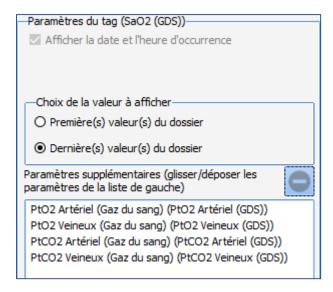


Pour supprimer l'un des paramètres supplémentaires, cliquer dessus puis sur le bouton



4.12.2.2.3 Les tags personnalisés de résultats de laboratoire

A l'aide du troisième onglet, il est possible d'ajouter des tags personnalisés de résultats de laboratoire.

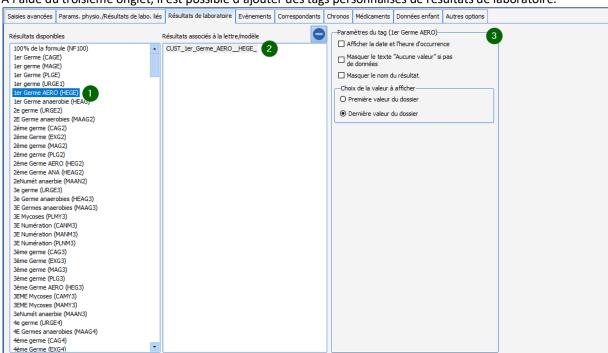

Cliquer sur le troisième onglet de l'outil : une page de gestion de **tag personnalisé** fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock de tous les résultats disponibles.
- La colonne du centre contient les **tags personnalisés** précédemment créés. Glisser-déposer le **résultat biologique** à voir dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un tag personnalisé est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un tag personnalisé à tout moment sans avoir à modifier la lettre-type.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 150 / 419

Les options de paramétrage du tag personnalisé d'un résultat biologique :

- Afficher la date et l'heure d'occurrence : date et heure visible dans le dossier patient.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'une information est une information.
- Masquer le nom du résultat.
- Première ou dernière valeur du dossier.

4.12.2.2.4 Les tags personnalisés d'évènements

A l'aide du quatrième onglet, il est possible d'ajouter des tags personnalisés d'évènements.

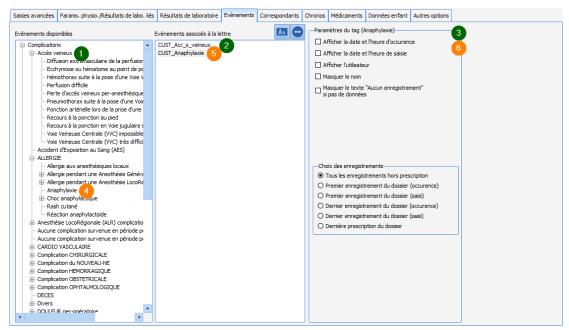

Cliquer sur le quatrième onglet de l'outil : une page de gestion de **tag personnalisé** fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock de tous les événements.
- La colonne du centre contient les **tags personnalisés** précédemment créés. Glisser-déposer l'**événement** à voir dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un **tag personnalisé** est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un **tag personnalisé** à tout moment sans avoir à modifier la **lettre-type**.

Les options de paramétrage du tag personnalisé événement :

- Afficher la date et l'heure d'occurrence : date et heure visible dans le dossier patient.
- Afficher la date et l'heure de saisie : date et heure réelle de saisie.
- Afficher l'utilisateur : prénom et nom.
- Masquer le nom : permet de réécrire le nom différemment dans la lettre-type.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information importante.
- Choix des enregistrements.

4.12.2.2.5 Les tags personnalisés de chronomètres

A l'aide du sixième onglet, il est possible d'ajouter des tags personnalisés de chronomètres.



BOW MEDICAL SAS 43. Avenue d'Italie 80

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 151 / 419

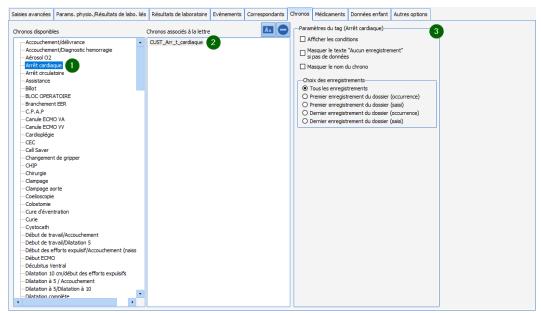

Cliquer sur le sixième onglet de l'outil : une page de gestion de **tag personnalisé** fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock de tous les **chronomètres**.
- La colonne du centre contient les **tags personnalisés** précédemment créés. Glisser-déposer le **chronomètre** à voir dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un tag personnalisé est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un tag personnalisé à tout moment sans avoir à modifier la lettre-type.

Les options de paramétrage du tag personnalisé chronomètre :

- Afficher les conditions.
- Masquer le texte « Aucune valeur » si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information importante.
- Masquer le nom du chrono : permet de renommer le nom du chronomètre dans la lettre-type.
- Choix des enregistrements.

4.12.2.2.6 Les tags personnalisés de médicaments

A l'aide du septième onglet, il est possible d'ajouter des tags personnalisés de médicaments.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 152 / 419

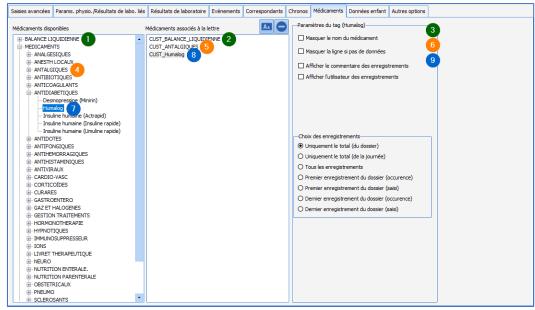

Cliquer sur le septième onglet de l'outil : une page de gestion de **tag personnalisé** fonctionne en trois colonnes avec une progression de gauche à droite.

- La colonne de gauche contient le stock des balances liquidiennes, des médicaments du bloc et des produits sanguins.
- La colonne du centre contient les tags personnalisés précédemment créés. Glisser-déposer le produit à voir dans le document.
- La colonne de droite apparaît lorsqu'un tag personnalisé est sélectionné dans la colonne du milieu. Cette colonne permet de choisir les options pertinentes. Il est possible de modifier les options d'un tag personnalisé à tout moment sans avoir à modifier la lettre-type.

Les options de paramétrage du tag personnalisé médicament :

- Masquer le nom du médicament : permet de renommer le nom du médicament dans la lettre-type.
- Masquer la ligne si pas de données : lorsque l'absence d'informations est une information importante.
- Afficher le commentaire des enregistrements : les commentaires liés à des occurrences.
- Choix des enregistrements.

NOTE: il est possible d'avoir un tag pour l'ensemble des médicaments, un autre pour une catégorie de médicament. Cette possibilité est très pratique pour ne pas avoir à modifier la lettre-type à chaque ajout de médicament dans une catégorie.

4.12.2.3 Les lettres-types au format éditeur intégré DIANE

Les lettres types dans **DIANE** sont éditables sous deux formats possibles. Dans ce chapitre, le format éditeur intégré **DIANE** sera présenté. Puis, dans le chapitre suivant, les lettres types sous format **Word** seront présentées.

4.12.2.3.1 Prérequis, avantages et inconvénients

L'éditeur intégré DIANE est un éditeur interne, qui possède des avantages et inconvénients en comparaison au format **Word**.

O Prérequis :

Version de DIANE supérieure à 4.6.24.8

Avantages :

- Cet éditeur intégré offre une indépendance envers les applications extérieures telles que **Word** ou **LibreOffice** (**OpenOffice**). Cela facilite considérablement le déploiement et assure une qualité de



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 153 / 419

fonctionnement et d'impression fidèle à ce que souhaite le référent en charge de la rédaction de ces documents.

- La réactivité est bien meilleure qu'avec **Word** ou **LibreOffice (OpenOffice)**. Parce qu'il n'y a pas d'application extérieure à lancer.
- Les fonctionnalités de mise en page sont basiques, ce qui permet une stabilité accrue dans le paramétrage de lettres types.
- La présence d'un moteur de recherche de tags, facilite la conception de lettre type.
 - Inconvénients
- Il n'est pas possible de créer un document formulaire protégé en lecture seule comme dans Word.
- Les options de mises en pages sont moins nombreuses que dans Word et LibreOffice (OpenOffice).

4.12.2.3.2 Créer une lettre-type

Pour créer une lettre type, sélectionner dans la configuration application, l'onglet **LETTRE TYPES**, puis choisir dans le menu déroulant, la catégorie de document souhaité, puis se reporter à la section 3 pour créer une lettre type. Une fois ces étapes effectuées, la fenêtre de Création/Edition de la lettre type s'ouvre, et permet de choisir le format désiré via le menu déroulant.



Pour créer une **Lettre-Type Intégrée** , sélectionner l'application **Éditeur de texte avancé Diane**. Puis, cliquer sur le bouton d'édition simplifiée.



L'éditeur intégré **DIANE** ouvre un éditeur de texte avec un document vierge.

NOTE : une fois créé, il n'est pas possible de changer le type d'un document.

4.12.2.3.3 Modifier une lettre-type

Pour modifier une lettre type, sélectionner dans la configuration application, l'onglet LETTRE TYPES, puis choisir dans le menu déroulant, la catégorie de document souhaité, puis sélectionner dans la colonne de droite la lettre type souhaitée, et l'éditer.



Une fois ces étapes effectuées, la fenêtre de Création/Edition de la lettre type s'ouvre, et permet de choisir le format désiré via le menu déroulant.



43, Avenue d'Ita

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

BOW MEDICAL SAS


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

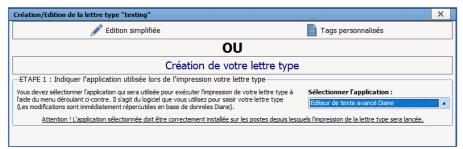


Pour modifier une "Lettre-Type Intégrée", cliquer directement sur le bouton d'édition simplifiée.




L'éditeur intégré s'ouvre sur le document précédemment sauvé.

4.12.2.3.4 Utiliser l'éditeur intégré DIANE

Voici l'ensemble des outils utilisables dans l'éditeur intégré DIANE.

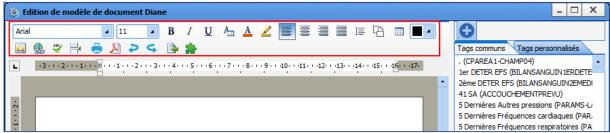

La typo, l'alignement, l'interligne des paragraphes, l'orientation du document, la gestion des tableaux, l'insertion d'image, la création de liens, les sauts de page sont contrôlables.

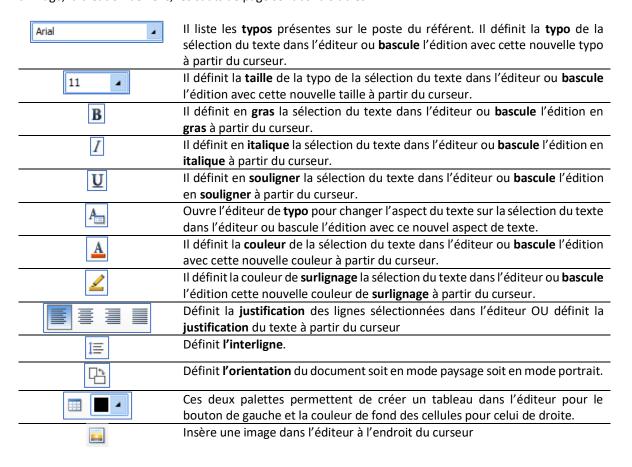



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Insère un mot cliquable dans la lettre-type
ABC/	Outil de correction orthographique
H	Outil de saut de page
	Outil d'impression. Envoie l'impression sans confirmation à l'imprimante par
	défaut du poste de l'utilisateur.
<u>A</u>	Génère un fichier PDF à sauvegarder sur le poste de l'utilisateur
2 4	Ces deux fonctions, aller à une version passée et revenir vers le présent, sont
	doublées des raccourcis clavier CTRL + Z et CTRL + MAJ + Z
	Importe une copie du contenu d'une autre lettre-type.
*	Affiche une case à cocher. Des cases sont utilisées dans certains documents de documentation d'antibiotique, par exemple.

4.12.2.3.5 Insérer un tag ou un tag personnalisé dans la lettre type

Pour insérer des tags personnalisés dans un document, il est nécessaire de les créer dans un premier temps (Cf. Chapitre Créer des tags personnalisés). Une fois cette étape effectuée, il est possible d'insérer les tags précédemment créés au sein du document au format éditeur intégré DIANE.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

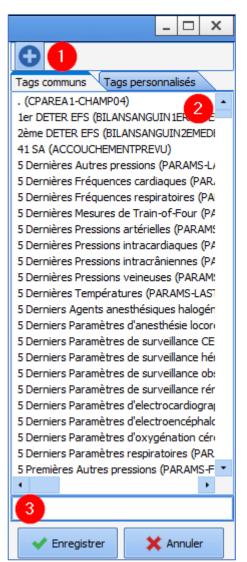

La colonne de droite contient, dans le premier onglet Tags communs: Puce 2, l'ensemble des tags de type ActiveX ID de données.

Pour trouver un tag à insérer, il est possible d'utiliser le moteur de recherche de tags : Puce 3. La recherche porte à la fois sur le nom du tag, mais aussi sur le titre du composant paramétré avec ce tag.

Pour insérer un tag dans le document, faire un double-clic ou un clic droit sur le tag souhaité.

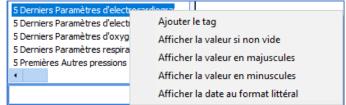


Au clic droit, un menu permet de paramétrer rapidement une forme de mise en page, sans utiliser de conditions.

- Ajouter le tag,
- Afficher la valeur si non vide,
- Afficher la valeur en majuscules,
- Afficher la valeur en minuscule,
- Afficher la date au format littéral.

Dans le second onglet, apparaissent les tags personnalisés, dont la création est vue plus haut dans ce document : dans le chapitre **Créer des tags personnalisés**. Leur insertion est strictement identique aux **tags communs**.

4.12.2.3.5.1 Créer un tag avec des conditions simples

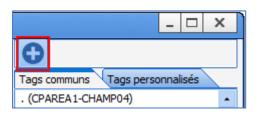

Le bouton situé tout en haut de la colonne de droite permet d'ouvrir le **" Menu des conditions "**. Les formules habituelles de politesse sont présentées.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



Monsieur / Madame

Monsieur / Madame / Mademoiselle (basé sur le nom usuel)

Monsieur / Madame / Mademoiselle (Age)

Monsieur / Madame / Mademoiselle / Le ou la jeune

agé / agée

Ce / Cette

Difficultés d'accès aux voies aériennes (score d'intubation)

Antécédents transfusionnels (si existants)

...

La liste des formules habituelles est la suivante :

• Monsieur / Madame basé sur le genre

Monsieur / Madame / Mademoiselle

basée sur le nom usuel

 Monsieur / Madame / Mademoiselle basé sur l'âge

- Monsieur / Madame / Mademoiselle / Le ou la jeune
- Âgé / âgée
 basé sur l'âge
- Ce / Cette basé sur le genre
- Difficultés d'accès aux voies aériennes basé sur le score d'intubation du module Consultation de DIANE ANESTHÉSIE
- Antécédents transfusionnels

La dernière option " ... " affiche le générateur de condition. Cela permettra de créer une condition sur mesure. L'exemple suivant sera détaillé : l'expression « Patient mineur » sera affichée dans la lettre-type, lors que le patient est âgé de moins de 18 ans.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 158 / 419

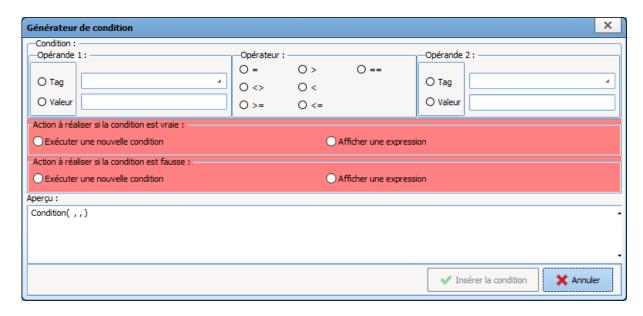


Le générateur de condition est composé de trois zones horizontales :

- Condition: Elle permet de définir les bases ou critères pour paramétrer la condition souhaitée.
- Actions à réaliser : Elle permet de sélectionner le comportement de la condition si elle est vraie ou fausse.
- Aperçu : Elle permet de voir la formule de la condition.

La zone Condition:

Elle est composée de 3 parties, à remplir de gauche à droite.

- Opérande 1 : Cette zone permet de définir un tag ou une valeur comme référence à la condition souhaitée. Dans cet exemple, le tag **PATIENT-AGE-ANNEES** sera sélectionné car il est lié à un composant calculant l'âge du patient en nombre d'années, en rapport avec la date de naissance et la date du jour. **Rappel** : Afin de trouver un tag, consulter la partie « Trouver un tag ».

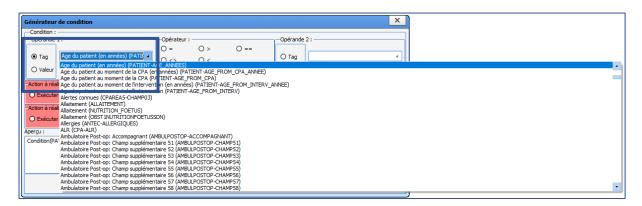

- Opérateur : Cette zone permet de définir un critère de type inférieur ou supérieur ou égal, etc. Dans cet exemple, il s'agira du symbole « < » (inférieur à).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

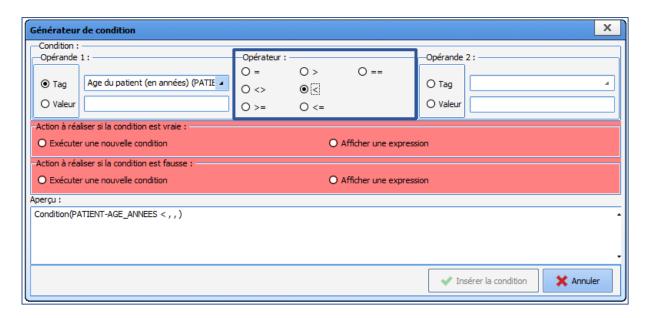

Opérande 2 : Cette zone permet de définir un tag ou une valeur comme résultat à la condition souhaitée.
 Dans cet exemple, la valeur 18 sera choisie. Il est important de connaître le format utilisé pour le tag sélectionné en opérande 1, afin de déterminer la valeur.

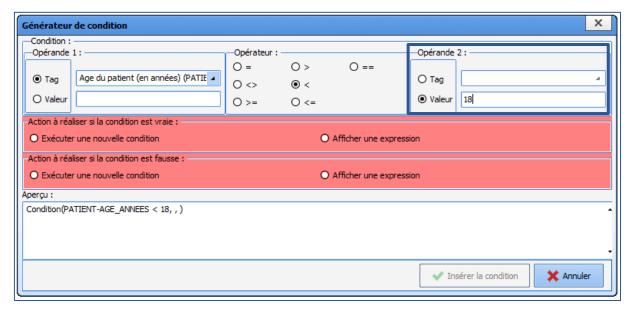

La zone Actions à réaliser :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

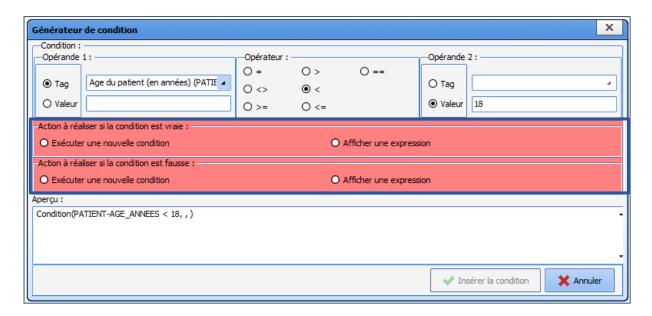


Cette zone permet d'indiquer ce qui est écrit quand la condition est vraie, puis ce qui est écrit quand la condition est fausse. Avant de les configurer, la zone **Actions à réaliser** est affichée en rouge. Ces deux actions doivent être renseignées et apparaître avec un fond de couleur verte pour pouvoir insérer la condition.

Si l'une des deux Actions n'a pas d'utilité, cliquer sur **Afficher une expression** et insérer la condition sans aucune modification dans le générateur d'expression.

Pour afficher un texte libre, il faut le renseigner dans la fenêtre.

Pour afficher un tag lorsque la condition est vraie/fausse, sélectionner ce tag dans la colonne de droite.

Dans cet exemple, si le tag **PATIENT-AGE-ANNEES** est inférieur à **18**, et si cette condition est vraie, alors il faut afficher l'expression *Patient mineur*. En cochant **Afficher une expression**, le générateur d'expression permettra de choisir le texte ou le tag à afficher.

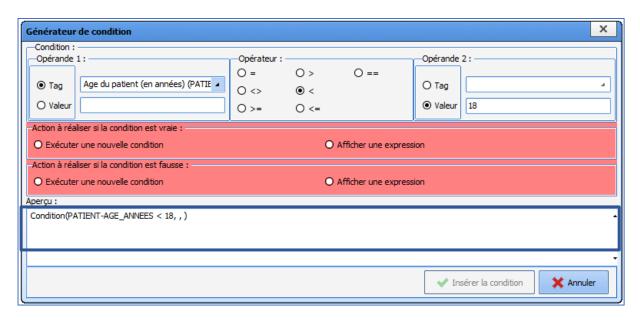



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Dans cet exemple, la case **Afficher une expression** sera cochée pour l'**Action à réaliser si la condition est vraie.** Dans la zone de gauche, il faut saisir le texte : *Patient mineur*. Puis valider l'expression.

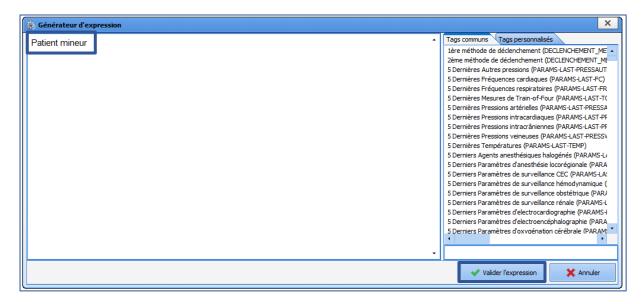

Si la condition est fausse, c'est-à dire sui le tag **PATIENT-AGE-ANNEES** est supérieur à **18**, il n'y a rien à afficher, alors il est nécessaire de sélectionner **Afficher une expression**, dans **Action à réaliser si la condition est fausse**.

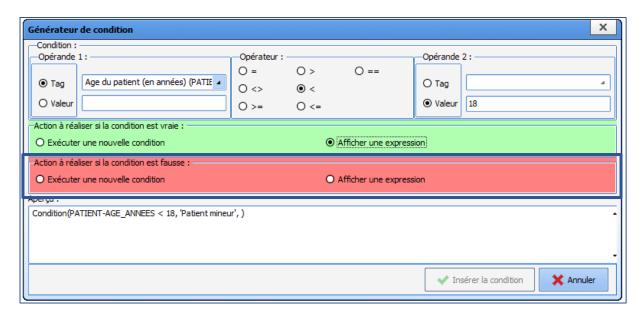

Puis la fenêtre du générateur d'expression s'ouvre de nouveau :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 162 / 419

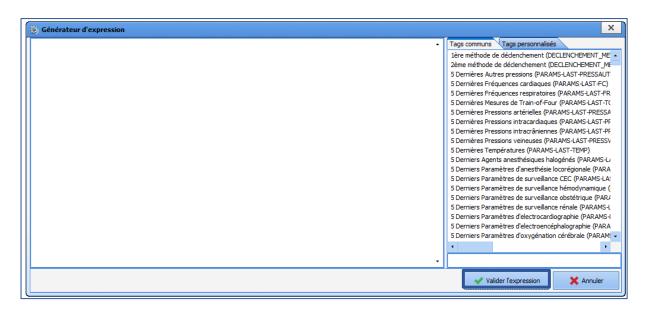

Dans cet exemple, il ne faut pas renseigner d'autres informations dans la lettre si le tag **PATIENT-AGE-ANNES** est supérieur à **18**. Il suffit de valider l'expression sans écrire de texte, ni sélectionner de tags.

Après avoir insérer les deux actions (Vraie et fausse), la zone est désormais affichée en vert.

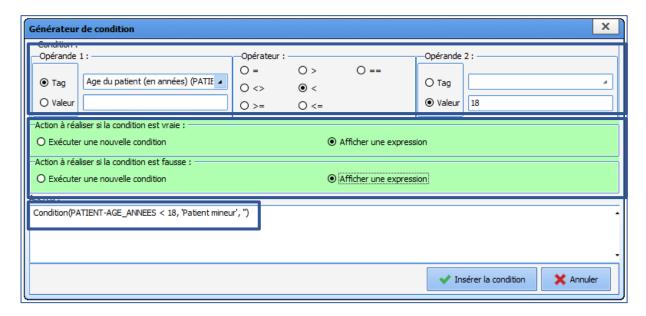

La zone d'aperçu :

Elle permet de visualiser l'apparence de la condition qui vient d'être créée. Dans cet exemple : Condition(PATIENT-AGE_ANNES < 18, « Patient mineur », « »). Enfin, sélectionner **Insérer la condition**.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 163 / 419

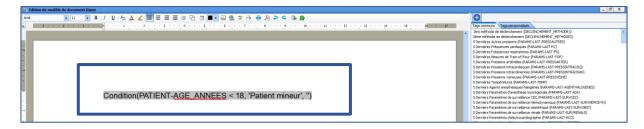

La condition sera automatiquement insérée dans le corps du texte. Elle peut être déplacée, modifiée (Cf. chapitre Modifier un tag conditionné).

Cette condition va donc servir à renseigner automatiquement dans la lettre type le terme « Patient mineur », lorsque le composant PATIENT-AGE ANNES est inférieur à 18, et ne rien écrire lorsque le patient est majeur.


4.12.2.3.5.2 Créer un tag avec des conditions avancées

Il est régulièrement utile de créer un tag dans une lettre type, qui imbrique plusieurs conditions et plusieurs actions différentes.

Exemple: le terme Patient mineur sera indiqué dans le cas d'un patient de moins de 18 ans, Patiente mineure sera indiqué dans le cas d'une patiente de moins de 18 ans ; Patiente majeure sera indiqué dans le cas d'une patiente de plus de 18 ans et Patient majeur sera indiqué dans le cas d'un patient de plus de 18 ans.

Dans ce cas, 3 conditions seront imbriquées. La première est basée sur l'âge, puis les 2 suivantes sont configurées avec le composant **PATIENT-SEXE**.

La première étape est de définir le tag **PATIENT-AGE_ANNEES**, telle que la partie précédente. Les 2 conditions suivantes vont être insérer via le choix **Exécuter une nouvelle condition**.

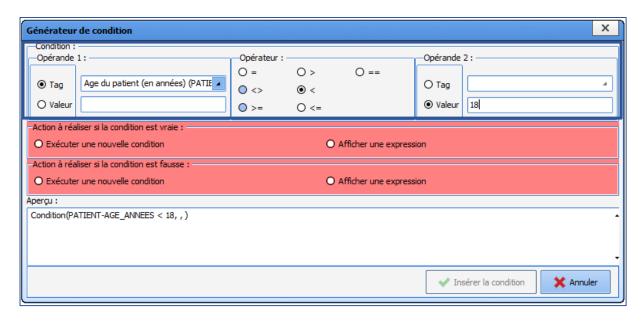

Cliquer sur **Exécuter une nouvelle condition**, le générateur de condition s'ouvre une seconde fois pour configurer cette 2^e condition. Dans cet exemple, la condition imbriquée est basée sur le tag **PATIENT-SEXE**, est égal à **F** (valeur possible du composant sexe du patient).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

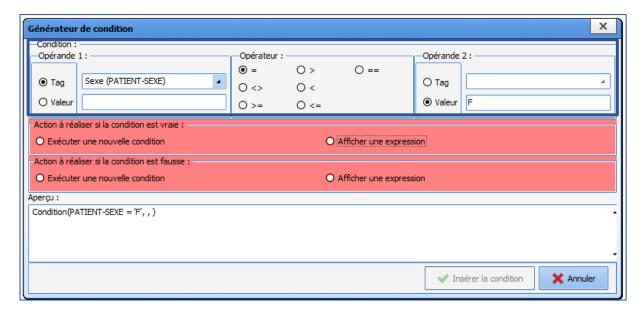

Puis sélectionner **Afficher une expression**, et saisir l'expression ou le tag souhaité. Dans cet exemple, si le sexe est égal à **F**, il faut afficher *Patiente mineure*.

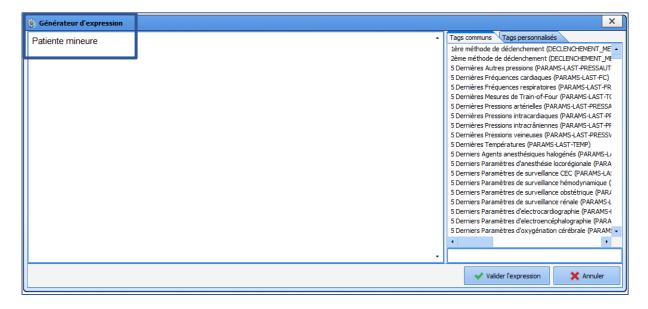

Si la condition est fausse, il faut alors indiquer Patient mineur. (Actions à réaliser si la condition est fausse).

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

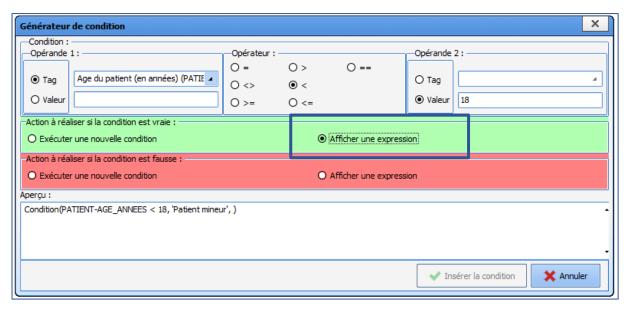

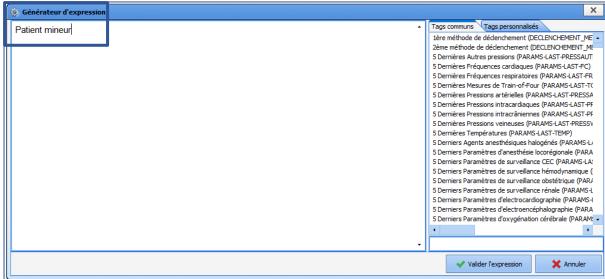

Cette 2^e condition est donc paramétrée. Il est nécessaire de sélectionner **Insérer la condition**.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 166 / 419

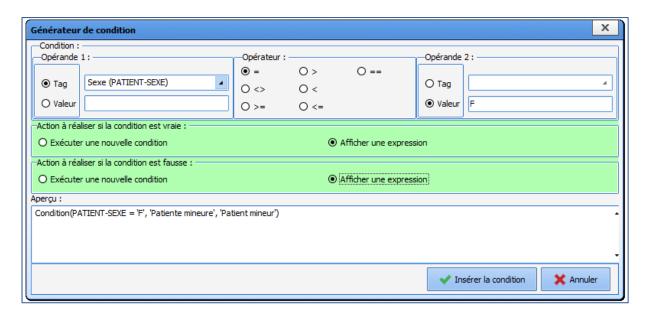

Le générateur de condition de la 1^{re} condition est maintenant ouvert afin de terminer le paramétrage.

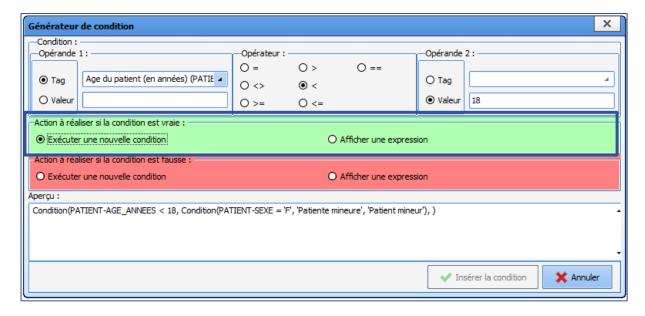

L'Action à réaliser si la condition est fausse doit être configurée. Dans cet exemple, il faut indiquer *Patient majeur* pour un homme, et *Patiente majeure* pour une femme. Il est donc nécessaire d'imbriquer une 3^e fonction avec Exécuter une nouvelle condition, dans Action à réaliser si la condition est fausse.

BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

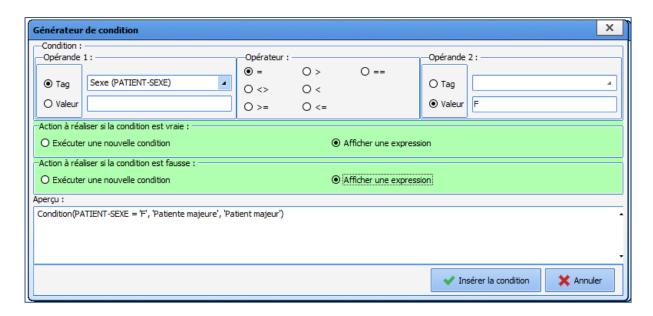

De la même façon que précédemment, il faut sélectionner l'opérande 1, l'opérateur, l'opérande 2, puis les actions à réaliser si vraie / fausse (dans cet exemple : patiente majeure, patient majeur). La condition (3^e condition) est ensuite insérée. Le générateur revient alors sur la 1^{re} condition dans laquelle, l'ensemble des 3 conditions est visible dans l'aperçu.

Sélectionner Insérer la condition, pour que la condition soit affichée dans la lettre type.

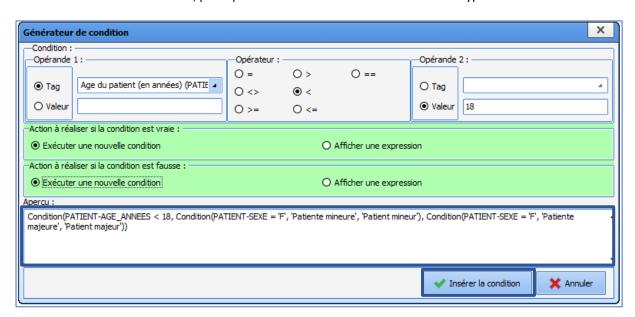

Le résultat des conditions est le suivant :

- Si le patient a moins de 18 ans et est féminin = écrire *Patiente mineure*
- Si le patient a moins de 18 ans et n'est pas féminin = écrire Patient mineur
- Si le patient a 18 ans ou plus et est féminin = écrire Patiente majeure
- Si le patient a 18 ans ou plus et n'est pas féminin = écrire Patient majeur

La zone Aperçu permet de consulter l'ensemble des conditions imbriquées.

Rappel : Enregistrer la lettre type avant de fermer la fenêtre de l'éditeur, pour la sauvegarder.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 168 / 419


4.12.2.3.5.3 Modifier un tag conditionné

Voici l'illustration dans l'éditeur du résultat de la formule Monsieur / Madame des formules habituelles.


Condition(PATIENT-SEXE == "M", "Monsieur", "Madame"), veuillez prendre connaissance de

Une condition apparaît toujours comme un bloc gris d'un seul tenant, il n'est pas possible d'en effacer une partie ni d'en modifier directement le contenu.

Pour apporter une modification à cette condition, cliquer sur le bloc gris, un menu apparaît.

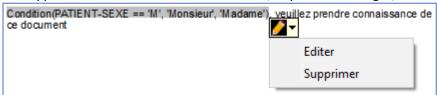

Cliquer sur **Éditer** ouvre l'éditeur de condition dans l'état précis dans lequel il a été validé. Il n'y a pas de différence d'utilisation entre création et modification des conditions.

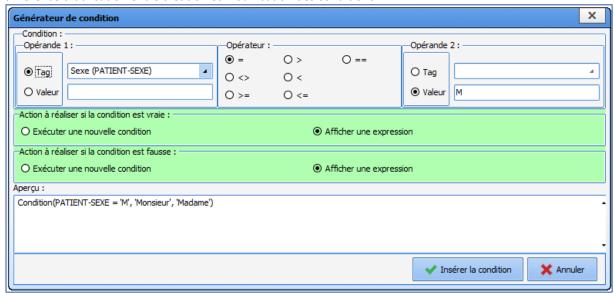

4.12.2.3.6 Ajouter un en-tête à une lettre-type

Un en-tête de lettre-type est une lettre-type à part entière possédant le contenu de l'en-tête. Son intérêt réside dans la centralisation des en-têtes. Pour modifier le logo de l'établissement par exemple, il est possible de le modifier dans le modèle en-tête et toutes les ordonnances bénéficiant de cet en-tête sont automatiquement mises à jour.

L'utilisation d'en-têtes indépendants des lettres permet de modifier les documents tout en conservant une charte graphique commune, de sécuriser et centraliser les informations de cet en-tête, et le cas échéant de modifier l'en-tête qui s'appliquera aux documents concernés (sans modifier chaque lettre).

Les en-têtes au format de l'éditeur intégré **DIANE** sont exclusivement utilisables pour les lettres types au format de l'éditeur intégré **DIANE**.

Pour créer ou modifier un en-tête, sélectionner dans la configuration application, l'onglet LETTRE TYPE, dans le menu déroulant sélectionner Entêtes et pieds de page :



Créer un document tel qu'indiqué dans le chapitre : Les lettres-types au format éditeur intégré DIANE.

NOTE : Les en-têtes doivent être également basculer dans la colonne des **Lettres types visibles dans le secteur sélectionné.**

Afin de lier une lettre-type à un en-tête, choisir dans le menu déroulant, la catégorie de lettre-type dans lequel



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

se trouve le document (ex : Impression CPA). Cliquer sur le document dans la colonne de droite, puis cliquer sur le bouton de liaison ci-dessous à droite.



L'outil de liaison des en-têtes filtre automatiquement les en-têtes adaptés au format d'éditeur intégré **DIANE**. Les boutons radios ne permettent qu'un choix parmi ceux disponibles. Cliquer dans **Formulaire génétique** et valider pour lier le document. Pour délier un document et qu'il n'ait plus d'en-tête, cliquer sur **Aucun en-tête** et valider.

REMARQUE: l'en-tête appliqué est visible à l'utilisation et non pas en configuration. Ne pas oublier de relancer **DIANE** grâce à **DIANE MANAGER** pour constater le résultat du paramétrage.

4.12.2.3.7 Ajouter un fond de page à une lettre-type

Un fond de page de lettre-type est une lettre-type à part entière. Celle-ci possède un contenu qui lui est propre sous forme d'images ou de textes. Son utilité la plus fréquente est de permettre la création d'ordonnances avec une colonne soit à droite, soit à gauche listant les médecins de l'établissement. Dans ce cas, pour modifier la liste, le médecin est ajouté dans la lettre-type de fond de page et toutes les ordonnances bénéficiant de ce fond de page sont automatiquement mises à jour.


NOTE : Le fond de page et la lettre-type avec laquelle il est lié peuvent être considérés comme des calques. Il faut s'assurer que le résultat attendu est bien celui paramétré.

Pour créer ou modifier un fond de page :



Créer un document tel qu'indiqué dans le chapitre : Les lettres-types au format éditeur intégré DIANE.

NOTE : Faire attention à basculer les fonds de page dans la colonne du milieu pour les entités sur lesquelles elles ont un sens.

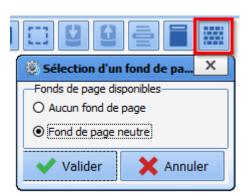

Afin de lier un fond de page à une lettre-type, choisir dans le menu la catégorie de lettre-type dans lequel se trouve le document. Cliquer sur le document et cliquer sur le bouton de liaison cidessous à droite.

L'outil de liaison des fonds de pages présente tous les fonds de page existants. Il n'y a que l'éditeur intégré pour lequel les fonds de page fonctionnent.

Les boutons radios ne permettent qu'un choix parmi ceux disponibles. Cliquer dans **Fond de page neutre** et valider pour lier le document. Pour délier un document et qu'il n'ait plus de fond de page, cliquer sur **Aucun en-tête** et valider.

REMARQUE: le fond de page appliqué est visible à l'utilisation et

non pas en configuration. Ne pas oublier pas de relancer **DIANE** grâce à **DIANE MANAGER** pour constater le résultat du paramétrage.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.12.2.4 Les Lettres-types au format WORD

Afin de créer des lettres types, il est possible d'utiliser le format **Word**. Compte tenu de la complexité de cet outil, il sera nécessaire de consulter le manuel utilisateur de **Word**, car ses fonctions et son ergonomie peuvent différés d'une version à l'autre.

4.12.2.4.1 Prérequis, avantages et inconvénients

Prérequis :

- Aucun prérequis n'est demandé mis à part déployer Word sur tous les postes susceptibles de générer des lettres-types - ordonnances, comptes rendus ... -
- Une maitrise moyenne de l'outil Word par les utilisateurs, ainsi qu'une maitrise avancée pour les référents.

Avantages:

- Permet une mise en page élaborée et une intégration poussée dans certains systèmes informatique d'établissement.
- Il est possible de protéger un document en écriture à l'exception de cases à cocher. Cette fonctionnalité est contestable dans la mesure où des informations potentiellement importantes ne sont pas présentes dans le dossier patient DIANE.

Inconvénients

- L'absence de moteur de Tag rend moins simple la recherche de ces mêmes tags.
- Le chargement du document à l'édition sera plus long, comparé à l'éditeur intégré DIANE.

4.12.2.4.2 Créer une lettre-type au format Word

Pour créer une lettre type, sélectionner dans la configuration application, l'onglet **LETTRE TYPES**, puis choisir dans le menu déroulant, la catégorie de document souhaité, puis se reporter à la section 3 pour créer une lettre type. Une fois ces étapes effectuées, la fenêtre de Création/Edition de la lettre type s'ouvre, et permet de choisir le format désiré via le menu déroulant.



Pour créer une **Lettre-Type Word** , sélectionner l'application **Word97 ou supérieur**. Puis, cliquer sur le bouton d'édition simplifiée.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



L'éditeur Word s'ouvre alors avec un document vierge.

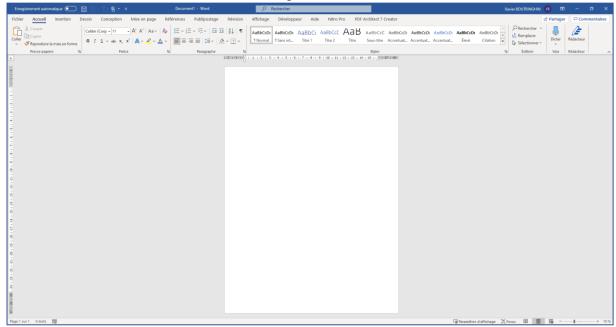

NOTE : une fois créé, il n'est pas possible de changer le type d'un document.

4.12.2.4.3 Protéger en écriture, exporter ou importer une lettre-type

L'export / import de lettres-types permet principalement de restreindre la modification des documents. Les deux cas fréquents rencontrés sont de créer un document avec des cases à cocher et de modifier des documents DIANE sur un ordinateur dépourvu de ce logiciel.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

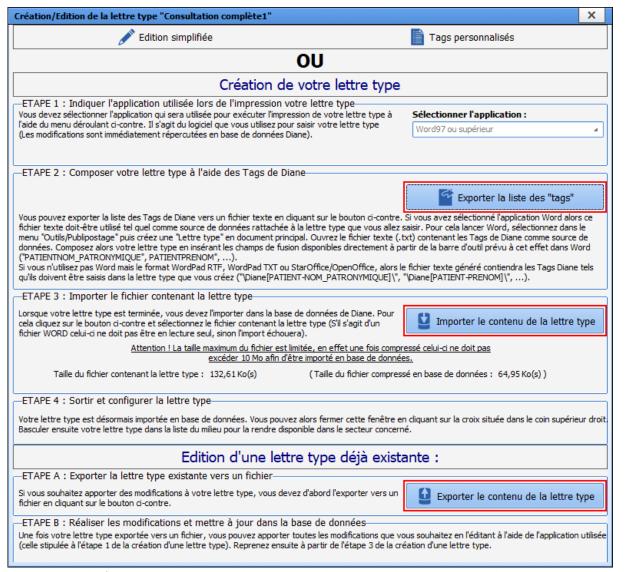

Voici une marche à suivre pour obtenir un document Word contenant des tags DIANE sur le poste.

- Créer ou modifier un document Word sur le poste ou exporter une lettre-type DIANE de type Word.
- Exporter la liste des tags
- Lier la liste des tags au précédent document Consulter le prochain chapitre pour procéder à la liaison Se référer à l'aide Word en cas de difficultés.
- Rédiger et insérer des tags dans le document. Se référer à la section Insérer un tag dans une lettretype ci-dessous
- Insérer éventuellement des composants de formulaires (case à cocher, champs libre ...) Se référer à l'aide **Word** en cas de difficultés.
- Protéger éventuellement le document
 Se référer à l'aide Word en cas de difficultés.
- Importer le document dans DIANE

4.12.2.4.4 Lier la liste des tags à un document Word

La fonction de publipostage permet d'automatiser les courriers et rapports en fonction des informations remplies dans le dossier patient de **DIANE**. Afin d'utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de lier le document à une



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

base de données, qui comprend les tags **DIANE** (eux-mêmes liés à un composant).

Par exemple le tag PATIENT-NOM_PATRONYMIQUE correspond au champ du nom patronymique du patient. Le fait d'insérer le tag PATIENT-NOM_PATRONYMIQUE dans le document, permettra donc d'écrire automatiquement dans le document, le nom du patient.


Lors d'une séance de travail sur la mise en page d'une lettre type, hors édition simplifié (c'est-à-dire hors utilisation de DIANE), il convient de lier la liste des tags à la lettre type en question. Pour réaliser cette liaison, il est nécessaire de procéder de la manière suivante :



1- Exporter la liste des tags dans un répertoire au choix :

Dans la configuration application, rubrique lettre-types, puis en sélectionnant le domaine de lettre souhaité, éditer le document à modifier. (Dans cet exemple, il s'agit de la lettre type nommée **Consultation complète 2**)

Lorsque la fenêtre de création de lettre-type s'ouvre, sélectionner **Exporter le contenu de la lettre type**.

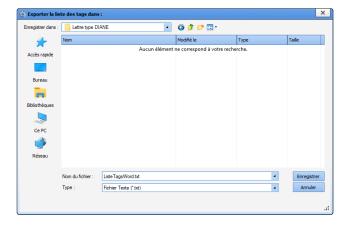

<u>2 – Choisir l'emplacement du fichier contenant la liste des tags.</u>

La liste des tags doit être enregistrée sur le poste de travail. Sélectionner l'emplacement souhaité, à l'aide des icones de droite et/ou du menu déroulant.

Sélectionner le bouton **Enregistrer**.

La liste des tags est à présent téléchargée dans l'emplacement souhaité (dans cet exemple : dossier nommé Lettre type DIANE)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



3- Première situation :

Une lettre type déjà existante dans le logiciel **DIANE** est utilisée.

Editer la lettre type dans la configuration application puis, dans la fenêtre de **Création/édition**, exporter la lettre type et l'enregistrer dans un répertoire au choix

3 bis – Seconde situation

Un document **Word** existant ou un document vierge est utilisé. Cette étape n'est donc pas nécessaire.



Dans la première situation, Sélectionner l'emplacement souhaité, à l'aide des icones de droite et/ou du menu déroulant.

Sélectionner Enregistrer.

A ce stade, il est possible d'ouvrir la lettre type via le logiciel **Word**. Le document est accessible à l'emplacement préalablement choisi. Dans cet exemple, le document est enregistré dans le dossier nommé **Lettre type DIANE**.


4 - Dans le cas d'un document préexistant dans DIANE :



Lors de l'ouverture du document **Word**, préexistant dans **DIANE**, le logiciel ouvrira automatiquement une fenêtre afin de lier la liste des tags avec le fichier **Word**.

Sélectionner **OUI**.

Puis dans la fenêtre suivante, sélectionner **Rechercher la source de données**.

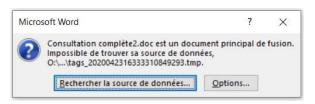

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 175 / 419

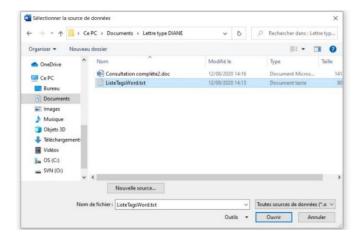

La fenêtre de sélection de la source de données permettra de choisir l'emplacement dans lequel la liste des tags a été précédemment enregistrée (dans cet exemple la liste des tags était enregistrée dans le dossier nommé **Lettre type DIANE**. Puis cliquer sur **Ouvrir**.

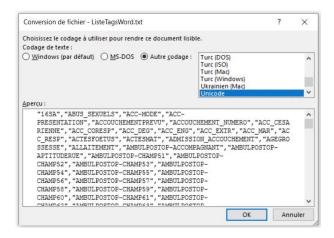


Enfin, sélectionner **OK** dans la fenêtre de conversion du fichier, sans aucune modification.

Le document **Word** est désormais ouvert et lié à la liste des tags. Le travail de mise en page peut alors démarrer.

Fin de l'étape 4 concernant un document déjà présent dans **DIANE**. L'étape 4 bis consistera à présenter la même procédure pour un document vierge ou externe à **DIANE**.

4 <u>bis – Dans le cas d'une création d'un document (ex nihilo).</u>

Il est possible que le document de travail soit un document vierge ou un document **Word** préalablement préparé. Ouvrir le document, puis dans le menu de **Word**, rubrique **Publipostage**, cliquer sur **Démarrer la fusion et le publipostage**. Sélectionner **Assistant fusion publipostage** pas à pas.

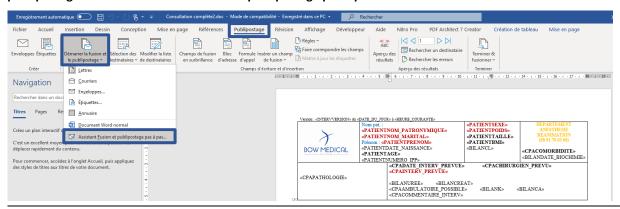



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 176 / 419

Selon la version **Word**, le logiciel ouvrira alors une fenêtre d'assistance ou un volet d'assistance sur la droite. Dans cet exemple, **Word** ouvre un volet de navigation à la droite du document.

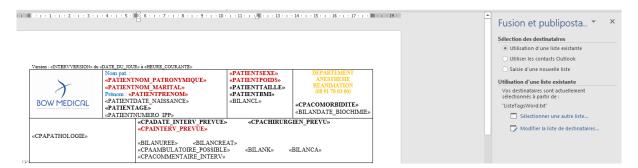

Au bas du volet de fusion, sélectionner Suivante : écriture de votre lettre

La fenêtre de choix de l'emplacement s'ouvre alors. Sélectionner l'emplacement dans lequel la liste des tags a été précédemment enregistrée. Sélectionner **Ouvrir**

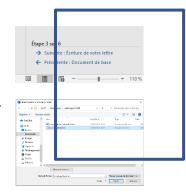






Sélectionner Suivante : Aperçu de vos lettres

Sélectionner Suivante : Fin de la fusion

La liaison entre la liste des tags et la lettre de type est maintenant effective. Il est dès à présent possible de commencer le travail de mise en page dans le document **Word**.

Dans la rubrique **Publipostage**, il est possible d'accéder à la liste des tags via le bouton **Insérer un champ de fusion**. (Cf. point suivant)

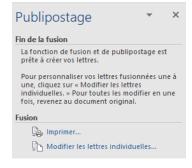

4.12.2.4.5 Insérer un tag dans une lettre-type

Afin d'insérer un tag, sélectionner sur la rubrique **Publipostage**. Cliquer sur la zone Insérer un champ de fusion. Si le document a été exporté sur le poste, il est indispensable d'exporter la liste des tags et de paramétrer cette dernière pour l'associer au fichier **Word**. (Cf. point précédent)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



En cliquant sur la partie supérieure (1) de la zone **Insérer un champ de fusion**, la fenêtre suivante permet de choisir le tag à insérer.

Si quelques lettres du tag sont saisies rapidement, cela permet d'accéder plus rapidement au tag souhaité. En cliquant sur la partie inférieure (2), un menu déroulant apparaitra afin d'afficher la liste des tags. Contrairement à la partie supérieure, la recherche rapide à la frappe n'est pas disponible.

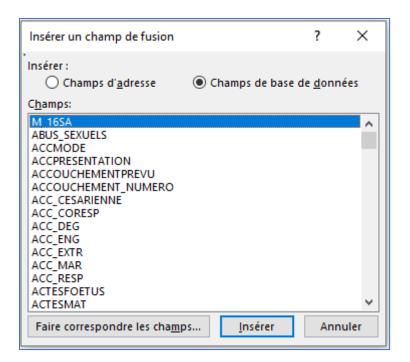

4.12.2.4.6 Créer un tag avec des conditions simples (règles)

Cas concret : créons une règle qui permette d'écrire automatiquement « Monsieur » ou « Madame » en fonction du genre renseigné dans le dossier patient.

- Ouvrir la lettre-type souhaitée.
- Onglet publipostage > Règles



- En cliquant sur le bouton **Règles**, il est possible de choisir le type de règles à appliquer.
- Il faut utiliser la fonction : Si...Alors...Sinon



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 178 / 419

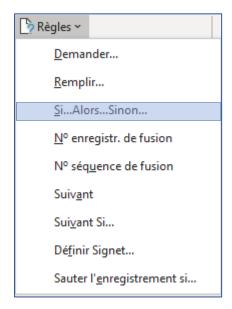

• La fenêtre d'insertion de champ s'ouvre. Le menu déroulant permet de choisir le champ de référence. Ici, le tag **PATIENTSEXE** sera choisi. Au besoin, pour savoir à quel tag correspond quelle information : se reporter au chapitre **Trouver les tags**.

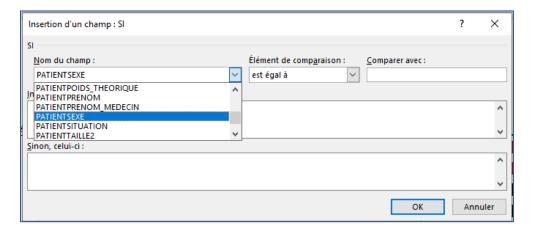

Ensuite, choisir est égale à. dans les éléments de comparaison.
 Pour obtenir les valeurs possibles lors de la comparaison, se reporter au chapitre Trouver les tags.

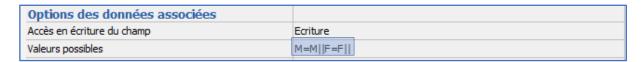

• Entrer la valeur **M** dans le champ **Comparer avec :** Puis les textes à apparaître en fonction du cas. La première zone permet d'afficher le texte **Monsieur** si le test est réussi. La seconde zone permet d'afficher la valeur **Madame** si le test a échoué.



nce

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Insertion d'un champ : SI		?	×
SI -			
Nom du champ :	Élément de comp <u>a</u> raison : <u>C</u> omparer avec :		
PATIENTSEXE	est égal à V M		
Insérer le texte suivant : Monsieur			^
Sinon, celui-ci :			~
Madame			^
			v l
	ОК	Anı	nuler

4.12.2.4.7 Créer un tag avec des conditions avancées

Lorsque la situation l'impose, notamment lorsque les règles sont trop simples.

- Condition complexe (et / ou),
- Le texte à insérer contient un tag voire un autre test
- ..

Un document **Word** avec publipostage possède deux niveaux d'affichage. Avec le niveau habituel, les tags apparaissent grisés entourés de guillemets (" "). Il y en a un second affichage dans lequel les tags sont beaucoup plus détaillés et surtout éditables.

Vocabulaires et raccourcis clavier à connaître :

MERGEFIELD: Champ de fusion

ALT + F9 : Affichage / Désaffichage du mode détaillé de Word :

CTRL + F9: *Insertion des accolades*. Dans une formule de tag, les accolades classiques font échouer les formules "": Le double guillemet signifie « ne rien écrire » ou « rien ». Un texte entre deux guillemets signifie qu'il faut écrire le texte.

Exemple: {si{ MERGEFIELD PATIENTNOM_MARITAL }="" "" "Monsieur" } La condition signifie que si le composant du nom marital est vide, alors ne rien écrire, sinon écrire Monsieur.

Voici le schéma de tout tag dans **Word**. Il est conseillé d'espacer les guillemets ("" ""), cela évite les erreurs et facilite énormément la lisibilité.

La logique de la rédaction d'un tag avec des conditions avancées peut être illustrée de la manière suivante :

{Si {TAG}="à comparer avec TAG" "ce qui se passe si le test répond vrai" "ce qui se passe si le test échoue"}

Exemple de fonction pour le nom :

«PATIENTNOM MARITAL»

Voilà ce que donne le paramétrage en Mode ALT+F9 : { IF { MERGEFIELD PATIENTNOM_MARITAL }="" "Nom marital : " } { MERGEFIELD PATIENTNOM MARITAL }

Traduction : La condition correspond à : si le champ PATIENTNOM_MARITAL est vide, alors ne rien écrire, sinon insérer le champ de fusion PATIENTNOM_MARITAL.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 180 / 419

Exemple de fonction pour la date de naissance et âge :

Affichage hors mode ALT+F9:

«PATIENTDATE_NAISSANCE»
«PATIENTAGE»

Affichage en mode ALT+F9:

```
{ IF { MERGEFIELD PATIENTDATE_NAISSANCE }= "" "Né{ IF { MERGEFIELD PATIENTSEXE }="M" "" "e"\* MERGEFORMAT } Ie: " \* MERGEFORMAT } MERGEFIELD PATIENTAGE }="" "Age: " \* MERGEFORMAT } MERGEFIELD PATIENTAGE }
```

Explications:

Si <mark>le champ de fusion PATIENTDATE_NAISSANCE n'est pas renseigné</mark>, <mark>alors rien</mark>, sinon <mark>écrire Né (et si le champ de fusion est égal à M, alors ne rien écrire, sinon écrire « e »</mark>

Traduction:

Si la date de naissance n'est pas renseignée, il ne faut rien écrire, sinon, il faut écrire « né » pour un homme et « née » pour une femme, en se référant au champ PATIENTSEXE, insérer le champ « date de naissance » et si l'âge est égal à rien, ne rien écrire, sinon écrire âge : insérer le champ « **âge** » en respectant la mise en forme de la police telle quelle. (en gras)

Résultat : aucun texte ne sera écrit si les informations sont manquantes. En revanche, si les informations sont présentes, le texte suivant sera affiché :

Né le date renseignée (XX/XX/XXX) ou Née le date renseignée (XX/XX/XXXX)

Age: Age renseigné. (XX ans)

4.12.2.4.8 Créer un formulaire avec des cases à cocher et des zones de saisies



Afin d'ajouter des cases à cocher dans un document **Word**, il est nécessaire de disposer de l'onglet **DÉVELOPPEUR**. Si ce n'est pas le cas dans la configuration du logiciel **Word**, cliquer sur l'onglet **FICHIER**.



Situé en bas à gauche de la fenêtre, sélectionner le menu **OPTIONS**.

Puis sélectionner l'option **PERSONNALISER LE RUBAN**, dans la nouvelle fenêtre. Cocher l'onglet développeur, puis sélectionner **OK**. L'onglet **DÉVELOPPEUR** apparaît ensuite dans la barre des tâches **Word**.

^

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

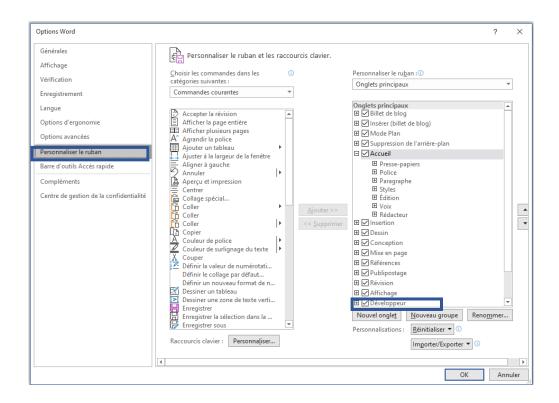



Une fois l'onglet développeur affiché, sélectionner l'endroit dans le document où insérer une case à cocher, puis sélectionner l'icône représentant une case à cocher dans l'onglet **DÉVELOPPEUR**.

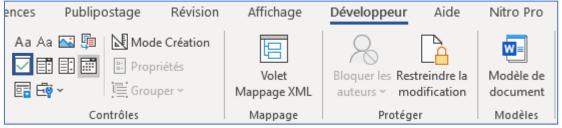

La case à cocher apparaitra à l'endroit où la sélection a été faite au simple clic :



Au simple clic dans la case à cocher, elle se cochera et se décochera.

Exemple:

Ordonnances du 01/02/2020 :

- ☐ 1 Boite de PARACETAMOL 500mg
- □ 1 boite de PARACETAMOL 1000mg

4.12.2.4.9 Protéger le document

Un document possédant des cases à cocher ou des zones de saisies doit être protégé pour que les utilisateurs



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 182 / 419

puissent utiliser ces éléments de formulaires. Il est également possible de protéger un document pour qu'il ne soit pas modifiable par l'utilisateur une fois intégré dans **DIANE**.




Cliquer sur Restreindre la modification comme illustré ci-dessus.

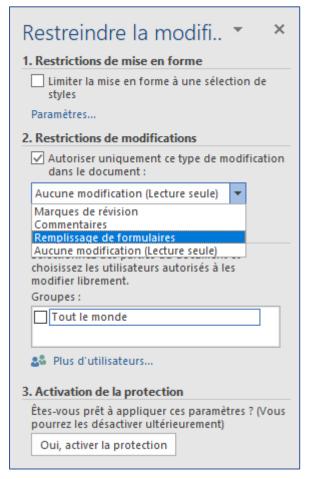

Cocher Autoriser uniquement ce type de modification. Choisir l'option du menu déroulant Remplissage de formulaires

Puis passer au point numéro 3, cliquer sur le bouton **Oui,** activer la protection.

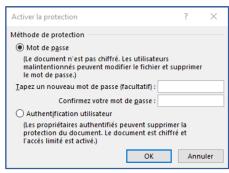

Ne pas entrer de mot de passe et cliquer sur **OK** : le document est désormais protégé. Seuls les formulaires sont modifiables.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.12.2.4.10 Ajouter un en-tête à une lettre-type Word

Un en-tête de lettre-type est une lettre-type à part entière possédant le contenu de l'en-tête. Son intérêt réside dans la centralisation des en-têtes. Pour modifier le logo de l'établissement, par exemple, il faut le modifier dans le modèle en-tête et toutes les ordonnances bénéficiant de cet en-tête sont automatiquement mises à jour.

L'utilisation d'en-têtes indépendants des lettres permet de modifier les documents tout en conservant une charte graphique commune, de sécuriser et centraliser les informations de cet en-tête, et le cas échéant de modifier l'en-tête qui s'appliquera aux documents concernés (sans modifier chaque lettre).

Les en-têtes au format Word sont exclusivement utilisables pour les lettres types au format Word.

Pour créer ou modifier un en-tête, Sélectionner dans la configuration application, l'onglet LETTRE TYPE, dans le menu déroulant sélectionner Entêtes et pieds de page :



Créer un document tel qu'indiqué dans le chapitre : Créer une lettre type au format Word.

NOTE : Les en-têtes doivent être également basculer dans la colonne des Lettres types visibles dans le secteur sélectionné.

Afin de lier une lettre-type à un en-tête, choisir dans le menu déroulant, la catégorie de lettre-type dans lequel se trouve le document (ex : Impression CPA). Cliquer sur le document dans la colonne de droite, puis cliquer sur le bouton de liaison ci-dessous à droite.



L'outil de liaison des en-têtes filtre automatiquement les en-têtes adaptés au format Word.

Les boutons radios ne permettent qu'un choix parmi ceux disponibles. Cliquer dans Formulaire génétique et valider pour lier le document. Pour délier un document et qu'il n'ait plus d'en-tête, cliquer sur Aucun en-tête et

REMARQUE : l'en-tête appliqué est visible à l'utilisation et non pas en configuration. Ne pas oublier de relancer DIANE grâce à DIANE MANAGER pour constater le résultat du paramétrage.

4.13 Listes

Les listes sont utilisées dans les composants de type Champ de saisie avec liste de référence :



Il s'agit de la liste appelée en cliquant sur 😉 ou en tapant les premières lettres du mot.



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 184 / 419

Il est possible de :

- Créer une nouvelle liste
- Compléter une arborescence existante


Les listes issues de l'onglet Listes sont de type consultation. Le Root de référence sera le nom de la liste utilisée. La liste est attribuée dans le paramétrage du composant :

Liste générale de la deuxième colonne	Consultation
Root de référence de la deuxième colonne	EXAMEN CARDIO-VASCULAIRE

La liste générale est toujours Consultation. Le root de référence est le nom de la liste indiqué dans le menu déroulant supérieur de l'onglet Listes.



4.13.1 Configuration d'une liste

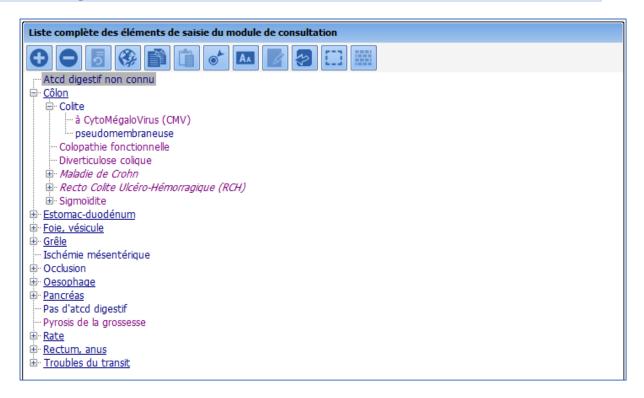

Une liste est un ensemble d'items. Dans cet exemple, la liste est utilisée pour la saisie des antécédents digestifs du patient. Un item peut être un « item-fils » et dépendre d'un autre item et/ou peut être un « itempère » et avoir des items descendants.

Le bouton

permet de déployer et le bouton

permet de masquer l'arborescence constituée des item-fils et de leur éventuelle descendance.

Un item configuré en sélecteur (matérialisé par le soulignement) n'est pas repris quand l'utilisateur sélectionne un de ses items-fils. Dans cet exemple, « Côlon » est configuré en sélecteur, contrairement à « Colite ». Si l'utilisateur choisit « pseudomembraneuse », il est donc écrit « Colite pseudomembraneuse ».

Pour transformer un élément en sélecteur, il faut le sélectionner et cliquer sur 🍱





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical : 4.1.2

UDI: (01)3760404900005(10)040102




Sélection ou création via le d'un Root (= nom de la liste).



(avant d'ajouter un élément veiller à sélectionner son emplacement)

Tous les éléments de la liste sont disponibles par défaut, la colonne de gauche est utile pour n'utiliser qu'une partie des éléments de la liste, dans ce cas, seuls les éléments basculés à gauche seront visibles à l'utilisation.

Après avoir sélectionné les éléments à mettre à disposition du secteur, il est possible de réorganiser l'ordre d'affichage

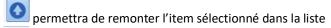

permettra de descendre l'item sélectionné dans la liste

permettra de classer toute la liste par ordre alphabétique

L'affichage en italique indique qu'un identifiant externe a été configuré pour la liste par l'intermédiaire du bouton .

4.13.2 Code couleur des éléments de liste

- Rien de particulier sur l'élément
- <u>L'élément souligné est un sélecteur (il sert à trier la liste mais n'apparaît pas à l'usage)</u>
- L'élément en italique (quelle que soit sa couleur) bénéficie d'un identifiant externe utilisé pour un usage particulier
- Un ou plusieurs code(s) CIM 10 sont associés à l'élément
- Un ou plusieurs code(s) CCAM sont associés à l'élément

4.14 Livret thérapeutique

Cet onglet permet de gérer les médicaments utilisés en prescription (livret thérapeutique et substitutions de produits pharmaceutiques).

Il est possible de :

- Gérer le livret thérapeutique en ajoutant, supprimant ou important des produits présents dans l'établissement afin qu'ils soient utilisables en prescription.
- Paramétrer les substitutions de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire le remplacement d'un produit



43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

BOW MEDICAL SAS

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

par un autre lors des prescriptions.


Sur une même base de données, il est possible d'utiliser plusieurs livrets (par exemple, un livret pour le service d'anesthésie et un autre pour le service de réanimation). Si la base de données est partagée par plusieurs sites, il est également possible d'utiliser des bases de données sur les médicaments différentes.

4.14.1 Import du livret thérapeutique

L'accès à la configuration du livret thérapeutique se fait à partir de l'onglet Livret thérapeutique.



- 1. Permet l'ajout d'un élément au livret.
- 2. Permet la suppression d'un élément du livret ou la réintégration d'un élément supprimé (visible si la case **Masquer les éléments supprimés** est décochée).
- 3. Met à jour le livret existant depuis la base de données sur les médicaments paramétrée (Zone 6).
- 4. Permet d'importer un livret depuis un fichier CSV :
 - Si la première ligne contient les titres des colonnes, il faut cocher la case 1^{re} ligne titre.
 - Si l'import est réalisé à partir des codes UCD, il faut cocher la case **Importer depuis des** codes UCD.
- 5. Permet de rechercher un élément du livret.
- 6. Nom de la base de données sur les médicaments paramétrée (BCB ou Vidal) et état de la connexion.
- 7. Permet l'édition et la validation de l'import du livret.

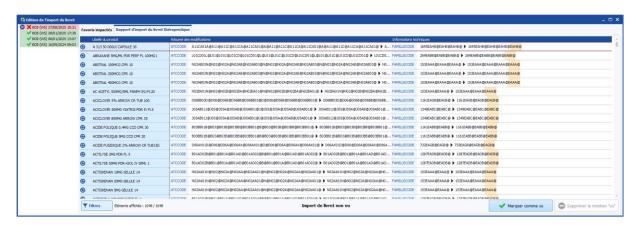

8. Affiche le différentiel entre la base de données et les éléments de la liste.



- 9. Applique les modifications en base de données : sans cette action, la mise à jour et/ou l'import du livret ne sont pas effectifs.
- 10. Exporte le livret existant au format CSV.
- 11. Affichage des éléments du livret : les éléments supprimés sont visibles si la case Masquer les



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 187 / 419

4.14.2 Rapport d'import du livret thérapeutique

Afin de faciliter la mise à jour des livrets thérapeutiques et de garantir la continuité des protocoles de soins, l'import du livret génère un rapport d'import présentant deux onglets :

- · Affichage du rapport d'import indiquant pour chaque produit impacté les modifications apportées
- Affichage des favoris impactés, permettant de les modifier si besoin et de les approuver (si l'utilisateur a les droits d'approbation des favoris)

Lorsqu'un livret est mis à jour, certains produits des favoris peuvent devenir invalides (références modifiées, marché expiré, etc.). DIANE propose automatiquement des correspondances entre les anciens et les nouveaux produits, afin de préserver les favoris et protocoles sans interruption.

Ces correspondances sont visibles dans le rapport d'import.


L'algorithme recherche les équivalents selon plusieurs critères (UCD, DCI, CIP, forme, dosage, ...). Il est alors possible de modifier et/ou de valider la substitution.

Le rapport permet :

- d'identifier rapidement les produits devenus invalides après import du livret,
- de valider ou ajuster les substitutions proposées,
- de réapprouver les favoris mis à jour (si l'utilisateur dispose du droit associé).

Le rapport s'affiche sous forme de tableau avec :

- les produits invalidés,
- les propositions de remplacement,
- l'état de validation (automatique ou manuelle),
- l'auteur et la date de ré approbation si applicable.

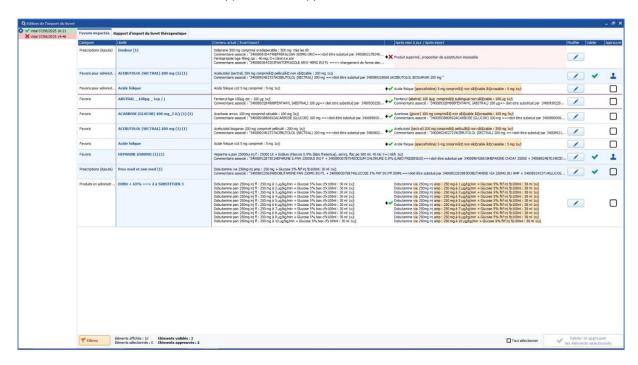

Le second rapport vous permet de visualiser les ajouts, suppressions ou mise à jour des produits.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 188 / 419

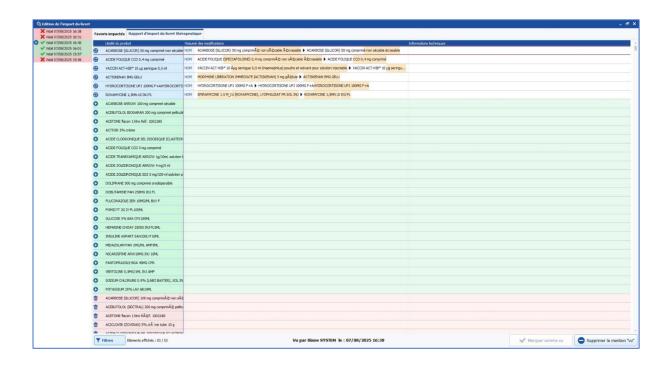

4.14.3 Edition du livret thérapeutique

Il est possible d'ajouter, d'éditer ou de supprimer des éléments du livret.

L'ajout d'un élément peut s'effectuer grâce au champ **Recherche de médicament** : la saisie d'un nom de produit, de principe actif ou un code UCD, UCD13, CIP ou CIP13 permet de récupérer directement les informations de la base de données sur les médicaments configurée.

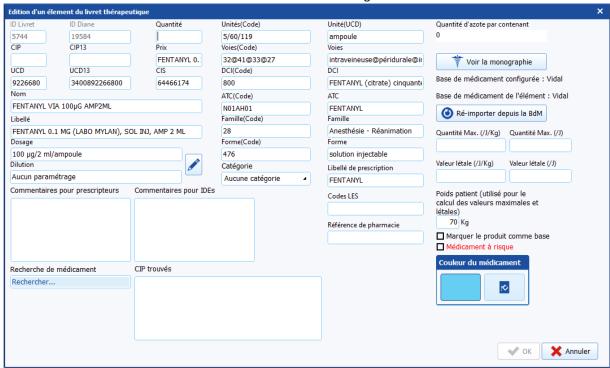



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 189 / 419

DIANE identifie le ou les code(s) CIP correspondant et les affiche les produits correspondants :




Un double clic sur le libellé du produit permet de récupérer les informations de la base de données sur les médicaments configurée.

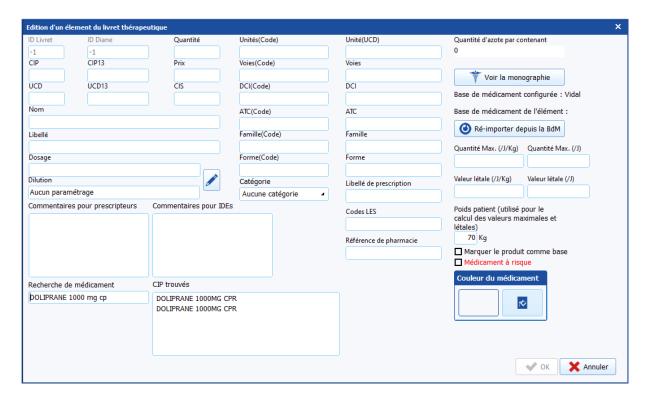

Le bouton Ré-importer depuis la BdM permet de mettre à jour les informations de l'élément.

Il est possible de mettre à jour l'ensemble du livret en cliquant sur le bouton Mettre à jour le livret existant.

La suppression d'un élément est possible grâce au bouton **Supprimer un élément du livret**. La suppression n'est pas définitive : il est possible de réintégrer un élément supprimé. Pour cela, il faut décocher la case **Masquer les éléments supprimés** (1). Les éléments supprimés sont identifiables par la valeur 0 dans la colonne **Visible** (2). Pour réintégrer l'élément, il faut au préalable le sélectionner puis cliquer sur le bouton **Ré intégrer un élément au livret** (3).

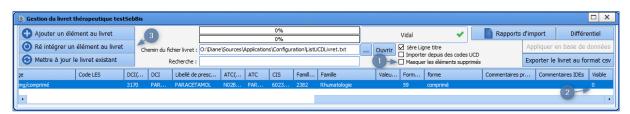



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com





BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Les champs **Commentaires pour prescripteurs** et **Commentaires pour IDEs** permettent au pharmacien de renseigner des informations visibles par les prescripteurs dans la fiche de saisie de prescription (1 et 2) et par les IDEs dans le plan de soin (3).

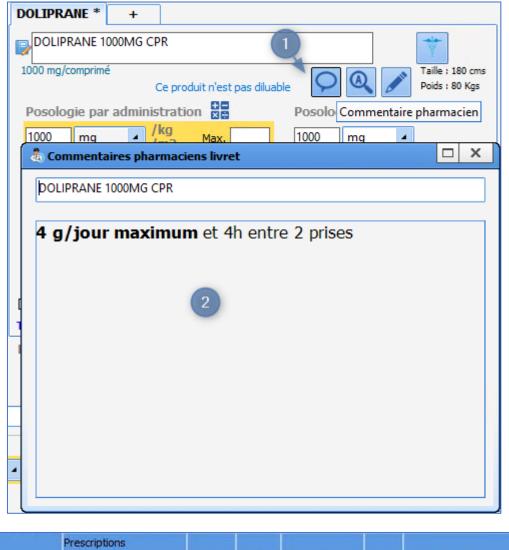

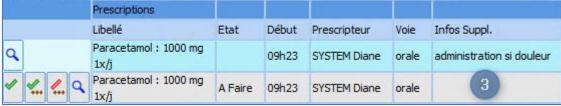

Le commentaire destiné aux prescripteurs (2) peut être mis en forme au moyen de balises HTML.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.14.4 Substitutions de produits pharmaceutiques

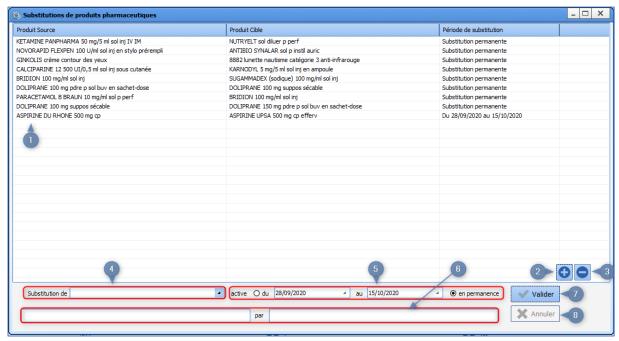

- 1. Liste des substitutions.
- 2. Ajoute une substitution.
- 3. Supprime la substitution sélectionnée.
- 4. Détermine le type de substitution.

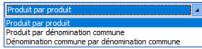

- 5. Période de la substitution.
- 6. Produits concernés par la substitution.
- 7. Valide les modifications effectuées.
- 8. Annule les modifications effectuées.

4.14.5 Dilution obligatoire

Certains produits (Livret thérapeutique) doivent être dilués (=Dilution obligatoire).

Pour ces produits, il est possible (non obligatoire) d'associer un ou plusieurs diluants.

En utilisation, si l'option **Dilution obligatoire** est activée, il n'est possible de valider la fenêtre de prescription que si le diluant est précisé :

- Si aucun diluant n'est configuré, il est possible de choisir n'importe quel diluant.
- Si un seul diluant est configuré, celui-ci est automatiquement sélectionné.
- Si plusieurs diluants sont configurés, il est uniquement possible de choisir parmi ces diluants.

Les diluants obligatoires se paramètrent dans **Configuration application**, onglet **Livret thérapeutique**. Pour chacun des produits auxquels associer des diluants obligatoires, il faut ouvrir la fenêtre **Edition d'un élément du livret thérapeutique** en double-cliquant sur la ligne du médicament concerné.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 192 / 419

Pour définir le ou les diluants obligatoires, il faut cliquer sur le bouton _____, ce qui ouvre la fenêtre Modification du dosage/dilution/conditionnement du produit.

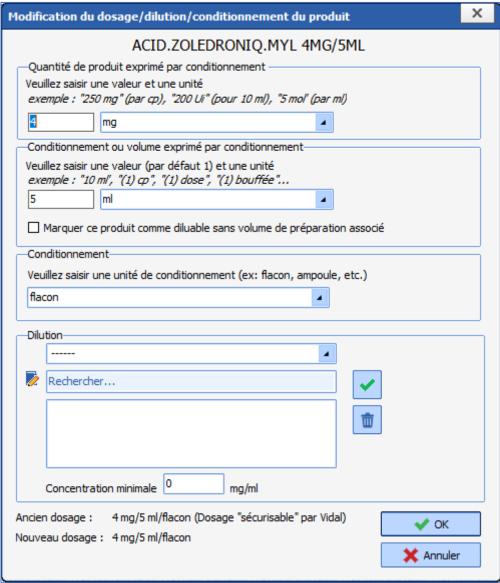

Il faut ensuite choisir sur **Produit avec dilution obligatoire** dans le menu déroulant et saisir les diluants. La recherche à la frappe permet de retrouver facilement les diluants parmi les éléments du livret thérapeutique.

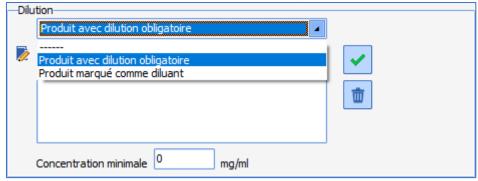



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 193 / 419

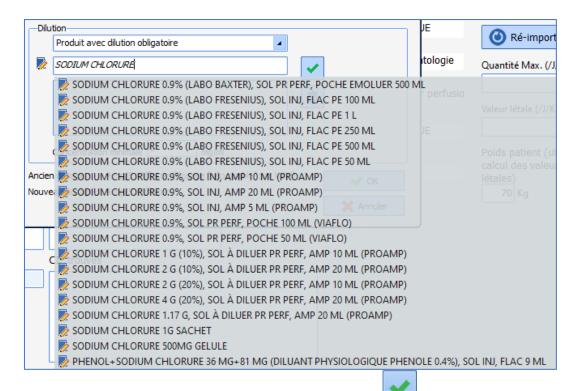

Une fois le diluant sélectionné, il faut le valider en cliquant sur le bouton

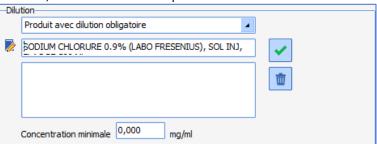

Il est ensuite possible de spécifier une concentration minimale qui devra être respectée pour pouvoir valider la prescription en utilisation.

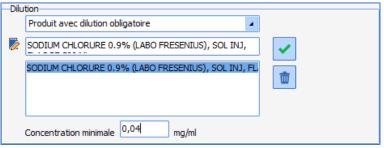

Il est possible de paramétrer autant de diluants obligatoires que nécessaire.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

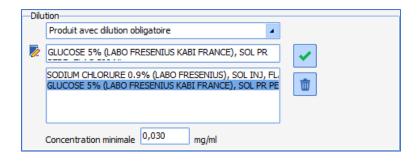


Le clic sur le bouton

permet de retirer le diluant de la liste.

4.14.6 Produits marqués comme diluants

Le choix **Produit marqué comme diluant** permet de proposer l'élément du livret comme diluant lors de la complétion de dilution depuis le plan de soin ou depuis la fenêtre d'édition des étiquettes médicamenteuses.

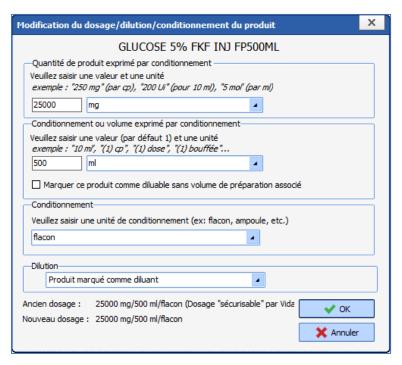

Attention : s'il y a au moins un produit marqué comme diluant, seul produit parmi cette liste sera utilisable dans le plan de soins quand la prescription ne précise pas de diluant.

4.14.7 Couleurs des médicaments d'anesthésie

La configuration des couleurs pour les médicaments d'anesthésie peut maintenant être ajustée depuis le livret thérapeutique. Cette couleur sera visible lors de l'administration directe des médicaments.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 195 / 419

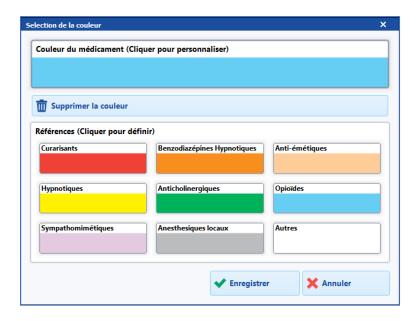

La couleur de référence peut être définie dans la fiche produit unitaire ou depuis la liste complète des produits.

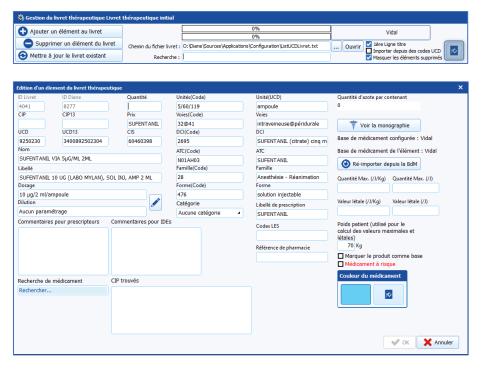

En plus d'une sélection de couleurs associées aux classes pharmacologiques, il est possible de définir d'autres couleurs en cliquant sur **Couleur du médicament (Cliquer pour personnaliser)**.

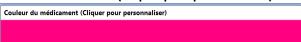



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 196 / 419



4.15 Médicaments

Cet onglet permet de gérer les éléments de **balance liquidienne** (pertes sanguines, diurèse, ...), les **médicaments** (drogues, médicaments, solutés, ...) et les **produits sanguins** (CGR, plaquettes, Clottafact, ...) administrés en bloc.

4.15.1 Présentation de l'onglet Médicaments

Cet onglet permet de configurer les médicaments, les balances liquidiennes et les produits sanguins. Leur utilisation DIANE ANESTHESIE (PerOp et PostOp) n'est possible que lorsque les items Médicaments, Balance Liquidienne et Produits Sanguins ont été insérés dans la liste des Evénements visibles dans le secteur sélectionné de l'onglet Evénements.

Ces intitulés ne peuvent et ne doivent pas être modifiés! Il en est de même pour les catégories (Antalgiques, Antibiotiques...)

Pour chaque catégorie, il est possible de :

- créer de nouveaux éléments,
- créer de nouvelles posologies, de nouvelles concentrations.

En anesthésie, il n'y a pas de communication avec les bases de données sur les médicaments (BCB / Vidal).

Afin d'alléger les listes, il est recommandé de gérer les médicaments disponibles pour le secteur.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com

Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 197 / 419

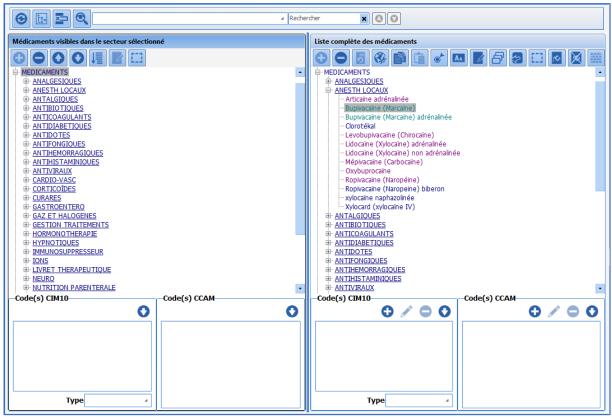

Légende des couleurs de médicaments :

Pas de posologie configurée et pas de prescription configurée Au moins une posologie configurée et pas de prescription configurée Pas de posologie configurée et au moins une prescription configurée Au moins une posologie configurée et au moins une prescription configurée

Glisser-déposer un élément à gauche ne déplace que l'élément sélectionné. Pour déplacer également ses enfants, il faut maintenir pressée la touche **ALT** en effectuant le glisser-déposer.

L'affichage en italique indique qu'un identifiant externe a été configuré pour l'élément (Catégorie, sélecteur ou produit) par l'intermédiaire du bouton .



4.15.2 Création, modification et suppression des posologies

Il est possible de modifier tous les éléments en ajoutant, modifiant ou supprimant des posologies.

Attention, il est impossible de renommer les catégories **Antalgiques**, **Antibiotiques**, **Anticoagulants**, **Ions** et **Solutés** car leurs listes sont récupérées pour la réalisation des prescriptions postopératoires de l'application **Visual**. Il est également impossible de créer un médicament en doublon.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 198 / 419

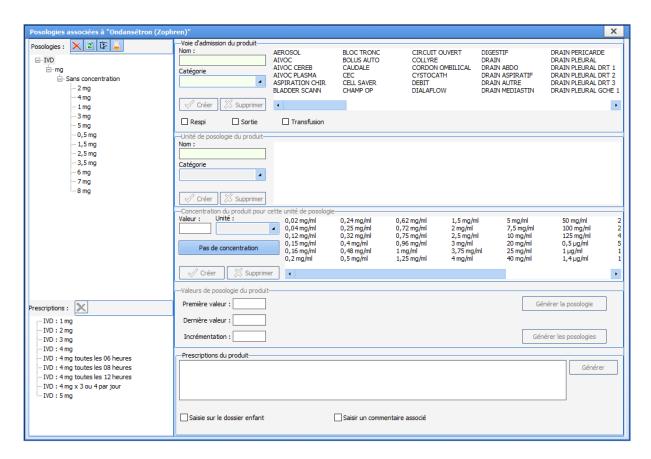

Dans la zone **Voie d'admission du produit**, sélectionner une voie d'administration comme IVD par exemple. Si la voie d'admission n'existe pas, il faut la créer en indiquant son **Nom** et sa **Catégorie**.

La voie par **Respi** est notamment utilisée pour l'enregistrement des gaz d'anesthésie manuellement ou pour les aérosols, celle par **Sortie** concerne les pertes liquidiennes, celle par **Transfusion** concerne les transfusions sanguines.

Les voies **BOLUS** auto, **PSE** auto et **TCI** auto sont des catégories réservées pour les appareils connectés. Dans la zone **Unité de posologie du produit**, sélectionner l'unité des nouvelles posologies (il est possible de créer une nouvelle unité en indiquant son nom et sa catégorie).

Pour la création de posologies en injection continue (en seringue électrique (SAP ou PSE) par exemple), il est possible de sélectionner une concentration dans la zone **Concentration du produit** (il est possible de créer une nouvelle concentration en indiquant sa **Valeur** et son **Unité**). Si l'on ne souhaite pas indiquer de concentration, il faut cliquer sur le bouton **Pas de concentration**.

Il faut ensuite indiquer les **Posologies** du médicament dans la zone **Valeurs de posologie du produit**. Pour cela, il est possible de renseigner valeur par valeur en complétant le champ **Première valeur** puis en cliquant sur **Générer la posologie**.

Pour renseigner un grand nombre de posologies avec un intervalle régulier entre chaque, il faut renseigner les champs **Première valeur** (valeur minimale), **Dernière valeur** (valeur maximale) et **Incrémentation** (intervalle) puis cliquer sur **Générer les posologies**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

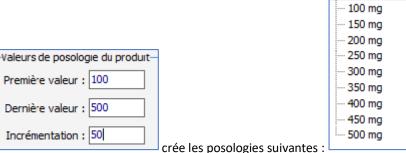

Par exemple, cette saisie

cree les posologies sulvantes .

Pour supprimer une **Voie d'admission**, une **Unité de posologie** ou une **Concentration**, il faut sélectionner l'item à supprimer et cliquer sur le bouton **Supprimer** correspondant.

Attention, dans ce cas, toutes les posologies associées seront également supprimées.

Il est possible de supprimer une ou plusieurs **Posologies** l'aide du bouton . Il est aussi possible de supprimer la(es) posologie(s) l'aide du clic droit de souris. Les touches Shift et Control du clavier permettent d'utiliser la sélection multiple. Pour supprimer toutes les posologies d'une voie d'admission, d'une unité ou d'une concentration, il suffit de supprimer directement la voie d'admission, l'unité ou la concentration.

La création de posologies reste possible à la volée en utilisation, mais ce mode de fonctionnement n'est pas pratique à l'usage.

Options de paramétrage :

Prescriptions du produit		
		Générer
Saisie sur le dossier enfant	☑ Saisir un commentaire associé	•
☑ Demander le volume associé à ce culot lors de la saisie	☑ Rendre obligatoire la saisie du numéro de lot (Fenêtre de saisie du	volume)

Plusieurs options de paramétrage sont disponibles dans la partie inférieure de la fenêtre.

- Saisie sur le dossier enfant est utilisée en obstétrique.
- Saisir un commentaire associé : dans le cas des produits nécessitant une traçabilité, il est possible d'avoir une fenêtre de commentaire qui s'ouvre automatiquement après la saisie.
- **Demander le volume associé à ce culot lors de la saisie** : dans le cas des produits administrés en culot ou en poche (dont le volume est variable), une fenêtre permet la saisie du volume du culot.
- Rendre obligatoire la saisie du numéro de lot (Fenêtre de saisie du volume): dans le cas des produits administrés en culot ou en poche, le champ N° de lot de la fenêtre de saisie du volume du culot est obligatoire (cette option nécessite l'activation de l'option Demander le volume associé à ce culot lors de la saisie).

4.15.3 Création, modification et suppression des prescriptions

Les prescriptions sont utilisées dans l'ancien onglet **Prescriptions** de **DIANE ANESTHESIE Visual (PerOp et PostOp)**. Dans la zone **Prescriptions du produit**, il faut indiquer les différentes prescriptions les unes à la suite des autres en passant à la ligne grâce à la touche Entrée du clavier.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102




Le bouton **Générer** permet de les ajouter aux prescriptions configurées dans la colonne de gauche.

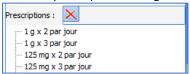

4.15.4 Associer un volume à un culot

Lorsque l'unité de posologie du produit est en culot, culots, culot(s), poche, poches ou poche(s), il est possible de demander le volume associé lors de la saisie. Pour cela, la case à cocher **Demander le volume associé à ce culot lors de la saisie** apparaît en bas à droite de la fenêtre. Ce choix s'applique à toutes les posologies en culot(s) ou en poche(s) du produit.

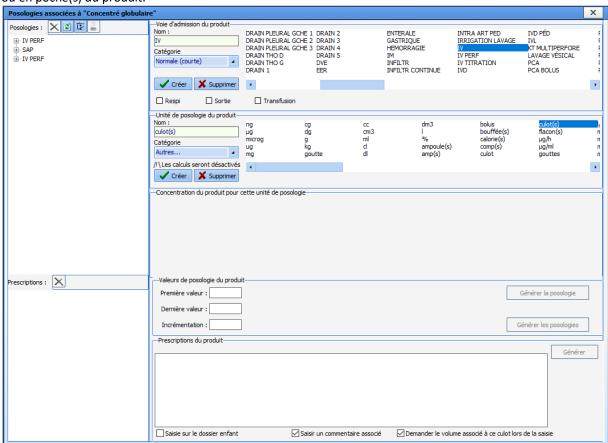

4.15.5 Associer des couleurs aux médicaments

Il est possible d'associer des couleurs aux médicaments DIANE. Le bouton permet d'ouvrir la fenêtre



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 201 / 419

Couleurs, ce qui permet d'associer une couleur au(x) médicament(s) sélectionné(s). Dans cet exemple, la couleur orange est attribuée au **Fentanyl**.

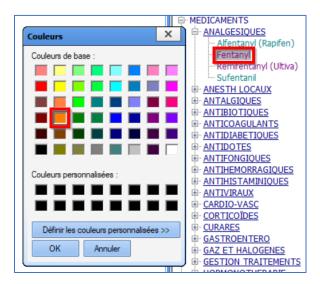

Lorsque le Fentanyl est utilisé, il apparaît en orange dans l'onglet Surveillance de Visual ou Bloc de DIANE REA.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.16 Paramétrages

Voir chapitre : Paramétrages

4.17 MD Favoris Pres./Ordo./Medic.

Pour le paramétrage des favoris de prescriptions, il est possible de modifier les favoris existants ou d'en créer de nouveaux.

Le livret thérapeutique doit avoir été importé avant de commencer la création de favoris, lors des mises à jour du livret, il est impératif de penser à vérifier les favoris impactés.

La création d'un favori s'effectue en 7 étapes :

1. Cliquer sur le bouton



2. Nommer le favori



3. Choisir le champ de prescription



4. Cliquer sur le bouton (il est nécessaire que le champ de prescription choisi soit paramétré dans l'affichage de l'onglet Prescription de la configuration DIANE REA basculée.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 203 / 419

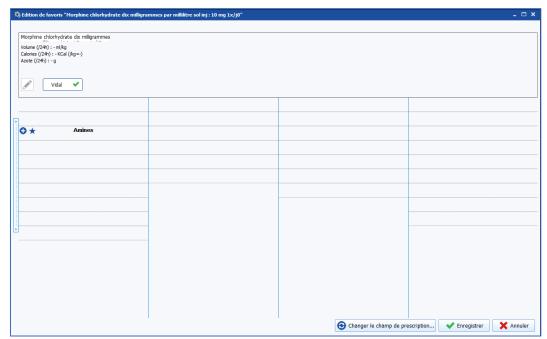

5. Saisir les informations du favori via la fenêtre de prescription guidée ou expert

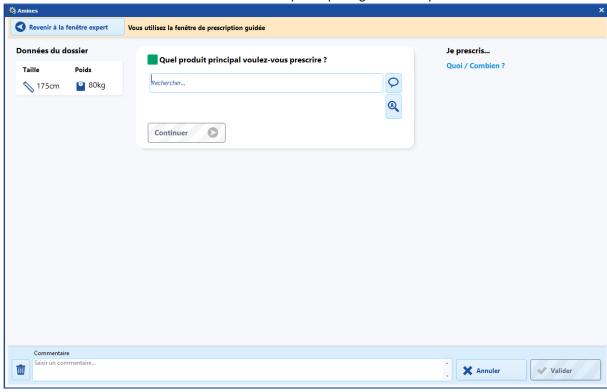

6. Valider

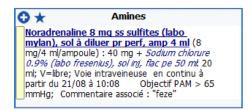

7. Enregistrer



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 204 / 419

Le bouton présent dans les fenêtres de prescription guidée et expert permet de supprimer une ligne de prescription dans un favori ou un protocole.


A l'utilisation, ceux-ci seront disponibles via l'étoile ** dans la catégorie de médicaments choisis dans l'onglet Prescription.



L'affichage en italique indique qu'un identifiant externe a été configuré pour le favori par l'intermédiaire du bouton .

4.17.1 Favoris

丽

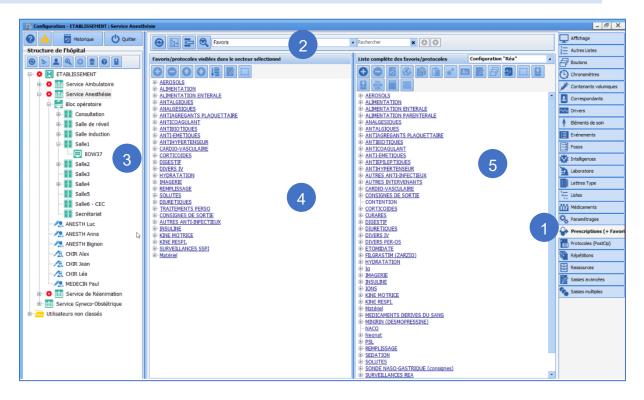

- 1. Pour ajouter des favoris, sélectionner l'onglet Favoris Pres./Ordo./Medic..
- 2. Sélectionner **Favoris** dans le menu déroulant.
- 3. Sélectionner le secteur dans lequel les favoris doivent être appliqués (roue crantée).
- 4. La colonne de gauche représente les favoris configurés dans le secteur sélectionné.
- Pour modifier un favori, il faut le sélectionner et l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton

 I'utilisation) puis cliquer sur

 Enregistrer

 L'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner et l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer un favori, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton l'éditer. Pour créer la prescription (comme à l'éditer. Pour créer le prescription (comme à l'éditer. Pour créer le prescription l'éditer. Pour créer l'é



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 205 / 419


4.17.2 Protocoles

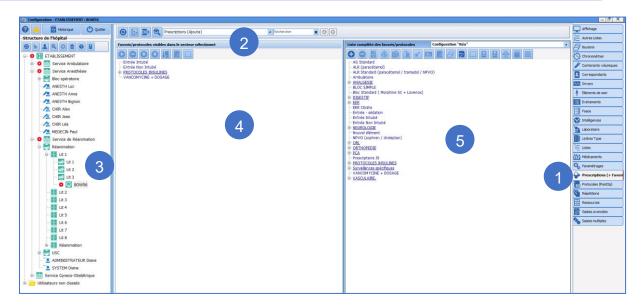

- 1. Pour créer un protocole (groupe de prescriptions), sélectionner l'onglet Prescriptions (+ Favoris).
- 2. Sélectionner Prescriptions (Ajoute) dans le menu déroulant.
- 3. Sélectionner le secteur dans lequel les protocoles doivent être appliqués (roue crantées).
- 4. La colonne de gauche représente les favoris protocoles dans le secteur sélectionné.
- 5. Pour modifier un protocole, il faut le sélectionner et l'éditer. Pour créer un protocole, il faut sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton.



Il suffit de créer les différentes prescriptions désirées pour le protocole, puis cliquer sur

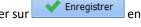



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 206 / 419

4.17.3 Validation/Approbation des favoris de prescription

Les favoris/protocoles de prescription publics sont soumis à approbation (les favoris privés ne sont pas concernés). Seuls les utilisateurs possédant le droit **Approbation des favoris/protocoles de prescription** ont le droit d'approuver un favori/protocole de prescription.

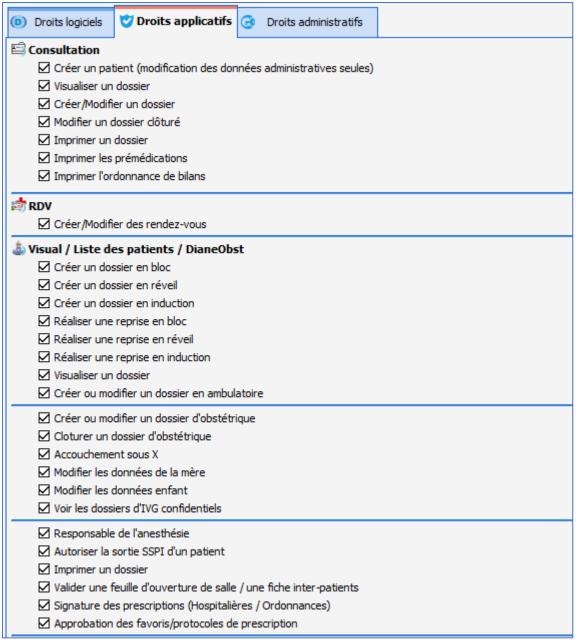

Cette opération s'effectue en configuration. Les protocoles et favoris qui n'ont pas été approuvés apparaissent en rouge dans l'onglet **Prescriptions** (+Favoris).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

```
## FILGRASTIM (ZARZIO)


Gaz du sang: x1 à 22h, x1 à 8h

Glucose 5 %+ potassium chlorure 0,2 %+ sodium chlorure 0,4 %: 1000 ml en continu

HYDRATATION

Hydroxyethylamidon 130 000 6 %+ sodium chlorure 0,9 %: 500 ml; D=1h 2x/j
```

Si le protocole/favori n'est pas encore approuvé, la date de la dernière modification est spécifiée, ainsi que l'utilisateur qui en est l'auteur. Un bouton **Approuver** permet d'approuver le protocole ou favori de prescription.

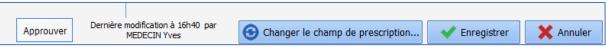

Si l'utilisateur ne possède pas le droit, il n'est pas autorisé à approuver.



Une fois approuvé, la date d'approbation et l'utilisateur qui l'a effectuée sont indiqués et le protocole/favori apparaît en bleu dans l'onglet **Prescriptions** (+Favoris).



Si un utilisateur n'ayant pas le droit d'approuver modifie un protocole/favori, celui-ci doit à nouveau être approuvé. En revanche, si l'utilisateur qui le modifie possède le droit d'approbation, le protocole/favori est automatiquement approuvé.

4.17.4 Relais (traitement) // Arrêt (traitement)

Les conciliations et les arrêts proposés lors de la consultation dans l'onglet **Traitement / prémédications** se gèrent dans cette partie de l'onglet **Prescriptions (+favoris)**

Le travail se fait par classe ATC.

Ces favoris se créent en suivant différentes étapes :

- Créer un nouveau groupe via et le nommer
- Sélectionner le et cliquer sur
- Déterminer via la fenêtre suivante les médicaments ou les classes ATC concernées



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 208 / 419

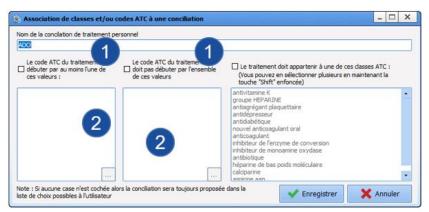

- Dans cette fenêtre, cocher la case 1 qui correspond aux attentes.
- Le bouton en bas de la zone 2 permet d'accéder aux classes existantes et de sélectionner celles concernées par le paramétrage en cours
- Enregistrer
- Editer le formulaire via le bouton
- Cliquer sur pour accéder à la fenêtre de paramétrage du médicament
- Saisir dans la partie supérieure, le médicament qui servira pour le relais ainsi que sa posologie et la voie d'administration

La partie inférieure va permettre d'organiser la date d'arrêt du traitement habituel, la date de début du traitement relais, la durée du traitement de relais.

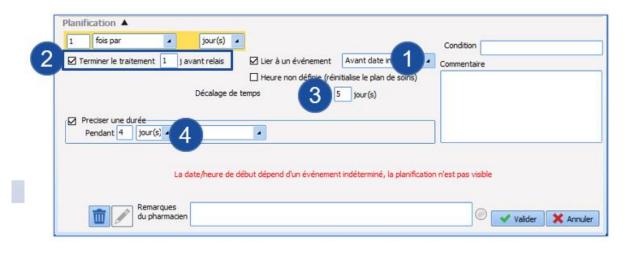

La zone 1 permet de signaler que ce relais sera organisé autour de la date d'intervention.

La zone 2 permet de déterminer le décalage qu'il y aura entre la date d'arrêt du traitement habituel du patient et la date de démarrage du médicament relais.

La zone 3 détermine la date de démarrage du médicament relais

La zone 4 détermine combien de jours doit être pris le médicament relais

Ainsi dans cet exemple:

- Le relais s'organise autour de la date d'intervention.
- Le médicament habituel sera arrêté la veille du démarrage du médicament relais
- Le médicament relais commencera 5 jours avant la date d'intervention et sera pris pendant 4 jours.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


4.17.5 Produits en administration directe

Cet onglet permet de paramétrer les médicaments du livret à utiliser en anesthésie.

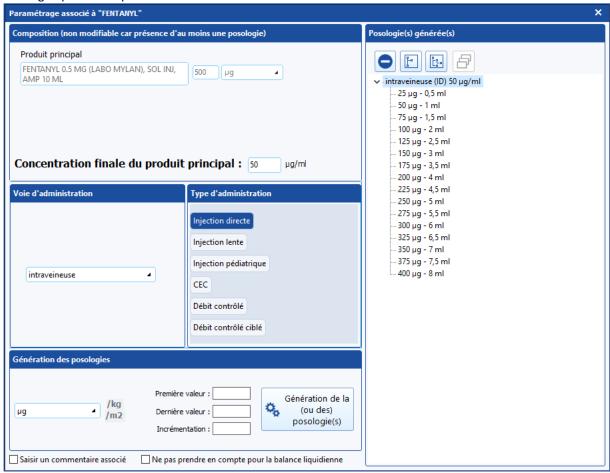

4.17.5.1 Composition

La zone Composition permet de configurer le (ou les) produit(s) contenu dans le médicament.

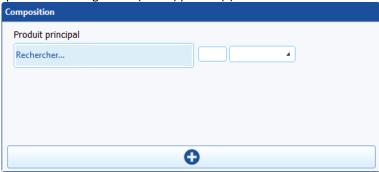

La champ **Produit principal** permet de sélectionner le produit principal à partir des éléments du livret thérapeutique.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Composition			
Produit principal			
ALFENTANIL 1 MG (RAPIFEN), SOL INJ, AMP 2 1000 µg			
Concentration finale du produit principal : 500 µg/ml			
•			

La zone unité reprend les unités associées au produit principal récupérées directement depuis le livret thérapeutique.

Le clic sur le bouton **ajoute une ligne Produit additionnel**.

Produit additionel		
Rechercher	4	


Cette ligne fonctionne de la même façon que le produit principal mais permet de choisir un produit secondaire.

Il est possible de cliquer autant de fois que voulu sur le bouton afin d'associer autant de produits que nécessaire. Chaque ligne ajoutée est précédée du libellé **Produit additionnel** et comporte une case à cocher **Diluant**. Cette case à cocher permet de définir quel produit parmi les produits additionnels est le diluant. Un seul produit peut être considéré comme diluant.

Produit additionel Diluant				
GLUCOSE 10% (LABO B BRAUN), SOL PR PERF, POCHE 1 L	1000 m	nl 🔺	葷	

En bas de cette zone, la **Concentration finale du produit principal** est affichée. Elle est éditable et modifie le volume de diluant.

4.17.5.2 Voie d'administration

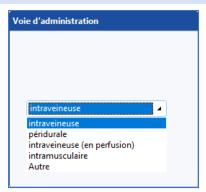

Les voies sont celles configurées pour le produit principal dans le livret thérapeutique. Il est possible de saisir une voie **Autre**. Dans ce cas, une fenêtre invite à préciser la voie d'administration.





BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.17.5.3 Type d'administration

6 types d'administration sont disponibles : Injection directe (ID), Injection lente (IL), Injection pédiatrique (I Ped), CEC, Débit contrôlé (PSE) et Débit contrôlé ciblé (PSE ciblé).



4.17.5.4 Génération des posologies

Le nombre de produits et le type d'administration conditionnent la génération des posologies à l'étape suivante cible et ou débit).

Dans le cas où il n'y a qu'un seul produit principal, les unités disponibles sont les unités compatibles avec celle du produit principal.

- Injection directe (ID): posologie en quantité par administration, cible par kg ou m² possible
- Injection lente (IL): posologie en quantité par heure ou par minute, cible par kg ou m² possible
- Injection pédiatrique (I Ped): posologie en quantité par administration, cible par kg ou m² possible
- **CEC**: posologie en quantité par administration, cible par kg ou m² possible
- Débit contrôlé (**PSE**) : posologie en quantité par heure ou par minute, cible par kg ou m² possible
- Débit contrôlé ciblé (PSE ciblé): posologie en quantité par heure ou par minute, cible par kg ou m² possible

S'il y a plusieurs produits, l'unité est le millilitre (ml) ou les gouttes.

- Injection directe (ID) : posologie en ml de mélange
- Injection lente (IL): posologie en ml ou en gouttes de mélange par heure ou par minute
- Injection pédiatrique (I Ped) : posologie en ml de mélange
- CEC : posologie en ml de mélange
- Débit contrôlé (PSE) : posologie en ml ou en gouttes de mélange par heure ou par minute
- Débit contrôlé ciblé (PSE ciblé): posologie en quantité par heure ou par minute, cible par kg ou m² possible



Il est possible de créer les valeurs une par une en remplissant le champ **Première valeur** et en cliquant sur le bouton **Génération de la (ou des) posologie(s)**.

Il est aussi possible de créer une série de posologie en : remplissant le champ **Première valeur** avec la valeur la plus basse, **Dernière valeur** avec la valeur la plus haute, puis en renseignant le pas d'**Incrémentation**. En cliquant sur le bouton **Génération de la (ou des) posologie(s)**, alors les valeurs seront créées en partant de la valeur la plus basse jusqu'à la valeur la plus haute en respectant l'intervalle entre chaque valeur.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.17.5.5 Association d'un bouton

Un bouton peut être associé à une posologie ou à un groupe de posologies. Pour cela, il faut sélectionner la posologie ou le groupe et cliquer sur le bouton (Associer un bouton à la posologie sélectionnée).




Il est ensuite possible de renommer le bouton.




Un message confirme la création du bouton.




L'association d'un bouton à un produit ou à une catégorie se fait au niveau de la liste complète avec le bouton

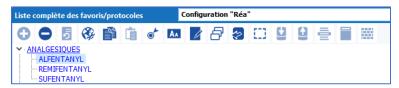

Il est ensuite possible de renommer le bouton.

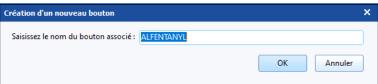

Un message confirme la création du bouton.

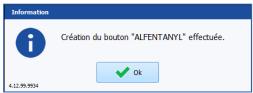



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Les boutons créés sont dans les catégories suivantes :

- Admin directe (Favori(s))
- Admin directe (Groupe de poso)
- Admin directe (Posologie)

4.17.6 Favoris pour administration à la demande

La saisie d'administration demandées oralement par un médecin peut être restreinte à certains favoris configurés dans l'onglet **Favoris Pres./Ordo./Medic.**, sous onglet **Favoris pour administration à la demande**.

Par défaut, la liste complète des favoris (à droite) reprend l'ensemble des favoris de prescription.

La création, la modification et la suppression de favoris pour administration à la demande est similaire à celle des favoris de prescription.


Seuls les favoris basculés à gauche dans la liste des favoris sont utilisables dans le secteur sélectionné.

4.18 Protocoles (PostOp)

C'est à partir de cet onglet que sont configurés tous les protocoles et les prescriptions postopératoires utilisés sous forme de boutons dans l'onglet **Prescriptions** de l'application **Visual**.

4.18.1 Créer une nouvelle configuration de prescription

La création ou la modification d'une configuration de prescription pour le module **Visual** s'effectue dans l'onglet **Affichage**. Il faut ensuite sélectionner la configuration dans laquelle figure l'onglet de prescriptions.

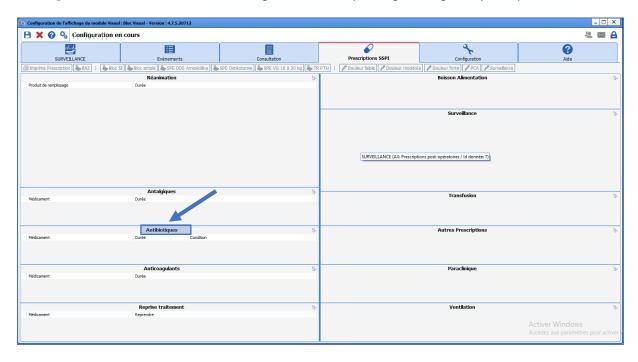

Dans cet exemple, l'élément configuré est le champ **Antibiotiques**. Un clic droit fait apparaître un menu pour accéder à la configuration du composant.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

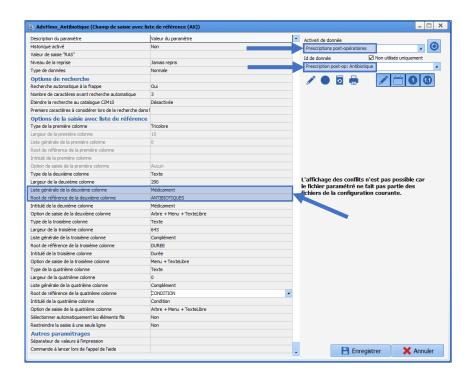

Pour configurer le composant, il faut d'abord configurer l'ActiveX et l'Id de donnée voulu (dans cet exemple : **Prescription post-opératoires/Antibiotique**) et choisir l'intitulé.

Il faut penser à mettre la liste générale sur **Médicament** et le root de référence (dans cet exemple : **ANTIBIOTIQUES**). Ce dernier fait appel aux catégories présente dans la partie médicaments.

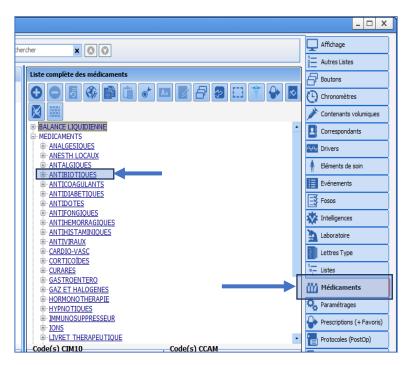

Pour ce qui concerne les surveillances, les bilans biologiques, l'alimentation, etc..., cela fera appel aux listes **Consultation** >> **SURVEILLANCE**... **PARACLINIQUE** ... **ALIMENTATION** ...



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

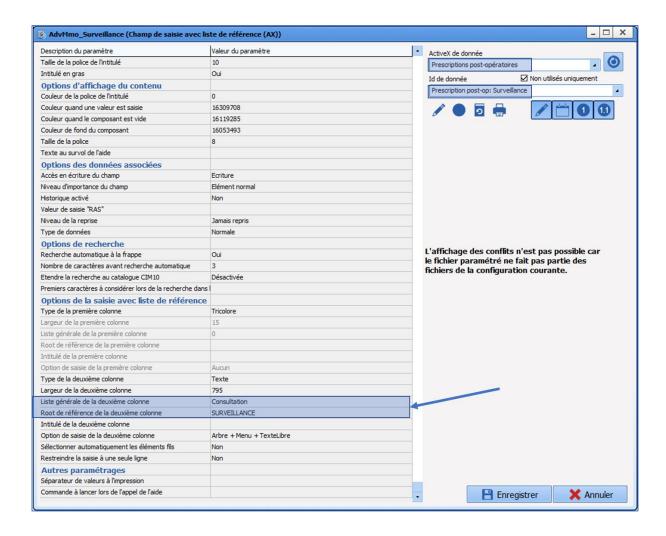

4.18.2 Créer un nouveau protocole / une nouvelle prescription

- Cliquer sur le bouton (Créer un nouveau protocole ou une nouvelle prescription).
- Indiquer le nom du protocole ou de la prescription.





BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

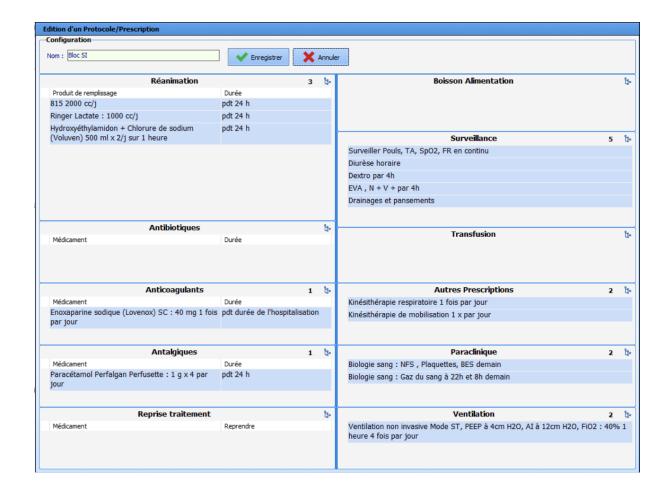

C'est également à partir de cet onglet qu'il est possible de créer les boutons de prescriptions et de protocoles à utiliser en per et/ou postopératoire. Ceci est réalisable grâce au bouton (Associer l'élément à un bouton configurable).



4.18.3 Créer un protocole POST OP

Dans l'onglet Protocoles (PostOp), cliquer sur le bouton : cela édite le formulaire, tel qu'il est configuré dans l'onglet VISUAL.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 217 / 419

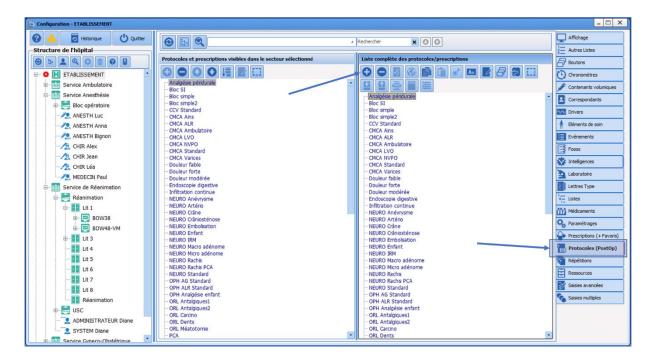

Pour composer le protocole ou la prescription, il faut remplir les différents champs de prescriptions. Plusieurs méthodes sont possibles :

- Manuellement en saisissant directement le texte,
- En ouvrant l'arbre avec les différents items configurés grâce au bouton ¹
- En double cliquant pour faire apparaître l'arbre avec les différents items configurés,
- En faisant un clic droit pour faire apparaître le menu avec les différents items configurés.

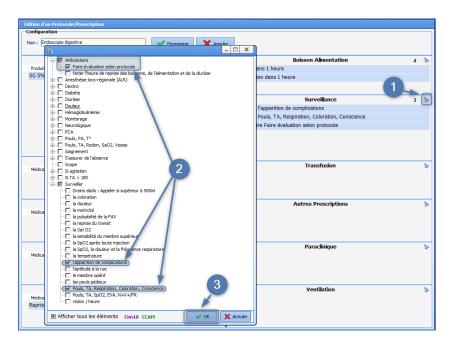

Cliquer sur **OK** pour valider Puis sur **Enregistrer** qui se trouve en haut de la fenêtre

Tous les items disponibles ont été configurés à partir de l'onglet Médicaments (Solutés pour les Réanimation, Antalgiques, Antibiotiques, Anticoagulants, et tous les médicaments pour la Reprise



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Traitements), à partir de l'onglet **Autres Listes** (pour les Durée et Condition) ; et à partir de l'onglet Listes (pour les prescriptions **Boisson/Alimentation**, **Surveillance**, **Ventilation**, **Paraclinique**, **Transfusion**, **Autres prescriptions**).

Pour modifier un protocole ou une prescription, il faut le sélectionner dans la liste complète et cliquer sur le bouton (Editer l'élément). Il est possible d'ajouter, de supprimer ou de modifier les items du protocole ou de la prescription. Après la modification ou la création d'un protocole ou d'une prescription, il faut cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

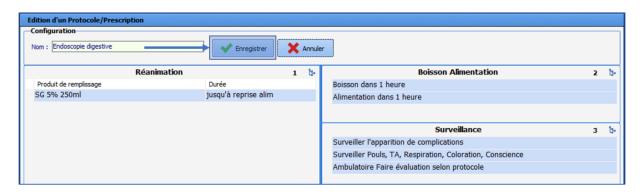

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

4.19 Répétitions

Cet onglet sert à paramétrer les répétitions utilisées dans les planifications horaires et les planifications de traitements (« matin-midi-soir », « 1-0-1 », « le soir », …). Le paramétrage de ces répétitions permet de définir des heures par défaut correspondantes aux habitudes de services ex : Soir = 18h

4.20 Ressources

Cet onglet contient toutes les images, modèles, procédures, protocoles infirmiers et médicaux, templates d'impressions et vidéos configurés dans le logiciel :

- Annotations (fichiers *.bmp et *.jpg)
 Fichiers présents dans l'onglet Documents
- **Fichiers** (fichiers *.*)
- Icônes (fichiers *.ico)
- Image Bitmap (fichiers *.bmp)

Icônes associées aux boutons présents dans l'onglet Configuration des applications Visual, DianeRéa et DianeObstétrique.

Image JPEG (fichiers *.jpg)

Images des équipements biomédicaux sur lesquels **DIANE** peut se connecter : ces images sont visibles dans l'onglet **Configuration** des applications **Visual**, **DianeRéa** et **DianeObstétrique**.

- Image PNG (fichiers *.png)
- Modèle DiaReport (fichiers *.rtf)
- Procédures (fichiers *.rtf)
- Protocoles Infirmiers (fichiers *.rtf)
- Protocoles Médicaux (fichiers *.rtf)
- Templates d'Impression XSL (fichiers *.xsl)
- **Vidéo** (fichiers *.avi)

Pour importer un nouveau fichier, il faut sélectionner le type de fichier à insérer à l'aide de la liste déroulante :

- Cliquer sur le bouton (Créer une nouvelle ressource).
- Saisir le nom du nouvel élément.



• Cliquer sur le bouton Sélectionner le fichier ressource.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 220 / 419

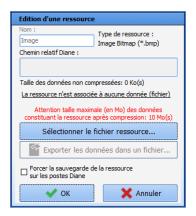

Les fichiers doivent impérativement être enregistrés dans le répertoire du logiciel **DIANE** (C:\Program Files\Diane\Data\) pour pouvoir les importer.

Une fois le fichier sélectionner, son chemin relatif dans le répertoire **Diane** apparaît. Il est possible d'exporter le fichier dans un autre dossier et de supprimer le chemin relatif grâce au bouton **Supprimer les données associées à la ressource** (cela ne supprime ni la ressource, ni le fichier).



4.20.1 Activer un entête personnalisé sur les impressions HTML

Il est possible d'activer un entête (header) personnalisé sur les impressions « HTML ». Pour cela, il faut disposer d'un fichier XSL comportant les modifications demandées par rapport au header par défaut.

Ce principe est applicable à toutes les impressions dites « HTML », qui correspondent à l'utilisation de cette fenêtre :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 221 / 419

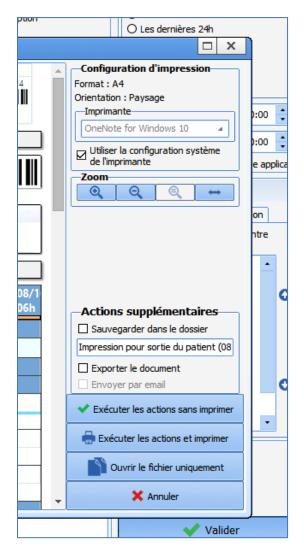

Dans cet exemple, le fichier XSL fourni s'appellera « headerperso.xsl » mais le nom peut être différent et plus spécifique (ex: "headerprescription.xsl"). Attention, le nom du fichier a son importance pour la suite du paramétrage.

Toutes les manipulations suivantes sont à réaliser dans l'outil de configuration.

• Importation de la ressource

Aller dans l'onglet Ressources, catégorie Templates d'impression XSL et créer une nouvelle ressource.

BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

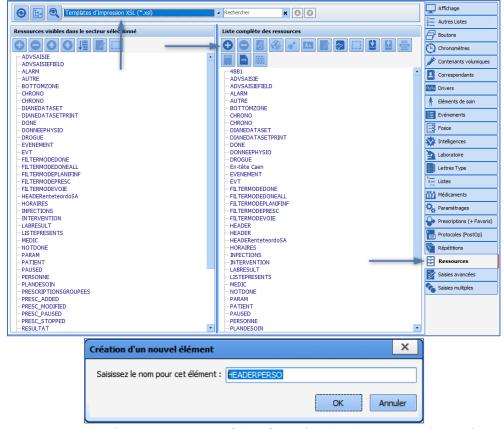

Il est important de rester cohérent avec le nom de fichier fourni (ici « headerperso.xsl ») pour s'y retrouver par la suite. Pour cet exemple, la ressource sera donc nommée « HEADERPERSO ».

Il est fortement recommandé de garder la même cohérence entre nom de ressource et nom de fichier. La majorité des problèmes rencontrés lors de la configuration viennent de confusions à ce niveau.

Il faut placer le fichier XSL « headerperso.xsl » dans le répertoire DIANE « ...\Data\xxx\Templates\xsl » et importer le fichier « headerperso.xsl » dans la ressource nouvellement créée.

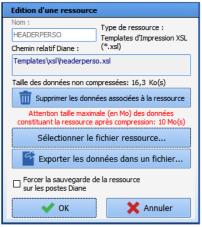

Il ne faut pas oublier de basculer la ressource « HEADERPERSO » pour la rendre disponible. Une fois la ressource correctement importée et nommée, il est possible de l'activer.

• Activation du header

L'activation se paramètre dans l'onglet **Paramétrages**, catégorie **Impression**. Editer la configuration correspondante à l'emplacement désiré dans l'arborescence.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 223 / 419

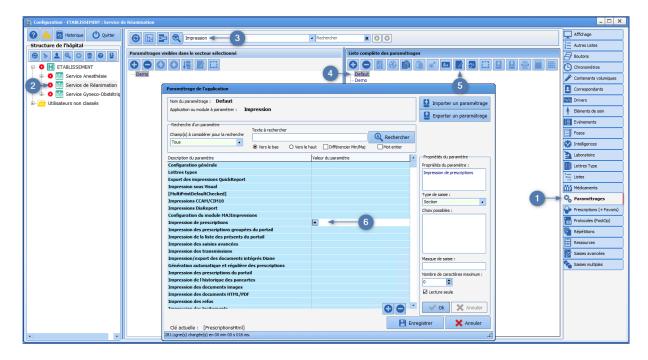


Différentes impressions sont listées dans ce paramétrage (Prescriptions, Saisies avancées...) : il faut configurer le header personnalisé pour chaque impression où il doit être utilisé.

Cela permet d'activer ou non des headers personnalisés différents pour chaque impression « HTML ».

Exemple avec l'impression des prescriptions :

Il faut modifier la valeur de ces deux clés :

- Utilisation d'un header personnalisé => cocher pour le passer à 1.
- Nom de la ressource utilisée en tant que header personnalisé => taper le nom du fichier importé précédemment : dans cet exemple « headerperso.xsl »

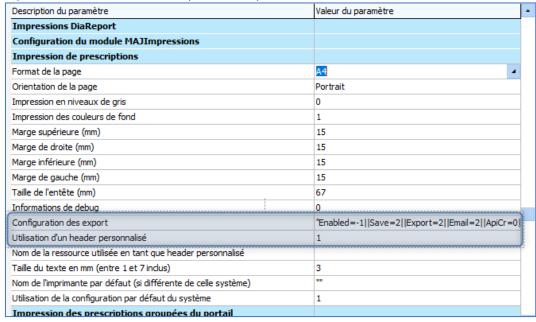

Note: c'est bien le nom du fichier avec l'extension « .xsl » qu'il faut saisir.

Il faut ensuite valider le tout, redémarrer DIANE, via la procédure habituelle et tester sur une impression pour



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 224 / 419

laquelle cet header a été activé (dans cet exemple, l'impression des prescriptions).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif mé

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 225 / 419

4.21 Saisies avancées (SA)

Une saisie avancée est un formulaire permettant de renseigner des éléments, de calculer un score, de prescrire un bilan...

Quatre types de de saisies avancées sont disponibles dans l'application : Bilans / Examens spécifiques / saisies avancées / Scores.

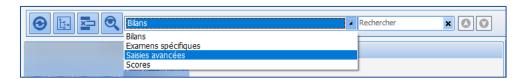

Les saisies avancées de type **Bilans** et **Examens spécifiques** sont dédiées au module de consultation **DIANE**. Les **saisies avancées** et les saisies avancées de type **Scores** sont utilisables dans tout le logiciel **DIANE**.

Il est à noter que les saisies avancées de type **Scores** pourront remonter de Visual vers la consultation suivante. Ainsi pour le Cormack par exemple, il faudra utiliser une saisie avancée de type **Scores** pour le renseigner en per opératoire et le voir automatiquement lors d'une consultation ultérieure.

4.21.1 Généralités sur les saisies avancées

Créer ou travailler sur une saisie avancée existante se fait dans l'onglet Saisie avancée.

Une saisie avancée utilisée en production n'est plus modifiable. Il faudra alors la dupliquer pour la retravailler. Une fois terminée, il faudra la rendre disponible pour les secteurs l'utilisant et penser à gérer son intégration dans l'application. (Paramétrage des actions importantes, affichage dans les saisies multiples, dans les boutons, dans l'onglet Prescription...)

Il n'y a pas d'Ax/Id sur une saisie avancée. Elle s'enregistre entièrement.

L'affichage en italique indique qu'un identifiant externe a été configuré pour la saisie avancée par l'intermédiaire du bouton .

4.21.1.1 Créer une saisie avancée

- Choisir la section pour laquelle la saisie avancée est créée (Bilans / Examens spécifiques / Saisies avancées / Scores)
- Cliquer sur
- Nommer la saisie avancée
- Composer la partie à l'aide des composants proposés
- Chaque composant se positionne par un glisser-déposer
- Enregistrer la saisie avancée

Penser à la mettre à disposition des secteurs en la glissant dans la colonne de gauche.

4.21.1.2 Configuration d'une saisie avancée



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 226 / 419

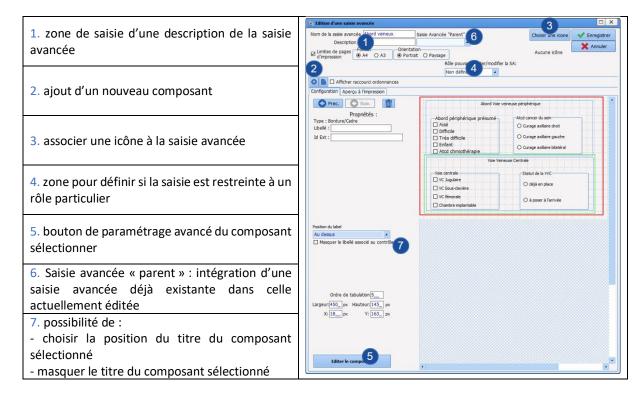

Pour gérer la tabulation d'un composant à l'autre, il faut :

- Finir de composer l'intégralité de la saisie avancée
- Editer un des composants
- Sélectionner la ligne « ordre de tabulation »
- Cliquer sur le bouton
- Gérer l'ordre des composants.

Note: L'ordre de tabulation permet de faciliter la saisie, mais il détermine également l'ordre d'affichage du résumé.

4.21.1.3 Les composants disponibles pour une saisie avancée

- Le libellé
- La case à cocher
- Le champ de saisie simple
- Le champ de saisies multilignes
- Le menu déroulant
- Le groupe de bouton radio
- Le groupe de cases à cocher
- Le champ de saisie avec liste de référence (Dialist memo)
- La Bordure/cadre
- Le bouton
- Le bouton (AX)
- Le sous-score
- Le bouton de valeurs prédéfinies
- Les données Diane
- Le sous-score (affichage intégré)
- La saisie d'événement via un bouton



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

• L'affichage des dossiers du patient sous forme de texte

Permet d'ajouter un texte. Le texte se rédige dans Score permettant d'évaluer la probabilité de naussées / vomissements post-opératoires (NVPO Libellé la partie Libellé. Ajoute une case à cocher. Son intitulé se saisit dans Case à cocher Urgence la case Libellé. Ajoute un menu déroulant. Son intitulé se saisit dans la case Libellé. Menu déroulant Les différentes valeurs Liste de choix possibles : se définissent comme suit : 1=... 2=... Crée un bordure/cadre (esthétique) Bordure/Cadre Nécessité d'associer un titre (libellé). Permet d'ajouter un bouton auquel pourra être associé un comportement Bouton Impressions (appel contextuel, impression etc) Ne pas utiliser le bouton (AX). Bouton (AX) Ajoute un bouton pour lequel il sera possible d'associer Bouton de valeurs prédéfinies des valeurs par défaut.






43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

BOW MEDICAL SAS

Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

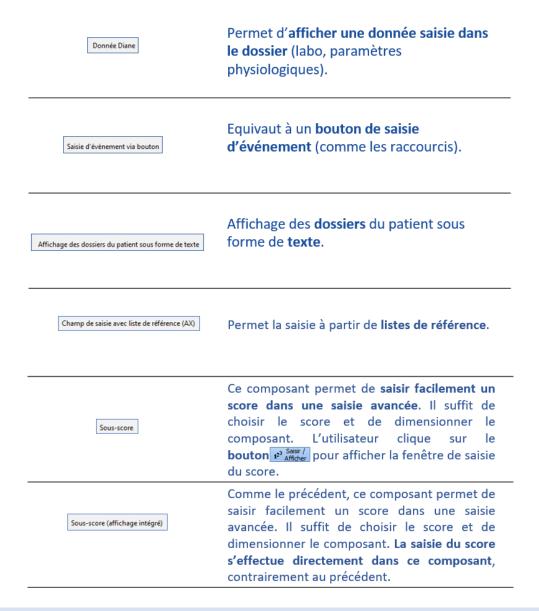

4.21.1.4 Modifier une saisie avancée

Une saisie avancée utilisée en production ne peut plus être modifiée. Ceci permet de s'assurer qu'elle pourra être entièrement vue lors de l'ouverture d'un ancien dossier.

Pour modifier une saisie avancée, il faut :

- Dupliquer et travailler sur la nouvelle version.
- Renommer l'ancienne version en la précédant par des Z
- Renommer la nouvelle version pour la cohérence vis-à-vis des utilisateurs
- Retirer l'ancienne version de l'affichage et la remplacer par la nouvelle version

4.21.1.5 Ax/Id et saisies avancées

Il est possible d'affecter des Ax/ld sur des composants de la saisie avancée. Cela aura pour effet de faire communiquer les éléments de la saisie avancée avec des composants externes.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 229 / 419

Pour cela, il faudra:

- Sélectionner le composant concerné
- Cliquer sur **Editer le composant** (situé en bas à gauche de la fenêtre)

S'ouvre alors la fenêtre de paramétrage du composant décrite dans la partie *Les composants disponibles dans l'application*.

4.21.2 Particularités de la saisie avancée de type Bilan

Les saisies avancées de type **Bilan** ne sont utilisables que dans le composant dédié en consultation. Elles permettront d'éditer les ordonnances associées.

Une vigilance sera accordée au choix du titre du bilan car celui-ci sera repris dans l'ordonnance.

Il existe un tag pour éditer toutes les saisies avancées de ce composant : « bilanspecifiques ». Ce tag aura pour effet d'éditer uniquement les cases cochées des différentes saisies à disposition.

Si chaque saisie avancée doit donner lieu à une ordonnance différente, il faudra alors créer un tag personnalisé au moment de la création de la lettre type. (cf. chapitre *Lettres types*)

Il est à noter que certaines fonctionnalités générales ne sont pas disponibles pour ces saisies avancées.

4.21.3 Particularités de la saisie avancée de type examens spécifiques

Les saisies avancées de type **Examens spécifiques** ne sont utilisables que dans le composant dédié. (surtout utilisé en consultation)

Une vigilance sera accordée au choix du titre du bilan car celui-ci sera repris à l'impression.

Le tag d'impression pour éditer toutes les saisies avancées utilisées est « examenspecifique ».

Il est à noter que certaines fonctionnalités générales ne sont pas disponibles pour ces saisies avancées.

4.21.4 Particularités de la saisie avancée de type Scores

4.21.4.1 Particularités de paramétrage des saisies avancées de type Scores

- 8. Possibilités de :
- Masquer le libellé
- Inclure la valeur dans un calcul
- Mettre le champ en lecture seule et résultat du calcul
- Champ obligatoire
- Données enfant (module obstétrique)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

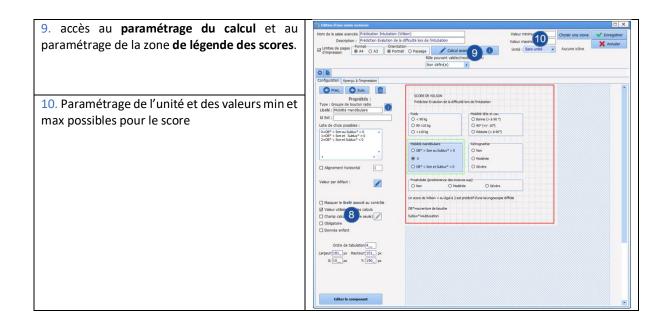

4.21.4.2 Paramétrage du calcul du score dans la saisie avancée

Avant de paramétrer le calcul, il faut créer la saisie avancée comme les saisies avancées classiques. La différence va résider dans l'écriture des choix possibles.

Pour les menu déroulant, les groupes de cases à cocher ou les boutons radio, jusqu'à présent l'écriture se faisait : A=choix 1 | B=choix 2 ...

Dans le cadre du calcul, les lettres seront remplacées par la valeur prise en compte pour le calcul : 1= choix 1 | | 2= choix 2...

- Pour les champs utilisés dans le calcul du score penser à cocher la case « Valeur utilisée dans les calculs ».
- Renseigner l'unité dans lequel sera affiché le score (il existe l'item « sans unité » proposée en milieu de liste)
- Renseigner les valeurs minimales et maximales possibles du score. Ne pas oublier que les cases à cocher peuvent accepter plusieurs coches dans le même composant.
- Accéder au paramétrage de la formule de calcul via le bouton



- Le nom des variables reprend par défaut le titre des composants. Il est possible de les renommer afin de faciliter l'écriture de la formule dans la zone dédiée.
- Ecrire la formule de calcul
- Tester la formule



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Formule utilisée pour le calcul

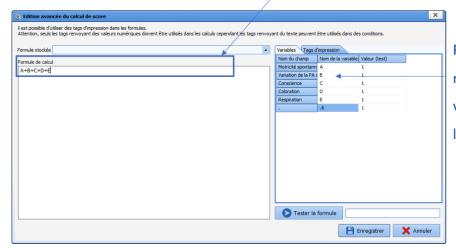

Possibilité de renommer les variables via un double clic dans la case

4.21.5 Modes d'affichage des saisies avancées dans la consultation

4.21.5.1 L'affichage des saisies avancées de type Bilans

Dans le module de consultation se trouve un composant nommé « BilanGroupBox (Examen) ».



Via un clic droit, il sera possible d'accéder à la fenêtre de paramétrage qui permettra de déterminer son **onglet parent**, son **titre** ainsi que diverses fonctions accessoires.

Pour le positionner dans l'onglet, il faut le déplacer et cliquer une deuxième fois sur l'endroit voulu. La flèche en bas à droite permet de gérer la largeur et la hauteur du composant.

Un clic sur permettra d'ouvrir la fenêtre de sélection des saisies avancées disponibles afin de choisir celles qui seront affichées. Cette arborescence est disponible aussi pour l'utilisateur. Les saisies avancées seront celles de la liste **Bilans** disponible pour le secteur.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Il faut prévoir un bouton d'édition à proximité de ce composant afin de pouvoir déclencher l'édition associée à la sélection faite.

4.21.5.2 L'affichage des saisies avancées de type Examens spécifiques


Dans le module de consultation se trouve un composant nommé « ExamenGroupBox (Examens) ».



Via un clic droit, il sera possible d'accéder à la fenêtre de paramétrage qui permettra de déterminer son **onglet parent**, son **titre** ainsi que diverses fonctions accessoires.

Pour le positionner dans l'onglet, il faut le déplacer et cliquer une deuxième fois sur l'endroit voulu. La flèche en bas à droite permet de gérer la largeur et la hauteur du composant.

Un clic sur permettra d'ouvrir la fenêtre de sélection des saisies avancées disponibles afin de choisir celles qui seront affichées. Cette arborescence est disponible aussi pour l'utilisateur. Les saisies avancées seront celles de la liste **Examens spécifiques** disponible pour le secteur.

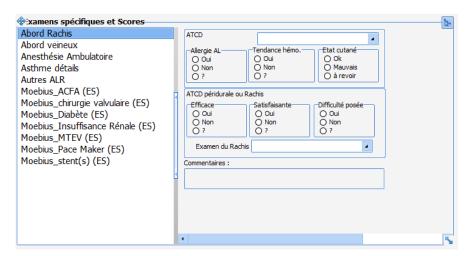

4.21.5.3 L'affichage des saisies avancées de type saisie avancée et de type Scores

Dans chaque onglet de la consultation se trouve un container comme ci-dessous. Il devient visible dès lors qu'une saisie avancée est paramétrée.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

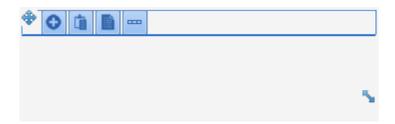


Ce container permet d'afficher les saisies avancées de type **Saisie avancée** et celles de type **Scores**. Une seule saisie avancée peut être affichée par onglet. Il est possible de rajouter autant d'onglet que de saisie avancée voulue.

Afin d'afficher une saisie avancée dans ce container, il faut :

- Cliquer sur
- Sélectionner Onglet
- Inscrire un intitulé pour cet onglet dans la fenêtre qui s'est ouverte
- Enregistrer
- Cliquer de nouveau sur
- Sélectionner Saisie avancée (affichage simple) ou saisie avancée (affichage multiple)
- Faire un clic droit sur l'emplacement de la future saisie avancée
- Sélectionner Editer
- Dans le menu déroulant, sélectionner la saisie avancée voulue
- Cocher la case Afficher seulement ce composant
- Sélectionner l'ordre d'affichage désiré (croissant ou décroissant)
- Enregistrer

Différence entre Saisie avancée (affichage simple) et Saisie avancée (affichage multiple) :

- L'affichage simple ne fera apparaître qu'un seul formulaire. (Le premier ou le dernier enregistrement suivant le paramétrage choisi)
- L'affichage multiple permettra de voir toutes les saisies de ce formulaire.

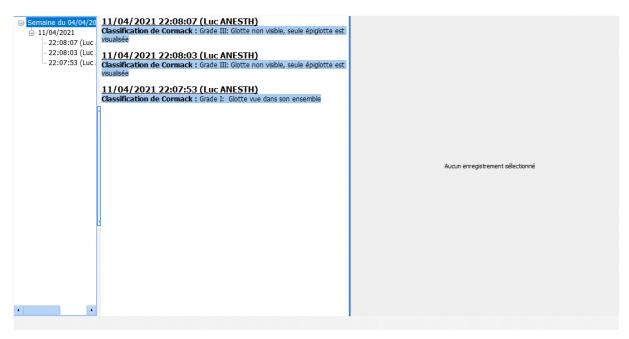



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102




4.21.6 Modes d'affichage des saisies avancées dans Visual et dans DIANE REA

Les **saisies avancées** peuvent être affichées dans les onglets type **Médecin** ou **Paramédical** et dans les onglets types **Dispo 3**, et ce sous trois formes différentes.

4.21.6.1 L'affichage simple (Saisie avancée affichage simple)

Dans ce mode d'affichage, une seule **saisie avancée** peut être sélectionnée. Il permet d'afficher un résumé des données saisies mais également de restreindre l'affichage afin de ne voir que le résultat du score par exemple.

Choix du composant dans la liste : Saisie avancée affichage simple

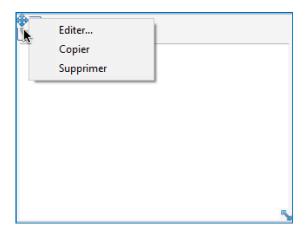

Choix du composant dans la liste : Saisie avancée affichage simple Clic droit Editer



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

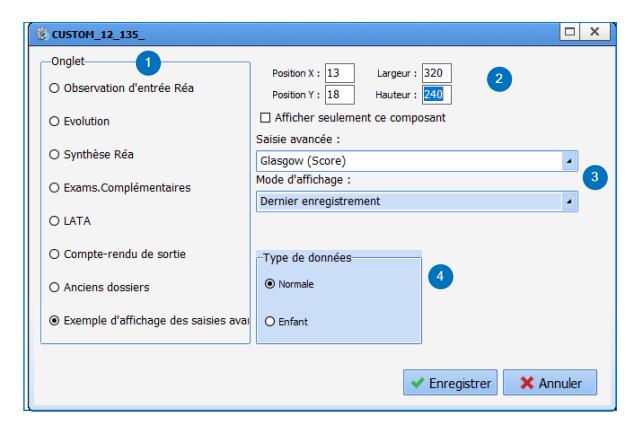

- 1. Zone permettant de choisir l'Onglet parent : par défaut celui-ci est sélectionné sur l'onglet en édition
- 2. Zone de paramétrage de la largeur et la hauteur du composant. L'option Afficher seulement ce composant permet de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran.
- 3. Saisie avancée : ouvre la liste des saisies avancées et scores disponibles.
- 4. Type de données : permet d'affecter la donnée au dossier de l'Enfant le module DianeObstétrique.

Aperçu de l'affichage:

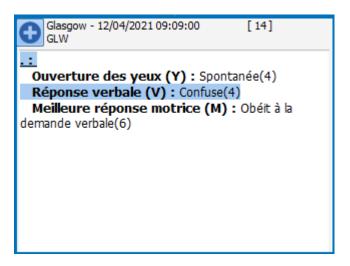

4.21.6.2 L'affichage multiple (Saisie avancée affichage multiple)

Ce mode d'affichage est composé de trois colonnes :

• La première : Historique des saisies



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 236 / 419

- La seconde : Résumé des informations saisies
- La troisième : Visualisation de la saisie avancée dans son ensemble avec sa mise en page.


Choix du composant dans la liste : Saisie avancée affichage multiple

Clic droit Editer

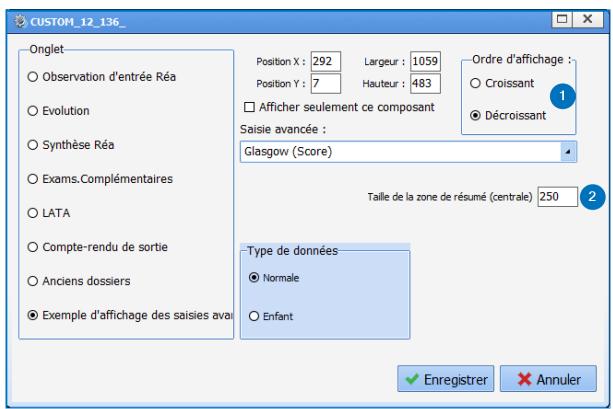

- 1. Ordre d'affichage : détermine l'ordre d'affichage
- 2. Taille de la zone de résumé centrale : permet de déterminer la largeur de la deuxième colonne.

Aperçu d'affichage:

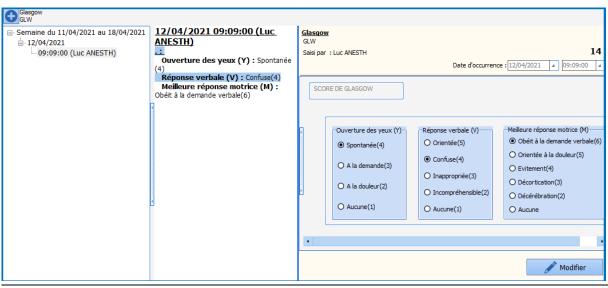



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 237 / 419

4.21.6.3 Le tableau de saisie avancées (Affichage des Saisies avancées sous forme de liste)

Ce dernier mode, permet de créer un tableau de résumé avec des colonnes paramétrables. Contrairement aux deux autres modes d'affichage il permet de configurer plusieurs saisies avancées.

- Choix du composant dans la liste : Saisie avancée sous forme de liste
- Clic droit Editer

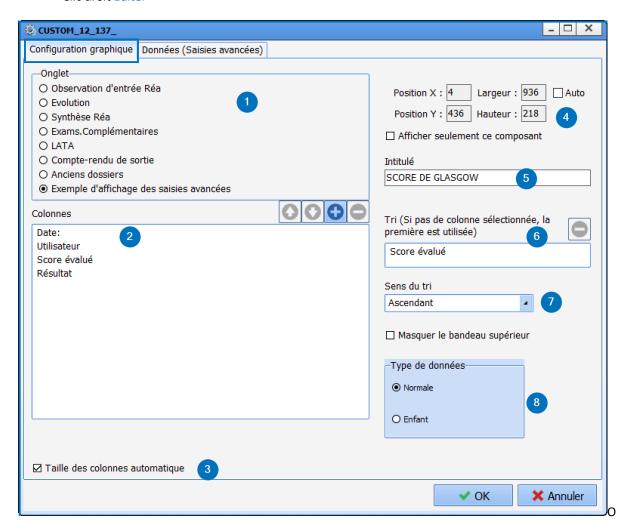

La fenêtre de paramétrage est composée de deux sous-onglets :

- Configuration graphique : permet de construire le tableau : lui attribuer des colonnes, lui donner un titre ...
 - 1. Onglet : permet de déterminer l'Onglet d'affichage
 - 2. Colonnes : permet de créer et de nommer les colonnes du tableau. Pour ajouter une colonne cliquer sur le , pour renseigner l'intitulé faite un clic dans la zone. Pour changer l'ordre des colonnes utiliser les flèches
 - 3. Taille des colonnes automatique : permet la gestion automatique de la largeur des colonnes en fonction de leur contenu
 - 4. Gestion de la hauteur et de la largeur du composant. L'option Auto permet d'adapter la largeur à la taille de l'écran. L'option Afficher seulement ce composant permet au tableau de prendre



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

l'ensemble de l'écran d'affichage.

- 5. Intitulé : permet de donner un titre au tableau.
- 6. Tri : permet de choisir la colonne et le type de donnée pour le tri d'affichage : exemple par date, par intitulé...
- 7. Sens du tri : permet de choisir entre un tri ascendant ou descendant.
- 8. Type de données : permet d'affecter la donnée au dossier Enfant dans le module DianeObstétrique.

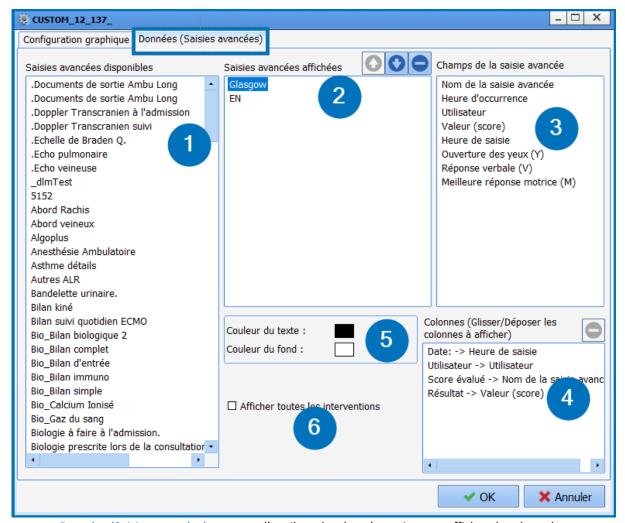

- Données (Saisies avancées) : permet d'attribuer les données qui seront afficher dans les colonnes.
 - Saisies avancées disponibles : listes des saisies avancées et scores disponibles.
 - 2. Saisies avancées affichées : glisser / déposer les saisies avancées que l'on souhaite saisir et afficher dans le tableau.
 - 3. Champs de la saisie avancée : reprend les différents champs et informations appartenant à la saisie avancée
 - 4. Zone permettant d'attribuer le contenu des colonnes cette action se fait à l'aide d'un glisser / déposer. Exemple ici : Valeur (score) est attribuée à la colonne "Résultat".
 - 5. Option permettant d'attribuer des couleurs différentes pour le fond et le texte, cette option est spécifique pour chaque **saisie avancée** paramétrée.
 - 6. Afficher toutes les interventions: cette option permet de reprendre l'ensemble des enregistrements, non pas seulement sur le dossier en cours, mais sur l'ensemble des dossiers du patient.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Aperçu d'affichage:

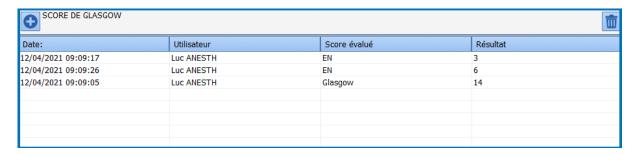


4.21.7 Impressions des saisies avancées

Lors du paramétrage de la saisie avancée, il est possible de visualiser l'aperçu à l'impression via l'onglet dédié. Une vigilance particulière doit être apportées aux saisies avancées qui seront imprimées.

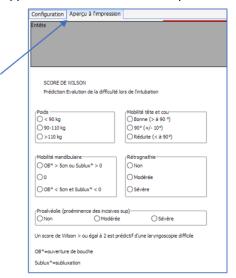

Pour chaque saisie avancée (normale ou score), il est possible de choisir l'orientation (portrait ou paysage).

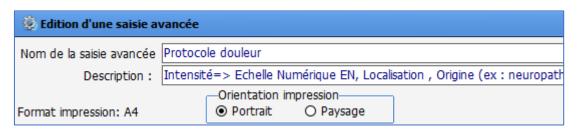

Si ce paramétrage n'est pas effectué, c'est le paramétrage global qui est pris en compte (Onglet **Paramétrages – Impression**). Le format de la page se configure également dans ce fichier de paramétrage.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

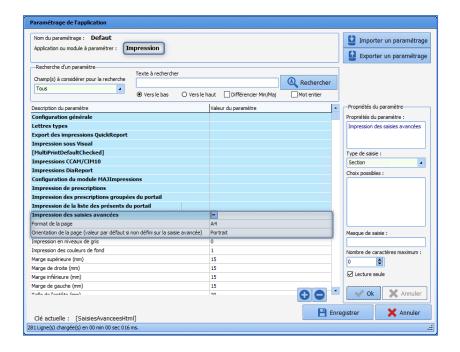

4.22 Saisies multiples

Une **Saisie Multiple** est un outil qui facilite la saisie de divers éléments en créant des scénarii, tels que l'installation du patient en salle d'opération, la perfusion, l'intubation, une intervention chirurgicale, ...

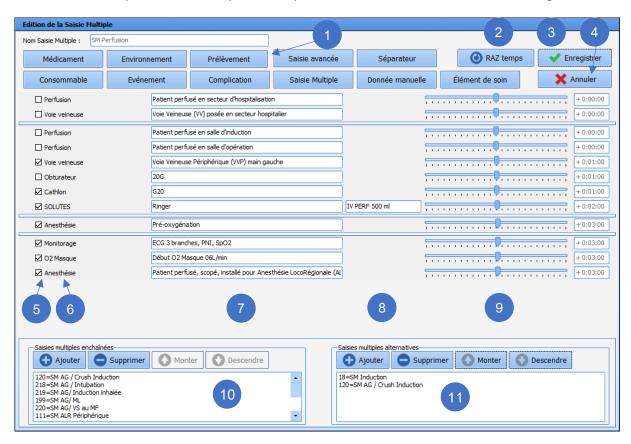



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 241 / 419

1. Menu des éléments utilisables dans une saisie multiple :

	Ajoute un médicament, une balance liquidienne ou un produit sanguin de l'onglet Médicaments: la première colonne sert à définir un Médicament ou une Catégorie de médicament et la seconde permet d'indiquer une posologie ou de donner le choix à l'utilisateur.	
Médicament		
Environnement	Ajoute un élément de l'arborescence Environnement de l'onglet Evénements .	
Prélèvement Ajoute un élément de l'arborescence Prélèvement de Evénements.		
Saisie avancée	Ajoute une Saisie avancée ou un Score de l'onglet Saisies avancées.	
Séparateur	Ajoute une ligne de démarcation entre blocs de lignes pour améliorer la lisibilité.	
Consommable	Ajoute un élément de l'arborescence Consommables de l'onglet Evénements .	
Evénement	Ajoute un élément de l'arborescence Evénements de l'onglet Evénements .	
Complication	Ajoute un élément de l'arborescence Complications de l'onglet Evénements .	
Saisie Multiple	Ajoute une saisie multiple existante.	
Donnée manuelle	Ajoute une donnée manuelle.	
Élément de soin	Ajoute un élément de l'onglet Eléments de soin.	

Note : Les éléments nécessaires doivent avoir été créés en amont, et être les mêmes que ceux configurés dans le plan de soins en affichage, afin de voir le plan de soin se compléter au fur et à mesure des saisies multiples.

- 2. Remise à zéro des décalages horaires (cf. 9).
- 3. Enregistre et quitte l'édition de la saisie multiple.
- 4. Quitte l'édition de la saisie multiple sans enregistrer.
- 5. Cases pour pré cocher ou non les éléments à l'ouverture de la saisie multiple.

☑ Scores	Glasgow
■ Comportement	Indéterminé
☐ Sommeil	Indéterminé

Dans le cas d'un élément **Indéterminé**, la coche est remplacée par un carré noir : à l'utilisation la coche sera effectivement cochée quand l'élément aura été précisé.

- 6. Types d'éléments ajoutés à la saisie multiple.
- 7. Intitulés des éléments ajoutés à la saisie multiple. Si la catégorie de l'élément est uniquement renseignée, l'élément **Indéterminé** est affiché. L'utilisateur doit le renseigner lors de la saisie de la saisie multiple.
- 8. Voie et quantité pour les médicaments.
- 9. Zone horaire pour scénariser la saisie des différents éléments : en décalant les curseurs, il est possible de gérer l'écart de temps, en positif ou en négatif, par rapport au moment de l'ouverture



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- de la saisie multiple. La touche **Ctrl** permet de décaler tous les éléments en même temps. Le décalage est affiché à droite du curseur.
- Paramétrage des saisies multiples enchaînées (proposition(s) faite(s) en sélectionnant ok et poursuivre avec en utilisation)
 - Le bouton **Ajouter** donne accès à la liste complète des saisies multiples disponibles dans l'application.
 - Exemple: après la saisie multiple **Perfusion**, il est possible d'enchaîner avec la saisie multiple **AG / Crash Induction**.
- 11. Paramétrage des saisies multiples alternatives (à saisir à la place de la saisie multiple courante).
 Exemple : à la place de la saisie multiple Perfusion, il est possible d'effectuer la saisie multiple AG / Crash Induction.


Il est possible de supprimer, de remonter (**Avant**) ou de descendre (**Après**) une ligne de la saisie manuelle par un clic droit. Le menu suivant s'affiche :



Il est également possible de déplacer la ligne par un glisser-déposer : pour cela, il faut sélectionner la ligne

✓ Anesthésie


en cliquant sur l'extrémité gauche qui devient alors verte :

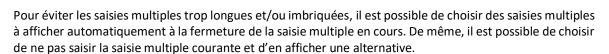

Les saisies multiples sont généralement associées à des boutons pour faciliter leur saisie : il faut penser à rendre les boutons visibles dans le paramétrage de l'affichage.

4.23 Référentiels

Il est possible de configurer des **Référentiels** dans l'outil de configuration de **DIANE**.

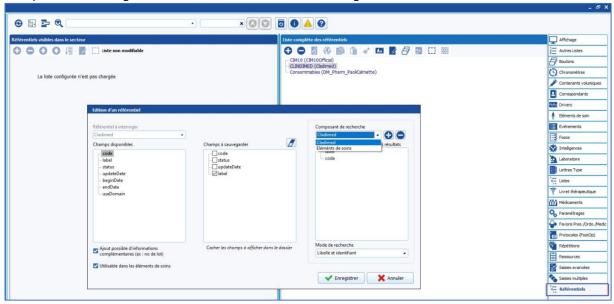



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Cela permet de définir des champs de recherche personnalisés pour interroger les référentiels disponibles, qu'ils soient locaux ou nationaux (dans une phase ultérieure).

Il est possible de créer plusieurs composants de recherche pour un même référentiel, afin d'adapter finement les usages aux besoins métiers.

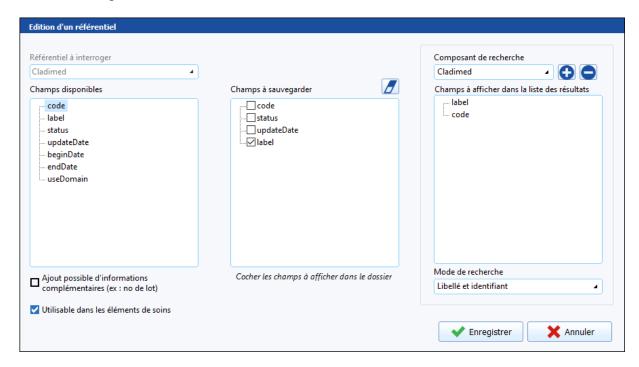

Une fois configurés, ces champs de recherche peuvent être intégrés dans différents contextes :

- Formulaires d'éléments de soins
- Fenêtres de saisie multiple
- Fenêtres dédiées, accessibles via boutons configurables



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


5.1 Principales clés de paramétrage

5.1.1 Consultation

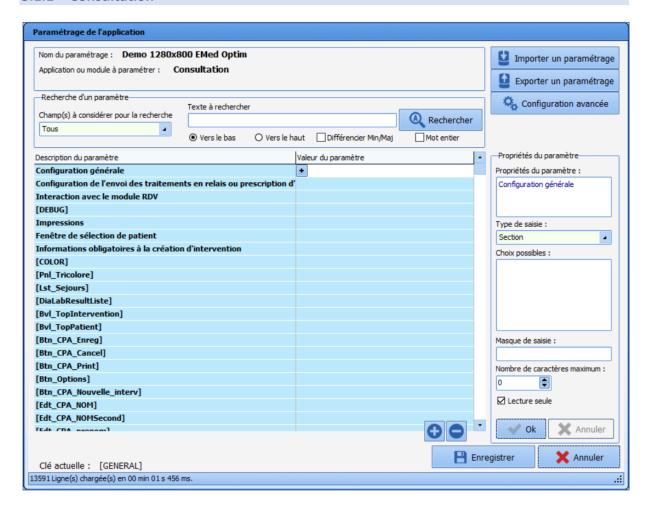

5.1.1.1 Configuration générale

5.1.1.1.1 Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage de la consultation (ConfigurePoste)

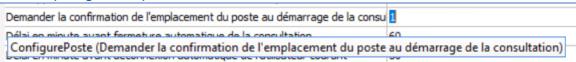

Ce paramétrage demande la confirmation du bon emplacement de l'ordinateur : ceci est pertinent notamment pour les postes de secours.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 245 / 419

5.1.1.1.2 Délai en minutes avant fermeture automatique de la consultation (AutoCloseTime)

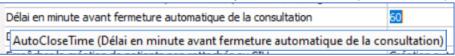

Ce paramétrage permet de définir le délai (en minutes) avant la fermeture automatique de la consultation.

5.1.1.1.3 Délai en minutes à attendre avant déconnexion de l'utilisateur courant (AutoDelogTime)

Délai en minute avant déconnexion automatique de l'utilisateur courant	30
Empêcher la création de patients non rattachés au SIH	Création autorisée
AutoDelogTime (Délai en minute avant déconnexion automatique de	l'utilisateur courant)
	, P

Ce paramétrage permet de définir le délai (en minutes) avant la déconnexion de l'utilisateur en cours.

5.1.1.1.4 Empêcher la création de patients non rattachés au SIH (CannotCreateDIAPat)

Impêcher la création de patients non rattachés au SIH	Création autorisée
CannotCreateDIAPat (Empêcher la création de patients non rattachés au	SIH) cation toujours
homore de jours au-dela duque la modification d'une ancienne consultation dec	800

Ce paramétrage permet d'autoriser (avec ou sans confirmation) ou non la création de patients qui ne sont pas rattachés au SIH. Pour les salles accueillant des urgences, il est recommandé de ne pas bloquer la création.

Création autorisée	
Création bloquée	
Confirmation demandée	

5.1.1.1.5 Empêcher la modification des données provenant du SIH (CannotModifySIHData)

Empêcher la modification des données provenant du SIH	Modification toujours possible
CannotModifySIHData (Empêcher la modification des données pro	

Ce paramétrage permet d'autoriser ou non les modifications des données provenant du SIH. Si la modification est bloquée, toute modification sera « effacée » à la réouverture du dossier, les données du SIH sont alors reprises.

Modification toujours autorisée Modification autorisée si IPP non renseigné Modification toujours bloquée

5.1.1.1.6 Demander pour lancer la reprise automatiquement lors de la création d'une nouvelle intervention (AskForRepriseAuto)

Demander pour lancer la reprise automatiquement lors de la création d'une nou Onglet Antécédent seul avec demande de con Missau de reprise à partir duquel les items cont reprise dans la consultation.

AskForRepriseAuto (Demander pour lancer la reprise automatiquement lors de la création d'une nouvelle intervention (antécédents,6= Choisir le dossier pour tout reprendre))

Lexité decrivair un distrorque saist a partir du reveil

Ce paramétrage détermine la stratégie de reprise lors de la création d'une nouvelle consultation (pour les patients ayant déjà un dossier).



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Inactif
Onglet Antécédent seul avec demande de confirmatior
Onglet Antécédent seul invisible
Toute la consultation avec demande de confirmation
Toute la consultation silencieuse
Choisir le dossier pour les antécédents
Choisir le dossier pour tout reprendre

5.1.1.1.7 Niveau de reprise à partir duquel les items sont repris dans la consultation (DefaultNivReprise)

	Reprise des items niveau 3 (comme le poids)
Tex DefaultNivReprise (Niveau de reprise à partir duquel les items sont re	pris dans la consultation)

Ce paramétrage détermine le niveau de reprise (1, 2 ou 3) à partir duquel les items seront repris dans la consultation lors de la proposition à la création d'une nouvelle consultation.

Reprise des items niveau 3 (comme le poids)

Reprise des items niveau 1 (comme les antécédents)
Reprise des items niveau 2 (comme la taille)
Reprise des items niveau 3 (comme le poids)

5.1.1.1.8 Onglet à sélectionner par défaut (DefaultTabIndex)

Ortglet à sélectionner par défaut	Administratifs
Mil Default Tablndex (Onglet à sélectionner par défaut) sur la croix (window	: 0
Activer le mode debug	n

Ce paramétrage détermine l'onglet à afficher à l'ouverture de la consultation.

5.1.1.2 Impressions

5.1.1.2.1 Impression Word utilisée par défaut (IMPRCPAWORD)

Impression Word utilisée par défaut (Si=1,c'est le document que vous aurez col

A IMPRCPAWORD (Impression Word utilisée par défaut (Si=1,c'est le document que vous aurez configuré

Activer Impression du champ 3 (Antecedents obstetricaux a Lille)

Ce paramétrage détermine l'impression **Word** utilisée par défaut. Si le paramétrage est à 1 (oui), le document configuré à partir de l'application **Configuration**, onglet **Lettres Type / Impression CPA complète** sera utilisé.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 247 / 419

5.1.1.3 Fenêtre de sélection du patient

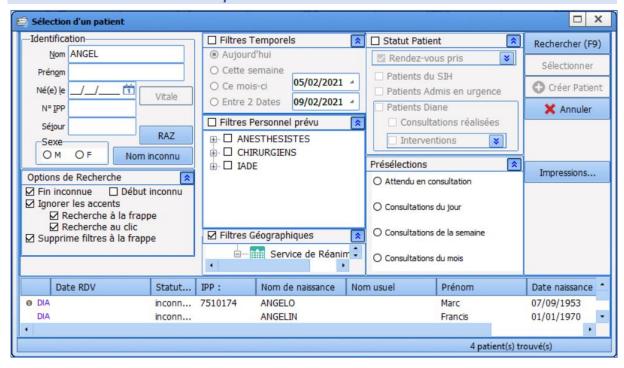

La fenêtre de sélection du patient pour la consultation peut se configurer via les clés de paramétrages.

Description du paramètre	Valeur du paramètre
Fenêtre de sélection de patient	-
Couleur du mode connecté	13432022
Couleur du mode dégradé	10921727
Définition des colonnes à l'affichage	"23,80 1,120 2,120 3,120 5,70 4,36 6,115 "
Indice de la colonne triée par défaut	2 4
Ordre de tri par défaut	-1
Nom à utiliser lors du clic sur "Patient Inconnu"	"Nom Inconnu"
Prénom à utiliser lors du clic sur "Patient Inconnu"	" <date> <heure>"</heure></date>
Affiche le type de recherche par défaut	1
Coche par défaut "Début inconnu"	0
Coche par défaut "Fin inconnue"	1
Coche par défaut "Ignorer les accents"	1
Coche par défaut "Recherche à la frappe"	1
Coche par défaut "Recherche au dic"	1
Nombre de caractère minimum avant recherche automatique	3
Interdit la recherche automatique à l'ouverture de la fenêtre	0
Message indiquant le manque de droit	"Vous n'avez pas les droits"
Affiche les filtres patient par défaut	1
Active les filtres patient par défaut	1
Active la recherche dans les identités du SIH	0
Activo la recherche dans les identités du module de rendez veus	•

Ce paramétrage peut également être effectué sur l'affichage graphique, accessible via le bouton Configuration

avancée / Sélection de patient

Sélection de patient



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 248 / 419

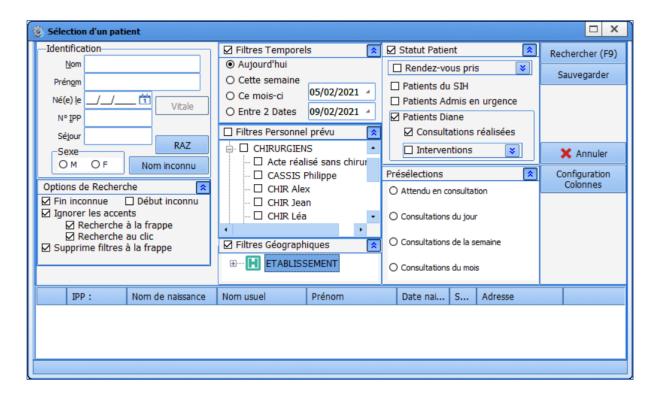

5.1.1.3.1 Configuration des colonnes

Cette interface facilite notamment la configuration des colonnes :



5.1.1.3.2 Configuration des présélections

Il est possible de configurer des présélections (favoris de filtres).

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

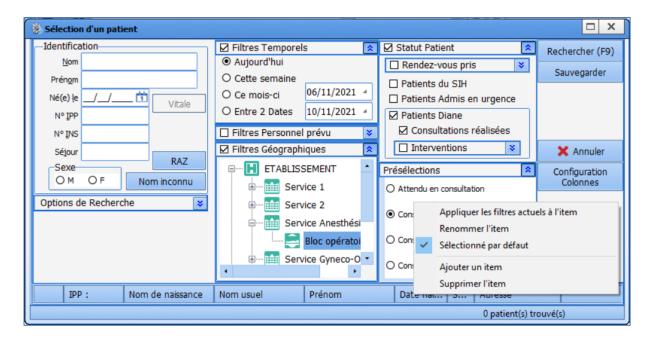


Un clic droit sur un élément des présélections affiche un menu pour :

- 12. Appliquer les filtres actuels à l'item en question : permet de modifier une présélection existante ou d'appliquer les filtres à une nouvelle présélection
- 13. Renommer l'item : permet de modifier/corriger l'intitulé d'une présélection
- 14. Sélectionné par défaut : permet de choisir la présélection qui sera appliquée à l'ouverture de la fenêtre de sélection du patient
- 15. Ajouter un item : permet de créer une nouvelle présélection
- 16. Supprimer l'item : permet de supprimer la présélection sélectionnée

Particularité du filtre géographique :

Pour sauvegarder le filtre géographique, il faut effectuer un clic droit, ce qui affiche le menu suivant :

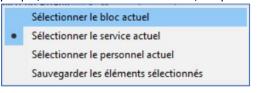

Une fois le filtre géographique configuré, il faut choisir l'option appropriée :

- 17. Sélectionner le bloc actuel : sélectionne le bloc dans lequel le poste se trouve
- 18. Sélectionner le service actuel : sélectionne le service dans lequel le poste se trouve
- 19. Sélectionner le personnel actuel : affiche les patients dont la consultation a été réalisée par l'utilisateur courant
- 20. Sauvegarder les éléments sélectionnés : sélectionne le(s) bloc(s) ou le(s) service(s) configuré(s), peu importe l'emplacement du poste



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 250 / 419


5.1.1.4 Informations obligatoires à la création d'intervention

5.1.1.4.1 Rendre obligatoire la saisie de la date de naissance pour autoriser la demande de création (NeedDateNaiss)

Rendre obligatoire la saisie de la date de naissance pour autoriser la demande de création	0	
Dandon although the coins do not the contract and a state of the contract and the contract		
Re NeedDateNaiss (Rendre obligatoire la saisie de la date de naissance pour autoriser la demande de création)		
Rénure obligatoire la saisie du typé d'intervention prevue pour autoriser la démande de d'eadon	0	

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie de la date de naissance du patient pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.2 Rendre obligatoire la saisie du sexe du patient pour autoriser la demande de création (NeedSex)

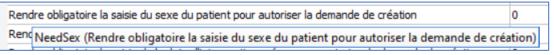

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie du sexe du patient pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.3 Rendre obligatoire la saisie du type d'intervention prévue pour autoriser la demande de création (NeedTypeIntervPrev)

Rendre obligatoire la saisie du type d'intervention prévue pour autoriser la demande de création	0
Need Type IntervPrev (Rendre obligatoire la saisie du type d'intervention prévue pour autoriser le Rendre obligatoire la saisie de la date d'intervention pour autoriser la genange de creation	a demande de création)

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie du type d'intervention prévue pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.4 Rendre obligatoire la saisie de la date d'intervention prévue pour autoriser la demande de création (NeedDateIntervPrev)

Rendre obligatoire la saisie de la date d'intervention prévue pour autoriser la demande de création	0
NeedDateIntervPrev (Rendre obligatoire la saisie de la date d'intervention prévue pour autorise	r la demande de création)

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie de la date d'intervention prévue pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.5 Rendre obligatoire la saisie de la date d'hospitalisation pour autoriser la demande de création (NeedDateHospPrev)

Rendre obligatoire la saisie de la date d'hospitalisation pour autoriser la demande de création	0
RedDateHospPrev (Rendre obligatoire la saisie de la date d'hospitalisation pour autoriser la	demande de création)

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie de la date d'hospitalisation prévue pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.6 Rendre obligatoire la saisie du chirurgien prévu pour autoriser la demande de création (NeedPreviousChir)

Rendre obligatoire la saisie du chirurgien prévu pour autoriser la demande de création	
NeedPreviousChir (Rendre obligatoire la saisie du chirurgien prévu pour autoriser la demande d	le création)



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie du chirurgien prévu pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.7	endre obligatoire la saisie de l'anesthésiste prévu pour autoriser la demande de créatior
	leedPreviousAnesth)

(
Rendre obligatoire la saisie de l'anesthésiste prévu pour autoriser la demande de création	0
NeedPreviousAnesth (Rendre obligatoire la saisie de l'anesthésiste prévu pour autoriser la den	nande de création)
Rendre obligatoire la saisie du service demandeur pour autoriser la demande de creation	0

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie de l'anesthésiste prévu pour autoriser la création d'une intervention.

5.1.1.4.8 Date d'hospitalisation dans la fenêtre "Programmation d'une nouvelle intervention" (UseNormalDateHosp)

Date d'hospitalisation dans la fenêtre "Programmation d'une nouvelle intervention"	0
UseNormalDateHosp (Date d'hospitalisation dans la fenêtre "Programmation d'une nouvelle	intervention")

5.1.1.4.9 Rendre obligatoire la saisie du service demandeur pour autoriser la demande de création (NeedServiceDemandeur)

Rendre obligatoire la saisie du service demandeur pour autoriser la demande de création	0
NeedServiceDemandeur (Rendre obligatoire la saisie du service demandeur pour autoriser la	demande de création)
Phi movine	demande de creation,

Ce paramétrage rend obligatoire la saisie du service demandeur pour autoriser la création d'une intervention.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.1.2 DianeRea

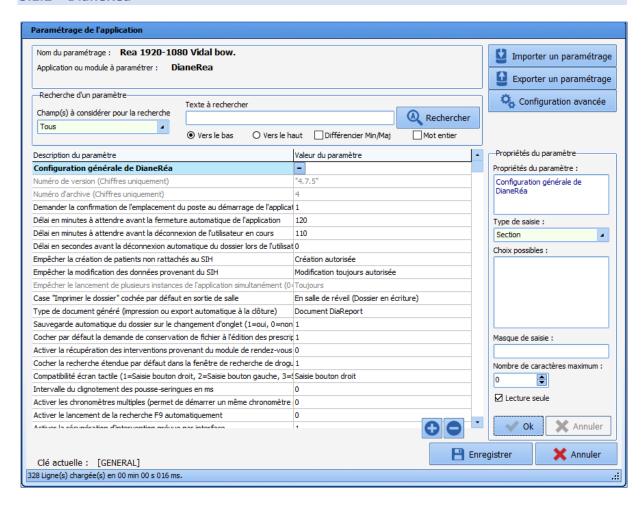

5.1.2.1 Configuration générale de DianeRéa

5.1.2.1.1 Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage de l'application (ConfigurePoste)

Namero a archive (crimies aniquement)	20070	
Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage de l'applica	1	\square
ConfigurePoste (Demander la confirmation de l'emplacement du poste		

Ce paramétrage demande la confirmation du bon emplacement de l'ordinateur : ceci est pertinent notamment pour les postes de secours.

5.1.2.1.2 Délai en minutes à attendre avant la fermeture automatique de l'application (AutoCloseTime)

	120
Délai en AutoCloseTime (Délai en minutes à attendre avant la fermeture	utomatique de l'application)
Délai en secondes avant la deconnexion automatique du dossier lors de l'utilisat	u

Ce paramétrage permet de définir le délai (en minutes) avant la fermeture automatique de l'application.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 253 / 419

5.1.2.1.3 Empêcher la création de patients non rattachés au SIH (CannotCreateDIAPat)

Empêcher la création de patients non rattachés au SIH	Créa	tion autorisée
CannotCreateDIAPat (Empêcher la création de patients non rattachés au	SIH)	cation toujours a
Empecher le lancement de plusieurs instances de l'application simultanement (U:	LOUIC	DUIS

Ce paramétrage permet d'autoriser (avec ou sans confirmation) ou non la création de patients qui ne sont pas rattachés au SIH. Pour les salles accueillant des urgences, il est recommandé de ne pas bloquer la création.

Création autorisée	
Création bloquée	
Confirmation demandée	

5.1.2.1.4 Empêcher la modification des données provenant du SIH (CannotModifySIHData)

Empêcher la modification des données provenant du SIH	Modification toujours autorisée
CannotModifySIHData (Empêcher la modification des données	s provenant du SIH)
Case Imprimer le dossier, cochée par detaut en sortie de saile	en salle de réveil (Dossier en écri

Ce paramétrage permet d'autoriser ou non les modifications des données provenant du SIH. Si la modification est bloquée, toute modification sera « effacée » à la réouverture du dossier, les données du SIH sont alors reprises.

Modification toujours autorisée	
Modification autorisée si IPP non renseigné	
Modification toujours bloquée	

5.1.2.1.5 Masque d'affichage du bandeau supérieur du module (UpperBandDisplayMask)

		ie (Opper Daniu Dispiayiviask)		
ACC	aver le mode debug	0		
Mas	sque d'affichage du bandeau supérieur du module	" <patient_civilite> <patientformatednames< th=""></patientformatednames<></patient_civilite>		
⁴ U	pperBandDisplayMask (Masque d'affichage du bandeau supérieur d	u module)		

Ce paramétrage permet de configurer le bandeau d'identitovigilance du module DIANE REA.

	Nom	Prénom	Âge	Localisation	Jour	Taille	Poids	Poids théorique du patient en kg
<u>≖</u> M.	ANGELIN	Francis	🚟 56 ans	🗃 Lit 3	📆 J 96	√ 170cm	69kg	Poids théorique du patient en kg 66,02kg

Les clés de ce paramétrage sont disponibles dans le chapitre *Tags des informations affichées dans le bandeau Visual/DIANE REA/ DIANE OBSTETRIQUE.*



Ce paramétrage permet d'activer les contrôles sur les prescriptions d'antibiotiques en associant un nombre de jours de prescription avec un identifiant de modèle DIANE et/ou de formulaire interne à associer à la saisie.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Paramétra	ge des saisies complémentaires de pres	cription					
Veuillez coche	er les jours pour lesquelles la prescription doit-être complétée:						
Pour chaque	ue jour coché veuillez sélectionner le modèle de document et/ou le formulaire souhaité.						
	Vous pouvez éditer/ajouter des modèles de document via l'onglet des lettres types dans l'outil de configuration (section une prescription (Réa)")						
	Modèle de document :	Fiche interne de validation :					
☑ Jour 1		Informations initiales (Antibiotique)					
☐ Jour 2	A	4					
☑ Jour 3	4	Evaluation (Antibiotique)					
☐ Jour 4	4	4					
☐ Jour 5	4	4					
☐ Jour 6	4	4					
☑ Jour 7	4	Ré-Evaluation (Antibiotique)					
	✓ OK X Annuler						
	non défini						
	Informations initiales (Antibiot	ique)					
	Evaluation (Antibiotique)	The state of the s					
	Ré-Evaluation (Antibiotique)						
	Indication (Produit hors GHS)						
	Enregistrement de Document	<u> </u>					

5.1.2.2.2 Mode d'affichage du nom du produit dans le résumé des prescriptions (ProductNameMode)

		•						
Mode d'affichage	du nom de produit d	lans le résumé des p	rescriptions		Libellé du			
Masquer le nom	roductNameMoo	de (Mode d'afficha	ae du nom de	produ	uit dans le	e résumé	des prescript	tions)
o e lilla el			9	P				,

Ce paramétrage permet de définir le mode d'affichage du nom du produit dans le résumé de prescription.

Libellé du livret DCI (si applicable) DCI Court (sans dosage/forme, si applicable)


5.1.2.2.3 Affichage de la voie pour un produit prescrit (ShowVoieResumeLevel)

A	chage de la voie pour un produit prescrit. Pas d'affichage défaut (=0).	Dans l'onglet de prescriptions et le plan de soins	4
Per	Richage de la voie pour un produit prescrit. Pas d'affichage défaut (=0).	- . Pas d'affichage défaut (=0).)	
D	. 3	5	

Ce paramétrage permet de définir l'affichage de la voie d'administration dans le résumé de prescription et ou le plan de soins.

Pas d'affichage Dans l'onglet de prescriptions Dans le plan de soins Dans l'onglet de prescriptions et le plan de soins

5.1.2.2.4 Limitation en coefficient de débit de perfusion sur le plan de soins par rapport à la prescription initiale (LimitRateChangeAfterPrescriptionCoef)

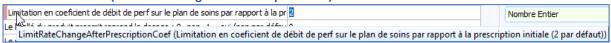

Ce paramétrage permet de définir le coefficient entre le débit prescrit par le médecin et le débit saisi par l'IDE lors de l'administration. Par défaut, ce coefficient est paramétré à 2. Pour empêcher la saisie d'un débit différent de celui renseigné par le médecin, ce coefficient doit être égal à 1.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 255 / 419

5.1.2.2.5 Demander la signature des prescriptions au changement d'onglet (RequestSignOnTabChange)

	Demander la signature des prescriptions au changement d'onglet : $0=$ non, $1=1$	V	
[Ajai (en minutes), annès la création d'une saisie de prescription, nécessaire à l'-1		
,	RequestSignOnTabChange (Demander la signature des prescriptions au changement d'onglet : 0=non, 1 = oui (1 par d	défau	ut))

Ce paramétrage permet de définir si l'application affiche un message quand l'utilisateur quitte l'onglet **Prescription** alors que la prescription du jour n'a pas été signée. Il est fortement recommandé de maintenir cette clé à **1** pour éviter l'oubli de la signature par le médecin.

5.1.2.2.6 L'application d'une heure non définie réinitialise en interne la planification du plan de soins (=fonctionnement similaire à "urgent" mais avec la possibilité de déplacer l'occurrence). Activé par défaut (=1) (FreeStartOrApplyDateTimeResetCarePlanSchedule)

		L'application d'une heure non définie réinitalise en interne la planification du pla 1
	i	la ráilgaliastian quatidianna dan procedintiana normat la validatian du pharmaci ()
FreeSta	artC	PrApplyDateTimeResetCarePlanSchedule (L'application d'une heure non définie réinitalise en interne la planification
du plar	ı de	soins (=fonctionnement similaire à "urgent" mais avec la possibilité de déplacer l'occurrence). Activé par défaut (=1).

Ce paramétrage détermine le comportement d'une prescription signée lorsqu'elle est modifiée et que la case **Heure non définie** est cochée.

Si la clé est activée, la signature de la prescription réinitialise le plan de soins et génère une nouvelle occurrence de plan de soin à l'heure courante.

Si la clé est désactivée, la signature de la prescription ne génère pas de nouvelle occurrence de plan de soin à l'heure courante. La première occurrence non réalisée peut-être déplacée.

5.1.2.2.7 Restreindre l'administration à la demande aux favoris autorisés. Désactivé par défaut (=0) (UseOnlyAuthorizedShortcutsForAdministrationOnDemand)

	•	
Restreindre l'administration à la demande aux favoris autorisés. Désactivé p	ar 1	
	l	
UseOnlyAuthorizedShortcutsForAdministrationOnDemand (Restreind	re l'administration à la demande aux favoris autorisé	s. Désactivé par défaut (=0))

Ce paramétrage détermine quels sont les produits concernés par les administrations demandées oralement par un médecin.

Si la clé est désactivée, n'importe quel produit du livret thérapeutique ou de la base de données médicamenteuse peut être saisi dans la fenêtre.

Si la clé est activée, seuls les favoris pour l'administration à la demande basculés sont utilisables.

5.1.2.2.8 Interdire les médicaments n'appartenant ni au livret, ni à la banque médicamenteuse pour les "médicaments en administration directe" (médicaments structurés destinés à l'anesthésie). (ForbidLiteralMedicsForDirectAdmin)

	<u>'</u>	
Interdire les médicaments n'appartenant ni au livret, ni à la banque médicamen	Non 4	
Utiliser la prescription quidée pour les favoris	1	Lecture seule
ForbidLiteralMedicsForDirectAdmin (Interdire les médicaments n'appar	enant ni au livret, ni à la banque médicamenteuse	e pour les "médicaments en administration directe" (médicaments structurés destinés à l'anesthésie


Ce paramétrage détermine si les médicaments utilisés en administration directe doivent obligatoirement appartenir soit à la base de données sur les médicaments, soit au livret thérapeutique de l'établissement.

5.1.2.2.9 Utiliser la prescription guidée pour les favoris. (UseGuidedPrescriptionForShortcuts)

Ī	Survey to breeze bear too to	
	Utiliser la prescription guidée pour les favoris	1
	Ouvris par défaut les proscriptions en mode quidé	1
	UseGuidedPrescriptionForShortcuts (Utiliser la prescription guidée po	ur les favoris)

Ce paramétrage détermine la fenêtre de prescription (guidée ou experte) à utiliser lors de la saisie de favoris de prescription.

5.1.2.2.10 Ouvrir par défaut les prescriptions en mode guidé (OpenGuidedPrescriptionByDefault)

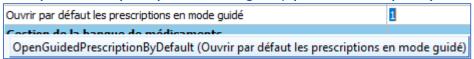



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Ce paramétrage détermine la fenêtre de prescription (guidée ou experte) à ouvrir lors de la saisie de prescriptions médicamenteuses.

5.1.2.2.11 Export de la prescription

La configuration de l'export de la liste des prescriptions au format PDF à chaque signature se paramètre dans 3 endroits différents.

5.1.2.2.11.1 Transport des fichiers

Paramétrages > Export > Export des prescriptions au format PDF

Nom de la clé	Valeurs possibles	Conseils et commentaires
Export des documents	Actif = 1 Désactivé = 0	
Affichage des erreurs	Actif=1 Désactivé = 0	
Mode silencieux	Actif = 1 Désactivé = 0	Peut être désactivé en test pour débugger
Adresse où exporter les fichiers de contexte	Laisser vide	Les fichiers de contexte (HL7) ne doivent pas être envoyés dans le cadre de l'export dégradé.
Adresse où exporter les documents	Si dossier partagé : Chemin du dossier Si FTP : IP du serveur	Permet de gérer les sous-dossiers.
Indique le type d'envoi des fichiers	ftp ou file	
Utilisation du mode passif (FTP)	Oui si FTPS	Peut être utile même dans le cas d'un FTP
Utilisateur à connecter si besoin (ftp, WebService)	Login compte FTP	
Mot de passe crypté correspondant	Mot de passe compte FTP (Encrypté)	Utiliser SimpleCrypte
Création des fichiers de log	0=Log des erreurs uniquement", "1=Log actif", "2=Log complètement désactivé"	L'absence de chemin afin de ne pas exporter les fichiers HL7 génère des logs d'erreur. Il est possible de les désactiver ici pour empêcher de polluer.
Nombre de jours sauvegardés dans le dossier historique	DaysHistoSaved=7	Dans le fichier .ini de la configuration d'affichage

5.1.2.2.11.2 Déclencheur

Paramétrages > DianeRea > Prescription > GeneratePDFOnValid

arametrages - Branchea - Trescription - Generater Bronvana	
Prescription	
Heure de début de journée de Réanimation / de plan de soins (en nombre d'heu	7
Décalage en heures entre le début de journée de réanimation et l'heure de déb	0
Limitation en coeficient de débit de perf sur le plan de soins par rapport à la pre	10
Le libellé du produit prescrit reprend le dosage : 0=non, 1 = oui (non par défau	1
Le résumé de la prescription reprend le prix : 0=non, 1 = oui (1 par défaut)	1
Le résumé de la prescription reprend la durée totale du traitement : 0=non, 1 =	1
Alerte sur la fin de traitement (en jours), -1 pour désactiver	-1
Désactiver l'affichage des produits présents dans le contenant de la fenêtre de	0
Génération automatique d'un fichier PDF reprenant la prescription à chaque va	1
Modification du docade possible dequis la fenêtre de prescription Seu GeneratePDFOnValid (Génération automatique d'un fichier PDF repr	Oui avec enregistrement possible dans le livret enant la prescription à chaque validation.)

5.1.2.2.11.3 Contenu

Paramétrages > Impression > Impression de prescriptions



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 257 / 419

Format de la page	A4
Orientation de la page	Portrait
Impression en niveaux de gris	0
Impression des couleurs de fond	1
Marge supérieure (mm)	15
Marge de droite (mm)	15
Marge inférieure (mm)	15
Marge de gauche (mm)	15
Taille de l'entête (mm)	67
Informations de debug	0
Configuration des export	dUF= FileMask=Prescription_ <ipp>_<idint> " </idint></ipp>
Utilisation d'un header personnalisé	1
Nom de la ressource utilisée en tant que header personnalisé	
Taille du texte en mm (entre 1 et 7 indus)	3
Nom de l'imprimante par défaut (si différente de celle système)	**
Utilisation de la configuration par défaut du système	1

L'ouverture de la configuration des exports permet de paramétrer le PDF des prescriptions.

- L'export doit être activé 🔱
- Rendre obligatoire l'export dans la section 2.
- Le nom du fichier de prescriptions à renseigner dans la section set le suivant :

 *Prescriptions <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTPRENOM>(<IPP>) <IDINT> <DATENOW:yyyymmddhh>

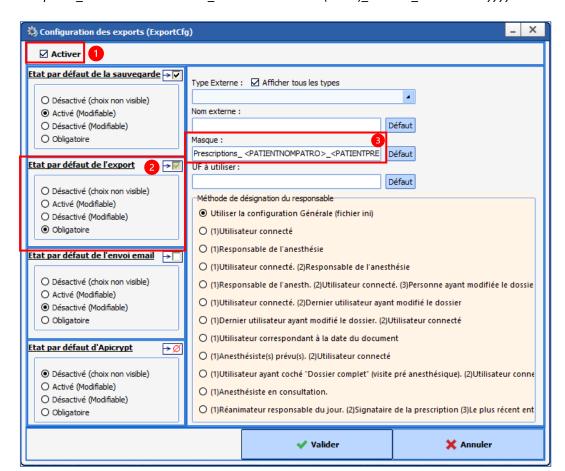

5.1.2.2.11.4 Gestion des sous-dossiers et de l'historique

Il est possible de créer un sous-dossier par patient et d'y intégrer l'ensemble de ses exports dégradés. De la même façon que le plan de soins, dans la clé **Adresse où exporter les documents** dans **Paramétrages > Export > Export des prescriptions au format PDF**, il faut ajouter au chemin les tags suivants :

Dans le cadre d'un export FTP, il faut ajouter à l'adresse IP les tags suivants :

/<PATIENTNOMPATRO> <PATIENTPRENOM>(<IPP>)

Dans le cadre d'un export de fichier, il faut ajouter au chemin les tags suivants :



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


\<PATIENTNOMPATRO>_<PATIENTPRENOM>(<IPP>)

Attention : le sens du slash varie selon le mode de transport des fichiers

Pour la gestion de l'historique, il faut compléter la clé **DaysHistoSaved** afin de reproduire le comportement d'historisation du plan de soins.

5.1.2.2.12 Export de la prescription (PN13)

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Export.

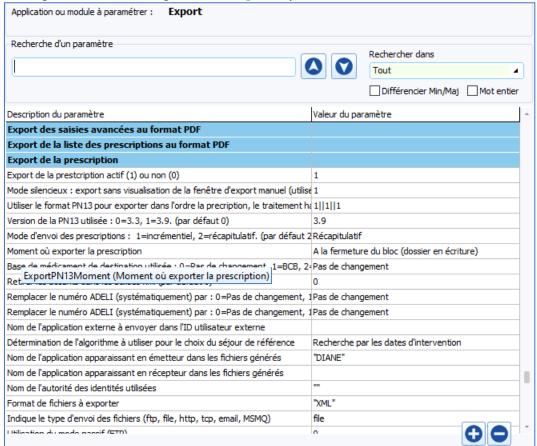

Il est possible de configurer un export PN13 de la prescription. Il y a plusieurs déclencheurs possibles pour cet export :

- A la signature
- A la fermeture de la réanimation (dossier en écriture)
- A la clôture du dossier de réanimation (dossier en écriture et clôture)
- A la signature et à la fermeture de la réanimation (dossier en écriture)
- A la fermeture du réveil (dossier en écriture)
- A la clôture du dossier en réveil (dossier en écriture et clôture)
- A la signature et à la fermeture du réveil (dossier en écriture)
- A la fermeture du bloc (dossier en écriture)
- A la clôture du dossier en bloc (dossier en écriture et clôture)
- A la signature et à la fermeture du bloc (dossier en écriture)
- A la signature et à la fermeture du dossier (dossier en écriture)
- A la clôture du dossier (dossier en écriture et clôture)
- Manuellement



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.1.2.3 MD Plan de soin

5.1.2.3.1 Limite en minutes de validation des éléments futurs plan de soins (FutureCarePlanValidLimitTime)

Plan de soin	
Limite (en minutes) de validation des élements futurs du plan de soin	720
Arrâtor automatiquement les perfusions manuelles en coura acrivées à échéans FutureCarePlanValidLimitTime (Limite (en minutes) de validation des él	ements futurs du plan de soin)

Ce paramétrage permet de limiter la possibilité de réaliser/démarrer des occurrences en avance.

5.1.2.3.2	Arrêter	automatiquement	les	perfusions	manuelles	en	cours	arrivées	à	échéance
	(AutoSto	opStartedCarePlanOc	curre	ncesAfterDe	layInMin)					

() tatootopotait	a care range court ended, are resident, and a care resident and a
Lit 6	Arrêter automatiquement les perfusions manuelles en cours arrivées à échéanc 1
AutoStopStartedCarePlanOccurrences défaut))	AfterDelayInMin (Arrêter automatiquement les perfusions manuelles en cours arrivées à échéance depuis 'x' minutes

Ce paramétrage permet ou non d'arrêter automatiquement, sur le plan de soin, les perfusions manuelles arrivées à échéance depuis 'x' minutes : x=0 désactive l'arrêt automatique, 1 = arrêt à l'heure prévue, sinon arrêtée à l'heure courante une fois l'échéance dépassée.

5.1.2.3.3 Nombre de jours de génération du plan de soin (2 par défaut) (CarePlanGenerateDayCount)

Nombre de jours de génération du plan de soin (2 par défaut)	2
CarePlanGenerateDayCount (Nombre de jours de génération du plan d	e soin (2 par défaut))
Transmissions ciblées	

Ce paramétrage permet de préciser le nombre de jours à générer pour le plan de soins : si un traitement est prescrit pour 7 jours, seuls les 2 premiers jours seront affichés dans le plan de soin.

Afficher le dosage sur l'entête des produits sur le plan de soin (ShowDosageInCarePlanHeader) 5.1.2.3.4

	(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afficher le dosage sur l'entête des produits sur le plan de soin	0
ShowDosageInCarePlanHeader (Afficher le dosage sur l'entête d	des produits sur le plan de soin)

Ce paramétrage permet d'afficher ou non le dosage sur l'entête des produits.

5.1.2.3.5 Liaison au PSE : désactiver le contrôle strict de la correspondance de dilution entre la prescription et l'appareil à lier à une occurrence de plan de soins (sans ce contrôle strict la liaison est plus simple mais cela peut entraîner des incohérences sur le plan de soins) (DisabledCheckDeviceDilutionCompleteApplication)

		(DIS	abicac	STICER DE VICE DITUTION CON	ipictcApplication	011)		
I	Keammauon			Liaison au PSE : désactiver le contrôle strict de la correspondance de dilution en	1			
	test salle attente			Tonominion obline		Lecture seule		
	DisabledCheckDeviceDilutionCo	mpleteApplicat		désactiver le contrôle strict de la correspondance de dilution entre la pres	cription et l'appareil à lier à une occurrence de p	ian de soins (sans ce controle strict la lia	ason est plus simple mais cela peut entraîner des	incohèrences sur le plan de soins) (1=oui, 0=non. Oui par défau

Ce paramétrage permet, dans le cas d'une occurrence de plan de soin liée à un PSE, de désactiver le contrôle strict de la correspondance de dilution entre la prescription et l'appareil à lier à une occurrence de plan de soins. Sans ce contrôle strict, la liaison est plus simple mais cela peut entraîner des incohérences sur le plan de soins. (1=oui=contrôle désactivé, 0=non=contrôle activé. Oui par défaut)

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

5.1.2.4 Actions importantes

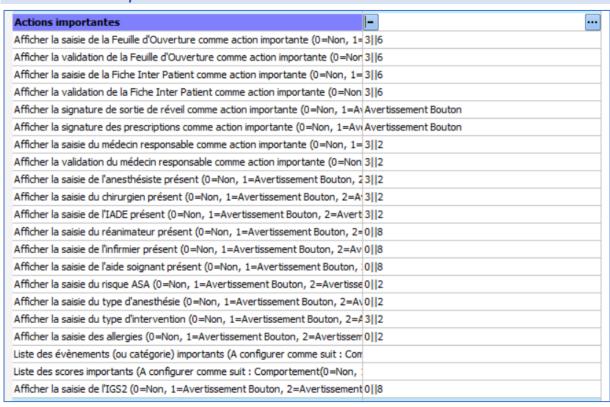

Les actions importantes permettent de rendre obligatoire ou non certaines saisies du dossier patient. Le paramétrage des actions importantes est détaillé dans le chapitre *Configurer les actions importantes*.

5.1.2.5 Documents intégrés

5.1.2.5.1 Paramétrage des documents intégrés dans DianeRea.ini

Documents intégrés	
วิหีtervalle (en secondes) entre chaque sauvegarde locale du contenu en cours	15
Masque de l'entête ajouté automatiquement lors de l'édition	" <newline><newline><userprenom> <usern< td=""></usern<></userprenom></newline></newline>
Modèles par défaut lors de la première édition	1028=212 1031=219 1032=229 1027=228 "

- Intervalle (en secondes) entre chaque sauvegarde locale du contenu en cours d'édition : détermine l'intervalle de sauvegarde automatique du contenu sur le poste, pour limiter la perte de contenu en cas de déconnexion.
- Masque de l'entête ajouté automatiquement lors de l'édition : permet de modifier l'entête ajouté automatiquement lors de l'édition d'un document intégré.
- Modèle par défaut lors de la première édition : détermine le modèle à intégrer au document lors de la première ouverture en édition.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 261 / 419

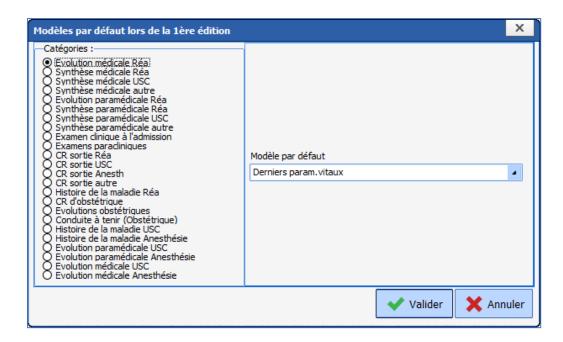

5.1.2.5.2 Paramétrage des documents intégrés dans Misc.ini

Ce paramétrage (dans la section **Configuration générale**) détermine les documents intégrés pour lesquels l'horodatage est activé ou non.



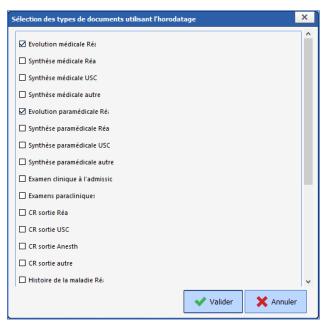

La clé de paramétrage **UseHistoryInDocs** permet d'activer ou de désactiver l'horodatage des documents intégrés à **DIANE**. Pa défaut, la clé est activée pour les catégories suivantes :

- Evolution médicale Réa
- Evolution paramédicale Réa
- Evolutions obstétrique
- Evolution paramédicale USC
- Evolution paramédicale Anesthésie



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 262 / 419

- Evolution médicale USC
- Evolution médicale Anesthésie

5.1.2.5.3 Paramétrage des documents intégrés dans la configuration d'affichage

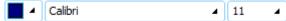


Pour chaque composant de type document intégré, la police est paramétrable (couleur, police et taille).


5.1.2.6 Configuration des icônes d'isolement

Configuration des icônes d'isolement	
Paramètrage des icônes d'isolement	"112072=6 112075=2;1 112076=0 112073=2 11
IsolationIconsSettings (Paramètrage des icônes d'isolement)	

Le paramétrage des icônes d'isolement (IsolationIconsSettings) permet d'attribuer une ou des icônes selon le type d'isolement.

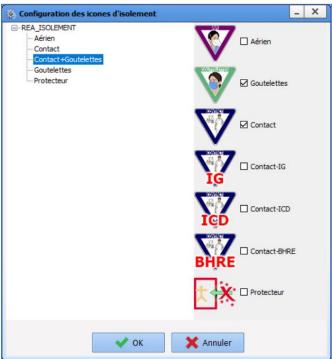

La liste des isolements se modifie dans l'onglet Listes/REA_ISOLEMENT.

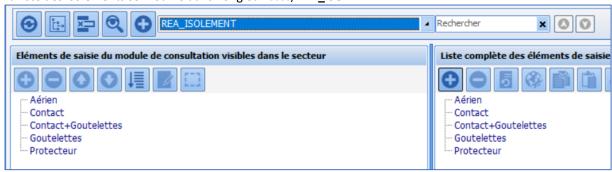



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 263 / 419

5.1.2.7 Configuration de la liste des tâches

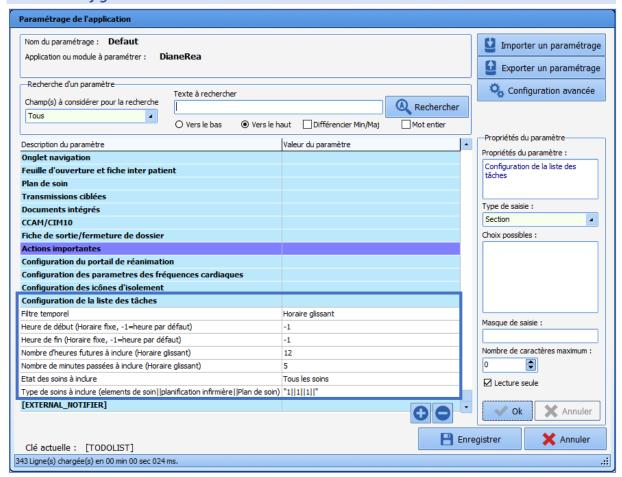


5.1.2.7.1 Filtre temporel (TodoFlterType)

Filtre temporel	Horaire glissant
Heure de début (Horaire five -1-heure par défaut)	-1
Heure d TodoFilterType (Filtre temporel)	-1

Ce paramétrage détermine la plage horaire par défaut :

- Horaire glissant affiche les soins des X prochaines heures
- Horaire fixe affiche les soins compris pendant une plage horaire déterminée

5.1.2.7.2 Heure de début (TodoFilterHDebut)

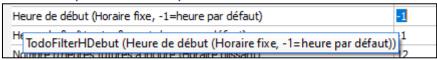

Ce paramétrage détermine l'heure de début si la plage horaire est en horaire fixe.

5.1.2.7.3 Heure de fin (TodoFilterHFin)

Heure de fin (Horaire fixe, -1=heure par défaut)	-1
No TodoFilterHFin (Heure de fin (Horaire fixe, -1=heure par défaut)	12
Nombre de minures passees a moure impraire dissanti	5

Ce paramétrage détermine l'heure de fin si la plage horaire est en horaire fixe.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 264 / 419

5.1.2.7.4 Nombre d'heures futures (TodoFilterNbHeures)

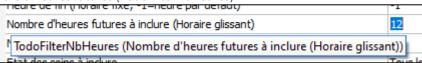

Ce paramétrage détermine la durée de la plage horaire à afficher quand celle-ci est en horaire glissant.

5.1.2.7.5 Nombre de minutes passées à inclure (TodoFilterNbMinPast)

	ibre a ricares ratares a irreare proraire grosarry	16		
Non	bre de minutes passées à inclure (Horaire glissant)	5		
Etal TodoFilterNbMinPast (Nombre de minutes passées à inclure (Horaire glissant)) ns				
Type de soins a inclure (elements de soin/Iplanification infirmiere/IPlan de soin) - 1/11/11/11				

Ce paramétrage détermine la durée passée à afficher quand la plage horaire est en horaire glissant.


5.1.2.7.6 Etat des soins à inclure (TodoFilterEtatSoin)

Etat des soins à inclure	Tous les soins
Type de soins à inclure (elements de soin Unlanification infirmière Plan de soin)	"1 1 1 "
TodoFilterEtatSoin (Etat des soins à inclure)	

Ce paramétrage permet de cocher le filtre Etats de soins utilisé :

- 0=Tous les soins
- 1=Uniquement les soins en retard
- 2=Uniquement les soins urgents

5.1.2.7.7 Type des soins à inclure (TodoFilterTypeSoin)

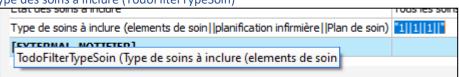

Ce paramétrage permet de cocher le filtre **Types de soins** utilisé avec l'ordre suivant « Éléments de soin(=**Equipements/pansements**)||**Planification infirmière**||Plan de soin(=**Prescriptions**) » et la valeur **1** pour sélectionner le type de soin et **0** pour ne pas le sélectionner.

5.1.2.8 Configuration de l'impression du plan de cueillette

Il est possible de paramétrer les informations du patient affichées dans le plan de cueillette Semi-Global avec la clé de paramétrage **Masque d'affichage du plan de cueillette semi global**

Cette clé permet de sélectionner les informations concernant le patient dans le plan de cueillette semi-global.

Les informations possibles sont les suivantes :

<patientnompatro></patientnompatro>	Nom de naissance du patient
<patientnommarit></patientnommarit>	Nom usuel du patient
<patientprenom></patientprenom>	Prénom du patient
<patientsexe></patientsexe>	Sexe du patient (M ou F)
<patientage></patientage>	Age du patient (incluant l'unité)
<patientdatenaiss></patientdatenaiss>	Date de naissance du patient au format régional du système d'exploitation
<currentlocation></currentlocation>	Localisation du patient
<patientipp></patientipp>	IPP du patient

^

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Le paramétrage par défaut (utilisé dans le cas où toutes les balises sont supprimées) est : <PATIENTNOMMARIT> <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTPRENOM> <PATIENTIPP> <CURRENTLOCATION>

Il est possible de saisir du texte libre dans le paramétrage et ce texte est intégré aux informations affichées dans le plan de cueillette semi global.

Exemple: "<PATIENTNOMMARIT> <PATIENTPRENOM> Sexe: <PATIENTSEXE> (IPP: <PATIENTIPP>)" = "Nom Prénom Sexe: M (IPP: XXXXXXXX)"

5.1.3 Visual

Application ou module à paramètre : Visual Recherche d'un paramètre Champ(s) à considérer pour la recherche Tous Texte à rechercher O vers le bas Vers le haut Différender Min/Maj Mot entier Configuration du paramètre Valeur du paramètre Valeur du paramètre Configuration générale de Visual Gestion des pousses-seringue [DEBUG] Fiche de sortie/fermeture de dossier Position et taille de la fenêtre, utilisé si la clé Maximized <> 1 Feuille d'ouverture et fiche inter patient Signatures Avertissements Actions importantes Configuration des couleurs de Visual [PRESCRIPTION] Mouvement du personnel Évènements automatiques lors de l'ouverture et la fermeture d'un dossier Graphique des médicaments Configuration de la fenêtre de sélection de patient Configuration de la fenêtre de sélection de patient en salle de réveil	Paramétrage de l'application				
Texte à rechercher Tous		sual		2mporter an parametrage	
Configuration générale de Visual Gestion des pousses-seringue [DEBUG] Fiche de sortie/fermeture de dossier Position et taille de la fenêtre, utilisé si la clé Maximized <> 1 Feuille d'ouverture et fiche inter patient Signatures Avertissements Actions importantes Configuration des couleurs de Visual [PRESCRIPTION] Mouvement du personnel Évènements automatiques lors de l'ouverture et la fermeture d'un dossier Graphique des médicaments Configuration de la fenêtre de sélection de patient Configuration de la fenêtre de sélection de patient Configuration de la fenêtre de sélection de patient en salle de réveil Configuration de la fenêtre de saisie manuelle de paramètre de ventilation	Champ(s) à considérer pour la recherche		- Nochardia	Configuration avancée	
Gestion des pousses-seringue [DEBUG] Fiche de sortie/fermeture de dossier Position et taille de la fenêtre, utilisé si la clé Maximized <> 1 Feuille d'ouverture et fiche inter patient Signatures Avertissements Actions importantes Configuration des couleurs de Visual [PRESCRIPTION] Mouvement du personnel Évènements automatiques lors de l'ouverture et la fermeture d'un dossier Graphique des médicaments Configuration de la fenêtre de sélection d'intervention Configuration de la fenêtre de sélection de patient Configuration de la fenêtre de sélection de patient en salle de réveil Configuration de la fenêtre de saisie manuelle de paramètre de ventilation	Description du paramètre		Valeur du paramètre		
Configuration de la fenêtre de sélection d'intervention Configuration de la fenêtre de sélection de patient Configuration de la fenêtre de sélection de patient en salle de réveil Configuration de la fenêtre de saisie manuelle de paramètre de ventilation	Configuration générale de Visual Gestion des pousses-seringue [DEBUG] Fiche de sortie/fermeture de dossier Position et taille de la fenêtre, utilisé s Feuille d'ouverture et fiche inter patier Signatures Avertissements Actions importantes Configuration des couleurs de Visual [PRESCRIPTION] Mouvement du personnel Évènements automatiques lors de l'ou	nt		Propriétés du paramètre : Configuration générale de Visual Type de saisie : Section	
[COULEUR] ☐ Lecture seule Connexion à distance	Configuration de la fenêtre de sélectio Configuration de la fenêtre de sélectio Configuration de la fenêtre de sélectio Configuration de la fenêtre de saisie m Configuration de la fenêtre de saisie de [COULEUR]	on de patient on de patient en salle de réveil nanuelle de paramètre de ventilation		Nombre de caractères maximum :	
[CTMOCCAM]				Ok X Annuler	
G G Allide	Clé actuelle : [GENERAL]		E En		

5.1.3.1 Configuration générale de Visual

5.1.3.1.1 Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage du per et/ou postopératoire (ConfigurePoste)

Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage du per et/o 1

ConfigurePoste (Demander la confirmation de l'emplacement du poste au démarrage du per et/ou postopératoire)

Delai en minutes a attendre avant la deconnexion de l'utilisateur en cours 110

Ce paramétrage demande la confirmation du bon emplacement de l'ordinateur : ceci est pertinent notamment pour les postes de secours. Cette demande de positionnement se fera si l'ouverture se fait directement par le raccourci Visual (raccourci permettant d'accéder directement à l'application sans passer par le portail **DIANE**).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.1.3.1.2 Délai en minutes avant fermeture automatique de l'application du per et/ou postopératoire (AutoCloseTime)

Délai en minutes à attendre avant la fermeture automatique de l'application per 120

AutoCloseTime (Délai en minutes à attendre avant la fermeture automatique de l'application per et/ou postopératoire)

Ce paramétrage permet de définir le délai (en minutes) avant la fermeture automatique de l'application. Ceci est pertinent pour les salles d'opération, mais il faut faire attention aux salles qui ont besoin d'un temps d'inactivité plus long.

5.1.3.1.3 Délai en minutes à attendre avant déconnexion de l'utilisateur en cours (AutoDelogTime)

Г		
	Délai en minutes à attendre avant la déconnexion de l'utilisateur en cours	110
	AutoDelogTime (Délai en minutes à attendre avant la déconnexion de	l'utilisateur en cours)

Ce paramétrage permet de définir le délai (en minutes) avant la déconnexion de l'utilisateur en cours. Ceci est pertinent en SSPI pour encourager les utilisateurs à se loguer correctement.

5.1.3.1.4 Empêcher la création de patients non rattachés au SIH (CannotCreateDIAPat)

Empêcher la création de patients non rattachés au SIH	Création autorisée
El CannotCreateDIAPat (Empêcher la création de patients non rattac	
Case "Imprimer le dossier" cochée par détaut en sortie de salle	En réanimation (Dossier en écriture et clôture)

Ce paramétrage permet d'autoriser (avec ou sans confirmation) ou non la création de patients qui ne sont pas rattachés au SIH. Pour les salles accueillant des urgences, il est recommandé de ne pas bloquer la création.

Création autorisée Création bloquée Confirmation demandée

5.1.3.1.5 Empêcher la modification des données provenant du SIH (Cannot Modify SIHD ata)

Empêcher la modification des données provenant du SIH Modification autorisée si IPP non renseigné					
					CannotModifySIHData (Empêcher la modification des données provenant du SIH) pn (Dossier en écriture et dôture)
Type de document denere umpression du export automatique à la cipture provenant du Sin)					

Ce paramétrage permet d'autoriser ou non les modifications des données provenant du SIH. Si la modification est bloquée, toute modification sera « effacée » à la réouverture du dossier, les données du SIH sont alors reprises.

Modification toujours autorisée Modification autorisée si IPP non renseigné Modification toujours bloquée

5.1.3.1.6 Case « Imprimer le dossier » cochée par défaut en sortie de salle (AutoPrintOnExit)

	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I
Case "Imprimer le dossier" cochée par défaut en sortie de salle	En réanimation (Dossier en écriture et dôture)
AutoPrintOnExit (Case "Imprimer le dossier" cochée par défaut en sor	tie de salle)

Ce paramétrage coche par défaut la case Imprimer le dossier en sortie de salle.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.1.3.1.7 Durée maximum en heures d'une intervention (IntervTimeLimit)

Durée maximum en heures d'une intervention	
IntervTimeLimit (Durée maximum en heures d'une intervention)	24

Ce paramétrage détermine la durée maximale d'une intervention : classiquement la durée est inférieure à 24 heures, mais il faut modifier ce paramétrage pour les salles d'obstétrique.

5.1.3.1.8 Durée maximum en heures d'une reprise d'intervention (RepriseTimeLimit)

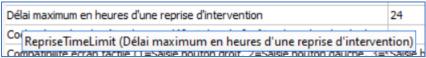

Ce paramétrage détermine la durée pendant laquelle il est possible de reprendre une intervention terminée.

Le temps se décompte à partir de la clôture du dossier.

Attention, si cette clé et la précédente peuvent être en concurrence. Par exemple, un dossier est clôturé au bout de 12 heures de présence (Bloc + SSPI). Si la reprise se fait 13 heures après la clôture, soit 25 heures après le début de l'intervention, elle ne pourra avoir lieu car la durée d'intervention sur un même dossier aura dépassé les 24 heures de la clé **Durée maximum en heures d'une intervention**.

Dans ce cas, il est vivement conseillé de créer un nouveau dossier.

5.1.3.1.9 Cocher la recherche étendue par défaut dans la fenêtre de recherche de drogues (SearchDrogueEtendue)

```
Cocher la recherche étendue par défaut dans la fenêtre de recherche de drogu 0

C SearchDrogueEtendue (Cocher la recherche étendue par défaut dans la fenêtre de recherche de drogues)
```

Ce paramétrage est classiquement à 0.

5.1.3.2 Fiche de sortie/fermeture de dossier

5.1.3.2.1 Choix de transfert de salle disponibles (ConfigurePoste)

one and a contract of the particle of the part	
Choix de transfert de salle disponibles	"1 3 5,5"
Der TransferChoices (Choix de transfert de salle disponibles)	1

Ce paramétrage permet de choisir les types de salles qui seront proposés pour le transfert lors de la fermeture du dossier (à mettre en corrélation avec le périmètre de DIANE) :





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Le clic sur le bouton affiche la fenêtre de paramétrage suivante :

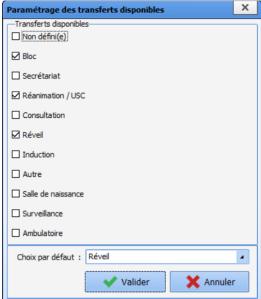

5.1.3.3 Signatures

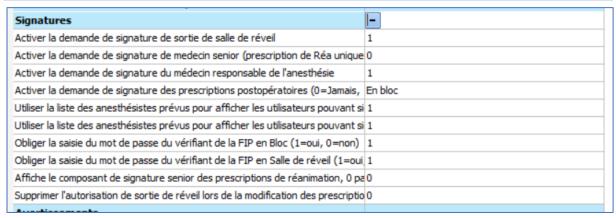

5.1.3.4 Configuration de la fenêtre de saisie de donnée manuelle

Configuration de la fenêtre de saisie de donnée manuelle	
Liste des paramètres à afficher	our)##15 450=Poids (Poids du patient)##37 "
ParamList (Liste des paramètres à afficher)	1
restances (este des parametres à arretres)	

Ce paramétrage permet de configurer la fenêtre de saisie de saisies manuelles :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 269 / 419



Le clic sur le bouton affiche la fenêtre de paramétrage suivante :



Il est alors possible d'ajouter ou de retirer des données du menu déroulant Choix du paramètre ou du groupe :

```
Ratio t4/t1 NMT
T° Rectale
Dextro
Hemocue
Nombre de TOF (Train Of Four)
Poids (Poids du patient)
T-Oeso
T-Peau
T-Tymp
```

Si la case **Afficher tous les paramètres** est cochée, cette sélection n'est plus prise en compte, tous les paramètres sont alors affichés.

5.2 Configuration de l'export en mode dégradé

Le paramétrage de l'export des documents dans le dossier dégradé s'effectue dans l'onglet Paramétrages – **Export.**



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com


Site Internet: www.bowmedical.com

CE

BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

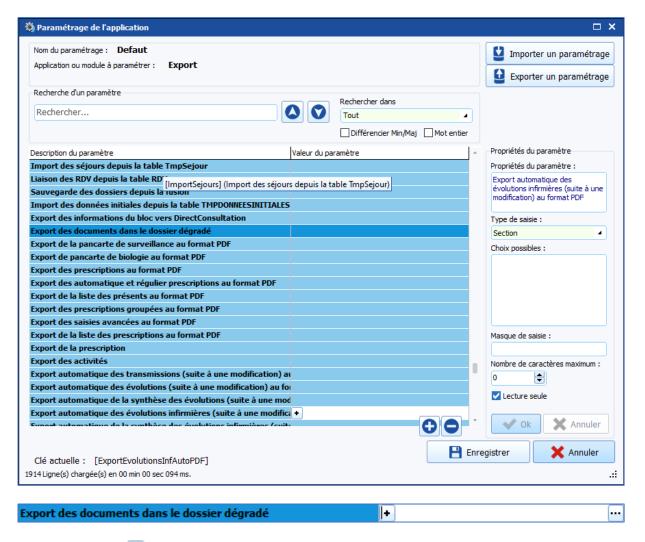

Le clic sur le bouton en fin de ligne permet d'ouvrir une fenêtre de paramétrage.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

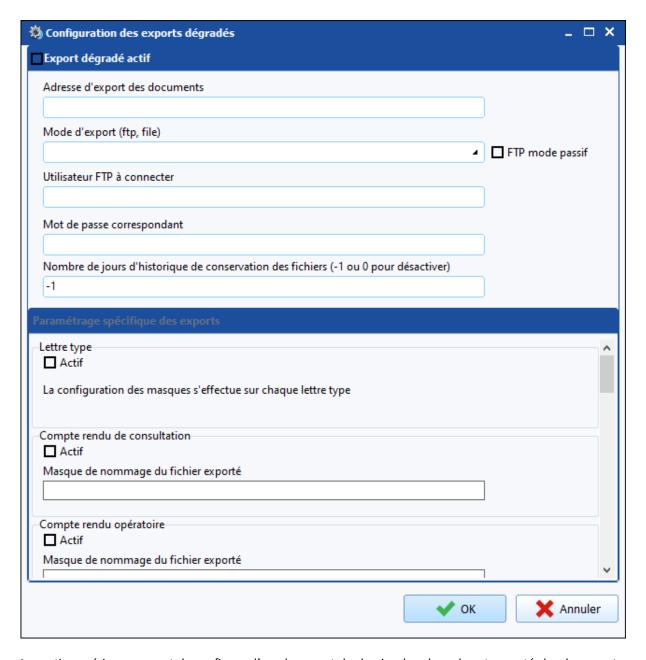

La partie supérieure permet de configurer l'emplacement du dossier dans lequel sont exportés les documents, en mode File ou FTP. Ainsi que le nombre de jours pendant lesquels les fichiers sont conservés.

La partie inférieure est modifiable uniquement si la case **Export dégradé actif** est cochée et elle permet de sélectionner les documents à exporter automatiquement dans le dossier dégradé ainsi que de déterminer un masque de nommage du fichier exporté. Pour les lettres type, le masque se configure pour chaque lettre type dans l'onglet **Lettres Type**.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com


Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

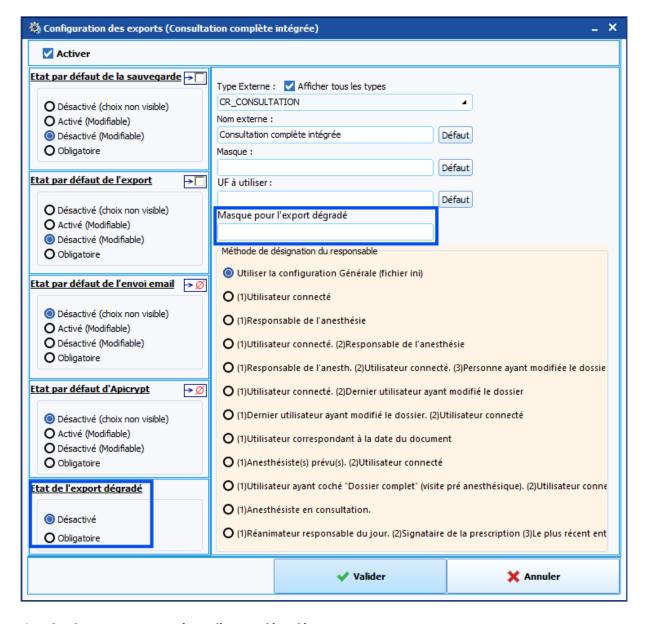

Liste des documents concernés par l'export dégradé :

- Lettres type
- Compte-rendu de consultation
- Compte-rendu opératoire
- Compte-rendu de réanimation
- Prescription à la signature
- Prescriptions à intervalle régulier
- Transmissions
- Evolutions
- Synthèse des évolutions
- Evolutions infirmières
- Synthèse des évolutions infirmières
- Examens à l'admission
- Examens paracliniques
- Histoire de la maladie
- Plan de soins



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Tags proposés pour les masques de nommage :

- <DATENOW:yyyymmddhhMM> : date de l'export
- <IPP>: Identifiant Patient Permanent
- <IDINT> : Identifiant de dossier DIANE
- <IDLT> : Identifiant du document exporté (pour les lettres type)

Pour l'export de la prescription à intervalle régulier et pour l'export du plan de soins, il faut configurer l'intervalle de temps (en secondes) entre 2 exports.

	<u> </u>	
Plan de soins		
Actif	Intervalle de génération (en secondes) 60	
Masque de no	mmage du fichier exporté	
PDS <ipp></ipp>		

5.3 Configurer les actions importantes

La gestion des éléments bloquants et des éléments importants est primordiale pour obtenir un bon équilibre entre obligations légales de certains éléments et facilité d'utilisation du logiciel.

Pour définir les **items bloquants et importants** dans **DIANE ANESTHESIE**, il faut ouvrir la configuration et choisir **Paramétrages / Visual**. Le même paramétrage est possible pour **DIANE REA** (Paramétrages / DianeRéa)

Cette fenêtre de paramétrage s'ouvre :

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

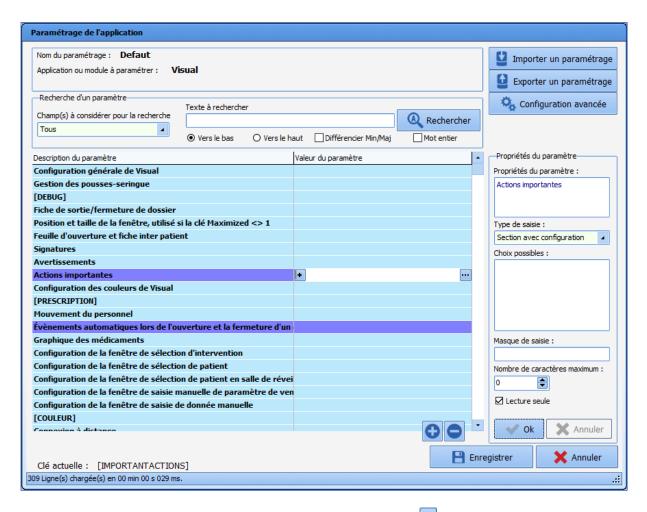

Choisir la première ligne violette **Actions Importantes** et cliquer sur le bouton **u** sur la droite de la ligne.

La fenêtre Configuration des événements importants s'ouvre :

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

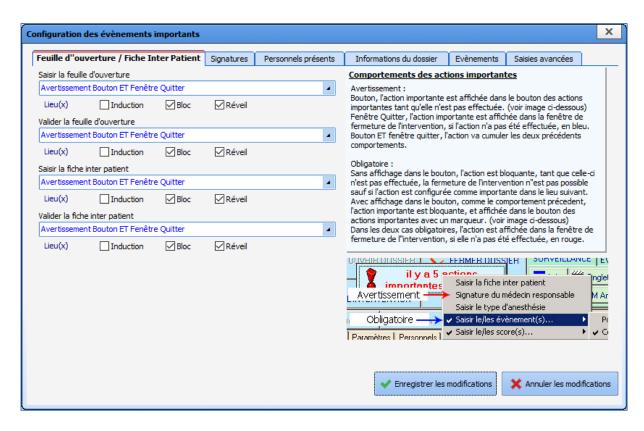

Pour chacun des items, il y a six choix de niveau d'importance (un seul choix possible) :

Désactivé	L'item n'est ni important ni bloquant : il n'a pas
	d'influence à la fermeture du dossier
Avertissement Bouton	L'item important apparaît dans le bouton clignotant rouge
	du bandeau haut du bloc mais il n'est pas bloquant
Avertissement Fenêtre Quitter	La mention de l'importance de l'item apparaît dans la
	fenêtre de sortie du patient sans être bloquant
Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter	La conjonction des deux niveaux précédents : il n'est
	toujours pas bloquant
Obligatoire sans affichage dans le bouton	L'item doit obligatoirement être renseigné. Sans affichage
	dans le bouton clignotant rouge du bandeau haut du bloc.
	La seule mention de l'obligation apparaît dans la fenêtre
	de sortie du patient
Obligatoire avec affichage dans le bouton	L'item doit obligatoirement être renseigné. L'obligation
	est mentionnée à la fois dans le bouton clignotant rouge
	et dans la fenêtre de sortie du patient

5.3.1 Feuille d'ouverture / Fiche Inter Patient

Cet onglet concerne les feuilles d'ouverture de salle et des fiches inter patient.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

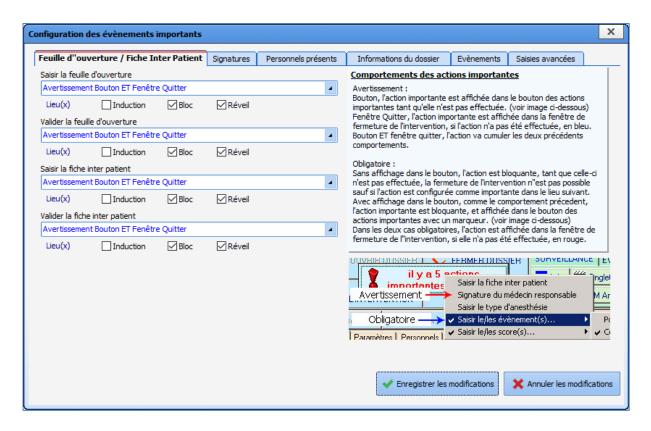

Il y a 4 items à configurer :

Saisir de la feuille d'ouverture	Signature de la personne qui vérifie la salle et son équipement à l'ouverture de la salle
La validation de la feuille d'ouverture	Signature du médecin qui engage sa responsabilité
La saisie de la fiche inter patient	Signature de la personne qui vérifie la salle et son
	équipement entre deux patients
La validation de la fiche inter patient	Signature du médecin qui engage sa responsabilité

Pour chacun de ces items, il faut choisir le niveau d'importance (un seul choix possible) : **Désactivé**, **Avertissement Bouton**, **Avertissement Fenêtre Quitter**, **Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter**, **Obligatoire sans affichage dans le bouton** ou **Obligatoire avec affichage dans le bouton**.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) - type(s) de salle - appliquer ce paramétrage :

Induction Bloc

Réveil

5.3.2 Signatures

Cet onglet permet de paramétrer les obligations médico-légales.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 277 / 419

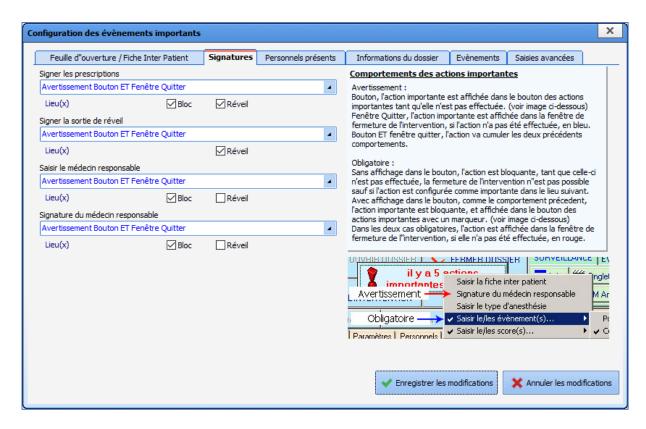

Il est possible de configurer quatre items :

Signature du médecin responsable	Suggère ou oblige la signature du médecin responsable
	l'opération <i>Cf : Responsabilité Anesthésie</i>
Saisir le médecin responsable	Suggère ou oblige qu'un anesthésiste soit défini pendant
	pour que le patient puisse sortir de salle de réveil
Signer la sortie de réveil	Suggère ou oblige un anesthésiste d'apposer sa signature
Signer les prescriptions	Suggère ou oblige la signature des prescriptions

Pour chacun de ces items, il faut choisir le niveau d'importance (un seul choix possible) : **Désactivé**, **Avertissement Bouton**, **Avertissement Fenêtre Quitter**, **Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter**, **Obligatoire sans affichage dans le bouton** ou **Obligatoire avec affichage dans le bouton**.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) - type(s) de salle - appliquer ce paramétrage :

Bloc

Réveil

5.3.3 Personnels présents

Cet onglet permet le paramétrage des personnels devant être renseignés dans un dossier patient.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 278 / 419

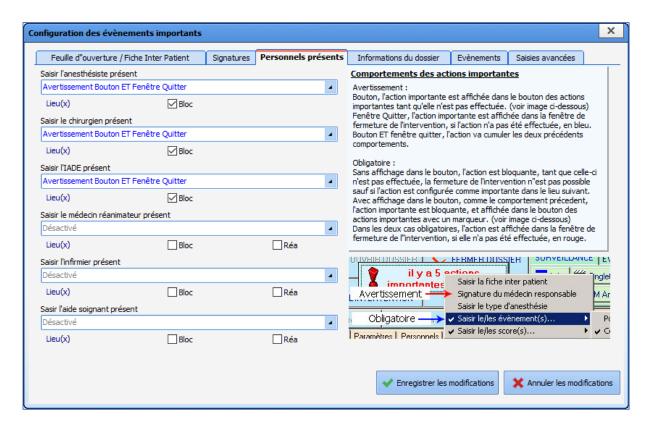

Il est possible de configurer six items :	
Saisir l'anesthésiste présent	Suggère ou oblige la saisie d'un anesthésiste présent pendant
	l'intervention
Saisir le chirurgien présent	Suggère ou oblige la saisie d'un chirurgien présent pendant
	l'intervention
Saisir l'IADE présent	Suggère ou oblige la saisie d'un IADE présent pendant
	l'intervention
Saisir le médecin réanimateur présent	Suggère ou oblige la saisie d'un médecin réanimateur présent
	pendant l'intervention ou la réanimation
Saisir l'infirmier présent	Suggère ou oblige la saisie d'un infirmier présent pendant
	l'intervention ou la réanimation
Saisir l'aide-soignant présent	Suggère ou oblige la saisie d'un aide-soignant présent
	pendant l'intervention ou la réanimation

Cela permet de pallier le cas où ces informations n'ont pas été entrées au préalable dans une consultation et les cas d'urgence.

Pour chacun de ces items, il faut choisir le niveau d'importance (un seul choix possible) : **Désactivé**, **Avertissement Bouton**, **Avertissement Fenêtre Quitter**, **Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter**, **Obligatoire sans affichage dans le bouton** ou **Obligatoire avec affichage dans le bouton**.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) - type(s) de salle - appliquer ce paramétrage : **Bloc**

Réa (Réanimation ou USC)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Informations du dossier 5.3.4

Cet onglet permet d'entrer les informations marquantes du dossier.

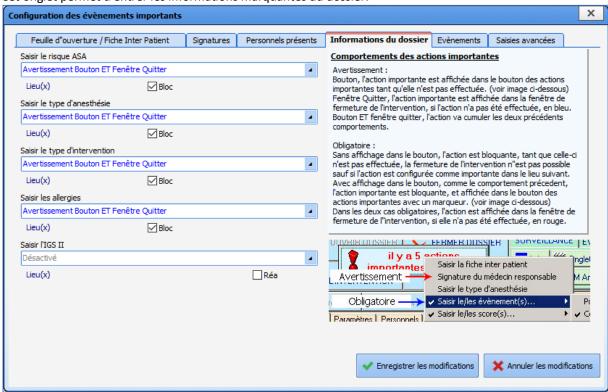

Il est possible de configurer cinq items :

Saisir le risque ASA	Suggère ou oblige que le score ASA soit noté (l'ASA peut être renseigné en consultation)
Saisir le type d'anesthésie	Suggère ou oblige que le type d'anesthésie soit noté (le type d'anesthésie peut être suggéré en consultation)
Saisir le type d'intervention	Suggère ou oblige que le type d'intervention soit noté (le type d'intervention provient de la consultation)
Saisir les allergies	Suggère ou oblige qu'une allergie soit a minima notée (prévoir une entrée pas d'allergie pour ne pas bloquer les utilisateurs)
Saisir l'IGS II	Suggère ou oblige la saisie de l'IGS II

Pour chacun de ces items, il faut choisir le niveau d'importance (un seul choix possible) : Désactivé, Avertissement Bouton, Avertissement Fenêtre Quitter, Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter, Obligatoire sans affichage dans le bouton ou Obligatoire avec affichage dans le bouton.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) – type(s) de salle – appliquer ce paramétrage :

Bloc	Sauf pour Saisir l'IGS II
Réa (Réanimation ou USC)	Uniquement pour Saisir l'IGS II

5.3.5 Événements

Cet onglet permet de configurer des événements importants ou bloquants.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 280 / 419

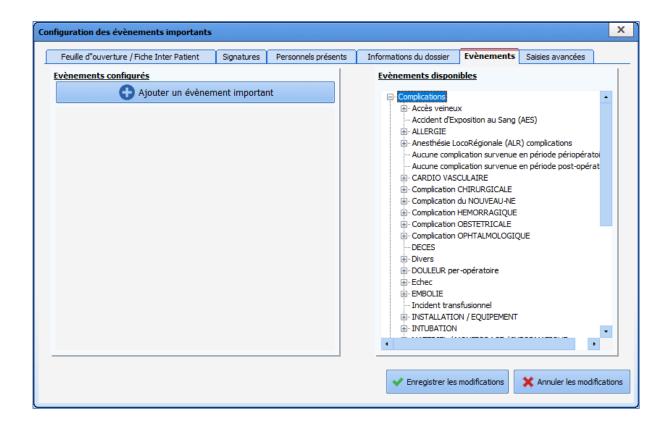

Pour ajouter un évènement important ou bloquant, il faut cliquer sur le bouton **Ajouter un évènement important**.

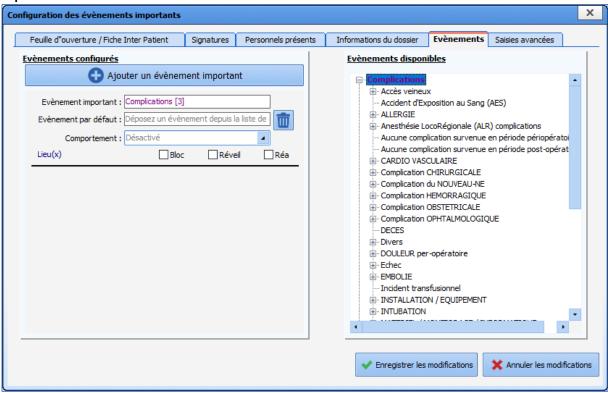

Dans l'exemple ci-dessus, la catégorie d'évènement Complications a été glissée-déposée dans la case à



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 281 / 419

gauche intitulée **Évènement important** (le nombre 3 entre crochets est un identifiant interne permettant de s'assurer de l'absence de doublons liée à de l'homonymie).

Pour suggérer aux utilisateurs une saisie rapide de complication, il est possible de glisser-déposer l'une des complications sous-jacentes.

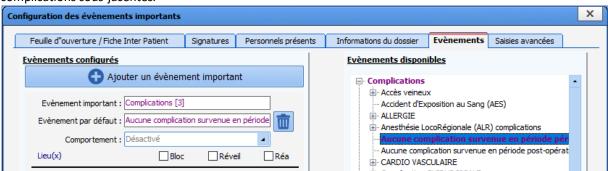

Pour chacun de ces items, il faut choisir le comportement (niveau d'importance) : Désactivé, Avertissement Bouton, Avertissement Fenêtre Quitter, Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter, Obligatoire sans affichage dans le bouton ou Obligatoire avec affichage dans le bouton.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) - type(s) de salle - appliquer ce paramétrage :


Bloc

Réveil

Réa (Réanimation ou USC)

5.3.6 Saisies avancées

Cet onglet permet de configurer des saisies avancées importantes ou bloquantes.

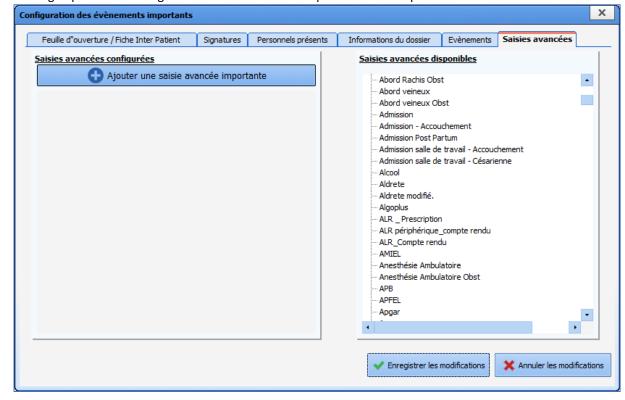



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 282 / 419

Pour ajouter une saisie avancée importante ou bloquante, il faut cliquer sur le bouton **Ajouter une saisie** avancée importante.

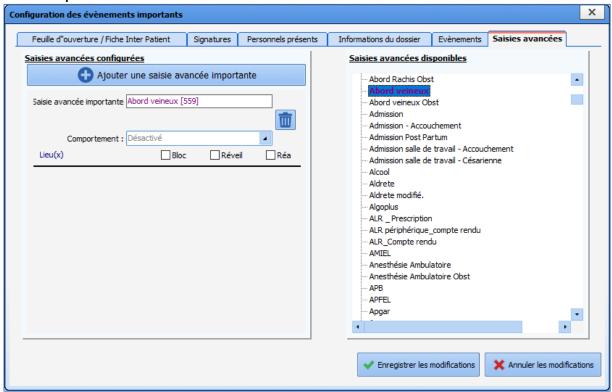

Dans l'exemple ci-dessus la saisie avancée **Abord veineux** a été glissée-déposée dans la case à gauche intitulée **Saisie avancée importante** (le nombre 559 entre crochets est un identifiant interne permettant de s'assurer de l'absence de doublons liée à de l'homonymie).

Pour chacun de ces items, il faut choisir le comportement (niveau d'importance) : Désactivé, Avertissement Bouton, Avertissement Fenêtre Quitter, Avertissement Bouton et Fenêtre Quitter, Obligatoire sans affichage dans le bouton ou Obligatoire avec affichage dans le bouton.

Deux autres comportements sont possibles :

A l'ouverture du dossier Le dossier ne peut pas être ouvert tant que la saisie avancée n'a pas été complétée.

A l'ouverture du dossier (différable)

Il est demandé à l'utilisateur de compléter la saisie avancée avant l'ouverture du dossier, mais il est possible de différer cette saisie : le dossier peut être ouvert mais la saisie avancée devra obligatoirement être complétée pour pouvoir fermer le dossier.

Il est enfin possible de choisir à quel(s) lieu(x) - type(s) de salle - appliquer ce paramétrage :

Bloc

Réveil

Réa (Réanimation ou USC)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 283 / 419

5.3.7 Enregistrement des modifications

Pour que les modifications soient prises en compte, elles doivent être enregistrées en cliquant sur le bouton **Enregistrer les modifications** de la fenêtre **Configuration des éléments importants**.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.4 Modifier la durée maximale d'une intervention

Configuration générale de Visual >> Durée maximum en heures d'une intervention -> Renseigner la durée souhaitée.

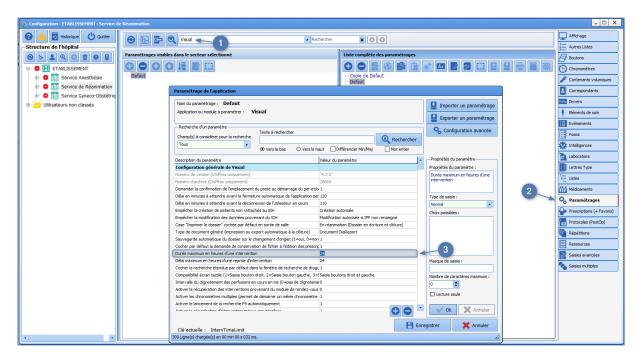

5.5 Paramétrage des données transmises à la base de données sur les médicaments

Le calcul des interactions et des alertes est adapté au patient, il prend en compte son poids, sa taille, sa date de naissance, son sexe, le nombre de semaines d'aménorrhée, l'insuffisance hépatique, l'allaitement, la clairance de la créatinine, ses antécédents et ses allergies.

Champs Diane utilisés :

Date de naissance	Patient – Date de naissance du patient
Sexe	Patient – Sexe du patient
Poids	Donnée manuelle Poids du patient la plus récente
Taille	Donnée manuelle Taille la plus récente
Semaine d'aménorrhée	Données d'obstétrique 1 – Semaine aménorrhée saisie manuellement
Allaitement	Données d'obstétrique 1 – Allaitement
Clairance de la créatinine	Information patient – Clairance de la créatinine
Allergies	Antécédent – Allergique
Pathologies	Antécédent – Médicaux actifs ou Antécédent - Familiaux



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 285 / 419


5.6 Configuration du mécanisme de reprise (Consultation)

La reprise des informations de la consultation peut s'opérer de différentes manières en fonction de la configuration enregistrée. Elle peut être manuelle, automatisée ou dissociée en trois niveaux. Cette souplesse permet d'obtenir le résultat qui convient le mieux.

5.6.1 Le niveau de reprise et reprise manuelle

A l'utilisation :


Si cette option a été paramétrée, la fenêtre suivante apparaît :

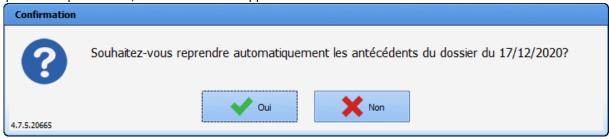

Il existe la possibilité de récupérer l'information d'anciens dossiers grâce au bouton **Reprise**. Ce bouton offre la possibilité de récupérer les éléments sur l'onglet actif.



En cliquant sur le bouton **Reprise**, une fenêtre de sélection va s'ouvrir et permet de spécifier la consultation/intervention dont on souhaite récupérer les informations.

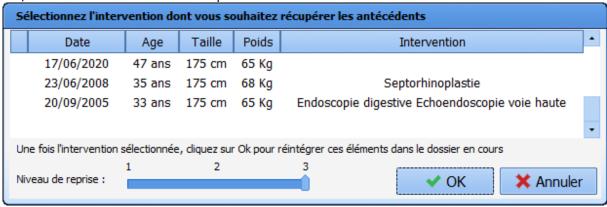

Une fois le niveau de reprise validé (à 1, 2 ou 3), l'onglet courant se modifie et des cases à cocher sont ajoutées à la plupart des composants de la page.

Dans l'exemple ci-dessous, si la case pointée par la flèche est décochée, cela revient à décocher toutes les cases du composant Antécédents chirurgicaux : l'ensemble des cases à cocher du composant seront automatiquement décochées et aucun des items concernés ne sera repris. Si, par exemple, seule la case de la ligne **Septorhinoplastie** est décochée, seul cet item ne sera pas repris.



43, Avenue d'It

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

BOW MEDICAL SAS


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

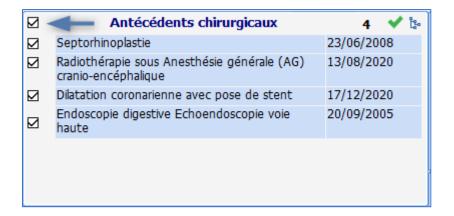

En configuration :

Dans l'onglet **Affichage**, le niveau de sensibilité à la reprise des différents champs de la consultation est paramétrable.

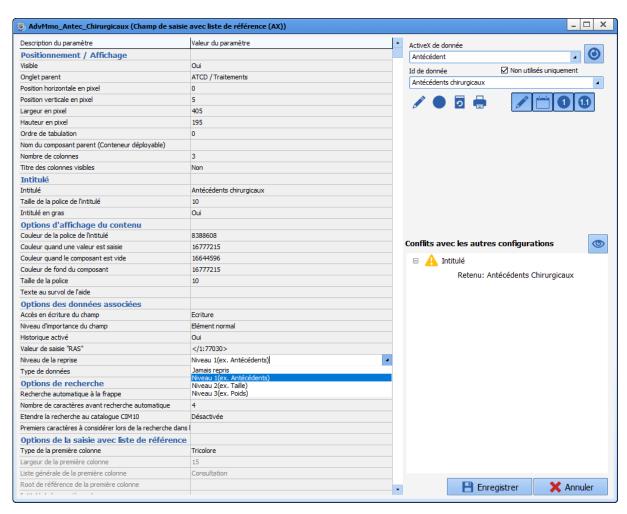

Le niveau 0 représente les données à ne jamais reprendre. Exemple : la prémédication.

Le niveau 1 représente les données stables dans le temps. Exemple : les antécédents.

Le niveau 2 représente les données variant peu dans le temps. Exemples : la taille, le médecin traitant.

Le niveau 3 représente les données les plus changeantes. Exemples : le poids, le traitement habituel et



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 287 / 419

ses relais.

5.6.2 Paramétrer le Mécanisme de Reprise

Dans l'onglet Paramétrages, 3 clés gèrent le fonctionnement de la reprise dans la consultation.

[&]quot;Niveau de reprise à partir duquel les items sont repris dans la consultation"

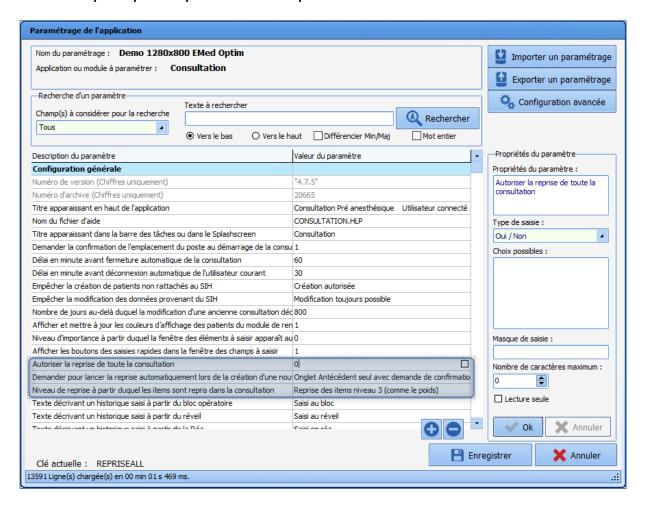

- "Autoriser la reprise de toute la consultation": la valeur 0 représente Non alors que la valeur 1 représente Oui.
- "Demander pour lancer la reprise automatiquement lors de la création d'une nouvelle intervention": Propose (ou pas) à l'utilisateur de reprendre la consultation précédente. Pour les valeurs possibles, il existe les choix suivants:
 - Inactif
 - Onglet Antécédent seul avec demande de confirmation
 - Onglet Antécédent seul invisible



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 288 / 419

[&]quot;Autoriser la reprise de toute la consultation"

[&]quot;Demander pour lancer la reprise automatiquement lors de la création d'une nouvelle intervention"

- Toute la consultation avec demande de confirmation
- Toute la consultation silencieuse
- Choisir le dossier pour les antécédents
- O Choisir le dossier pour tout reprendre
- "Niveau de reprise à partir duquel les items sont repris dans la consultation": Niveau de reprise à partir duquel les items sont repris dans la consultation qui permet d'affiner le fonctionnement des deux premières clés évoquées ci-dessus. Les valeurs possibles sont 1, 2 ou 3.

5.7 Configuration du module de saisie rapide

Le module de saisie rapide sert à extraire des dossiers de consultation en fonction de requêtes. Ces dossiers sont alors présentés sous forme de liste dans lesquels il va être possible :

- D'accéder directement
- De compléter des informations sans l'ouvrir, en mettant en avant des champs pré paramétrés.

Ce module peut être intéressant pour faciliter la saisie de la VPA, pour accéder aux dossiers à staffer, pour trouver les dossiers incomplets.

Il faut noter que le remplissage d'un dossier sans l'ouvrir ne génère pas de nouvelle édition.

5.7.1 Ouverture de la configuration

La configuration est accessible via l'onglet **Paramétrages** en choisissant **Diane** dans le menu. Il faut cliquer sur le bouton



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com


Fax: +33 9 72 29 34 87




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

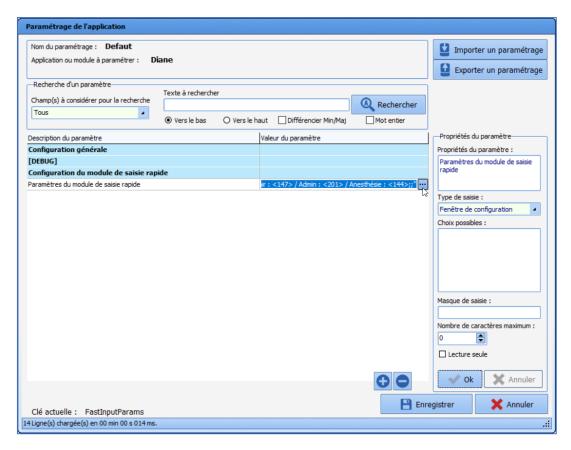

La fenêtre suivante s'ouvre :

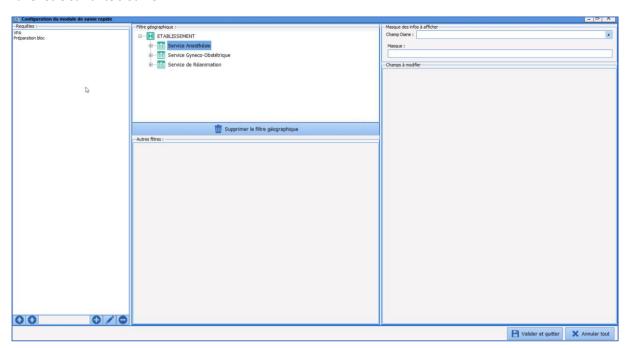



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 290 / 419

5.7.2 Présentation de la fenêtre de configuration

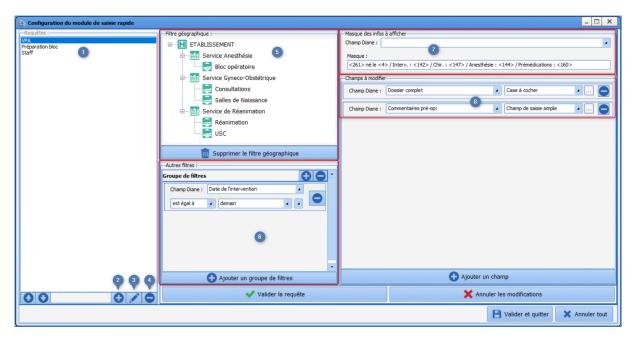

- 1. Liste des requêtes
- 2. Nouvelle requête
- 3. Modifier la requête sélectionnée
- 4. Supprimer la requête sélectionnée
- 5. Filtre géographique
- 6. Critères de sélection du dossier
- 7. Choix des champs qui apparaîtront à la sélection des patients
 - Sélectionner l'information souhaitée du dossier du patient dans le menu déroulant Champ Diane
 - Glisser-déposer dans le champ **Masque** (l'information apparaît sous forme d'un nombre entre chevrons (par exemple : <261>)
 - Ecrire littéralement le texte si besoin (par exemple : né le)
- 8. Choix des champs qui pourront être modifiés
 - Cliquer sur le bouton **Ajouter un champ** en bas à droite
 - Sélectionner le Champ Diane à modifier
 - Sélectionner le type de composant du champ sélectionné

Une fois la requête paramétrée, il faut la valider avec le bouton Valider la requête.

Le bouton **Valider et quitter** valide la configuration et ferme la fenêtre **Configuration du module de saisie**. Il faut ensuite cliquer sur le bouton **Enregistrer** de la fenêtre **Paramétrage de l'application**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

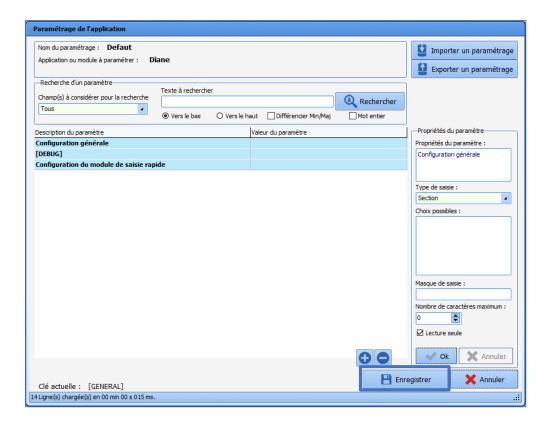

5.7.3 Configuration des filtres

Il est possible de configurer un ou plusieurs filtres et/ou groupe de filtres.

Pour apparaître, les dossiers doivent être vérifiés par au moins un des filtres de chaque groupe de filtres.



Dans cet exemple, les dossiers qui apparaîtront sont ceux dont la date d'intervention est aujourd'hui **OU** demain **ET** dont ANESTH Anna est l'anesthésiste en consultation **OU** l'anesthésiste prévue.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.8 Paramétrage du DiaReport

Le DiaReport permet de paramétrer la structure de la feuille d'anesthésie. Il est automatiquement exporté à la clôture du dossier **DIANE**. Pour rappel, lorsque le patient sort du circuit **DIANE**, il faut clôturer le dossier.

Choix des imprimantes : le logiciel récupère le paramétrage du poste. Pour ajouter ou modifier l'imprimante par défaut, il faut le faire dans **Windows**. **DIANE** proposera, par menu déroulant, les imprimantes paramétrées sur le poste.

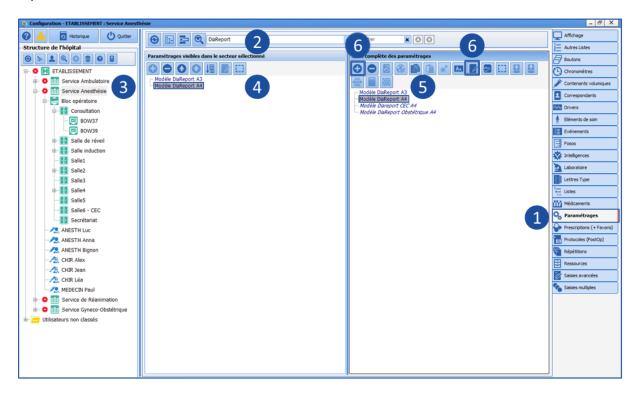

- 1. Onglet Paramétrages
- 2. Rubrique DiaReport
- 3. Choix du secteur (roue crantée)
- 4. DiaReport appliqué au secteur
- 5. Sélection du DiaReport à modifier
- 6. Editer le modèle existant ou créer un nouveau modèle

BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

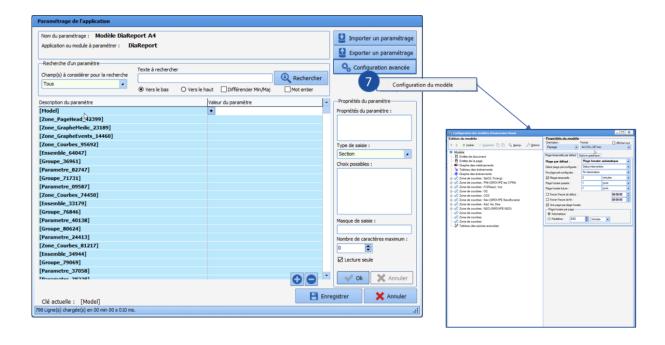

5.9 Gestion des verrous

5.9.1 Introduction

5.9.1.1 Généralités

Les verrous dans **DIANE** permettent de s'assurer qu'un même dossier patient ne soit pas ouvert en écriture à deux endroits différents.


Lors de l'ouverture d'un dossier patient en Consultation, Induction, Bloc, Réveil ou Réanimation, en écriture (donc pas en visualisation), on dispose alors du droit d'écriture exclusif pour ce dossier sur le poste où il a été ouvert.

Les verrous de **DIANE** fonctionnent de la sorte : lorsqu'un des dossiers d'un patient est ouvert en écriture, l'ensemble du dossier patient et de ses interventions le sont également, afin d'éviter des conflits de données si un autre utilisateur cherchait à y accéder depuis un autre ordinateur.

5.9.1.2 Comment se présentent les verrous ?

5.9.1.2.1 Dans les fenêtres de recherche

Lorsqu'un dossier patient est verrouillé ailleurs, une icône de verrou est visible en début de ligne dans la fenêtre de **Sélection d'un patient**, sous le libellé **DIA** :

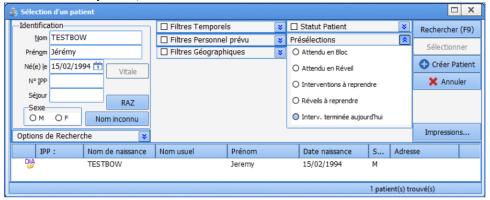



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 294 / 419

De même, concernant les interventions du patient, dans la fenêtre Sélection du dossier du patient :

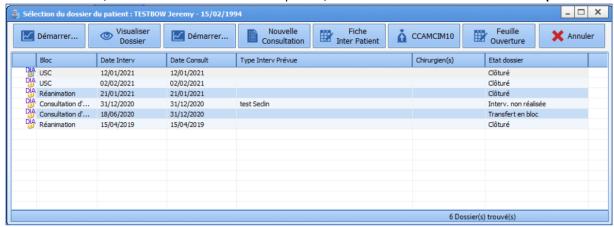

5.9.1.2.2 En Consultation

En consultation, si l'on ouvre un dossier verrouillé ailleurs, sans prendre les verrous (donc en ouvrant le dossier en lecture seule), le message suivant apparait pour le signaler :



Dans la partie haute de la fenêtre, au niveau de la liste des dossiers du patient, on peut constater plusieurs icônes possibles dans la première colonne :



Si l'icône est bleue, on ne dispose pas du droit d'écriture, principalement du fait du verrouillage du dossier ailleurs. Il est donc possible de rencontrer ces différentes icônes pour indiquer l'impossibilité d'éditer l'une des consultations visibles :



Il est possible d'obtenir plus de précision sur ces icônes en appuyant sur la touche





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 295 / 419


clavier alors que le logiciel **DIANE Consultation** est ouvert en premier plan. Cela ouvrira la fenêtre d'aide. Il suffit dès lors de se rendre à cet endroit de l'arborescence de l'aide pour trouver les informations mentionnées cidessus :

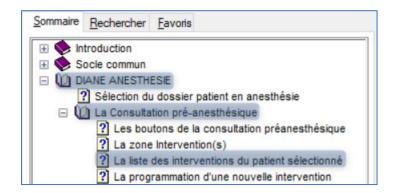

5.9.2 Outil de Gestion des verrous


5.9.2.1 Ouvrir l'outil

Sur le portail **DIANE**, cliquer sur le bouton **Impressions/Verrous** ou exécuter directement **MAJImpressions.exe**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner l'onglet **Gestion des verrous** : il s'agit de l'outil de gestion des verrous.

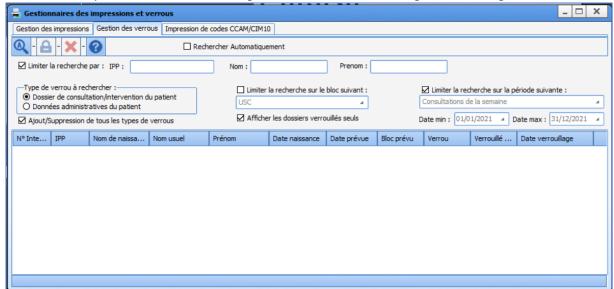

5.9.2.2 Effectuer une recherche

Dans cette fenêtre, se trouve une section pour les conditions de recherche :

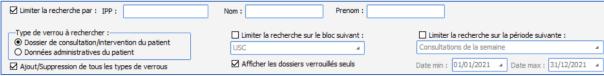

Dans le cadre de la recherche d'un « patient bloqué à déverrouiller », il est conseillé de :

1- Décocher les cases suivantes (utilisées en réalité pour l'onglet Gestion des impressions) :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 296 / 419

SC		t: ₄	Consultations de	nerche sur la période suivante : la semaine	
	her la case suivante : iser les champs suivan	Limiter la red			
IPP:		Nom:		Prenom:	

Cocher la case

✓ Afficher les dossiers verrouillés seuls

Dans le cadre de la recherche d'un « patient dont on souhaite s'attribuer le verrou », il suffit d'effectuer les mêmes actions, à ceci près qu'il faut décocher la case 🔲 Afficher les dossiers verrouillés seuls

Après avoir défini les conditions de recherche comme indiqué ci-dessus, il ne reste plus qu'à cliquer sur

le bouton de recherche

sauf si la case suivante est cochée


5.9.2.3 Libérer les verrous d'un dossier

Pour libérer les verrous d'un dossier patient, il faut s'assurer de bien faire apparaître toutes les lignes liées au patient. Dans la mesure du possible, pour éviter les erreurs, il faut éviter d'avoir plusieurs patients dans les résultats. Sinon, il faut faire très attention à ce qui est sélectionné pour ne pas rendre inutilisable un dossier ouvert ailleurs.

De plus, il faut s'assurer de sélectionner toutes les lignes d'un même patient. Par exemple, il faut faire ceci:




Et surtout pas n'en sélectionner qu'une, au prétexte de ne vouloir libérer que l'intervention à laquelle on souhaite accéder, auquel cas cela ne ferait que bloquer le dossier plus encore :

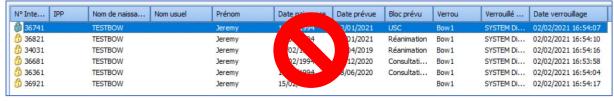

Pour sélectionner plusieurs lignes, il est possible de :

Cliquer sur la première ligne, puis en gardant la touche dernière pour surligner toutes les lignes affichées;

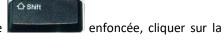

- Cliquer sur toutes les lignes à sélectionner en gardant la touche
- Cliquer avec la souris sous la liste de résultat et, sans relâcher le bouton de la souris, glisser vers le haut pour surligner les lignes une à une :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

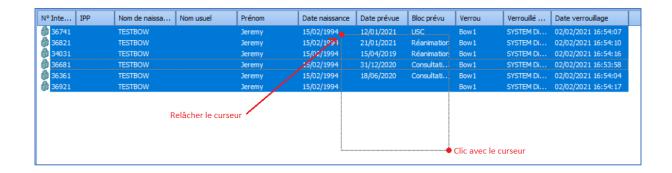

Une fois les lignes à déverrouiller sélectionnées, le bouton est maintenant dégrisé. Il est possible de cliquer dessus pour supprimer les verrous et rendre à nouveau le dossier patient et toutes ses interventions disponibles en écriture pour un autre ordinateur.

Il est également possible de faire un clic droit sur les lignes surlignées et sélectionner Retirer le(s) verrou(s) dans la sélection.

Nº Inte	IPP	Nom de naiss.	Nom usu	uel Prénom	Date naissance	Date prévue	Bloc prévu	Verrou	Verrouillé	Date verrouillage
√ 54	016352	TRAPAND		COLETTE	02-07-1942	14-09-2017	Unité de			
7585		COUCOUKER		Ca Va ?		18-08-2025	Bloc opér			
₫ 2	69713	ANGUERRAN		Charles	24-02-1976	11-09-2017	Unité de	TESTS-DI	CORSYN	01-07-2025 12:24:33
1	789854	TAVERNIER	X Retire	er le(s) verrou(s) dans la s	élection	23-08-2017	Unité de			
6507	100570	BOUQUIN		** =		01-04-2025	Bloc opér			
6508	100570	BOUQUIN		Christian	21-12-1947	27-03-2014	Bloc opér			
6510	100570	BOUQUIN		Christian	21-12-1947	28-03-2014	Bloc opér			
6637	100570	BOUQUIN		Christian	21-12-1947	16-04-2025	Bloc opér			

5.9.3 Configuration liée aux verrous

5.9.3.1 Priorisation des verrous

Il est possible, lorsque l'on souhaite ouvrir un dossier qui est verrouillé ailleurs, de s'attribuer les verrous du dossier au détriment des données en cours d'écriture sur l'autre poste.

Cependant, ce fonctionnement est en partie paramétrable. Il est possible de définir quels types de salle (Induction, Bloc, Réveil, Réanimation et autre) a la priorité sur les autres en matière de prise de verrou.

Pour cela, il faut se rendre dans le module de **Configuration Application**.

Sélectionner l'onglet Paramétrages (1), menu DiaServeur (2), cliquer sur la configuration à modifier (3), cliquer sur Éditer l'élément (4) :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

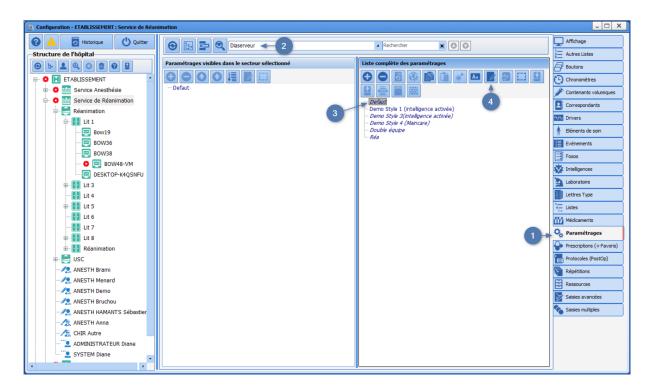

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner **Gestion des verrous** et cliquer sur le bouton bour dérouler la ligne :

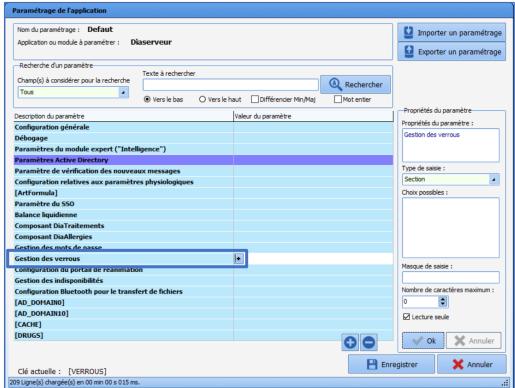

Sélectionner la ligne ainsi déroulée et cliquer sur le bouton en fin de ligne :

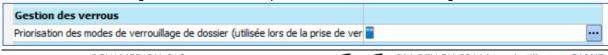



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

La fenêtre s'affiche:



Les lignes à l'intérieur du cadre central indiquent de bas en haut quel type de salle a la priorité sur les autres en matière de priorisation des verrous. Cela signifie par exemple, ici, que le bloc est prioritaire quand il s'agit de prendre le verrou d'un dossier, même si le dossier est actuellement ouvert en réveil.

Il est possible de modifier cet ordre en sélectionnant l'une des lignes et en cliquant sur les boutons juste en dessus selon cette utilisation :

Le premier bouton sert à remonter un item en première place instantanément.

Le deuxième bouton sert à remonter un item d'une seule place.

Le troisième bouton sert à descendre un item d'une seule place.

Le quatrième bouton sert à descendre un item en dernière place instantanément.

Un fois l'ordre final défini, il faut cliquer sur le bouton valider en bas de la fenêtre, puis sur le

bouton pour sauvegarder la configuration avec ce nouveau paramétrage. Il ne reste plus qu'à relancer DIANE sur les postes utilisant cette configuration.

5.9.3.2 Activer des logs pour surveiller les actions sur les verrous

Il est possible d'activer des logs (fichiers textes utiles pour l'analyse des problèmes rencontrés dans DIANE) pour surveiller les prises de verrous et les libérations de verrous. Cela peut servir à analyser ce qu'il s'est passé sur les postes clients lorsque des problèmes récurrents de verrous sont constatés. Ces logs sont désactivés par défaut.

Une fois activés, ces logs se génèrent dans le dossier **Diane/Data/*Nom du poste*/Log** du poste et peuvent être fournis à **Bow Médical** pour analyse.

Pour activer ces logs, il faut se rendre dans **Configuration Application**, onglet **Paramétrages**, menu **DiaServeur** pour sélectionner et éditer la configuration (voir chapitre précédent pour savoir comment faire ces étapes).

Une fois dans la fenêtre des clés de paramétrage, rechercher LogVerrou :

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

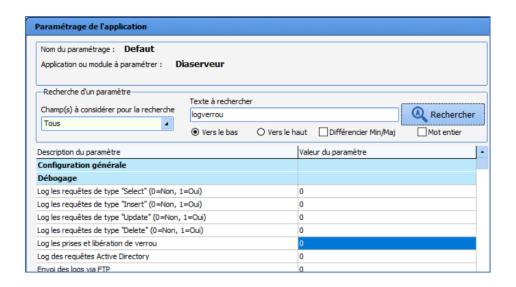


Puis modifier la valeur de la clé à « 1 » :

red ice induction on the printe for item's and	7	-	
Log les prises et libération de verrou		1	\square
		_	
Il ne reste plus qu'à cliquer sur	Enregistrer	et à relancer DIANE s	ur les postes utilisant cette
configuration.			,

5.9.4 Problèmes connus

5.9.4.1 Vol de verrous par un autre utilisateur

Si l'on souhaite forcer l'ouverture en écriture sur un autre poste que celui qui dispose des verrous, un message de ce type apparaitra :

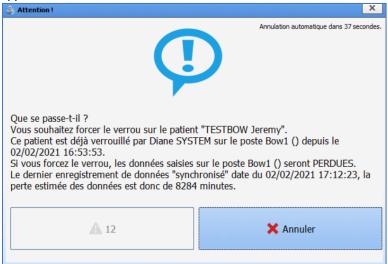

Au bout de 15 secondes, il prend cette forme :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 301 / 419



Cliquer sur le bouton avec le panneau jaune forcera la prise du verrou. Si le dossier était effectivement utilisé ailleurs, les autres utilisateurs feraient face à un message d'erreur et ne pourront plus travailler.

Si le dossier était bloqué sur un autre poste sans raison valable, c'est effectivement une solution pour reprendre la main sur le dossier, mais des pertes de données peuvent résulter de cette opération.

5.9.4.2 Verrou bloqué en bloc après transfert en SSPI

Il arrive parfois qu'à la suite d'un transfert de dossier du bloc vers la SSPI, le dossier ne puisse pas être ouvert en réveil car le verrou précédent n'a pas été correctement libéré.

Dans ce cas, il faut tout d'abord s'assurer que le dossier n'est vraiment plus ouvert sur le poste de bloc. Si le dossier a bien été clôturé ou transféré depuis le poste de bloc et donc qu'il ne s'y trouve plus, l'on va chercher à retirer les verrous du dossier. Sinon, il faut attendre qu'il soit fermé et vérifier en SSPI après coup que le dossier peut être ouvert en écriture.

Si le problème est toujours présent à cette étape, il faut se rendre dans l'outil **Gestion des verrous** pour voir s'il est possible de libérer les verrous de cette manière. Si cela est faisable, le dossier devrait être à nouveau disponible en écriture après l'opération de libération des verrous.

Si le problème n'est pas solutionnable ainsi ou persiste malgré la libération manuelle des verrous, il faut redémarrer DIANE avec un DianeKiller, option Arrêter, sur le poste de bloc, à la suite de quoi l'on pourra rouvrir DIANE sur le poste de bloc sans problème. Le dossier devrait dès lors être disponible après l'opération.

Si le problème persiste, merci de contacter Bow Médical.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.10 Paramétrage CIM10, CCAM et NGAP

5.10.1 Configuration de la CIM10 et de la CCAM

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Misc.

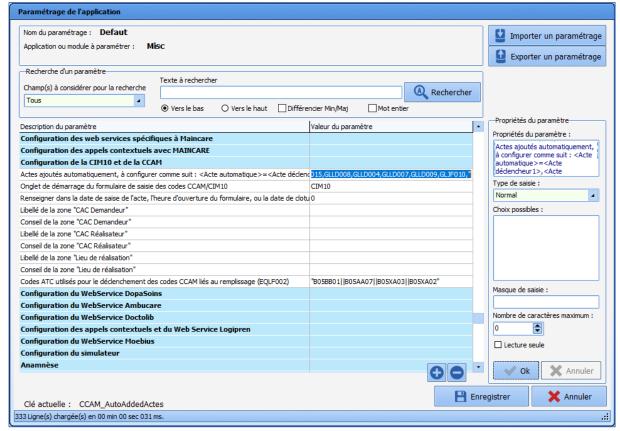

5.10.1.1 Actes ajoutés automatiquement

Cette clé se paramètre de la manière suivante :

<Acte automatique 1>=<Acte déclencheur1>,<Acte déclencheur2>,...,<Acte déclencheurN>,||<Acte
automatique 2>=<Acte déclencheur1>,<Acte déclencheur2>,...,<Acte déclencheurN>
Exemple :

"YYYY015=DEQP004,DEQP007,GLQP004,EQLF001,EQLF002,FELF003,||YYYY020=EQLF003,FELF004,EQMP001,EQMF003,GLLD006,GLLD013,GLLD002,GLLD012,GLLD015,GLLD008,GLLD004,GLLD007,GLLD009,GLJF010,"

5.10.1.2 Onglet de démarrage du formulaire de saisie des codes CCAM/CIM10

Cette clé détermine l'onglet affiché par défaut au démarrage du module **CCAM/Cim10**.

Valeurs possibles:

0=CIM10

1=CCAM

5.10.1.3 Renseigner dans la date de saisie de l'acte, l'heure d'ouverture du formulaire, ou la date de clôture du dossier si celui-ci est clos.

Par défaut 0, ce qui correspond à renseigner 23h59.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 303 / 419

Libellés et conseils des zones CAC Demandeur, CAC Réalisateur, et Lieu de réalisation

Ces clés permettent de modifier les intitulés et conseils à la souris des champs de saisies correspondants dans l'onglet **CCAM** du module **CCAM/Cim10**.



Si les clés sont vides, l'application affiche les valeurs par défaut.

5.10.1.4 Codes ATC utilisés pour le déclenchement des codes CCAM liés au remplissage (EQLF002)


Ce paramétrage indique les codes ATC utilisés pour déclencher le code EQLF002 (lors d'une prescription d'un produit de remplissage).

Exemple:

Codes ATC utilisés pour le déclenchement des codes CCAM liés au remplissage (EQLF002)

5.10.2 Paramétrage de DIANE REA (CCAM)

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages - DianeRea.

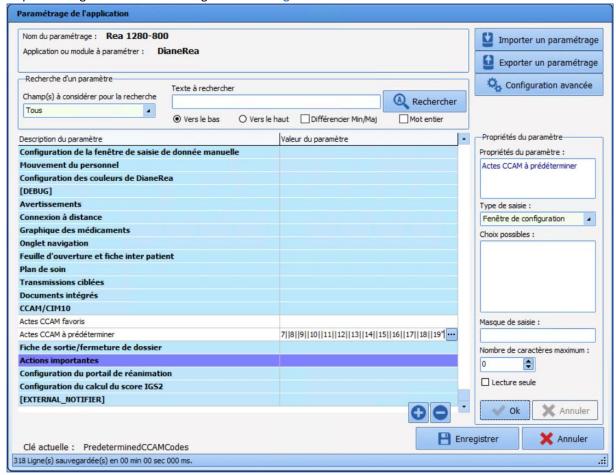



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.10.2.1 Actes CCAM favoris

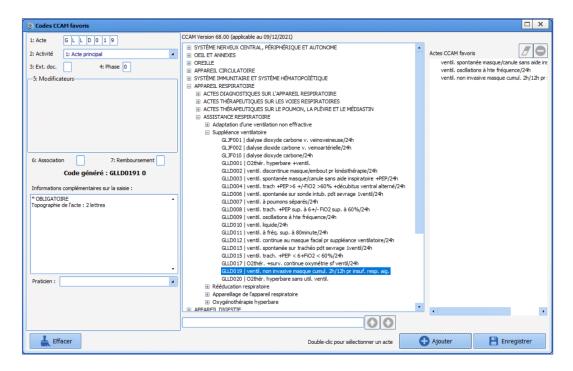

5.10.2.2 Actes CCAM à prédéterminer

Certains codes sont automatisés dans **DIANE**. Les codes générés automatiquement sont ceux qui ont été cochés dans cette fenêtre.

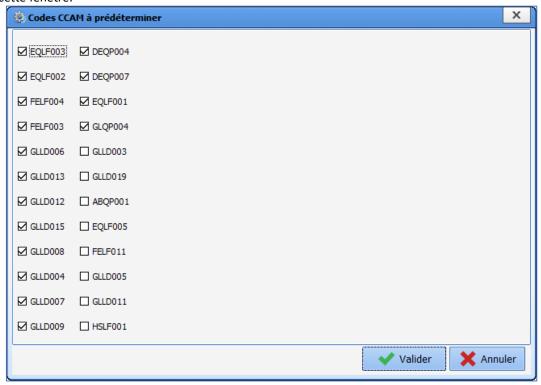



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 305 / 419

5.10.3 Paramétrage des codes CIM10, CCAM et NGAP


Des codes CIM10, CCAM et NGAP peuvent être paramétrés pour être saisis automatiquement par **DIANE**. Ce paramétrage s'effectue en créant des règles qui génèrent un ou plusieurs codes lorsque les conditions configurées sont respectées. Les conditions peuvent être une **Donnée du dossier**, un **Evènement** ou un **Chronomètre**.

Les codes sont générés automatiquement à l'enregistrement du dossier. Dans certains cas, il peut être utile d'utiliser dans les conditions un champ obligatoire « Dossier complet » afin de ne pas générer de code à chaque sauvegarde du dossier.


Pour les codes CIM10 et CCAM, le paramétrage s'effectue dans l'onglet **Paramétrages – DianeRea** pour la réanimation (ReaCodeRules) ou dans l'onglet **Paramétrages – Visual** pour l'anesthésie (VisualCodeRules).

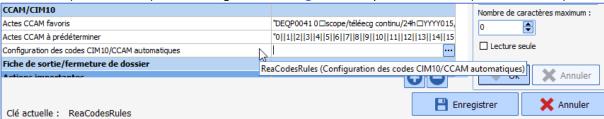

Pour les codes NGAP, le paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Misc (MiscNGAPCodeRules).

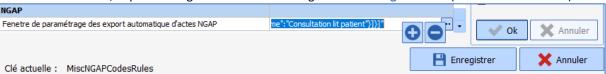

Le clic sur le bouton u affiche la fenêtre suivante :

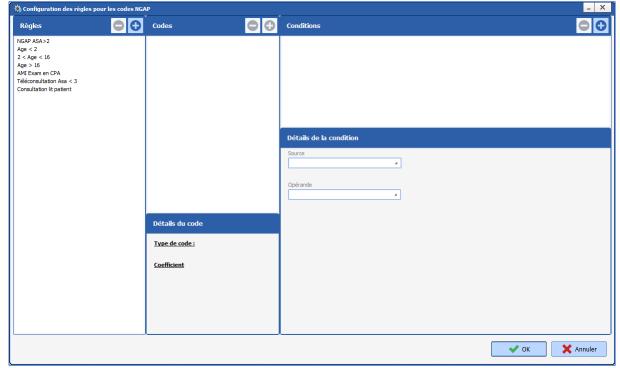



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Le paramétrage d'une règle se fait en 3 étapes :

5.10.3.1 Ajouter une règle

Pour ajouter une nouvelle règle, il faut cliquer le bouton et saisir le nom de la règle.




5.10.3.2 Ajouter un code

Il faut ensuite ajouter le ou les codes associés en cliquant sur le bouton puis sur le type de code voulu.



Fenêtre d'ajout de code CIM10 :

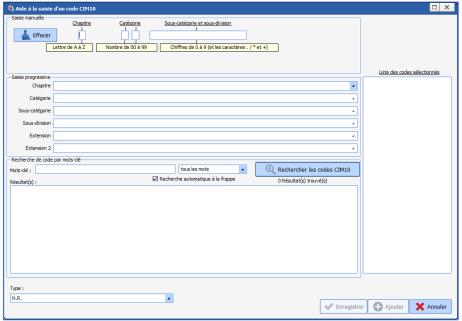

Fenêtre d'ajout de code CCAM:

2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

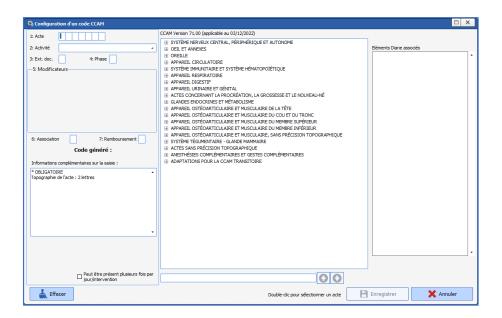


Fenêtre d'ajout de code NGAP :

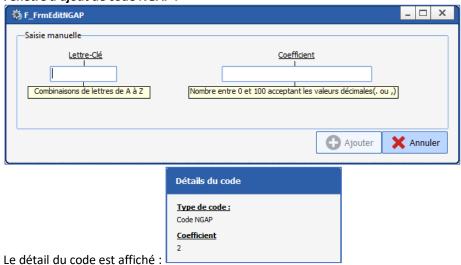

5.10.3.3 Ajouter une condition

Il faut enfin ajouter la ou les conditions permettant la saisie automatique du code en cliquant sur le bouton et saisir le nom de la condition.

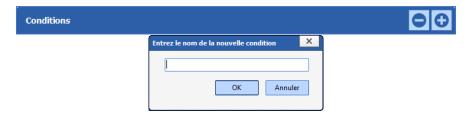

Pour chaque condition, il faut choisir la source de la donnée requise. Cette donnée peut être une **Donnée du dossier**, un **Evènement** ou un **Chronomètre**.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 308 / 419

5.10.3.3.1 Donnée du dossier (CIM10, CCAM et NGAP)

Dans le cas d'une donnée du dossier, il faut sélectionner le **Champ Diane** dans le menu déroulant, puis l'**Opérande** (variable selon le type de donnée : Contient..., Ne contient..., Est égal..., Est différent..., Est inférieur..., Est supérieur..., etc...).


Exemple pour un risque ASA supérieur à 2 :

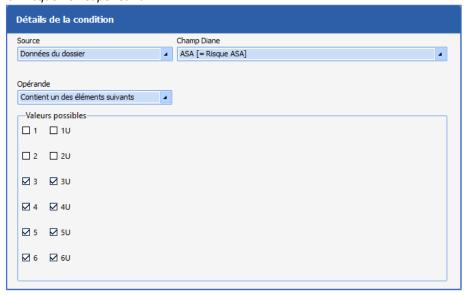

Exemple pour âge inférieur ou égal à 2 ans :



 ${\it Exemple pour une consultation classique:}$

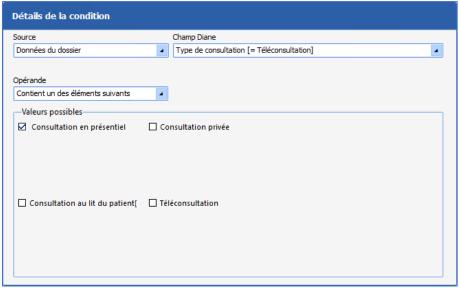



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Exemple pour un bilan réalisé en CPA :

Détails de la condition	
Source	Champ Diane
Données du dossier	Examens cliniques [= Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP]
Opérande Contient un des éléments suivants	
Valeurs possibles	
☑ Bilan réalisé en CPA ☑ Bilan et ECG r	éalisés en CPA
□ ECG réalisé en CPA	


5.10.3.3.2 Evènement (CCAM)

Dans le cas d'un évènement, il faut choisir l'élément racine (Complication, Environnement patient, Consommable ou Evénement) puis l'opérande (A été saisi ou N'a pas été saisi) et cocher les événements dans l'arbre.

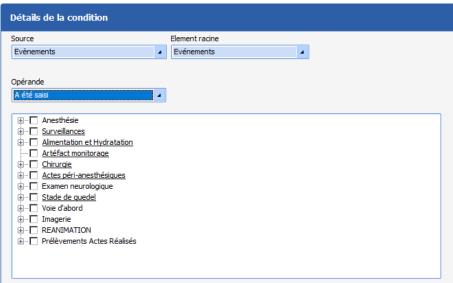

5.10.3.3.3 Chronomètre (CCAM)

Dans le cas d'un chronomètre, il faut choisir le chronomètre, l'opérande (**Durée >=, Durée <=** ou **Durée comprise entre**) et la ou les durées en minutes.

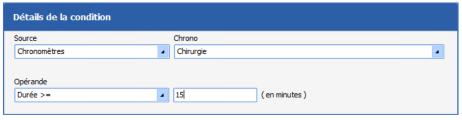



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.11 Paramétrage des alertes de modification à distance des champs Ax

Le paramétrage des alertes des champs modifiés s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Misc.

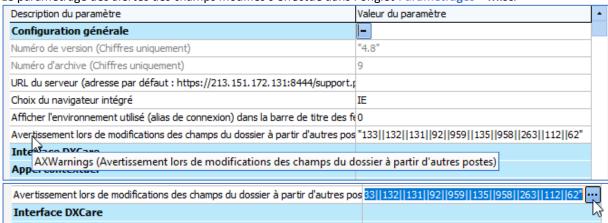

Le clic sur le bouton affiche la fenêtre suivante :

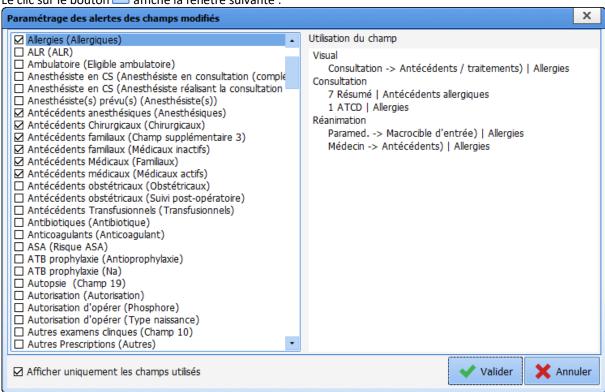

La zone de droite affiche, pour chaque configuration d'affichage basculée (**Consultation**, **Visual**, **Réanimation** et **Obstétrique**) les composants utilisant l'Ax/Id sélectionné et l'onglet dans lequel il se trouve.

5.12 MD Paramétrage de la balance liquidienne

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Diaserveur.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 311 / 419

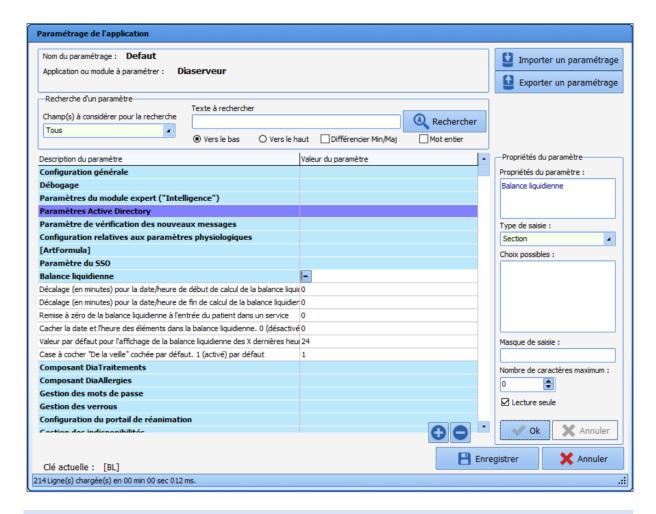

5.12.1 Définir l'heure de début de calcul de la balance liquidienne

OffsetStartDateTimeInMin: Décalage (en minutes) pour la date/heure de début de calcul de la balance liquidienne (utilisé pour la Réa pour laquelle la balance liquidienne se calque par défaut sur la journée de Réanimation). O par défaut, *ex*: -60=> démarre une heure plus tôt.

La clé de paramétrage **OffsetStartDateTimeInMin** permet de définir la date / heure de début de calcul de la balance liquidienne par rapport à l'heure de début de la journée de réanimation. Il s'agit du décalage, en minutes, par rapport à l'heure de début de journée de réanimation. Cette clé doit être un nombre entier, positif ou négatif.

Spécificité de l'anesthésie : dans le cas d'une intervention en bloc, c'est l'heure de début d'intervention qui est prise en compte et non l'heure de début de journée de réanimation. Il est impératif d'avoir un paramétrage (inférieur ou) égal à 0 et en aucun cas positif pour prendre en considération toutes les données de l'intervention.

5.12.2 Définir l'heure de fin de calcul de la balance liquidienne

OffsetEndDateTimeInMin: Décalage (en minutes) pour la date/heure de fin de calcul de la balance liquidienne (utilisé pour la Réa pour laquelle la balance liquidienne se calque par défaut sur la journée de Réanimation). 0 par défaut, *ex*: -60=> termine une heure plus tôt.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

La clé de paramétrage **OffsetEndDateTimeInMin** permet de définir la date / heure de fin de calcul de la balance liquidienne par rapport à l'heure de début de la journée de réanimation. Il s'agit du décalage, en minutes, par rapport à l'heure de début de journée de réanimation. Cette clé doit être un nombre entier, positif ou négatif.

Spécificité de l'anesthésie: dans le cas d'une intervention en bloc, c'est l'heure de début d'intervention qui est prise en compte et non l'heure de début de journée de réanimation. Il est impératif d'avoir un paramétrage (inférieur ou) égal à 0 et en aucun cas positif pour prendre en considération toutes les données de l'intervention.

5.12.3 Remise à zéro de la balance liquidienne à l'entrée du patient dans un nouveau service

ConstrainedToLocationStartDateTime : Remise à zéro de la balance liquidienne à l'entrée du patient dans un service

La clé de paramétrage **ConstrainedToLocationStartDateTime** permet la remise à zéro de la balance liquidienne lorsque celui-ci entre dans un nouveau service. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.12.4 Cacher la date et l'heure des éléments dans la balance liquidienne

HideDateTime: Cacher la date et l'heure des éléments dans la balance liquidienne. 0 (désactivé) par défaut.

La clé de paramétrage **HideDateTime** permet de masquer la date / heure de l'élément. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.12.5 Valeur par défaut pour l'affichage de la balance liquidienne des X dernières heures

DefaultValueTimeFilter : Valeur par défaut pour l'affichage de la balance liquidienne des X dernières heures. 24 par défaut.

La clé de paramétrage **DefaultValueTimeFilter** permet de configurer la valeur par défaut de **Des X dernières** heures dans la zone **Affichage de la balance liquidienne** de l'onglet **Balance liquidienne**. Ce paramétrage concerne aussi l'affichage de la balance liquidienne dans le cockpit ainsi que l'affichage des informations sur l'historique du dossier dans l'onglet **Prescription**. Cette clé doit être un nombre entier positif.

5.12.6 Case à cocher De la veille cochée par défaut

ShowDayBeforeChecked: Case à cocher De la veille cochée par défaut. 1 (activé) par défaut. La clé de paramétrage ShowDayBeforeChecked permet de cocher par défaut De la veille dans la zone Affichage de la balance liquidienne de l'onglet Balance liquidienne. Cette clé est de type Oui/Non.

5.13 Paramétrage des mots de passe

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Diaserveur.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68


Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

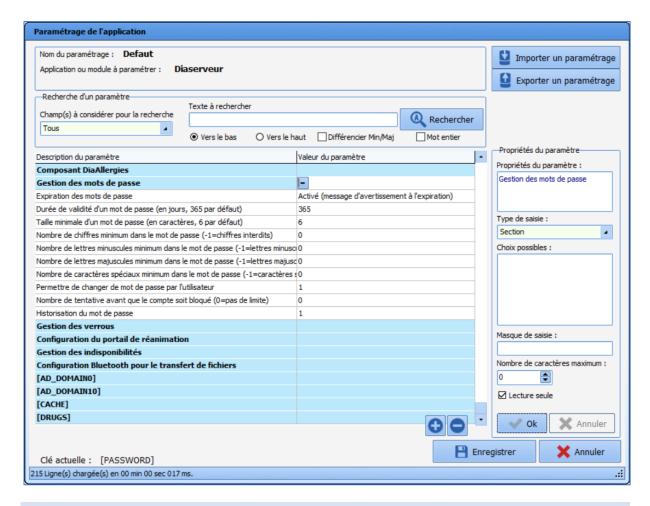

5.13.1 Expiration des mots de passe

PasswordExpiration: Expiration des mots de passe.

La clé de paramétrage **PasswordExpiration** détermine si les mots de passe ont une durée de vie limitée ou non. Trois réglages sont possibles :

- Désactivé : les mots de passe ont une validité permanente
- Activé (message d'avertissement à l'expiration): à l'expiration du mot de passe, un message informe que celui-ci est expiré
- Activé (changement obligatoire à l'expiration): à l'expiration du mot de passe, l'utilisateur doit obligatoirement définir un nouveau mot de passe pour se connecter

5.13.2 Durée de validité des mots de passe

PasswordDuration: Durée de validité d'un mot de passe (en jours, 365 par défaut).

La clé de paramétrage **PasswordDuration** permet de définir la durée de validité des mots de passe, en nombre de jours.



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.13.3 Taille minimale des mots de passe

PasswordMinLength: Taille minimale d'un mot de passe (en caractères, 6 par défaut).

La clé de paramétrage PasswordMinLength permet de définir la longueur minimale des mots de passe.

5.13.4 Nombre de chiffres minimum dans le mot de passe

PasswordMinDigits: Nombre de chiffres minimum dans le mot de passe (-1=chiffres interdits).

La clé de paramétrage **PasswordMinDigits** permet de définir le nombre minimal de chiffres que doivent contenir les mots de passe. Si cette clé a pour valeur -1, les chiffres sont interdits dans les mots de passe.

5.13.5 Nombre de lettres minuscules minimum dans le mot de passe

PasswordMinSmallLetters: Nombre de lettres minuscules minimum dans le mot de passe (-1=lettres minuscules interdites).

La clé de paramétrage **PasswordMinSmallLetters** permet de définir le nombre minimal de minuscules que doivent contenir les mots de passe. Si cette clé a pour valeur -1, les minuscules sont interdites dans les mots de passe.

5.13.6 Nombre de lettres majuscules minimum dans le mot de passe

PasswordMinCapitalLetters: Nombre de lettres minuscules majuscules dans le mot de passe (-1=lettres majuscules interdites).

La clé de paramétrage **PasswordMinCapitalLetters** permet de définir le nombre minimal de majuscules que doivent contenir les mots de passe. Si cette clé a pour valeur -1, les majuscules sont interdites dans les mots de passe.

5.13.7 Nombre de caractères spéciaux minimum dans le mot de passe

PasswordMinSpecialChar: Nombre de caractères spéciaux majuscules dans le mot de passe (-1= caractères spéciaux interdits).

La clé de paramétrage **PasswordMinSpecialChar** permet de définir le nombre minimal de caractères spéciaux que doivent contenir les mots de passe. Si cette clé a pour valeur -1, les caractères spéciaux sont interdits dans les mots de passe.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

5.13.8 Permettre de changer de mot de passe par l'utilisateur

CanModifyPassword: Permettre de changer de mot de passe par l'utilisateur.

La clé de paramétrage **CanModifyPassword** permet de définir si l'utilisateur peut changer lui-même le mot de passe ou si cette tâche doit être effectuée par un administrateur. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.13.9 Nombre de tentatives avant que le compte soit bloqué

PasswordFailure: Nombre de tentatives avant que le compte soit bloqué (0=pas de limite).

La clé de paramétrage **PasswordFailure** permet de définir le nombre de tentatives pour saisir le mot de passe avant le blocage temporaire du compte. Le compte est alors bloqué pendant une minute avant une série de tentatives. La durée de blocage double à chaque fois que le nombre de tentatives est atteint.

5.13.10 Historisation du mot de passe

PasswordHistory: Historisation du mot de passe.

La clé de paramétrage **PasswordHistory** permet de définir si les mots de passe sont historisés. Si c'est le cas, il n'est pas possible de réutiliser un mot de passe déjà utilisé dans le passé. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.14 Paramétrage du cockpit pour l'anesthésie

Le cockpit (liste des patients) permet l'affichage d'une icône VPA dans le cas d'une utilisation en anesthésie. Cette icône passe en bleu VPA à la signature de la VPA au moyen d'une saisie avancée paramétrée à cet effet.

5.14.1 Activation de l'icône VPA

L'affichage de cette icône est conditionné à l'activation de la clé de paramétrage **DisplayVPAStatusOnPanel** dans **Dianerea.ini**.

5.14.2 Configuration des saisies avancées VPA

Fax: +33 9 72 29 34 87

Pour qu'une saisie avancée soit utilisée pour la signature de la VPA, il faut cocher la case **Afficher sur le portail** patient (Icône statut VPA) lors de son édition.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE** : 4.14.2 Version du dispositif médical : 4.1.2

UDI : (01)3760404900005(10)040102 Version du document : 1

Page: 316 / 419



5.15 Paramétrage des saisies multiples

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages - Visual.

5.15.1 Activation de la synchronisation

SynchronizeNextSM : Activer la synchronisation de la saisie multiple enchaînée par rapport à la dernière heure d'occurrence de la précédente saisie multiple : désactivé par défaut.

La clé de paramétrage **SynchronizeNextSM** permet d'activer la synchronisation de la saisie multiple enchainée par rapport à la dernière heure d'occurrence de la précédente saisie multiple. Cette clé peut avoir les 3 valeurs suivantes :

Désactivé Activé si heure occurrence > heure courante Toujours activé


5.15.2 Activation de la case à cocher Conserver cette saisie multiple

AfficheRepriseSM : Afficher la checkbox de Reprise Saisie Multiple (par défaut à 1)

La clé de paramétrage **AfficheRepriseSM** permet de définir si la case à cocher **Conserver cette saisie multiple** est affichée dans les saisies multiples. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.16 Paramétrage des informations au survol de l'icône des informations contextuelles complémentaires

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Visual ou DianeRea.

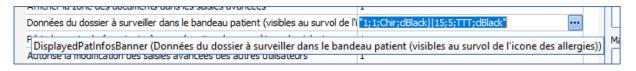

Le survol de l'icône peut afficher d'autres informations en plus des allergies renseignées dans le composant dédié.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 317 / 419



Ces informations additionnelles peuvent sélectionnées parmi les différents ActiveX de données grâce à la fenêtre **Configuration des champs Diane à afficher** Cette fenêtre est accessible en utilisant le bouton ... à la fin de la ligne de la clé de paramétrage.

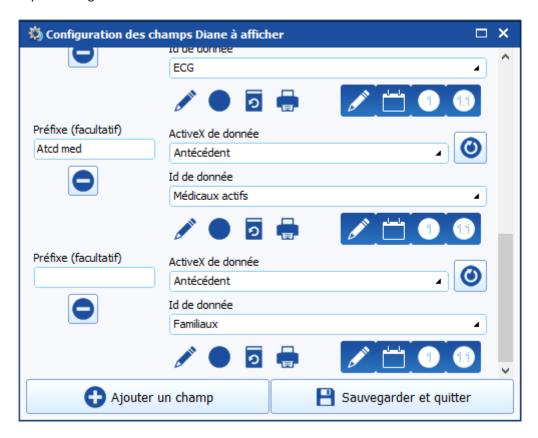

5.17 Paramétrage de l'exclusion d'affichage des données d'autres services

Lorsqu'un patient est transféré dans un autre service, par exemple un patient hospitalisé en réanimation qui subit une intervention en anesthésie, l'affichage des données liées au dossier de réanimation peut nuire à la lisibilité du dossier d'anesthésie.

Il est possible de paramétrer l'affichage pour n'afficher que les données du service actuel. Ainsi, l'affichage n'est pas surchargé par des données issues du service de provenance du patient. Pour cela, la case à cocher **Afficher uniquement les saisies du service actuel** permet de configurer l'affichage de l'onglet **Bloc** ou **Surveillance** ou des pancartes de type 3.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bown


Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

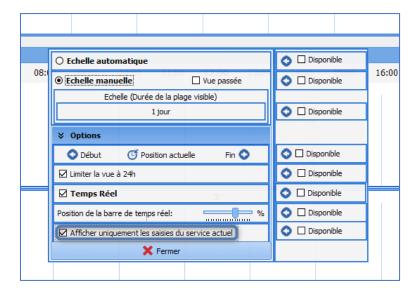

5.18 Paramétrage des traitements et prémédications

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Diaserveur.

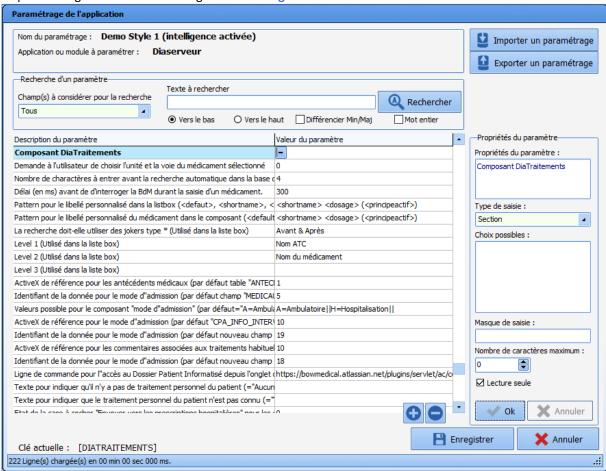

IdUnitRouteNeeded: Demande à l'utilisateur de choisir l'unité et la voie du médicament sélectionné



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 319 / 419

Cette clé est de type **Oui/Non**.

MinCharacterBeforeSearchInBase : Nombre de caractères à entrer avant la recherche automatique dans la base de données sur les médicaments Cette clé est un nombre entier.

DelayBeforeSearchInBase : Délai (en ms) avant de d'interroger la BDM durant la saisie d'un médicament. Cette clé est un nombre entier.

ListBoxMedicNamePattern: Pattern pour le libellé personnalisé dans la listbox (<defaut>, <shortname>, <dosage>, <forme>, <atccode>, <atcname>, <principeactif>)
Cette clé est un texte.

ComponentMedicNamePattern: Pattern pour le libellé personnalisé du médicament dans le composant (<default>=Libellé de la BdM <dosage>, <forme>, <atccode>, <atcname>, <medicname> = Libellé de la liste box, <cip>, <posology>)
Cette clé est un texte.

Jokerize: La recherche doit-elle utiliser des jokers type * (Utilisé dans la liste box)

Valeurs possibles : 0=Aucun

1=Avant 2=Après

3=Avant & Après

ListBoxLV1: Level 1 (Utilisé dans la liste box)
Valeurs possibles: <atcname>=Nom ATC

<atccode>=Code ATC <forme>=Nom Forme <dosage>=Dosage

<medicname>=Nom du médicament

ListBoxLV2: Level 2 (Utilisé dans la liste box)
Valeurs possibles: <atcname>=Nom ATC

<atccode>=Code ATC <forme>=Nom Forme <dosage>=Dosage

<medicname>=Nom du médicament

ListBoxLV3: Level 3 (Utilisé dans la liste box)
Valeurs possibles: <atcname>=Nom ATC

<atccode>=Code ATC <forme>=Nom Forme <dosage>=Dosage

<medicname>=Nom du médicament

AntecMedicauxRefDiaAX : ActiveX de référence pour les antécédents médicaux (par défaut table "ANTECEDENTS")

Cette clé est un nombre entier.

AntecMedicauxDatald : Identifiant de la donnée pour le mode d'admission (par défaut champ "MEDICAUX" de la table "ANTECEDENTS")

Cette clé est un nombre entier.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 320 / 419

Cette clé est un texte.

AdmissionModeRefDiaAX: ActiveX de référence pour le mode d'admission (par défaut "CPA INFO INTERVENTION")

Cette clé est un nombre entier.

AdmissionModeDatald: Identifiant de la donnée pour le mode d'admission (par défaut nouveau champ "mode d'admission")

Cette clé est un nombre entier.

CommentairesRefDiaAX : ActiveX de référence pour les commentaires associées aux traitements habituels (par défaut "CPA INFO INTERVENTION")

Cette clé est un nombre entier.

CommentairesDatald Identifiant de la donnée pour le mode d'admission (par défaut nouveau champ "commentaires") Nombre Entier

DPIPathToLaunch : Ligne de commande pour l'accès au Dossier Patient Informatisé depuis l'onglet des traitements personnels et prémédications.

Cette clé est un texte.

NoTreatmentText: Texte pour indiquer qu'il n'y a pas de traitement personnel du patient (="Aucun traitement" par défaut/si non renseigné)

Cette clé est un texte.

UnknowTreatmentText : Texte pour indiquer que le traitement personnel du patient n'est pas connu (="Traitement inconnu" par défaut/si non renseigné)

Cette clé est un texte.

SendSubstitutesToReaPrescription: Etat de la case à cocher "Envoyer vers les prescriptions hospitalières" pour les conciliations (désactivé=0 par défaut)

Cette clé est de type Oui/Non.

SendPremedsToRealPrescription: Etat de la case à cocher "Envoyer vers les prescriptions hospitalières" pour les prémédications (désactivé=0 par défaut)

Cette clé est de type Oui/Non.

TimeMorningTreatment: Heure par défaut du matin dans les traitements.

Cette clé est un nombre entier.

TimeMiddayTreatment: Heure par défaut du midi dans les traitements.

Cette clé est un nombre entier.

TimeEveningTreatment: Heure par défaut du soir dans les traitements.

Cette clé est un nombre entier.

TimeBedTimeTreatment : Heure par défaut du coucher dans les traitements.

Cette clé est un nombre entier.

ReprisePremed: Le bouton « Reprendre le traitement du précédent dossier » reprend également les prémédications (désactivé = 0 par défaut)



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.19 Paramétrage des scores intégrés (IGS II, CRIB II)

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – DianeRea.

Paramétrage des scores intégrés	
Type d'admission par défaut des patients en réanimation pour le calcul du scor	e Valeur du champ Diane TYPE_ADMISSION
Alime [IGS2] (Paramétrage des scores intégrés) roniques" à partir de la saisie	1
Configuration des parametres des fréquences cardiaques	"1 2 3 157 174 270 271 272 280 "
- 6	

5.19.1 Type d'admission par défaut des patients en réanimation pour le calcul du score IGS2

IGS2DefaultAdmissionType : Type d'admission par défaut des patients en réanimation pour le calcul du score IGS2

La clé de paramétrage **IGS2DefaultAdmissionType** détermine le type d'admission utilisé dans le calcul du score IGS II. Cinq réglages sont possibles :

- 0=Non défini (par défaut)
- 1=Chirurgie programmée
- 2=Chirurgie urgente
- 3=Médecine
- 4=Valeur du champ DIANE TYPE_ADMISSION

5.19.2 Alimenter automatiquement le champ "Maladies chroniques" à partir de la saisie dans le champ Diane MALADIES_CHRONIQUES (AX Info patient/Id de donnée 38)

IGS2ChronicDiseaseFromCase: Alimenter automatiquement le champ "Maladies chroniques" à partir de la saisie dans le champ Diane MALADIES_CHRONIQUES (AX Info patient/Id de donnée 38).

La clé de paramétrage **IGS2ChronicDiseaseFromCase** détermine si le champ **Maladies chroniques** doit être complété automatiquement à partir du contenu du champ DIANE **MALADIES_CHRONIQUES**. Cette clé est de type **Oui/Non**.

5.19.3 Configuration des paramètres des fréquences cardiaques

ParamFreqCard : Configuration des paramètres des fréquences cardiaques

La clé de paramétrage **ParamFreqCard** les fréquences cardiaques utilisées dans le calcul du score IGS II. Le clic sur le bouton affiche une fenêtre qui permet de choisir les fréquences cardiaques prises en compte.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 322 / 419

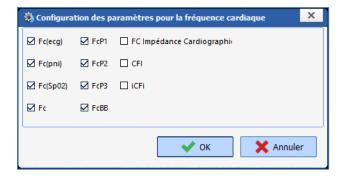

5.20 Paramétrage de l'âge réel

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Diaserveur.

Format de l'âge : valeurs minimum pour unités en années||mois||semaines (sin 3||3||5

Débogage

Pa AgeFormatMinYearMonthWeek (Format de l'âge : valeurs minimum pour unités en années

Le premier nombre correspond au nombre d'années à partir duquel l'âge est affiché en années. Le second correspond au nombre de mois à partir duquel l'âge est affiché en mois. Le troisième correspond au nombre de semaines à partir duquel l'âge est affiché en semaines. En dessous, l'âge est affiché en jours.

Exemples avec le paramétrage 3/3/15:

- Si le patient a 3 ans ou plus : son âge est affiché en années.
- Si l'âge du patient est compris entre 3 mois et 3 ans, l'âge est affiché en mois.
- Si l'âge du patient est compris entre 5 semaines et 3 mois, l'âge est affiché en semaines.
- Si le patient a mois de 5 semaines : son âge est affiché en jours.

5.21 Paramétrage de l'ordre d'affichage des résultats de laboratoire

Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet Paramétrages – Misc.



Pour chaque catégorie, il est possible de définir l'ordre en utilisant les flèches sur la droite de la fenêtre.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedia

Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 323 / 419



5.22 Impression des étiquettes médicamenteuses

L'impression des étiquettes médicamenteuse nécessite l'installation d'une imprimante adaptée utilisant le protocole ZPL. Cette fonctionnalité a été développée et testée pour l'imprimante Zebra ZD421 et un format d'étiquettes 100x50. Tout autre format d'étiquettes ne permettra pas une impression correcte des informations. Il peut être possible d'utiliser d'autres modèles d'imprimantes utilisant le protocole ZPL, mais nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de cette fonctionnalité.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


6 Configuration des utilisateurs (et structure de l'établissement)

6.1 Vocabulaire

Roue Crantée

L'icône représente une configuration : toutes les entités peuvent disposer de leur propre « roue crantée ».


Entités de l'établissement

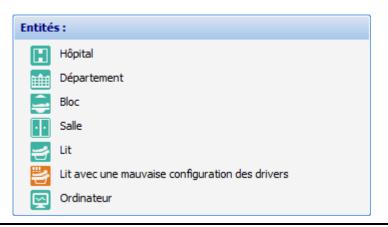

Chaque entité peut disposer de sa propre configuration (roue crantée).

Chaque entité n'ayant pas de configuration propre dépend de la première configuration rencontrée en remontant dans l'arborescence.

Catégories de personnels et Rôles

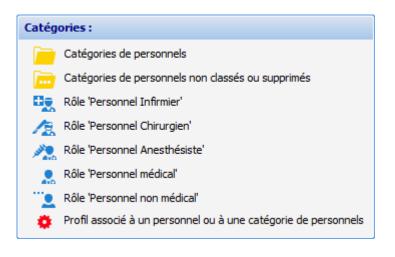

Les catégories segmentent les possibilités des utilisateurs par métier. Chaque catégorie de premier niveau doit avoir une roue crantée . Il est possible, si besoin, de créer un profil sur une ligne. Pour cela, il faut sélectionner la ligne, puis, au choix, cliquer sur le bouton droit de la souris pour obtenir un menu (Créer un profil) ou choisir le bouton de la barre d'outils ci-dessous.



Zone Propriétés

Cette zone contient toutes les informations pertinentes de la **Catégorie** ou **Rôle**. Les champs sont différents selon que l'on clique sur une **Catégorie de personnel** ou sur un **Rôle**.

Outils pour Catégories de personnel et Rôles



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 325 / 419

Les outils pour Catégorie de personnel ou Rôle sont les suivants :



Permet d'actualiser la liste, de refermer l'arborescence et de sélectionner le poste ou l'utilisateur courant



Permet de masquer ou non les comptes utilisateurs paramétrés



Permet de rechercher un compte utilisateur ou une entité de l'établissement



Permet de développer l'arborescence. Pour la refermer, utiliser le bouton



Permet d'afficher les entités de l'hôpital ou les catégories de personnels



Permet d'afficher les utilisateurs



Permet de supprimer une entité, une catégorie de personnel ou un personnel



Permet de créer un compte utilisateur ou une entité d'établissement



Permet de supprimer un compte utilisateur ou une entité d'établissement



Affiche la signification des icônes

Il est possible que certains boutons soient grisés s'ils n'ont pas d'utilité dans le contexte courant.

Informations de connexion des postes

Cette zone n'apparaît que si un **Ordinateur** est sélectionné.



C'est une information synthétique de dernière utilisation du poste.

Droits liés à une roue crantée

Chaque Catégorie de personnel ou Rôle est associé avec des Droits répartis en trois onglets



6.2 Configuration d'un utilisateur

Ce chapitre explique la création d'un nouveau compte utilisateur et la modification d'un compte existant.

Il est facilement possible de désélectionner un utilisateur, une catégorie ou une entité dans l'arbre de l'application UserConfiguration. Ceci est réalisable par un clic droit dans la zone blanche en bas de l'arbre



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

(après fermeture du sous-menu par un clic gauche à l'extérieur de ce sous-menu), par un clic gauche dans la zone blanche en bas de l'arbre ou en pressant la touche **Echap**.

6.2.1 Créer un compte utilisateur


Un utilisateur doit être associé à une *Catégorie de personnel* dans **DIANE**. La catégorie de personnel correspond à une ligne de la partie gauche de la configuration d'un utilisateur.

L'utilisateur créé dans cet exemple sera un anesthésiste, il faut donc cliquer sur la catégorie Anesthésistes :

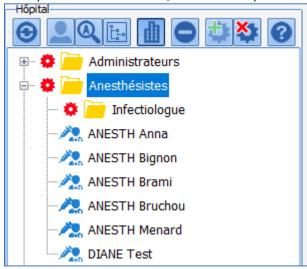

Ici, un certain nombre d'anesthésistes sont déjà configurés ainsi qu'une sous-catégorie de personnels : **Infectiologue** qui possède sa propre configuration (roue crantée).

La partie droite permet de créer un utilisateur par un clic dans le bouton encadré de rouge ci-dessous.

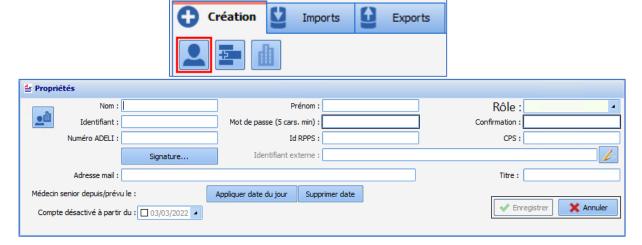

Nom et Prénom Le nom de l'utilisateur apparaît à l'utilisation des modules **DIANE**. Afin de bien distinguer les deux comptes des référents, lorsqu'ils sont personnels soignants, il est d'usage d'écrire **Référent** avant le **Nom** et le **Prénom**. Les deux comptes ont des droits et des prérogatives différents, il est donc très important que les **Nom** et **Prénom** permettent de les différentier.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Rôle	Le rôle conditionne certains comportements dans les modules DIANE . L'anesthésiste est le seul à pouvoir signer une sortie de salle de réveil. Le pharmacien et le médecin ont des fonctionnements différents de la prescription.			
Identifiant	Accompagné du Mot de passe , l' Identifiant conditionne l'accès au logiciel. L'identifian doit être unique dans l'établissement.			
Mot de passe et Confirmation	La complexité minimale du mot de passe en matière de majuscules et de chiffres est paramétrable en Configuration application . Il faut saisir le même mot de passe dans Mot de passe et dans Confirmation .			
Numéro ADELI	Cette information peut être renseignée automatiquement dans les courriers et ordonnances générés dans DIANE.			
Id RPPS	Cette information peut être renseignée automatiquement dans les courriers et ordonnances générés dans DIANE .			
CPS	Code Professionnel Santé			
Signature	Le contenu peut être ajouté à des courriers ou des ordonnances.			
Identifiant externe	Sert au service d'interfaces en relation avec la Direction Informatique pour créer de appels contextuels.			
Adresse mail	Sert dans le paramétrage d'envoi d'ordonnance pour paramétrer l'adresse d'envoi des mails.			
Titre	Titre de l'utilisateur.			
Médecin senior	Le médecin senior possède le droit de contresigner des signatures de médecins junior C'est un droit lié à une date de départ de cette faculté. Il n'est pas possible de génére une date particulière. C'est forcément à partir du clic sur le bouton Appliquer date c jour et cela s'achève au clic sur le bouton Supprimer date .			
Compte désactivé	Sert à limiter dans le temps la durée d'utilisation d'un compte sans avoir à le désactiver explicitement. Utile pour les internes par exemple.			
•	Permet de lier l'utilisateur à un établissement, à un service ou à un bloc			



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

BOW MEDICAL SAS


Tél: +33 3 60 03 24 68

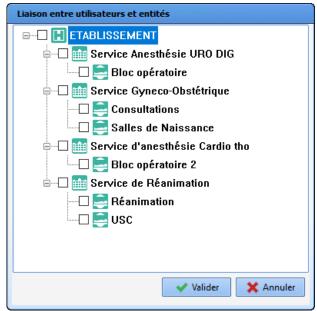

Par défaut, si l'utilisateur n'est affecté à aucune entité spécifique, il est affecté à toutes les entités.

6.2.2 Modifier un compte utilisateur

Afin de modifier un compte utilisateur ou pour en modifier une composante, il faut choisir directement l'utilisateur dans sa catégorie (il est également possible d'utiliser l'outil de recherche

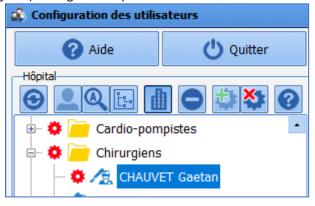

Une fois trouvé, cliquer sur le nom de l'utilisateur à modifier.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102




Il est nécessaire de cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

6.2.3 Supprimer un compte utilisateur

Un utilisateur configuré dans **DIANE** ne disparaît pas complètement, il est simplement désactivé. Garder à disposition les utilisateurs désactivés permet de garder la cohérence d'affichage et d'archivage des dossiers.

Pour supprimer un utilisateur, il faut faire un clic droit sur l'utilisateur à désactiver.

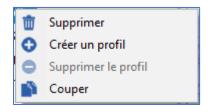

Dans ce menu, choisir **Supprimer**: une fenêtre de confirmation limite le risque de mauvaise manipulation.



Pour réactiver un compte, il y a deux possibilités :

- Glisser-déposer cet utilisateur dans la Catégorie d'utilisateur qui le concerne
- Faire un clic droit sur l'utilisateur et choisir **Couper**. Le nom de l'utilisateur passe en gris italique puis le coller par un clic droit dans la catégorie qui le concerne.

6.2.4 Utiliser la fonctionnalité de Signature d'utilisateur

La fonction signature permet de construire avec du texte et de l'image (code-barre, signature manuscrite scannée ...) une signature automatiquement ajoutée à la fin des ordonnances.

Pour cela, pour chaque utilisateur, il faut construire une signature sur **Wordpad** ou sur **Word** (ce n'est pas possible avec l'éditeur intégré) et la coller dans la fenêtre ouverte en ayant cliqué sur le bouton **Signature...**



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

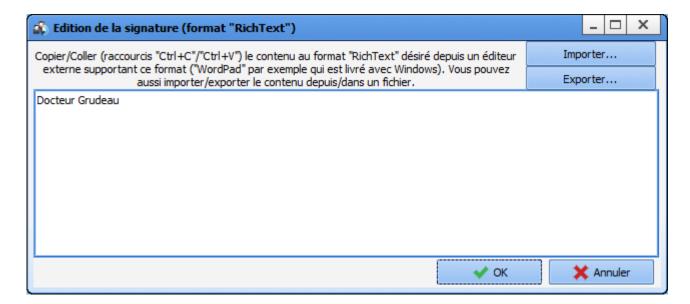

Une fois validé, un logo apparaît à gauche indiquant qu'il existe une signature pour cet utilisateur.

Il est aussi possible d'importer une signature au format RichText (.rtf).

6.2.5 Créer des catégories d'utilisateurs

Dans cet exemple, une catégorie d'externes cardio-pompistes sera créée. Afin de créer une nouvelle catégorie d'utilisateurs, sélectionner la catégorie parent d'utilisateurs.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68


Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

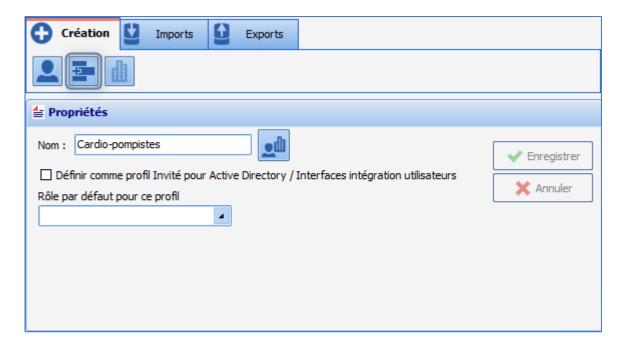

Après avoir cliqué sur le bouton de création de catégorie d'utilisateurs entouré de rouge dans l'illustration ci-dessus, cette fenêtre s'affiche :

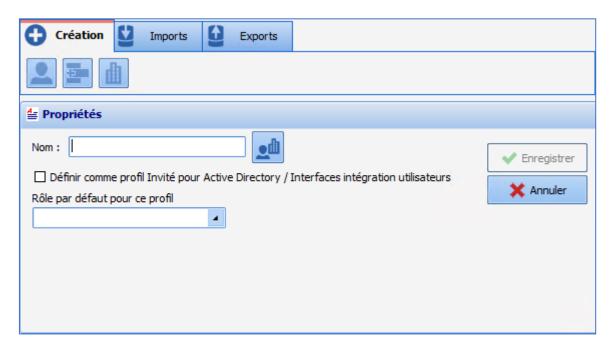

Le nom de la catégorie d'utilisateur se saisit dans la zone de saisie **Nom**. Le rôle lié à la catégorie d'utilisateur se sélectionne dans la liste déroulante **Rôle par défaut pour ce profil** parmi les valeurs suivantes :

- Anesthésiste
- Chirurgien
- Inf. anesthésiste
- Médical
- Non médical
- Réanimateur
- Infirmier



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- Aide-soignant
- Obstétricien
- Sage-femme
- Gynécologue
- Pédiatre
- Anesth. Réanimateur

Il est possible de lier une catégorie d'utilisateur à une ou plusieurs entités à l'aide de la fenêtre suivante

accessible au clic sur le bouton

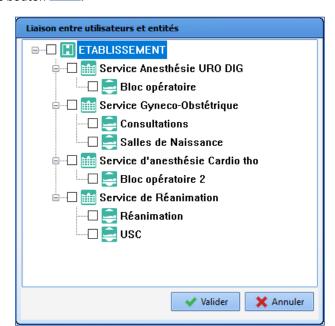

La liste des entités de type Hôpital, Service et Bloc configurés est proposée.

Il est possible de sélectionner les entités pour lesquelles affecter la catégorie de personnel via un simple clic. La validation de l'association se fait au clic sur le bouton **Valider**. Par défaut, si la catégorie de personnel n'est affectée à aucune entité spécifique, elle sera accessible dans tout l'établissement.

Attention: La suppression d'une entité entraine la mise à jour de la table où sont stockées les associations utilisateur / entité. Si un utilisateur était affecté uniquement à l'entité supprimée, il est de nouveau accessible dans tout l'établissement puisqu'il n'est associé à aucune entité spécifique.

NOTE: La case à cocher **Définir comme profil ... intégration utilisateurs** sert à connecter **DIANE** avec l'annuaire d'établissement : ceci est du ressort du service informatique.

6.2.6 Modifier une catégorie d'utilisateurs

Afin de modifier une catégorie d'utilisateurs, il faut faire un clic droit sur la catégorie.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 333 / 419

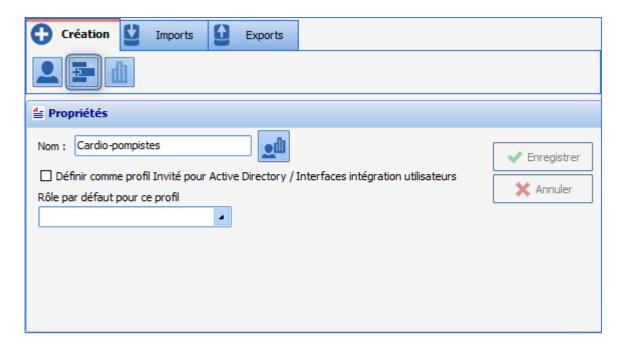

Modifier le Nom de la catégorie d'utilisateur et enregistrer la modification avec le bouton Enregistrer.

6.2.7 Supprimer une catégorie d'utilisateurs

Une catégorie d'utilisateurs configurée dans **DIANE** ne disparaît pas complètement, elle est simplement désactivée.

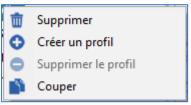

Dans ce menu, choisir **Supprimer**: une fenêtre de confirmation limite le risque de mauvaise manipulation.



Pour réactiver une catégorie, il y a deux possibilités :

- Glisser-déposer cet utilisateur dans la Catégorie d'utilisateur qui le concerne
- Faire un clic droit sur l'utilisateur et choisir **Couper**. Le nom de la catégorie passe en gris italique puis la coller par un clic droit dans la catégorie qui la concerne.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

6.2.8 Les roues crantées


La gestion des droits se paramètre grâce à l'utilisation de roues crantées . Il n'est pas possible de modifier les droits liés à une catégorie ou à un utilisateur s'il n'y a pas de roue crantée sur cette ligne.

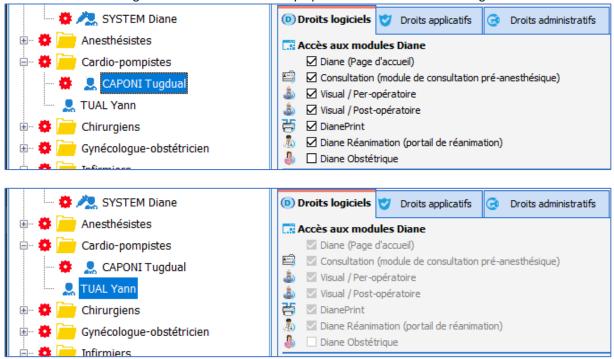

Dans l'exemple ci-dessus, les droits de Yann TUAL sont ceux paramétrés sur la **catégorie d'utilisateurs** Cardio-pompistes.

Si le paramétrage de la **catégorie d'utilisateurs** Cardio-pompistes est modifié, seul *Yann TUAL* bénéficiera des modifications. *Tuqdual CAPONI* n'est pas impacté : il a sa propre configuration.

Pour **ajouter** une **roue crantée** sur un **utilisateur** ou une **catégorie d'utilisateurs**, il faut faire un clic droit sur la ligne.

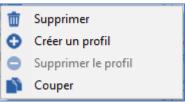

Puis choisir **Créer un profil** : le paramétrage retenu pour cette nouvelle **roue crantée** sera celui de la première ligne possédant une **roue crantée** en remontant l'arborescence.

Dans l'exemple ci-dessus, si une roue crantée est créée pour *Yann TUAL*, il possédera le même paramétrage mais cette fois modifiable. Il reçoit en paramétrage une "copie" du paramétrage de la **catégorie d'utilisateurs** Cardio-pompistes.

Pour **supprimer** une **roue crantée** sur un utilisateur ou une catégorie d'utilisateurs, il faut faire un clic droit sur la ligne.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

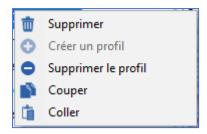

Puis choisir **Supprimer un profil** : le paramétrage qui s'applique désormais à cette ligne sera celui de la ligne possédant la première **roue crantée** en remontant l'arborescence.

Dans l'exemple ci-dessus si la **roue crantée** sur *Tugdual CAPONI* est supprimée, il partagera la même configuration que celle de *Yann TUAL*, soit celle des Cardio-pompistes.


Il y a une autre manière que le clic droit de la souris pour **Créer un profil** ou **Supprimer un profil** : il est possible d'utiliser les boutons correspondants : et et .

6.2.9 Gestion des droits

Sur une ligne possédant une roue crantée , il est possible de modifier les droits liés à la catégorie ou à l'utilisateur en fonction de la situation.

Un droit est représenté par un libellé et une case à cocher.

L'image ci-dessous indique que pour la ligne porteuse de la roue crantée , le lancement de tous les modules est autorisé à l'exception de DIANE OBSTETRIQUE.

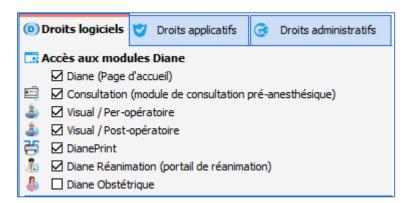

Pour que le lancement de **DIANE OBSTETRIQUE** devienne possible, il faut cocher la case et enregistrer le changement.

Les droits sont divisés en trois catégories :

Droits logiciels:

Ces droits conditionnent le lancement des différents modules. L'exemple le plus simple est la différence entre les comptes utilisateur et référent : l'utilisateur n'a pas le droit de lancer les deux outils de configuration, contrairement au référent.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68


Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

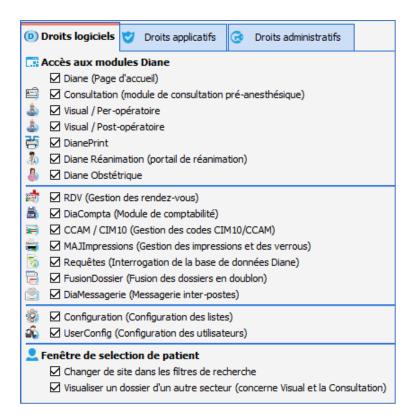

Droits applicatifs,

Ces droits conditionnent les actions possibles dans les différents modules, par exemple pour le module **Consultation** :

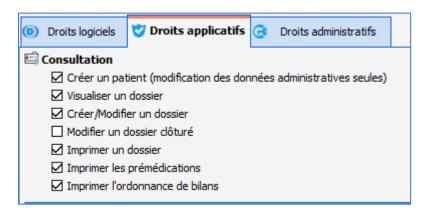

Droits administratifs.

Ces droits permettent de restreindre le champ d'intervention des référents. Cela permet de les spécialiser ou d'éviter de mauvaises manipulations.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 337 / 419

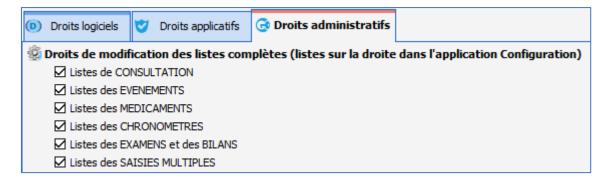

NOTE : les droits par défaut permettent un fonctionnement cohérent des différents modules. Ils sont modifiables mais avec précaution : il existe des interactions entre ces droits.

6.3 Configuration de la structure de l'établissement

Cet outil de configuration de l'établissement est utile pour modifier l'ordonnancement des salles et le placement éventuel des postes dans l'établissement.

6.3.1 Organisation de l'arborescence

L'établissement se subdivise dans une hiérarchie **Hôpital** > **Service** > **Bloc** > **Salle** > **Lit** > **Ordinateur**. La hiérarchie de l'établissement est créée à l'installation. Cet outil permet d'ajouter, de supprimer ou de renommer des entités (**Hôpital**, **Service**, **Bloc**, **Salle** ou **Lit**), de déplacer ou de supprimer des postes (ordinateurs).

NOTE: dans cet outil la notion de roue crantée n'a pas d'utilité et de ce fait n'apparaît pas.

6.3.2 Ajouter un poste

Ajouter un poste, ne se fait pas dans cet outil. Lorsqu'un poste doit être configuré sous **DIANE**, il faut le démarrer et lancer **DIANE**. Dès la connexion validée, l'emplacement du poste est demandé.



Une fois ce choix initial d'emplacement effectué, le poste apparaît dans l'outil, là où il a été indiqué.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

6.3.3 Ajouter une entité dans l'arborescence de l'établissement

Ajouter une entité dans l'arborescence permet de tenir à jour l'arborescence de l'établissement. Cela permet également un certain nombre de fonctionnements spéciaux.


Pour ajouter, il faut cliquer sur l'entité destinée à inclure la nouvelle entité. Dans cet exemple, une seconde **Salle de réveil** sera ajoutée, en cliquant sur la ligne **Bloc opératoire**.

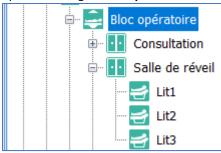

Choisir en haut de la partie droite de l'écran le bouton d'ajout d'entités :



Il est alors possible de créer la nouvelle entité :

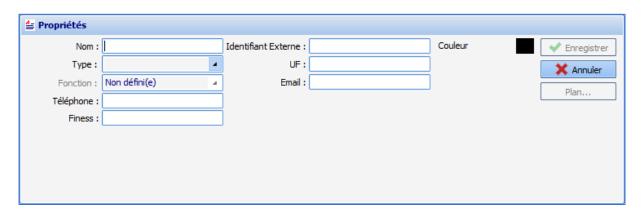

Le **nom** apparaît dans l'arborescence de l'établissement.

Le **type** correspond au niveau hiérarchique de l'entité :

Hôpital 	Correspond à l'établissement.	
Service	Rassemble plusieurs Blocs .	
Bloc	Rassemble toutes les salles d'un parcours patient.	
Salle	Rassemble a minima un Ordinateur - c'est souvent la Salle plus que l' Ordinateur qui porte les configurations.	
Lit	Pour être pris en compte, un lit doit être associé à un ordinateur.	
Ordinateur	Un ordinateur peut se voir affecter plusieurs lits - pour le réveil ou l'USC par	



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France
Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

exemple.

La fonction est utilisée pour qualifier la Salle :

Bloc	Configuration classique de bloc opératoire.		
Secrétariat	Permet d'affecter un patient à un poste.		
Réanimation / USC	Permet de fonctionner en mode Maître - Miroir . Un poste Miroir permet d'accéder à distance au dossier ouvert sur le poste Maître .		
Consultation	Permet d'automatiser, à la création d'une nouvelle consultation, l'utilisater connecté comme étant l'anesthésiste en consultation et la date du jour dans date de consultation.		
Réveil	Permet d'avoir la gestion de la signature de l'anesthésie pour autoriser la sortie du patient. Attention à affecter au moins un lit de réveil sous le poste présent dans la salle de réveil. Sinon, le portail considère que c'est une salle de bloc : la fonctionnalité de signature de salle de réveil est néanmoins conservée.		
Induction	Fonctionne comme une salle de réveil hormis qu'il n'y a pas de signature of sortie de réveil et que cela doit avoir lieu avant le bloc : cela permet, en blo d'avoir le patient dans la liste des attendus.		
Autre			
Salle de naissance			
Surveillance	Permet de configurer des postes sur chariots mobiles pour que l'utilisateur puisse intervenir sur les patients qui lui sont assignés sans avoir à se connecter à chaque changement de patient. Il n'est pas possible de réaliser l'admission d'un patient depuis un poste de surveillance.		
Ambulatoire	Permet de pouvoir sortir un patient à distance.		

6.3.4 Rechercher un poste, une salle ou un utilisateur

L'outil, à l'ouverture, sélectionne le poste courant. Cliquer sur le bouton d'actualisation permet de retrouver le poste courant :



Pour trouver un poste il est possible de le rechercher dans l'arborescence de l'établissement.



La fenêtre suivante s'affiche et le poste, la salle ou l'utilisateur peuvent être trouvés à partir d'une partie de leur nom.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



Si la ligne proposée par le moteur de recherche n'est pas la bonne, il faut appuyer sur **la touche F3** du clavier **pour lister**, une par une, les propositions du moteur de recherche.


REMARQUE: la présence d'utilisateurs dans cet outil n'est utile que pour le module **DIANE** Rendez-Vous.

6.3.5 Ajouter un utilisateur pour le module Rendez-Vous


Il est possible d'ajouter un utilisateur dans cette partie de l'outil. Les utilisateurs créés dans la partie utilisateur de l'outil se retrouvent tout en bas de l'arborescence de l'établissement dans la catégorie **Utilisateurs non-classés**. Il suffit alors de les déplacer dans le service voulu. Il est possible de les trouver par leur nom grâce au moteur de recherche et le déplacer dans le service voulu par glisser-déposer ou par couper-coller.

6.3.6 Inspecter l'historique d'un poste

Le clic droit sur un poste dans l'arborescence de l'établissement affiche ce menu :

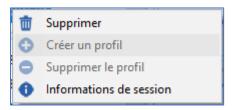

Le choix **Informations de session** affiche les informations de connexion de ce poste dans la fenêtre suivante.

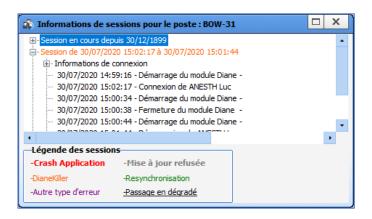



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 341 / 419

6.3.7 Supprimer un poste ou une salle

Le clic droit sur un poste ou une entité dans l'arborescence de l'établissement affiche ce menu :



Supprimer déplace le poste ou l'entité en bas de l'arborescence de l'établissement dans la catégorie **Entités supprimées**. En suivant les indications de **Déplacer un poste, une salle ou un utilisateur,** il est possible de déplacer ces lignes à la souris par glisser déposer.

Il est également possible de supprimer un poste ou une entité grâce au bouton de suppression dans la barre de boutons en haut de l'arborescence de l'établissement :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.1 Composants exclusivement utilisés dans les saisies avancées


7.1.1 Sous-score

Ce composant permet de saisir facilement un score dans une saisie avancée. Il suffit de choisir le score et de dimensionner le composant. L'utilisateur clique sur le bouton pour afficher la fenêtre de saisie du score.

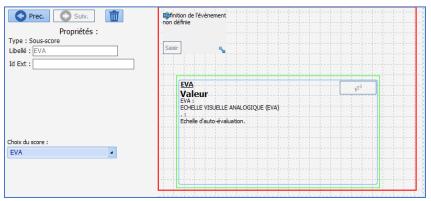

7.1.2 Sous-score (affichage intégré)

Comme le précédent, ce composant permet de saisir facilement un score dans une saisie avancée. Il suffit de choisir le score et de dimensionner le composant. La saisie du score s'effectue directement dans ce composant, contrairement au précédent.

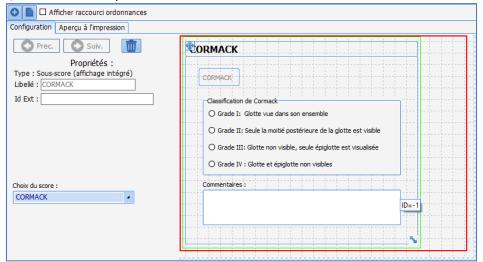



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 343 / 419

7.1.3 Bouton de valeurs prédéfinies

Ce composant permet de remplir les différents composants (Cases à cocher, groupes de boutons radios et/ou de cases à cocher, champs de saisie simples et/ou multilignes, ...) avec des valeurs paramétrées en configuration. Il est possible de déterminer s'il faut ou non supprimer les données saisies dans les composants restant vierge lors de l'édition de ce composant au moyen de la case à cocher **ne pas RAZ autres champs**.




7.1.4 Donnée DIANE

Ce composant permet d'afficher 3 types de données DIANE :


• Données du dossier (associées à un ActiveX et un ld de donnée)



• Paramètres physiologiques :

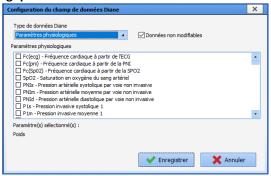

• Résultats de laboratoire :

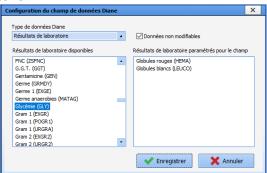



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.1.5 Composants exclusivement utilisés en configuration d'affichage


7.1.5.1 Onglet

Ce composant est utilisé dans les configurations des applications **DIANE ANESTHÉSIE** (**Visual** (PerOp et PostOp)), **DIANE OBSTETRIQUE** et **DIANE REA**. Il permet d'ajouter un sous-onglet dans les onglets qui le permettent.




7.1.5.2 Saisie avancée (affichage simple)

Ce composant permet l'affichage des items saisis lors de l'édition d'une saisie avancée.

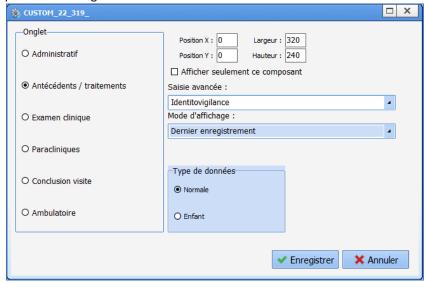

Les 2 paramétrages de ce composant sont :

• Saisie avancée :

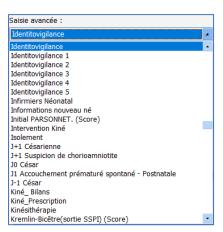

• Mode d'affichage :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 345 / 419




La case à cocher **Afficher seulement ce composant** dimensionne le composant pour qu'il occupe l'intégralité de l'onglet.

Il est également possible d'utiliser des saisies avancées non basculées.

7.1.5.3 Saisie avancée (affichage multiple)

Comme le précédent, ce composant permet l'affichage de saisies avancées à la différence que les précédentes saisies restent visibles et affichables intégralement. Il est également possible d'utiliser des saisies avancées non basculées.

lci, les seuls paramétrages sont le choix de la Saisie avancée et l'Ordre d'affichage (Croissant ou Décroissant).

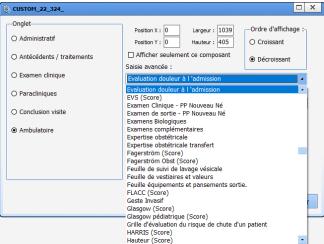

7.1.5.4 Transmissions

Le composant **Transmissions** (ciblées et macro ciblées) ne peut être ni dimensionné (il occupe obligatoirement la surface du sous onglet), ni déplacé d'un sous onglet à l'autre, ni même modifié.

Il faut uniquement lui dédier un sous-onglet, il n'y a rien à paramétrer.

7.1.5.5 Traitements

Ce composant permet de synchroniser et donc de récupérer les traitements habituels saisis en Consultation.



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 346 / 419

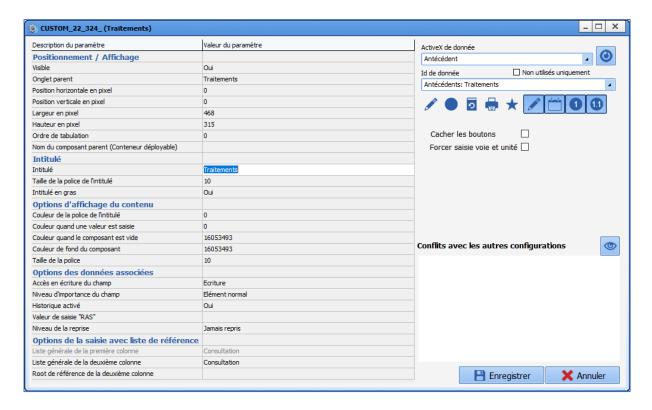


Il est important de reprendre le couple ActiveX/Id de donnée utilisé dans le module Consultation.

NOTE : Par défaut, le composant se connecte sur le cache des bases de données sur les médicaments Vidal ou BCB.

7.1.5.6 Conteneur déployable

Le conteneur déployable est un composant qui permet d'alléger l'affichage : il est possible d'y insérer d'autres composants qui ne sont visibles que lorsque le conteneur est déployé.

Conteneur replié:

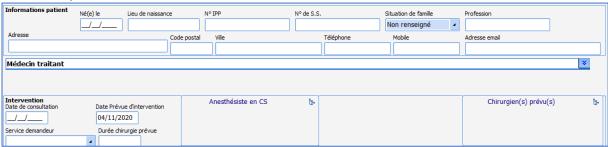

Conteneur déployé :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 347 / 419

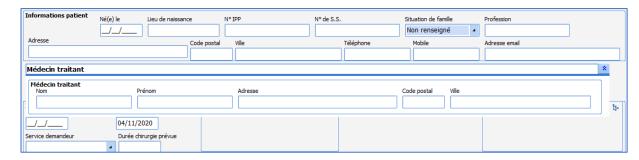

Le conteneur se déploie grâce au bouton et se replie avec le bouton .

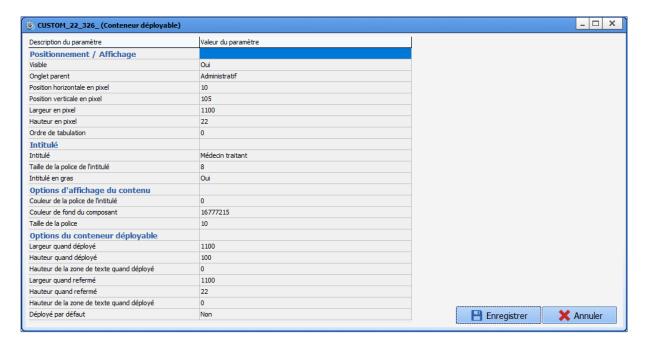

Les paramètres importants de ce composant sont ses dimensions déployé et refermé.

Pour ajouter chaque composant à intégrer au conteneur, il faut compléter le paramètre **Nom du composant parent (Conteneur déployable)** :



Le positionnement des composants à l'intérieur du conteneur doit se faire en modifiant les paramètres **Position horizontale en pixel** et **Position verticale en pixel**.

7.1.5.7 Affichage de saisies avancées sous forme de liste

Ce composant permet d'afficher sous forme de tableau différents champs de saisies avancées. Le



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

paramétrage s'effectue à partir de deux onglets :

Le premier onglet Configuration graphique permet de configurer l'apparence du composant :

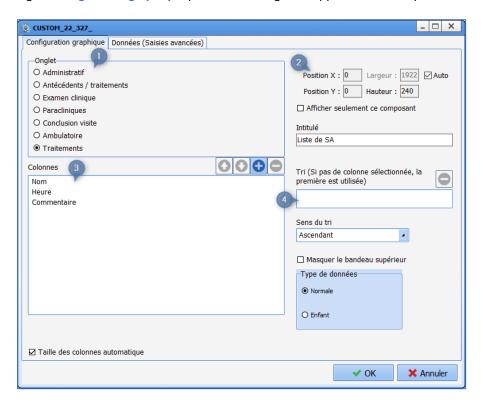

- 1. Cette zone permet de choisir le sous-onglet dans lequel apparaît le composant.
- 2. Cette zone permet de choisir la position du composant dans le sous-onglet ainsi que ses dimensions. La case à cocher Afficher seulement ce composant permet de n'afficher que ce composant dans le sous-onglet : il occupe alors toute la surface du sous-onglet. L'intitulé correspond au titre affiché du composant.
- 3. Cette zone permet de configurer les colonnes du tableau affiché dans le composant : Le contenu des colonnes peut être de type **Texte**, **Date/Heure** ou **Numérique**.
 - Les boutons permettre de modifier l'ordre des colonnes, d'en ajouter et d'en supprimer. Le nom est modifiable : pour cela il faut cliquer sur le libellé à modifier à 2 reprises non-rapprochées afin d'activer son édition.
- 4. Cette zone permet de trier les informations : par défaut le tri s'effectue par rapport à la première colonne, mais il est possible de trier à partir d'une autre colonne en la sélectionnant par un glisser-déposer dans le champ **Tri**.



Pour baser le tri sur une autre colonne, il faut au préalable retirer la colonne déjà paramétrée grâce au bouton .

Le second onglet Données (Saisies Avancées) permet de définir les saisies avancées que pourra saisir



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

l'utilisateur:

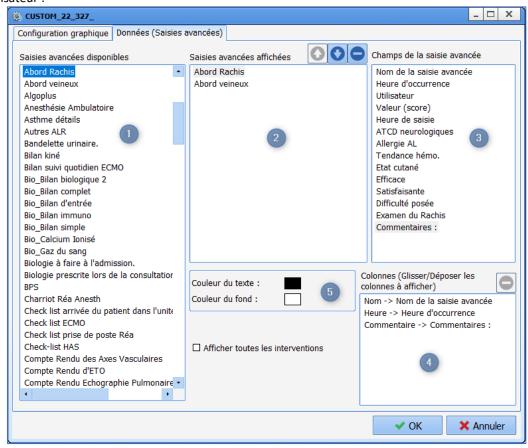

- 1. Liste des saisies avancées et scores disponibles (basculées ou non).
- 2. Liste des saisies avancées et scores affichés dans le composant.
- 3. Champs de la saisie avancée sélectionnée dans la zone 2.
- 4. Champs utilisés par les différentes colonnes (à paramétrer pour chaque saisie avancée ou score affiché(e).
- 5. Il est possible, pour chaque saisie avancée ou score, de paramétrer la couleur du texte et celle du fond pour les différencier aisément.

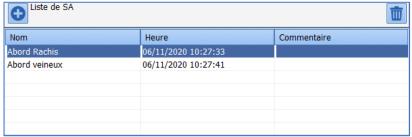

7.1.5.8 Allergies

Ce composant permet de synchroniser et donc de récupérer les antécédents allergiques entrés en Consultation.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 350 / 419

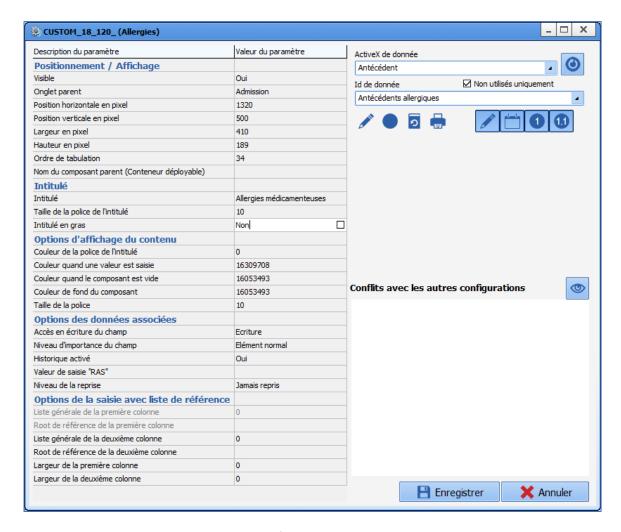

Il est important de reprendre le couple ActiveX/Id de donnée utilisé dans le module Consultation.

NOTE : Par défaut, le composant se connecte sur le cache des bases de données sur les médicaments Vidal ou BCB.

7.1.5.9 Affichage des dossiers du patient sous forme de liste

Ce composant permet de visualiser des informations sur les dossiers précédents du patient.

Nombre de dossiers : 1 (1) Interventions précédentes								
)ate	Anesthésiste	Chirurgien	Intervention					
- 18/12/2020	ANESTH Anna	CHIR Jean	Ablation du fil métallique					
10/12/2020	74425777741110	CHECOCH	/ Diddon dd ii metaiiqde					

Les colonnes sont configurables (nombre, intitulés, contenu). Le contenu est déterminé par le couple ActiveX/Id de donnée.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 351 / 419

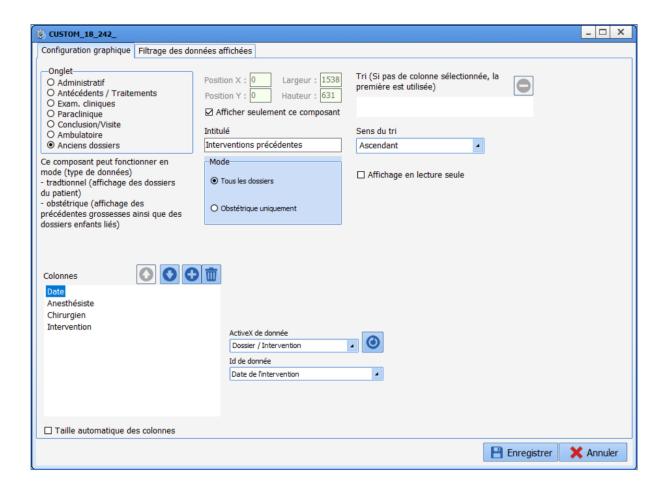

7.1.5.10 Sélecteur de dossiers enfant à traiter

Ce composant n'est utile que pour **DIANE OBSTETRIQUE**. Il n'y a pas de paramétrage à effectuer, il suffit de le dimensionner et de le positionner à l'endroit voulu.

7.1.5.11 Saisie d'évènement via bouton

Ce composant permet de saisir rapidement un événement au moyen d'un bouton.



Il est possible de sélectionner n'importe quel événement, mis à disposition ou non du secteur, dans l'onglet **Evénements**, des catégories **Complications**, **Consommables**, **Environnements Patient**, **Evénements** et **Prélèvements**.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.1.5.12 Pancarte (type 3)


La pancarte 3 est une pancarte hybride, combinant les fonctionnalités de la pancarte de surveillance et du plan de soins.

Il est possible de visualiser toutes les données disponibles dans le dossier du patient :

- Graphiquement pour les paramètres, scores, médicaments, balance liquidienne et produits sanguins.
- Sous forme de tableau pour les **évènements**, **produits sanguins**, **balance liquidienne**, saisies avancées.

La barre de saisies présente dans la pancarte de surveillance est également disponible.

La partie de gauche (encadrée en rouge) est la zone dédiée aux **prescriptions**. Une fois validées par le médecin, les prescriptions apparaissent automatiquement dans cette zone.

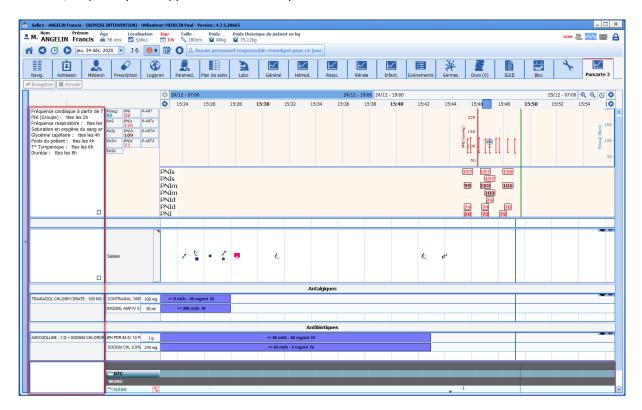

Le nombre de bandes est paramétrable. Une bande peut contenir au choix :

- Une grille **DIANE**.
- Un graphique des médicaments prescrits.
- Un graphique des paramètres physiologiques.
- Une barre d'évènements.
- Une zone de commentaire libre.
- Un graphique des médicaments non-prescrits.
- Un graphique des médicaments.
- Une zone de champs.

Particularité du graphique des médicaments prescrits :

Il est possible de filtrer les médicaments prescrits par leur code ATC en cochant la case **Le code ATC du produit doit débuter par au moins l'une de ces valeurs :**



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 353 / 419

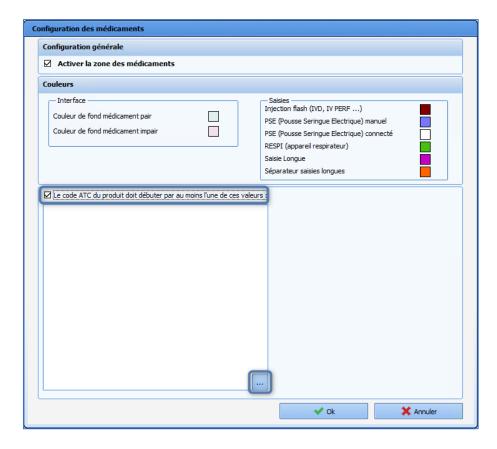

La fenêtre suivante s'ouvre et permet de sélectionner le ou les codes ATC à afficher dans le graphique.

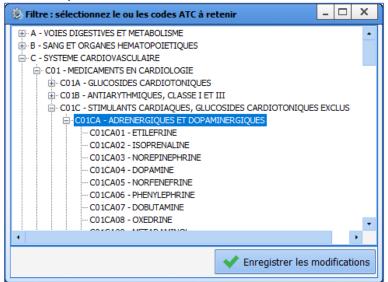



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 354 / 419

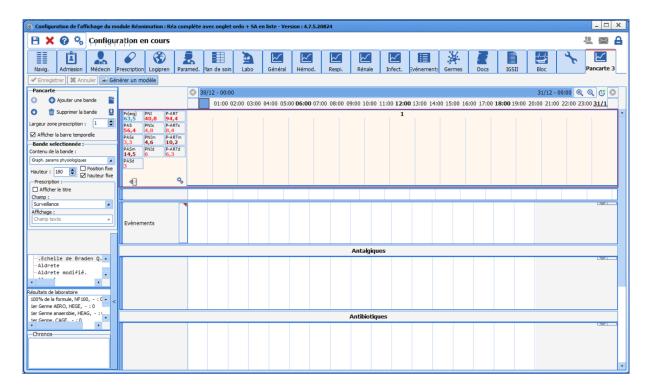


La configuration de l'affichage des paramètres est identique à celles de l'onglet Surveillance (DIANE ANESTHESIE) / Bloc (DIANE REA) : Paramétrage des paramètres à afficher.

7.1.5.13 Sélection du type de grossesse

Ce composant n'est utile que pour **DIANE OBSTETRIQUE**. Il n'y a pas de paramétrage à effectuer, il suffit de le dimensionner et de le positionner à l'endroit voulu.

7.1.5.14 Zone d'édition de document

Ce composant est un mini traitement de texte de type Rich Text, qui permet de la mise en forme.

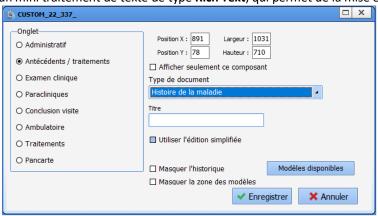

Il permet l'édition de plusieurs types de documents :

- Conduite à tenir (Obstétrique)
- CR d'obstétrique
- CR sortie Anesth
- CR sortie autre
- CR sortie Réa
- CR sortie USC



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 355 / 419

- Evolution médicale Anesthésie
- Evolution médicale Réa
- Evolution médicale USC
- Evolution paramédicale Anesthésie
- Evolution paramédicale Réa
- Evolution paramédicale USC
- Evolutions obstétrique
- Examen clinique à l'admission
- Examens paracliniques
- Histoire de la maladie Anesthésie
- Histoire de la maladie Réa
- Histoire de la maladie USC
- Synthèse médicale autre
- Synthèse médicale Réa
- Synthèse médicale USC
- Synthèse paramédicale autre
- Synthèse paramédicale Réa
- Synthèse paramédicale USC



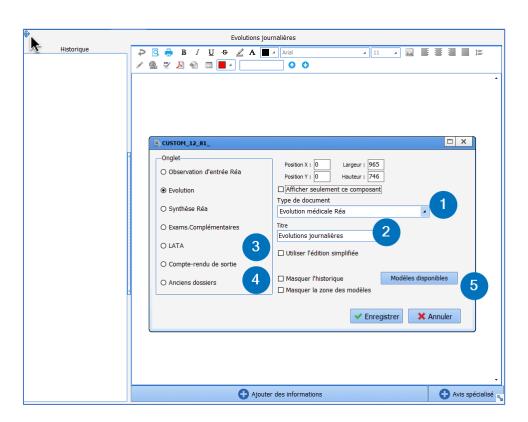

Le clic droit sur l'icône bleue en haut à gauche du composant permet d'éditer la fenêtre de paramétrage.

Type de document : permet de sélection un type de document (exemple : évolutions médicales Réa...).
 Le type de document permet l'enregistrement des informations en base de données de la manière que



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

les Active X/Id donnée. Pour utiliser plusieurs zones de texte différentes dans l'application, il faut s'assurer de ne pas sélectionner le même type de document.

- 2. Titre: permet de saisir le libellé.
- **3. Utiliser l'édition simplifiée :** cette fonction permet la saisie d'informations dans le composant sans utiliser le bouton **Ajouter des informations.**
- **4. Masquer l'historique :** permet de cacher la zone d'historique à gauche du composant. Elle reste cependant déployable au clic sur les chevrons.
 - **Masquer la zone des modèles :** permet de réduire la zone de sélection des modèles lors qu'aucun n'est paramétré.
- 5. Modèles disponibles : permet de configurer les modèles à rendre disponible depuis ce composant.

Le choix des modèles disponibles se fait par un glisser/déposer.

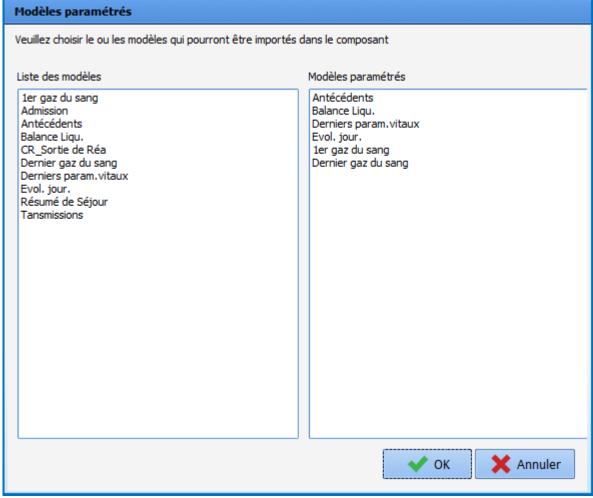

Note : Il est possible de déterminer un modèle automatique à la première édition du composant.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.1.5.15 Zone médicament enfants

Ce composant permet d'ajouter une zone médicament (cf. illustration ci-après) propre à chaque enfant en utilisant le **Sélecteur de dossiers enfant à traiter**.

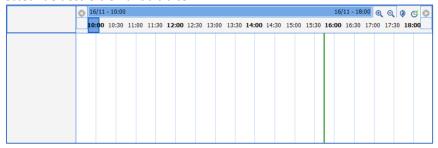


Il est possible de paramétrer les couleurs et de filtrer la saisie et/ou l'affichage des médicaments.

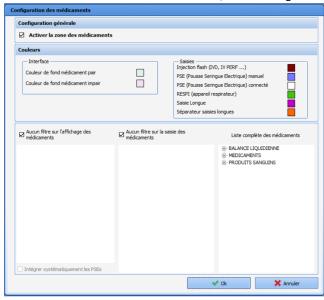

7.1.5.16 Zone de courbes pour paramètres manuels

Ce composant permet d'afficher sous forme de courbe et de saisir les paramètres manuels.

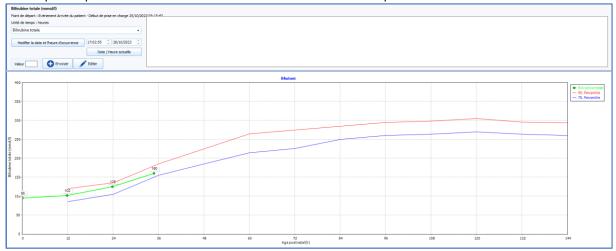



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102


Version du document : 1

Page: 358 / 419

Pour configurer ce composant, il faut dans un premier temps choisir le paramètre manuel (ou le groupe). La couleur de la courbe est paramétrable et il est possible d'afficher les valeurs sur le graphique. Un deuxième paramètre peut être affiché mais il doit avoir la même unité que le premier. Le type de donnée doit être **Normale**, sauf pour les dossiers d'obstétrique (**Mère** ou **Enfant**).

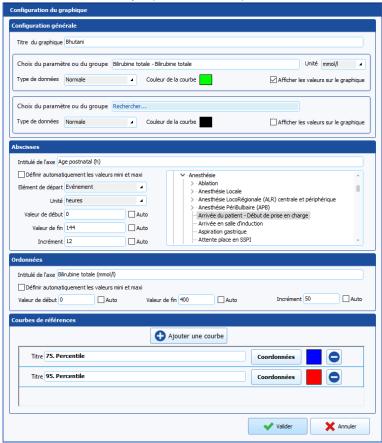

Les axes des abscisses et des ordonnées sont paramétrables. Les unités de temps utilisables sont les heures, les jours et les semaines. L'élément de départ peut-être le début de l'intervention, la date de naissance, le début de la grossesse ou un événement. Dans le cas d'un événement, il convient de le choisir parmi l'ensemble des événements (basculés ou non).

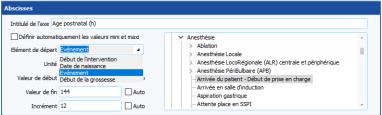

Les courbes de références permettent par exemple d'afficher des courbes de percentiles, de moyenne, ... Pour les configurer il faut d'abord cliquer sur le bouton **Ajouter une courbe**, puis sur le bouton **Coordonnées**. La fenêtre suivante s'affiche et il est possible de définir une courbe en saisissant les coordonnées de ses points, avec les unités définies dans **Configuration générale** du composant pour le paramètre en ordonnées (Y) et dans **Abscisses** (X) pour le temps.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2


Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

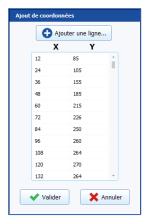

7.1.5.17 Liste des documents des anciens dossiers

Ce composant permet d'afficher des documents saisis dans des dossiers antérieurs du patient.

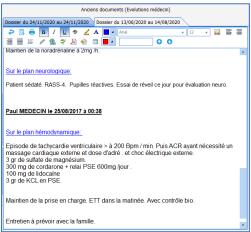

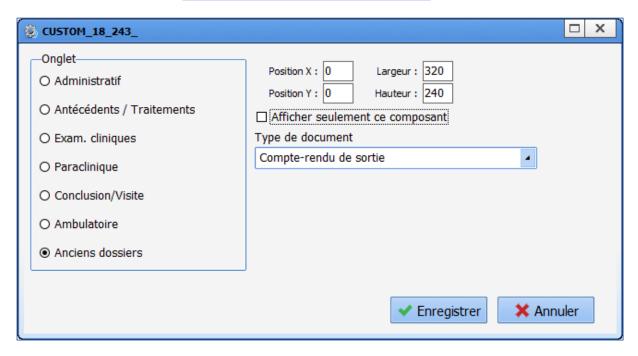

Les documents disponibles sont :



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1


Page: 360 / 419

- Evolutions médecin
- Synthèse médecin
- Evolutions infirmière
- Synthèse infirmière
- Examen clinique à l'admission
- Examens paracliniques
- Compte-rendu de sortie
- Histoire de la maladie
- CR d'obstétrique
- Evolutions obstétriques
- Conduite à tenir (Obstétrique)

Un seul type de document est configurable par composant.

7.1.5.18 Bouton d'ajout de paramètres manuels

Ce composant permet de saisir et/ou d'éditer rapidement une donnée manuelle. Il suffit de sélectionner le paramètre (ou le groupe de paramètres) ainsi que l'unité.

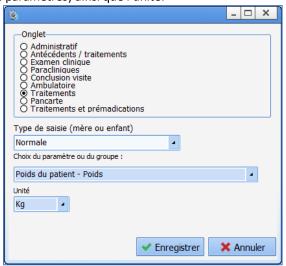

7.1.5.19 Zone de traitements et/ou prémédications

Ce composant permet d'afficher les traitements et/ou prémédications du patient.





BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 361 / 419


Sept modes d'affichages sont possibles en fonction des besoins :

- Affichage complet (traitements et prémédications) : zones 1, 2 et 3
- Traitements et prémédications réduits : zones 2 et 3
- Traitements complet: zones 1 et 2
- Traitements avec signature : zone 2
- Traitements en lecture seule : zone 2 sans la zone jaune ni le bandeau inférieur
- Prémédications avec signature : zone 3
- Prémédications en lecture seule : zone 3 sans la zone jaune ni le bandeau inférieur

En plus de ces modes, il est possible d'afficher ou non les conciliations dans la partie traitement.

7.1.5.19.1 Configuration de l'onglet dans le module de consultation

Dans la consultation, le composant se présente sous la forme d'un onglet. Il se configure via les clés de paramétrage de la consultation.

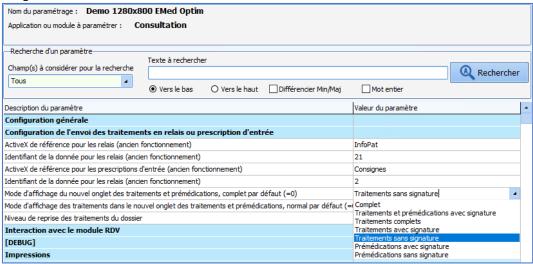

7.1.5.19.2 Configuration du composant dans Visual ou Diane Réa

Dans **Visual** ou **DIANE REA**, le composant peut être disposé dans un sous-onglet, seul ou avec d'autres composants.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

1	© CUSTOM_12_114_ □ X		
	-Onglet-	Position X: 0 Largeur: 1920	
	O Observation d'entrée Réa	Position Y: 0 Hauteur: 849	
	● Traitements et prémédications	✓ Afficher seulement ce composant Mode d'affichage	
	O Evolution	Affichage complet	
	O Synthèse Réa	O Traitements et prémédications réduits	
	o synthese red	O Traitements complet	
	O Exams. Complémentaires	O Traitements avec signature	
	O Engagement thérapeutique	O Traitements en lecture seule	
		O Prémédications avec signature	
	O Compte-rendu de sortie	O Prémédications en lecture seule	
	Affichage des traitements Complet Sans conciliation	☑ Ancré gauche ☑ Ancré haut ☐ Ancré droite ☐ Ancré bas	
		✓ Enregistrer ★ Annuler	

7.1.5.20 Schéma dentaire

Ce composant permet de lister l'état des dents du patient.

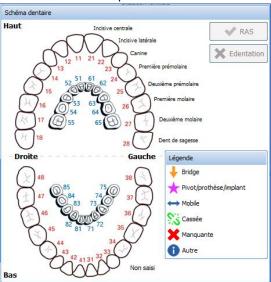

Il est déplaçable au clic gauche de la souris sur l'ensemble du composant et n'est pas redimensionnable. Au clic droit de la souris, il est possible de le modifier.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**


Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

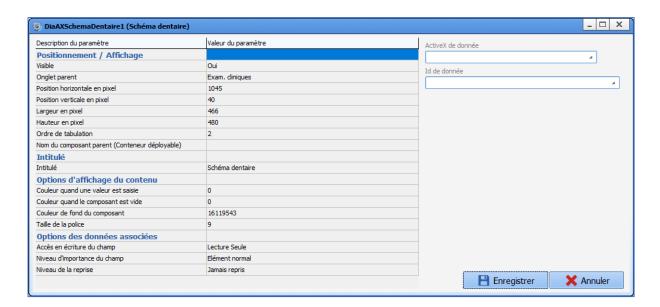

7.1.5.21 Chronomètres éditables

Ce composant affiche une fenêtre avec des chronomètres, semblable à celle de l'onglet SURVEILLANCE de Visual.

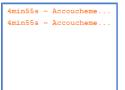



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 364 / 419

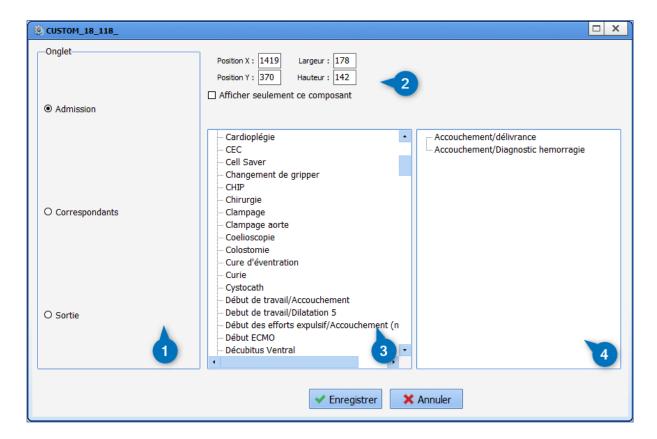

- 1. Onglet dans lequel apparaît le composant.
- 2. Position et dimension du composant.
- 3. Liste des chronomètres (basculés ou non).
- 4. Chronomètres configurés (Attention, seuls les chronomètres basculés dans la configuration seront affichés).

7.1.5.22 Moebius

Moebius est un outil d'évaluation des risques. Il propose une prise en charge adaptée au patient et une cartographie des risques.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

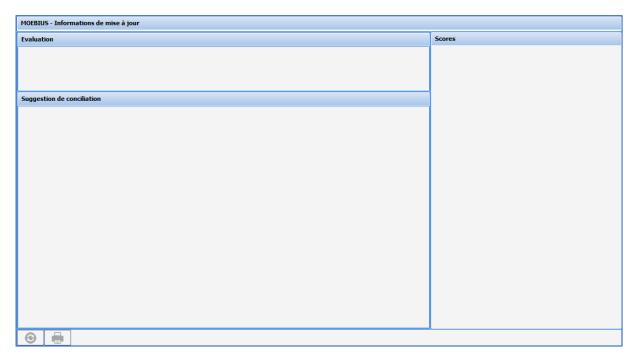

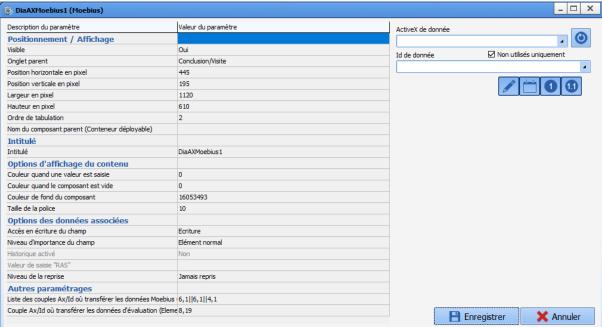

7.1.5.23 Schéma d'annotation 3D (Plan de soins)

Ce composant permet de localiser les soins directement sur une représentation en 3D du patient.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87


Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

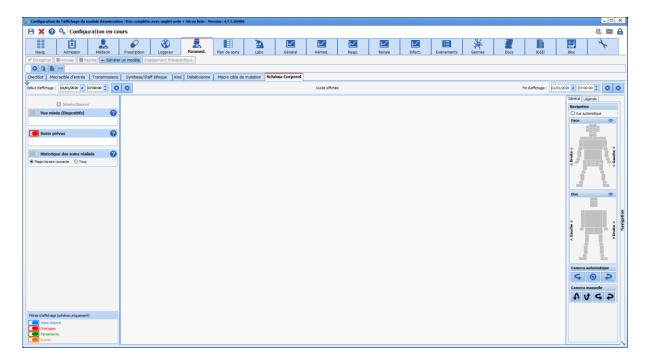

Les seuls paramétrages de ce composant sont sa position et ses dimensions. La case à cocher **Afficher seulement ce composant** permet de l'afficher sur l'intégralité de l'onglet.

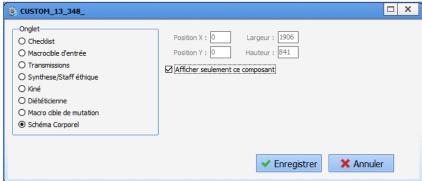

Afin que l'utilisateur puisse l'utiliser, il faut créer des formulaires dans l'onglet Eléments de soins.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.2 Liste des ActiveX et Id de données

Les couples Ax/Id permettent, entre autres, d'enregistrer les données du patient et de les imprimer si nécessaire. Certains couples Ax/Id ne doivent pas être utilisés pour autre chose que leur rôle prédéfini.

Ci-dessous, se trouvent les listes des Ax et les listes des Id en fonction de ces Ax. Ceux qui jouent un rôle spécifique ont un commentaire associé.

Légende :

: donnée calculée (cliquer sur l'icône pour obtenir des informations sur le calcul)

📆 : tag d'impression de la donnée

🖴 : donnée en lecture seule

7.2.1 Liste des ActiveX

- Antécédent
- Examens Cardio Respiratoires
- Intubation
- Examen biochimique
- Examen hématologique
- Consignes (et commande de produit sanguin)
- Bilan sanguin
- Information patient
- Visite préanesthésique
- Information dossier
- Dossier / Intervention
- **Patient**
- Prescriptions post-opératoires
- Ambulatoire: Pre Op
- Ambulatoire: Post Op
- Données de réanimation
- Informations Patient Supplémentaires
- Données d'obstétrique
- Conclusion CPA
- Examen clinique
- CPA PED
- CPA Obstétrique
- <u>Déchocage</u>
- Champs du séjour
- **Autres**

7.2.2 Liste des Id de données

7.2.2.1 ActiveX: Antécédent

Allergiques

📰 : ANTEC-ALLERGIQUES Anesthésiques : ANTEC-ANESTHESIQUES



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

•	Cardiaque	: ANTEC-CARDIAQUE
•	Chirurgicaux	: ANTEC-CHIRURGICAUX
•	Commentaire	: ANTEC-COMPLICATIONS
•	Complication opératoire	: ANTEC-COMPLICATION_OPERATOIRE
•	Conjoint : Habitus, tabagisme	: ANTEC-CONJOINT
•	Digestif	: ANTEC-DIGESTIF
•	Divers	: ANTEC-COMPORT_DIVERS
•	Endocrinologie	: ANTEC-ENDOCRINOLOGIE
•	Familiaux	: ANTEC-MEDICAUX
•	Gestité	: ANTEC-GESTITE
•	Gynécos actifs	: ANTEC-GYNECO_ACTIFS
•	Gynécos inactifs	: ANTEC-GYNECO_INACTIFS
•	Gynécologie	: ANTEC-GYNECOLOGIE
•	Habitus, tabagisme	: ANTEC-HABITUS_TABAGISME
•	Médicaux actifs	: ANTEC-MEDICAUX_ACTIFS
•	Médicaux inactifs	: ANTEC- MEDICAUX _INACTIFS
•	Neurologique	: ANTEC-NEUROLOGIQUE
•	Obstétricaux	: ANTEC-OBSTETRICAUX
•	Ophtalmologie	: ANTEC-OPHTALMOLOGIE
•	Parité	: ANTEC-PARITE
•	Pulmonaire	: ANTEC-PULMONAIRE
•	RAS	: ANTEC-RAS
•	Rénale	: ANTEC-RENALE
•	Risque hémorragique	: ANTEC-RISQUE_HEMORRAGIQUE
•	Ronfleur	: ANTEC-RONFLEUR
•	Traitements	: ANTEC-TRAITEMENTS_ACTUELS
•	Transfusionnels	: ANTEC-TRANSFUSIONNELS
•	Transfusionnels 2	: ANTEC-TRANSFUSIONNELS_2
•	Vasculaire	: ANTEC-VASCULAIRE

7.2.2.2 ActiveX: Examen cardiorespiratoire

CAT consultation autre	: EXAMEN_CARDIO-CAT_CONSULT_AUTRE
 Demande d'avis spécialisé 	: EXAMEN_CARDIO-DEMANDE_AVIS_SPECIALISE
• ECG	: EXAMEN_CARDIO-ECG
• Examen cardio	: EXAMEN_CARDIO-EXAMEN_CARDIO
 Examen complémentaire préopératoire 	EXAMEN_CARDIO- EXAMEN_COMPLEMENTAIRE_PRE_OP
Examen pneumo	: EXAMEN_CARDIO-EXAMEN_PNEUMO



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** BM-DEV-EN-034 Manue Version DIANE: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

• Examens	🖶 : EXAM-CARDIO_RESPI
Fréquence cardiaque	: EXAM-FC
Général	: EXAMEN_CARDIO-GENERAL
• NYHA	: EXAM-DYSPNEE
Pression artérielle diastolique	: EXAM-PA_DIASTO
Pression artérielle moyenne	: EXAMEN_CARDIO-PRESSION_ARTERIELLE_MOYENNE
 Pression artérielle systolique 	: EXAM-PA_SYSTO
• RAS	: EXAMEN_CARDIO-RAS
Résumé cs autre	: EXAMEN_CARDIO-RESUME_CS_AUTRE
Résumé cs cardio	: EXAMEN_CARDIO-RESUME_CS_CARDIO
Résumé cs pneumo	: EXAMEN_CARDIO-RESUME_CS_PNEUMO
• RP	: EXAMEN_CARDIO-RP
• Sat	: EXAMEN_CARDIO-SAT
Statut ECG	: EXAMEN_CARDIO-STATUT_ECG
Statut RP	: EXAMEN_CARDIO-STATUT_RP
• Temp	: EXAMEN_CARDIO-TEMP
• Veine	: EXAM-VEINE

7.2.2.3 ActiveX: Intubation

Ces couples Ax / Id sont tous en corrélation. Le remplissage de ces composants peut se faire via le bouton nommé « normal » (sans Ax/Id). Le calcul du score d'intubation est fait automatiquement.

Etat dentaire	🖶 : INTUB-ETAT_DENTAIRE
• Incisive	: INTUB-INCISIVES
• Intubation	: INTUB-TECHNIQUE
Mallampati	: INTUB-MALLAMPATI
Mobilité cervicale	: INTUB-MOBILITE
Ouverture bouche	: INTUB-OUVERTURE
Profil patient	: INTUB-PROFIL
Prothèse dentaire	: INTUB-PROTHESE
Score d'intubation	: INTUB-SCORE

Ca : BILAN-CA++ CI : BILAN-CLCréatininémie : BILAN-CREAT Date/Heure : BILAN-DATE_BIOCHIMIE Glycémie : BILAN-GLYCEMIE



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	К	: BILAN-K+
•	Na	: BILAN-NA+
•	Phosphore	: BILAN-PHOSP
•	Protide	: BILAN-PROT
•	Urée	: BILAN-UREE
•	Validé	: BILAN-VALID_BIOCHIMIE
7.2.	2.5 ActiveX : Examen hématolo	gique
		_

2.5 ActiveX : Examen hématologique	
CAT	: EXAMEN_HEMATO-CAT
Date/Heure	🖶 : BILAN-DATE_HEMATOLOGIE
Documents bilans scannés	: EXAMEN_HEMATO-DOCS_BILANS_SCANNES
Documents bilan Vu	: EXAMEN_HEMATO-DOCS_BILANS_VU
GB Utilisé par l'intelligence du « RAS » de la consultation d'anesthésie	: BILAN-GB
GBlancs	: EXAMEN_HEMATO-GBLANCS
GR	🖶 : BILAN-GR
НВ	🖶 : BILAN-HB
нт	: BILAN-HT
Plaquettes	🖶 : BILAN-PLAQ
Résultats bilans bio	: EXAMEN_HEMATO-RESULTATS_BILAN_BIO
Statut examens	: EXAMEN_HEMATO-STATIT_EXAMENS
TCA	: BILAN-TCA
TP	: BILAN-TP
TS	: BILAN-TS
Validé	🖶 : BILAN-VALID_HAMATOLOGIE

7.2.2.6 ActiveX: Consignes (et commande de produit sanguin) Commande : CPA-COMMANDE_PRODUITS Consignes : CPA-CONSIGNES Prémédications : CPA-PREMEDICATIONS

PREMEDICATIONS HORS HOPITAL 💼 : CPA-PREMEDICATIONS_HORS_HOPITAL

7.2.2.7 ActiveX: Bilan sanguin

•	1ERE DETER EFS	== : BILANSANGUIN1ERDETER
•	2EME DETER EFS	: BILANSANGUIN2EMEDETER
•	Bilan amené	: BILAN_SANGUIN-BILAN_AMENE
•	Bilan scanné	: BILAN_SANGUIN-BILAN_SCANNE
•	Bilan Vu	: BILAN_SANGUIN-BILAN_VU



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

•	CAT Groupe	: BILAN_SANGUIN-CAT_GROUPE
•	CAT RAI	: BILAN_SANGUIN-CAT_RAI
•	Commentaire	: BILAN-COMMENTAIRE
•	Critères validité RAI	: BILAN_SANGUIN-CRITERES_VALIDITE_RAI
•	Date/Heure RAI	: BILAN-DATE_RAI
•	Dernier RAI négatif	: BILANSANGUINDERNIERRAINEGATIF
•	Glycémie 2	: GLYCEMIE_POSTPRANDIALE
•	Glycémie à jeun g/l	: GLYCEMIE_A_JEUN
•	Glycémie H0	: GLYH0
•	Glycémie H1	: GLYH1
•	Glycémie H2	: GLYH2
•	Glycémie H3	: BILANSANGUINGLYH3
•	Glycémie à jeun g/l	: GLYCEMIE_A_JEUN
•	Groupe sanguin	: BILAN-GROUPE
•	HbA1C	: BILAN_SANGUIN-HB1AC
•	Hépatite B	: BILAN-HEP_B
•	Hépatite C	: BILAN-HEP_C
•	HIV	: HIV
•	INR	: BILAN_SANGUIN-INR
•	Nombre de déterminants	: BILAN-NB_DETERM
•	PCR	: BILAN_SANGUIN-PCR
•	RAI (Recherche d'Agglutines Irrégulières)	: BILAN-RAI
•	RAI à refaire	: BILAN-REFAIRE_RAI
•	Résultat examen bio	: BILAN_SANGUIN-RESULTAT_EXAMEN_BIO
•	Résultat examen compléter	: BILAN_SANGUIN-RESULTAT_EXAMEN_COMPLETER
•	Rhésus	: BILAN-RHESUS
•	Statut carte de groupe	: BILAN_SANGUIN-STATUT_CARTE_GROUPE
•	Statut Covid	: BILAN_SANGUIN-STATUT_COVID
•	Statut RAI	: BILAN_SANGUIN-STATUT_RAI
•	TCA ratio	: BILAN_SANGUIN-TCA_RATIO

7220	AntinoV		
1.2.2.0	ACLIVEX .	: Information	ı ballent

Adresse médecin	: PATIENT-ADRESSE_MEDECIN
Age du patient (avec unité)	: PATIENTAGEWITHUNIT
• ALR	: CPA-ALR
Ambulatoire	: CPA-AMBULATOIRE_POSSIBLE
Autorisation	: CPA-AUTORISATION



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE** : 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Auto-transfusion	: CPA-AUTOTRANSFUSION
•	Autres informations	: CPA-INFOS_DONNEES
•	вмі	: PATIENT-BMI
•	BMI Initial	: PATIENT-BMI_INITIAL
•	BSA 🕦	= : PATIENT-BSA
•	Code postal médecin	: PATIENT-CODE_POSTAL_MEDECIN
•	Commentaires	: ANTEC-RELAIS
•	Commentaires hors hôpital	: CPA-RELAIS-HORS-HOPITAL
•	Date hospitalisation	: CPA-DATE_HOSPITALISATION
•	Document protection donné	:INFOPAT-DOC_PROTEC_DONNE
•	Document protection scanné	:INFOPAT-DOC_PROTEC_SCANNE
•	Document protection signé	: INFOPAT-DOC_PROTEC_SIGNE
•	Estomac plein	: CPA-ESTOMAC_PLEIN
•	Examens généraux	: EXAM-GENERAUX
•	Identifiant de l'entité	: CPA-SERVICE_HOSPITALISATION
•	Insuffisance hépatique	: INFOPATINSUFFHEPATIQUE
•	Maladies chroniques	: MALADIES_CHRONIQUES
•	Mineur	: INFOPAT-MINEUR
•	Nom médecin	: PATIENT-NOM_MEDECIN
•	Numéro de chambre	: CPA-NUMERO_CHAMBRE
•	Numéro de téléphone Médecin	: INFOPATTELMEDECIN
•	Numéro mutuelle	: PATIENT-NUMERO_MUTUELLE
•	PNId habituelle	: PATIENT-PNID_HABITUELLE
•	PNIs habituelle	: PATIENT-PNIS_HABITUELLE
•	Poids ajusté du patient en kg 🚾	: INFOPATPOIDSAJUSTE
•	Poids du patient en kg	: PATIENT-POIDS2
•	Poids théorique du patient en kg	: PATIENT-POIDS_THEORIQUE
•	Prénom médecin	: PATIENT-PRENOM_MEDECIN
•	Présence parents	: INFOPAT-PRESENCE_PARENTS
•	Prise/Perte de poids (%)	: PRISE_PERTE_POIDS_PAGE
•	Prise/Perte de poids (kg)	: PRISE_PERTE_POIDS
•	Prise/Perte de poids depuis la dernière mesure	: PRISE_PERTE_POIDS_DEPUIS_DER_MESURE
•	Prise/Perte de poids depuis l'admission	: PRISE_PERTE_POIDS_DEPUIS_ADMISSION
•	Protection juridique	: INFOPAT-PROTEC_JURIDIQUE
•	Risque ASA	: CPA-ASA
•	Risque septique	: CPA-RISQUE_SEPTIQUE
•	Service demandeur	: CPA-SERVICE_DEMANDEUR



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** BM-DEV-EN-034 Manue Version DIANE: 4.14.2 Version du dispositif mé

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

• Synthèse	: CPA-ELEMENTS_IMPORTANTS
• Taille	: PATIENT-TAILLE2
Type entrée	: CPA-TYPE_ENTREE
Ville médecin	: PATIENT-VILLE_MEDECIN
Volume courant maximal prédit	: PATIENT-VC_MAX_PREDIT
Volume courant minimal prédit	: PATIENT- VC_MIN_PREDIT

7.2.2.9 ActiveX: Visite préanesthésique

Ces couples Ax/ Id sont tous en corrélation. Le remplissage d'un de ces composants implémente automatiquement les composants « fait par » et « Le ».

• A jeun	🖶 : CPA-A_JEUN
Commentaire	: CPA-COMMENTAIRE_VISITE
Date/heure de VPA	: VPADATETIME
Dossier complet	: CPA-DOSSIER_COMPLET
Nom/Prénom de l'utilisateur ayant réalisé la CPA	: VPAUSERNAME
Visite pré-anesthésique : RAS depuis CPA	· VPARASSINCEVPA

7.2.2.10 ActiveX: Information dossier

•	Anesthésie	: CPA-TECHNIQUE_ANESTHESIQUE
•	Anesthésiste en consultation (complété automatiquement) Utilisé par pour compléter automatiquement le nom de l'anesthésiste qui réalise la consultation	: CPA-COMORBIDITE
•	Anesthésiste réalisant la consultation d'anesthésie	: CPA-ANESTH
•	Anesthésiste(s)	: CPA-ANESTHESISTE_PREVU
•	Chirurgien(s)	: CPA-CHIRURGIEN_PREVU
•	Circonstances	: INTERV-CIRCONSTANCES
•	Commentaire	: CPA-COMMENTAIRE_INTERV
•	Commentaires associés au traitement personnel	: COMMENTAIRE_TRAITEMENT
•	Consentement anesthésie	: INTERV-CONSENTEMENT_ANESTH
•	Consentement transfusion	: INTERV-CONSENTEMENT_TRANSFUSION
•	Date de la consultation d'anesthésie	: DATE_CPA
•	Date prévue	: CPA-DATE_INTERV_PREVUE
•	Dépassement honoraire	: INTERV-DEPASSEMENT_HONORAIRE
•	Durée prévue	: INTERV-DUREE_PREVUE
•	Histoire de la maladie	: HISTOIRE_MALADIE
•	IADE(s)	: CPA-INFIRMIER_PREVU
•	Identifiant de salle	: CPA-SALLE_PREVUE
•	ldentifiant du bloc	: CPA-BLOC_PREVU



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**Version **DIANE**: 4 14 2

Version **DIANE** : 4.14.2 Version du dispositif médical : 4.1.2

UDI : (01)3760404900005(10)040102 Version du document : 1

Page: 374 / 419

Identifiant du lit de réveil	: CPA-LIT PREVU
Informations de l'intervention : type d'admission	: TYPE ADMISSION
Infos en provenance du DPI	: INTERV-INFOS_PROVENANCE_DPI
Localisation	: INFOINTERVLOCALISATIONINFO
 Mode d'admission (utilisé pour les traitements personnels) 	: MODE_ADMISSION
Mode d'admission validé	: INTERV-MODE_ADMISSION_VALIDE
Motif Admission Ambulatoire	: MOTIF-HOSPI-AMBU
Motif Admission Post-Partum	: MOTIF-HOSPI-PP
Motif Admission Réanimation	: MOTIF-HOSPI-REA
Motif Admission Salle de naissance	: MOTIF-HOSPI-SDN
Motif Admission SSPI	: MOTIF-HOSPI-SSPI
Motif Admission Surveillance	: MOTIF-HOSPI-SURV
Motif Admission USC	: MOTIF-HOSPI-USC
Pathologie	: CPA-PATHOLOGIE
Position sur la table	: INTERV-POSITION_TABLE
Suivi post-opératoire	: ANTEC-SUIVI_POST_OP
Téléconsultation	: INTERV-TELECONSULTATION
• Type	: CPA-INTERV_REALISEE
Type prévu	: CPA-INTERV_PREVUE
7.2.2.11 ActiveX : Dossier/Intervention • Anesthésiste de l'intervention	
Chirurgien de l'intervention Date de l'intervention	CDA DATE INTERVENTION
	: CPA-DATE_INTERVENTION
 Date de mise à jour de l'intervention Date/Heure de début de réanimation 	DEA DATE DEDUT
Date/Heure de début de réveil	: REA-DATE_DEBUT
Date/Heure de fin de réanimation	: INTERV-HEURE_DEBUT_REVEIL
Date/Heure de fin de réveil	: REA-DATE_FIN
Date/Heure de l'autorisation de sortie	: INTERV-HEURE_FIN_REVEIL
Date/Heure de rise à jour de l'impression de la	: INTERV-DATE_AUTORISATION_SORTIE
consultation	: INTERVDATEMAJIMPCPA
Date/Heure signature des prescriptions de réveil	DATE_SIGNATURE_PRECRIPTION



2025-11-07

etc...) 🖴

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

Etat de l'intervention (en cours, en réveil, en transit,

Heure de début de l'intervention

Heure de fin de l'intervention



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

: INTERV-HEURE_DEBUT

: INTERV-HEURE_FIN

•	IADE de l'intervention	
•	Identifiant Diane du dossier de la grossesse de la mère	: INTERVIDGROSSESSE
	associée	
•	Identifiant du bloc de l'intervention	
•	Identifiant du patient de l'intervention	
•	Identifiant externe de l'intervention	
•	Identifiant interne de dossier 🖴	
•	Liste « à faire » du portail	
•	Nom du bloc de l'intervention	: INTERV-BLOC
•	Numéro interne de version du dossier de l'intervention	
•	Paramétrage affichage personnalisé du portail	
•	Responsabilité de l'anesthésie 🖴	: INTERV-RESPONSABILITE_ANESTHESIE
•	Signataire de l'autorisation de sortie de réveil	: INTERV-AUTORISATION_SORTIE
•	Signataire des prescriptions du réveil	: INTERV-SIGNATURE_PRESCRIPTION
•	Type de dossier obstétrique 🖴	: TYPEDOSSIER-
•	Type de grossesse	: INTERVTYPEGROSSESSE
7.2	2.2.12 ActiveX : Patient	
Car	Couples d'Av/ld cont généralement utilisés par les interfers	os nour ráquaárar los donaáos administrativos
Ces Couples d'Ax/Id sont généralement utilisés par les interfaces pour récupérer les données administratives		

Adı	resse email du patient	📻 : PATIENT-EMAIL
Adı	resse postale du patient	: PATIENT-ADRESSE
Age	e du patient (années) 🖾 😑	
Au	tres prénoms du patient	🖶 : PATIENT-AUTRES_PRENOMS
Cod	de INSEE de naissance	: PATIENT-NAISS_CODE_INSEE
Cod	de postal du patient	: PATIENT-CODE_POSTAL
Coi	rrespondants	: PATIENT-CORRESPONDANTS
Dat	te de décès du patient	: PATIENT-DATE_DECES
Dat	te de naissance du patient	: PATIENT-DATE_NAISSANCE
His	torique du numéro IPP du patient	
Ide	ntifiant Diane de la mère biologique 🖴	: PATIENTIDMERE_BIOLOGIQUE
Ide	ntifiant National de Santé du patient	: PATIENT-INS_VALUE
lde	ntifiant unique (numéro IPP) du patient	🖶 : PATIENT-NUMERO_IPP
Ide	ntifiant unique (numéro IPP) régional du patient	: PATIENT- NUMERO_IPPREGIONAL
Lie	u de naissance du patient	: PATIENT-LIEU_NAISSANCE
Mé	decin traitant	: PATIENT-MEDECIN_TRAITANT
Na	ture de l'INS du patient	: PATIENT-INS_NATURE
No	m de naissance du patient	: PATIENT-NOM_PATRONYMIQUE
No	m usuel du patient	: PATIENT-NOM MARITAL



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

 Numéro de sécurité sociale du patient 	= : PATIENT-NUMERO_SS
Numéro de téléphone additionnel du patient	: PATIENT-TELEPHONE2
Numéro de téléphone du patient	: PATIENT-TELEPHONE1
Origine géographique de la mère	: ORIGINE-GEO-MERE-
Patient à peau noire	: PATIENT-PEAU_NOIRE
Pays du patient	: PATIENT-PAYS
Prénom du patient	= : PATIENT-PRENOM
Prénom usuel du patient	: PATIENT-PRENOM_USUEL
Profession du patient	: PATIENTPROFESSION
Sexe du patient	= : PATIENT-SEXE
Situation du patient	: PATIENT-SITUATION
Statut du patient	: PATIENT-INS_STATUS
Ville du patient	: PATIENT-VILLE

7.2.2.13 ActiveX : Prescriptions post-opératoires

Ces couples Ax/Id sont nécessaires afin de pouvoir imprimer / exporter le traitement issu de la prescription post opératoire.

•	Aliment	= : PRESCRIPTION-BOISSON_ALIMENTATION
•	Antalgique	: PRESCRIPTION-ANTALGIQUE
•	Antibiotique	: PRESCRIPTION-ANTIBIOTIQUE
•	Anticoagulant	: PRESCRIPTION-ANTICOAGULANT
•	Autres	: PRESCRIPTION-AUTRES
•	Paraclinique	: PRESCRIPTION-PARACLINIQUE
•	Réanimation	: PRESCRIPTION-REANIMATION
•	Surveillance	: PRESCRIPTION-SURVEILLANCE
•	Traitement	= : PRESCRIPTION-REPRISE_TRAITEMENT
•	Transfusion	: PRESCRIPTION-TRANSFUSION
•	Ventilation	: PRESCRIPTION-VENTILATION

7.2.2.14 ActiveX : Ambulatoire : Pre Op

• Commentaire	= : AMBULPREOP-COMMENTAIRE
Consignes connues	: AMBULPREOP-CONSIGNES_CONNUES
Heure arrivée	: AMBULPREOP-HEURE_ARRIVEE
Heure dernière alimentation	: AMBULPREOP-HEURE_DERNIERE_ALILENTATION
Heure dernière boisson	: AMBULPREOP-HEURE_DERNIERE_BOISSON
• Signature	: AMBULPREOP-PERSONNEL
• Traitements	: AMBULPREOP-TRAITEMENTS



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE** : 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Accompagnant	: AMBULPOSTOP-ACCOMPAGNANT
Aptitude rue	: AMBULPOSTOP-APTITUDERUE
Capacité à se lever	: AMBULPOSTOP-SELEVER
Collation	: AMBULPOSTOP-COLLATION
Commentaires	: AMBULPOSTOP-COMMENTAIRES
Conscience	: AMBULPOSTOP-CONSCIENCE
Difficulté	: AMBULPOSTOP-DIFFICULTE
Diurèse	: AMBULPOSTOP-DIURESE
Heure de première alimentation	: AMBULPOSTOP-HEURE_PREMIERE_ALIMENTATION
Heure de première boisson	: AMBULPOSTOP- HEURE_PREMIERE_BOISSON
Heure de sortie	: AMBULPOSTOP- HEURE_SORTIE
Motricité	: AMBULPOSTOP-MOTRICITE
Nausées 1	: AMBULPOSTOP-NAUSEES1
Nausées 2	: AMBULPOSTOP-NAUSEES2
Nom de l'accompagnant	: AMBULPOSTOP-NOM_ACCOMPAGNANT
Numéro de téléphone du patient	: AMBULPOSTOP-NUM_TEL_PATIENT
PEC douleur	: AMBULPOSTOP-PEC_DOULEUR
Rendez-vous chirurgien	: AMBULPOSTOP-RDV_CHIRURGIEN
Retour	: AMBULPOSTOP-RETOUR
Retour à domicile	: AMBULPOSTOP-RETOUR_A_DOMICILE
Saignement	: AMBULPOSTOP-SAIGNEMENT
Satisfaction	: AMBULPOSTOP-SATISFACTION
Signature	: AMBULPOSTOP-PERSONNEL
Sommeil	: AMBULPOSTOP-SOMMEIL
Soulagé par TTT	: AMBULPOSTOP-SOULAGE_PAR_TTT

Conclusion du staff	: CONCLUSION-STAFF
Protocole de recherche	: CPAREA1-PROTOCOLE_RECHERCHE
Transmissions médicales	: CPAREA1-TRANSMISSIONS_MEDICALES
Envoyé par	: PATIENT-MEDECIN_ADRESSEUR

7.2.2.17 ActiveX : Informations Patient Supplémentaires

•	Age du conjoint ≅≣	: INFOPATSUPAGECONJOINT
•	Antécédents médicaux du conjoint	: ANTECMEDICCONJOINT
•	Code professionnel de la mère	: CODEPROMERE



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Code professionnel du conjoint	DDEPROCONJOINT
. Data da naissanas du sanisint	ATENAISSCONJOINT
. Craves can avia du canicist	RPSANGCONJOINT
Niveau d'études de la mère : NI	IVETUDEMERE
a Niveau distribute du containt	IVETUDECONJOINT
Nom de la curatelle	OMCURATELLE
Nom de la personne à prévenir	ERSONNEAPREVENIRNOM
Nom de la personne de confiance	ERSONNECONFIANCENOM
Nom de la tutelle	OMTUTELLE
Nom du conjoint : No	OMCONJOINT
Numéro de téléphone de la curatelle	UMTELCURATELLE
Numéro de téléphone de la tutelle	UMTELTUTELLE
Numéro de téléphone du conjoint	UMTELCONJOINT
Origine géographique du conjoint	RIGINECONJOINT
Prénom de la curatelle	RENOMCURATELLE
Prénom de la tutelle	RENOMTUTELLE
Prénom du conjoint : PF	RENOMCURATELLE
Profession du conjoint : PF	ROFESSIONCONJOINT
Téléphone de la personne à prévenir : PE	ERSONNEAPREVENIRTEL
Téléphone de la personne de confiance : PE	ERSONNECONFIANCETEL
Tutelle / Curatelle	FOPATSUPTUTELLECURATELLE
7.2.2.18 ActiveX : Données d'obstétrique	
#B	OURSAMENORRHEE
• 16SA = : 1	
1ère méthodo de describancia	DECLENCHEMENT_METHODE1
	PECLENCHEMENT METHODE2
	PATE_ISSUE_GROSSESSE
Administra Associations	DMISSION ACCOUCHEMENT
A design of the second	DBST1CHAMP08
A (f + + + + + + + + + + + + + + + + +	GE-CORRIGE-AFFICHE
	GEGROSSESSE
Age de la grossesse	
. A	ATIENTAGEINYEARSINTEGER
Age du patient (années) : P Alimentation selle de missance Alimentation selle de missance	
Age du patient (années) : P Alimentation salle de naissance : C	ATIENTAGEINYEARSINTEGER
 Age du patient (années) : P Alimentation salle de naissance Allaitement 	ATIENTAGEINYEARSINTEGER DBST1NUTRITIONFOETUSSDN



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

 Amniocentèse 		: OBST1AMNIOCENTESE
Analyse placentaire		: PLACENTA_ANALYSE
Anesthésie après accour	chement 🗷 🖶	: ANESTH_MODE_APRES
• Anesthésistes		: ANESTH ANESTHESISTE
Année vaccination coqu	eluche madame	: VACCOQUELUCHEANNEE
• ARE		: ACC_MAR
Arrêt de travail		: ARRETTRAVAIL
Atcd d'Allergie/Asthme,	/Eczéma	: OBST1ATCDALLERGIEASTHMEECZEMA
Autorisation d'opérer		: OBST1CHAMP03
Autres prélèvements		: OBST1AUTRESPRELEVEMENT
Autres traitements		: OBST1AUTRESTRAITEMENTS
Biopsie de trophoblaste		: OBST1BIOPSIETROPHOBLASTE
Bracelet d'identification		: BRACELET_IDENTIFICATION
Calcul de la Date de Déb	out de Grossesse	: DDGCALC
• Césarienne		: ACC_CESARIENNE
Césarienne : Complication	ons	: CESAR_COMPLICATION
• Champ 112		: OBST1EC_RESP
• Champ 113		: OBST1EC_CARDIAQUE
• Champ 114		: OBST1EC_TONUSPERIPH
• Champ 115		: OBST1EC_CAVITEBUCCALE
• Champ 116		: OBST1EC_HANCHES
• Champ 117		: OBST1EC_OGE
• Champ 118		: OBST1EC_OCULAIRE
• Champ 119		: OBST1EC_POULSFEMORAUX
• Champ 120		: OBST1EC_ECHOHANCHE
• Champ 121		: OBST1EC_TONUSAXIAL
• Champ 122		: OBST1EC_ORTHOPEDIQUE
• Champ 123		: OBST1EC_MALFORMATIONPATHO
• Champ 124		: OBST1EC_SORTIEPRECOCEENVISAGEE
• Champ 125		: OBST1EC_EXAMENSAPREVOIR
• Champ 126		: OBST1EC_CONSIGNES
• Champ 127		: OBST1EC_SURVEILLANCE
• Champ 128		: OBST1EC_CONSULTATIONULTERIEURE
• Champ 129		: OBST1ES_POULSFEMORAUX
• Champ 130		
• Champ 131		OBST1ES_AUSCULTATIONCARDIAQUENORMALE
•		: OBST1ES_EXAMNORMAL
Champ 132	CAC	: OBST1ES_ICTERE
BOW MEDICAL	SAS	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Champ 133	: OBST1ES_CONCLUSIONICTERE
•	Champ 134	: OBST1ES_ICTEREVALEURMAX
•	Champ 135	: OBST1ES ICTEREDATEVALEUR
•	Champ 136	: OBST1ES RISQUEINFECTIEUX
•	Champ 137	: OBST1ES_ALIMENTATION
•	Champ 138	: OBST1ES_SORTIE
•	Champ 139	: OBST1ES OEAPEA
•	Champ 140	: OBST1ES TRANSFERTNEONAT
•	Champ 141	: OBST1ES_DEPISTAGEGUTHRIE
•	Champ 142	: OBST1ES_DEPISTAGECARDOCONG
•	Champ 143	: OBST1ES_CONCLUSIONSEJOUR
•	Champ 144	: OBST1ES_INFOCOURIERSORTIE
•	Champ 145	: OBST1ES_COMMENTAIRES
•	Champ 146	: OBST1SEJOUR
•	Champ 147	: OBST1PATHOPOSTPARTUM
•	Champ 148	: OBST1ACCOUCHEMENTLIEU
•	Champ 149	: OBST1ACCOUCHEMENTCOMMENTAIRE
•	Champ 150	: OBST1IVGTYPE
•	Champ 151	: OBST1ECHODATE
•	Champ 152	: OBST1ECHOBIOMETRIE
•	Champ 153	: OBST1ECHOEXMORPHO
•	Champ 154	: OBST1ECHOECHOGRAPHISTE
•	Champ 155	: OBST1ECHOLA
•	Champ 156	: OBST1ECHOPLACENTA
•	Champ 157	: OBST1ECHOPRESENTATION
•	Champ 158	: OBST1ECHOLONGUEURCOL
•	Champ 159	: OBST1ECHOOI
•	Champ 160	: OBST1ECHOCOMMENTAIRE
•	Champ 163	: OBST1NBENFANTSNES
•	Champ 164	: OBST1NBMFIUINF22
•	Champ 165	: OBST1NBMFIUSUP22
•	Champ 189	: OBST1SORTIEPRECENF
•	Champ 190	: OBST1SORTIEPRECMERE
•	Champ 191	: OBST1SORTIEPRECINDIC
•	Champ 193 ≅ =	: SEMAINESAMENORRHEE
•	Champ 198	: ABUS_SEXUELS
•	Champ 199	: VIOLENCE



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** BM-DEV-EN-034 Manue Version DIANE: 4.14.2 Version du dispositif me

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

•	Champ 201	: VIOLENCE_COMMENTAIRE
		: PREIVG SUIVI
•	Champ 202	
	Champ 215	: HOSPIT-ENTREE
•	Champ 217	: ACTESMAT
•	Champ 220	: ACTESFOETUS
•	Champ 221	: DELIVRANCE-HEMO-TYPE
•	Champ 226	: COMNEONAT
•	Champ 238	: BHCGDATE1
•	Champ 239	: BHCGDATE2
•	Champ 240	🖶 : BHCGDATE3
•	Champ 241	🖶 : BHCGDATE4
•	Champ 242	: BHCGTAUX1
•	Champ 243	: BHCGTAUX2
•	Champ 244	: BHCGTAUX3
•	Champ 245	: BHCGTAUX4
•	Champ 246	: OBST_DEPRECATED
•	Champ 248	: HABITUS_MODEDEVIE
•	Champ 250	: HABITUS_AUTREMODEVIE
•	Champ 252	: NUMARCH
•	Champ 40	: OBST1GLYCEMIECAPILAIRES
•	Champ 87	: DEL_MODALITE
•	Champ T21	: OBST1CHAMP404
•	CN	: OBST1CN
•	Commentaire enfant	: OBST1COMMENTAIREENFANT
•	Complication	: ANETH-COMPLICATION
•	Contractions utérines : Enregistrement	: OBST1CUENREGISTREMENT
•	Contractions utérines : Qualité	: OBST1CUQUALITE
•	Cordon : Anomalies	: OBST1CORDONANOMALIES
•	Cordon : Insertion	: CORDON_INSERTION
•	CoResp	: ACC_CORESP
•	Critère éligibilité prado enfant	: OBST1PRADOENF
•	Critère éligibilité prado mère	: OBST1PRADOMERE
•	Cytomégalovirus	: CYTOMEGALOVIRUS
•	Date d'accouchement prévue	: ACCOUCHEMENTPREVU
•	Date de début d'allaitement	: OBST1DEBUTALLAITEMENT
•	Date de début de grossesse	: DEBUTGROSSESSE



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

•	Date de début possible : Consultation d'anesthésie	: CONSULTANESTHSEPTIEMEMOISDEBUT
•	du 7 ^{ème} mois Date de début possible : Consultation du 3 ^{ème} mois	: CONSULTTROISIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 4ème mois	: CONSULTQUATRIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 5 ^{ème} mois	: CONSULTCINQUIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 6ème mois	: CONSULTSIXIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 7 ^{ème} mois	: CONSULTSEPTIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 8ème mois	: CONSULTHUITIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Consultation du 9 ^{ème} mois	: CONSULTNEUVIEMEMOISDEBUT
•	Date de début possible : Dépistage T21 au 1er trimestre	: DATEDEBUTDEPISTAGET21T1
•	Date de début possible : Dépistage T21 au 2ème trimestre	: DATEDEBUTDEPISTAGET21T2
•	Date de début possible : Test diabète gestationnel – HPGO 75g	:DEBUTHPGO75
•	Date de début possible pour la première échographie	:DATEDEBUTECHOT1
•	Date de début possible pour la seconde échographie	:DATEDEBUTECHOT2
•	Date de début possible pour la troisième échographie	:DATEDEBUTECHOT3
•	Date de début possible pour tester le streptococcus	:DEBUTSTREPTOB
•	Date de fin limite : Dépistage T21 au 1 ^{er} trimestre	: DATEFINDEPISTAGET21T1
•	Date de fin limite : Dépistage T21 au 2 ^{ème} trimestre	: DATEFINDEPISTAGET21T2
•	Date de fin limite : Test diabète gestationnel – HPGO 75g □□ □□	:FINHPGO75
•	Date de fin limite pour la première échographie	:DATEFINECHOT1
•	Date de fin limite pour la seconde échographie 🖼	:DATEFINECHOT2
•	Date de fin limite pour la troisième échographie 🖼	:DATEFINECHOT3
•	Date de fin limite pour tester le streptococcus bovis	:FINSTREPTOB
•	Date de fin possible : Consultation d'anesthésie du 7 ^{ème} mois	: CONSULTANESTHSEPTIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 3 ^{ème} mois	: CONSULTTROISIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 4ème mois	: CONSULTQUATRIEMEMOISFIN
	BOW MEDICAL SAS 43. Avenue d'Italie 80000 AMIENS France	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE Version DIANE : 4.14.2



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

•	Date de fin possible : Consultation du 5 ^{ème} mois □	: CONSULTCINQUIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 6ème mois	: CONSULTSIXIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 7 ^{ème} mois	: CONSULTSEPTIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 8 ^{ème} mois	: CONSULTHUITIEMEMOISFIN
•	Date de fin possible : Consultation du 9 ^{ème} mois	: CONSULTNEUVIEMEMOISFIN
•	Date de sortie du PP	: DATE SORTIE PP
•	Date de vaccination contre la grippe	: OBST1VACGRIPPEDATE
•	Date dernières règles (saisie)	: DERNIERERGLESSAISIE
•	Date des dernières règles 🚾	: DERNIERESREGLES
•	Date du décès	: OBST1DATEDECES
•	Date LCC	: OBST1MESURELCC
•	Date limite : Test diabète gestationnel – glycémie à jeun	: DATEGLYCEMIEAJEUN
•	Date limite pour la déclaration de grossesse	: DATELIMITEDECLARGROSSESSE
•	Date limite pour l'IVG	: DATELIMITEIVG
•	Date limite pour l'entretien prénatal	: DATEENTRETIENPRENATAL
•	Date Rhophylac	: OBST1DATERHOPHYLAC
•	Début du congé pathologique	: DEBUTCONGEPATHO
•	Décès Salle de naissance	: OBST1CHAMP07
•	Dégagement	: ACC DEG
•	Délivrance : Actes Associés	: DEL_ACTEASSOCIES
•	Délivrance : Administré par	= : DEL HEMORRAGIE
•	Délivrance : AP Oxytocine	: OBST1DELIVRANCEOXYADMINPAR
•	Délivrance : Délai après accouchement en min	: DEL_OXYTOCINE
•	Délivrance : hémorragie	: DEL_PERTES_SANGUINES
•	Délivrance : Modalité	= = =
•	Délivrance : Transfusion	======================================
•	Dépistage T21	: DEPISTAGE T21
•	DEPRECATED	: OBST1CHAMP236
•	Diamètre bipariétal en mm	: DIAMETRE_BIPARIETAL
•	Données d'obstétrique 1 : Champ 161	: OBST1DATEDEBUTSUIVI
•	Données d'obstétrique 1 : Champ 162	: OBST1DATEFINSUIVI
•	Données d'obstétrique 1 : Champ 237	: DATEIVG
•	DPNI	: OBST1DPNI
•	Durée de la phase active ☑등	: PHASE ACTIVE
•	Durée de la phase de latence	: PHASE LATENCE
•	Durée du congé pathologique	: DUREECONGEPATHO
•	Durée du Stade 1	: STADE1
	BOW MEDICAL SAS	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Durée du Stade 2	: STADE2
•	Durée du Stade 3 🚾	: STADE3
•	Durée entre perte de LA et début de travail	: PERTE LA DEBUT TRAVAIL
•	Effectué par	: OBST1ACCOUCHEMENTEFFECTUEPAR
•	Engagement	: ACC ENG
•	ENTRETIENT4EME	: ENTRETIENT4EME
•	EPP	: EPP
•	Equilibre acido basique : Déficit de base	: OBST1DEFICITDEBASE
•	Equilibre acido basique : Lactates	: OBST1LACTATES
•	Equilibre acido basique : pCO2	: OBST1PCOE
•	Equilibre acido basique : pH	:EAB PH
•	ESTRIOL	: OBST1ESTRIOL
•	Extraction	: ACC_EXTR
•	Fœtus : Anomalies du RCF	: FOETUS_ANOMALIE_RCF
•	Fœtus : DATE MFIU	: OBST1FOETUSMFIUDATE
•	Fœtus : Etat (Ne pas utiliser)	: FOETUS ETAT
•	Fœtus : Prélèvement du scalp	: FOETUS_SCALP
•	Fœtus : Surveillance	= : FOETUS SURVEILLANCE
•	Génotypage	= : GENOTYPAGE
•	Gestité ⊠≣	= : GESTITE
•	Glycémie capillaire : heure	: OBST1GCHEURE
•	Glycémie capillaire : valeur	: OBST1GCVALEUR
•	HBS	: HBS
•	HCG	: HCG
•	HEPATITEC	= : HEPATITEC
•	HIV	= : HIV
•	Indicateur éligibilité prado 🖼	: OBST1PRADOINDIC
•	Indication PG ou PCT	: INDICATION_PGPCT
•	Indications suivi DAN	: OBST1INDICATIONSUIVIDAN
•	Intervention Complémentaires	: CESAR INTERVCOMPL
•	Issue de la grossesse	
•	Issue de la grossesse ?	: ISSUEGROSSESSE
•	Jour aménorrhée saisie manuellement	: OBST1SAISIEJ
•	Jours d'aménorrhée en fonction de l'échographie 1er Trimestre	: OBST1JECHOT1
•	Le patient est-il mineur ?	: IS-MINOR
•	Le patient est mineur	: ISMINOROLD
•	Lésions des parties molles	: LPM
	BOW MEDICAL SAS	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Lésions des parties molles : Associé à	= : OBST1LPM_ASSOCIEA
•	Malformation Commentaire	: OBST1MOLFORMATIONCOMMENTAIRE
•	Manoeuvre	: OBST1ACCOUCHEMENTMANOEUVRE
•	Maturation ?	: MATURATION_METHODE
•	Méconium	: MECONIUM
•	Méthode de détermination de la grossesse	: DETERMINATIONTERME
•	Méthode de maturation	: MATURATION
•	Miction	: MICTION
•	Modalité de décès	: OBST1CHAMP09
•	Mode d'accouchement	: ACC-MODE
•	Mode d'anesthésie	: ANESTH_MODE_AVANT
•	Motif de l'intervention ou de la césarienne	: CESAR_MOTIF
•	Motif de maturation	: MATURATION_MOTIF
•	Motif du déclenchement	: DECLENCHEMENT_MOTIF
•	NEONATALISTE	: NEONATALISTE
•	Nombre de césariennes	: NB_CESAR
•	Nombre de cicatrices gynécologiques (hors césariennes)	: NB-CICATRICES-GYNECO
•	Nombre de grossesses môlaires	: OBST1NBMOLE
•	Nombre de grossesses avec Diabète	: OBST1NBDIABETE
•	Nombre de grossesses avec HTA	: OBST1NBHTA
•	Nombre de grossesses extra utérine	: OBST1NBGEU
•	Nombre de jours d'aménorrhée (si le nombre de semaines n'est 🚾	: OBST1JOURSAMENORRHEE
•	Nombre de jours total d'aménorrhée	: JOURSTOTALAMENORRHEE
•	Nombre de prématurés 🖾 🖶	: NOMBRE_PREMATURES
•	Nombre de semaines d'aménorrhée 🖼	: OBST1SEMAINESAMENORRHEE
•	Nombre d'enfants attendus par la patiente	: NOMBRE_ENFANTS
•	Nombre d'enfants hypotrophiques	: OBST1NBHYPO
•	Nombre d'enfants malformés 🚾	: OBST1NBMALFORM
•	Nombre d'enfants mort-nés 🚾	: NOMBRE_MORTSNES
•	Nombre d'IMG < 22 SA 🖼	: OBST1NBIMGINF22
•	Nombre d'IMG > 22 SA	: OBST1NBIMGSUP22
•	Nombre d'IVG	: OBST1NBIVG
•	Nombre fausses couches	: OBST1NBFC
•	Numéro	: ACCOUCHEMENT_NUMERO
•	Obstétrique : Date de l'échographie T1	: OBST-DATE-ECHO-T1
•	Obstétrique : Champ libre 1	: OBST-FREE-1



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** BM-DEV-EN-034 Manue Version DIANE: 4.14.2 Version du dispositif mé

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Obstétrique : Champ libre 2	= : OBST-FREE-2
Orthogénie : Confidentialité	: ORTHO_COMPLICATIONS
PAPP_A	: OBST1PAPP_A
Parité 🚾	: PARITE
Pathologie de la grossesse	: PATHOGROSSESSE
Pathologies et complications en cours de travail	= : PATHOCOMPLICATIONTRAVAIL
PCT au cordon	= : PCTCORDON
Pelviscanner : BIEPINEUX	: OBST1BIEPINEUX
Pelviscanner : MAGNIN	: OBST1MAGNIN
Pelviscanner : PRP	: OBST1PRP
Percentile de la taille	: OBST1PERCTAILLE
Percentiles du périmètre crânien	: OBST1PERCPC
Percentiles du poids 🖫	: OBST1PERCPOIDS
Périmètre crânien de naissance (en cm)	: PCCM-Naissance
Périmètre crânien en CM	: PCCM
Placenta : Anomalies	: PLACENTA ANOMALIES
Poids du nouveau-né (g)	= : POIDS-NN
Prélèvement gastrique	: PRELEVEMENT_GASTRIQUE
Prélèvements commentaires	: OBST1PRLVTCOMMENTAIRES
Préparation à la naissance et à la parentalité	= : PMP
Présence de cicatrices gynécologiques (hors césariennes)	: PRESENCE-CICATRICES-GYNECO
Présence de malformation	: OBST1MALFORMATIONPRESENCE
Présentation	: ACC-PRESENTATION
Prise acide folique	: OBST1CHAMP04
Prise de poids	: PRISEPOIDS
Prise du Rhophylac	: OBST1ROPPHYLAC
Prophylaxie Complète	: PROPHYLAXIE_COMPLETE
Prophylaxie oculaire	: PROPHYOCULAIRE
Rang de naissance	: OBST1CHAMP195
Réanimation SDB : Actes	: OBST1REAACTES
Réanimation SDB : Commentaires	: OBST1REACOMMENTAIRES
Réanimation SDB: Transfert	: OBST1REATRANSFERT
Réanimation SDN : Appel pédiatrique	: OBST1REAAPPELPEDIATRIQUE
Réanimation SDB : Responsable	: OBST1REARESP
Reconnaissance anticipée	: RECOANTICIPEE
Resp	: ACC_RESP
Résumé complet	: OBST1CHAMP254
BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE Version DIANE : 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102



Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

• Rubéole	🖶 : RUBEOLE
Rupture des membranes : Aspect	: MEMBRANES_ASPECT_RUPTURE
Rupture des membranes : Aspect LA	: MEMBRANES_ASPECT_ULTERIEUR_C
Rupture des membranes : Modalité	: OBST1MEMBRANESMODALITERUPTURE
Score Apgar 1	: SCORE-APGAR1
Score Apgar 5	: SCORE-APGAR5
Score Apgar 10	: SCORE-APGAR10
Score Crib II	: SCORE-CRIB2
Semaine aménorrhée saisie manuellement	: OBST1SAISIESA
• Semaines d'aménorrhée en fonction de l'échographie 1er Trimestre	: OBST1SAECHOT1
Sortie du patient	: SORTIEPATIENT
Streptocoque B	: STREPTOB
• SUIVIDAN	: OBST1SUIVIDAN
• Syphilis	: SYPHILIS
Taille à la naissance	: TAILLE-NAISSANCE
Température à la naissance	: OBST1CHAMP304
Terme de la grossesse	: TERMETHEORIQUEGROSSESSE
Terme de mise en travail, nombre de jours d'aménorrhée	: JOURS_AMENORRHEE
Terme de mise en travail, nombre de semaines d'aménorrhée	: SEMAINES_AMENORRHEE
Terme de mise en travail, nombre de semaines+jours d'aménorrhée	: SEMAINES_JOURS_AMENORRHEE
Thérapeutiques complémentaires	
	ANESTH_THERAPEUTIQUE_COMPLEMENTAIRE
• THROMBUS	: OBST1THROMBUS
• TIU	🖶 : TIU
Toxoplasmose	: TOXOPLSAMOSE
TPelviscanner : TMU	: OBST1TMU
Transfert immédiat	: TRANSFERT_IMMEDIAT
Transfert motif	: TRANSFERT_MOTIF
Travail	: MODALITE_TRAVAIL
Travail pendant la grossesse	: TRAVAILPDTGROSSESSE
Type fécondation, obtenue par	: OBST1CHAMP05
Utérus cicatriciel	: UTERUS-CICATRICIEL
Vaccination contre la grippe	: OBST1VACGRIPPE
Vaccination coqueluche M.	: VACCOQUELUCHEMRANNEE
Vaccination coqueluche madame	: VACCOQUELUCHE
BOW MEDICAL SAS	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DIANE



Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

•	Vaccination coqueluche MR	: VACCOQUELUCHEMR
•	Vitamine D	: OBST1CHAMP06
•	Champ 29	: OBST2ATCDGYNINACTIF
•	Champ 30	: OBST2ATCDMEDINACTIF
7 2	2.19 ActiveX : Conclusion CPA	
1.2.		п
	Ambulatoire validé	: CONCLUSION_CPA-AMBULATOIRE_VALIDE
	Antibioprophylaxie	: CONCLUSION_CPA-ANTIPPROPHYLAXIE
	Bas de contention	: CONCLUSION_CPA-BAS-CONTENTION
	Conclusion Staff	: CONCLUSION_CPA-CONCLUSION_STAFF
	Eligible ambulatoire	: CONCLUSION_CPA-ELIGIBLE_AMBULATOIRE
	Gestion accompagnant	: CONCLUSION_CPA-GESTION_ACCOMPAGNANT
	Monitorage prévu	: CONCLUSION_CPA-MONITORAGE_PREVU
•	Motif staff	: CONCLUSION_CPA-MOTIF_STAFF
•	PEC douleur	: CONCLUSION_CPA-PEC_DOULEUR
_	Réa post-opératoire	: CONCLUSION_CPA-REA_POST_OP
•	USC post-opératoire	: CONCLUSION_CPA-USC_POST_OP
7.2.	2.20 ActiveX : Examen clinique	
•	Addiction	: EXAMEN CLINIQUE-ADDICTION
•	Addiction Apfel	: EXAMEN_CLINIQUE-ADDICTION : EXAMEN CLINIQUE-APFEL
•		: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL
•	Apfel	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE
•	Apfel Cardiaque	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV Neurologie	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEV : EXAMEN_CLINIQUE-MTEV : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE
•	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV Neurologie NVPO	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEV : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE
	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV Neurologie NVPO Poids avant grossesse	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEV : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE : EXAMEN_CLINIQUE-NVPO : EXAMEN_CLINIQUE-POIDS_AVANT_GROSSESSE : EXAMEN_CLINIQUE-POIDS_DU_JOUR
	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV Neurologie NVPO Poids avant grossesse Poids du jour	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE : EXAMEN_CLINIQUE-NUPO : EXAMEN_CLINIQUE-NUPO : EXAMEN_CLINIQUE-POIDS_AVANT_GROSSESSE
	Apfel Cardiaque Etat général Examens cliniques effectués en CPA en lien NGAP Général Habitus Mal des transports MTEA MTEV Neurologie NVPO Poids avant grossesse Poids du jour Prise de poids	: EXAMEN_CLINIQUE-APFEL : EXAMEN_CLINIQUE-CARDIAQUE : EXAMEN_CLINIQUE-ETAT_GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-FAIT-EN-CPA-NGAP : EXAMEN_CLINIQUE-GENERAL : EXAMEN_CLINIQUE-HABITUS : EXAMEN_CLINIQUE-MAL_DES_TRANSPORTS : EXAMEN_CLINIQUE-MTEA : EXAMEN_CLINIQUE-MTEV : EXAMEN_CLINIQUE-NEUROLOGIE : EXAMEN_CLINIQUE-NVPO : EXAMEN_CLINIQUE-POIDS_AVANT_GROSSESSE : EXAMEN_CLINIQUE-POIDS_DU_JOUR : EXAMEN_CLINIQUE-PRISE_DE_POIDS



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2

UDI: (01)3760404900005(10)040102

	Signes fonctionnels cardio	: EXAMEN_CLINIQUE-SIGNES_FONCTIONNELS_CARDIO
	Signes fonctionnels pneumo	: EXAMEN_CLINIQUE-SIGNES_FONCTIONNELS_NEURO
	Statut infectieux	: EXAMEN_CLINIQUE-STATUT_INFECTIEUX
	Statut viral	: EXAMEN_CLINIQUE-STATUT_VIRAL
	Veineux	: EXAMEN_CLINIQUE-VEINEUX
	2.21 ActiveX : CPA PED	
	Alimentation	: CPA_PED-ALIMENTATION
	APGAR naissance	: CPA_PED-APGAR_NAISSANCE
	Complications prématurité	: CPA_PED-COMPLICATIONS_PREMATURITE
	Poids naissance	: CPA_PED-POIDS_NAISSANCE
_	Suspicion sténose	: CPA_PED-SUSPICION_STENOSE
	Temps recoloration cutanée	: CPA_PED-TEMSP_RECOLORATION_CUTANEE
	Type naissance	: CPA_PED-TYPE_NAISSANCE
	2.22 ActiveX : CPA Obstétrique	
	Choix technique patiente	: CPA_OBST-CHOIX_TECHNIQUE_PATIENTE
	Contexte obstétrical	: CPA_OBST-CONTEXTE_OBSTETRICAL
	Info bébé	: CPA_OBST-INFO_BEBE
	Information APD	: CPA_OBST-INFORMATION_APD
	Pathologie obstétricale	: CPA_OBST-PATHOLOGIE_OBSTETRICALE
	Préparation naissance	: CPA_OBST-PREPA_NAISSANCE
	Risque obstétrical	: CPA_OBST-RISQUE_OBSTETRICAL
	Type d'accouchement	: CPA OBST-TYPE ACCOUCHEMENT
	Vécu patiente	: CPA_OBST-VECU_PATIENTE
	2.23 ActiveX : Déchocage	
	Acide tranexamique	: ACIDE_TRANEXAMIQUE
	Activation de la procédure choc hémorra	agique : ACT_PROC_HEMORR
	Anomalie pupillaire	: ANOMAL_PUPIL_PREHOSP
	Anomalie pupillaire (phase hospitalière)	: ANOMAL_PUPIL_HOSP
	Antibiotiques	🔙 : ANTIBIOTIQUES
	Blast	: BLAST
	Ceinture pelvienne	: CEINTPELV
	Chute	: CHUTE
	Date de l'accident	: DATE_ACCIDENT
_	Date et heure d'arrivée dans le service d	'accueil
	Date et heure d'arrivée sur les lieux de l'	accident
	BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS Tél : +33 3 60 03 24 68	BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur DI Version DIANE : 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2



Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>

UDI: (01)3760404900005(10)040102

Décompression tamponnade gazeuse	: REA_DECOMP_TAMP_GAZ
Dose maximale de catécholamines en préhospitalier	: REA_CATECHO
Dossier Traumabase	: DOSSIER_TRAUMA
Echographie d'orientation	: FAST_FAIT
Ecrasé ou projeté	: ECRASE_PROJETE
Expansion volémique	🖶 : EXPVOL_PRH
FAST préhospitalière	🖶 : FAST_PREHOSPITALIERE
Grade de gravité annoncée	🖶 : GRADE_GRAVITE_ANNONCEE
Index de pulsatilité maximal	= : DTC_IP_MAX
Lieu d'accueil hospitalier initial	: LIEU_ACCUEIL_INITIAL
Mode d'admission du patient	🖶 : ORIGINE_PATIENT
Période de travail	= : PERIOD_TRAV
Précision du mécanisme	= : PRECIS_MECA_MONT
Précisions si FAST anormale	: FAST_ECHO_PRECISION
Radiographie thoracique	🖶 : RADIO_THORACIQUE
Résultats de la FAST préhospitalière	= : RESULT_FAST_PREHOSP
Résultats de la radiographie thoracique	: RADIO_THO_NORMALE
Transfusion préhospitalière	: TRANSFUSION_PREHOSP
Vélocité diastolique minimale	: VELOCITE_DIASTOLIQUE

7.2.2.24 ActiveX : Champs du séjour

Ces Ids de données sont verrouillés pour les interfaces.

- IDEXTERN
- IDPATIENT
- DATEIN
- DATEOUT
- TYPESEJOUR
- UF_MEDICALE
- UF_HEBERGEMENT
- CHAMBRE
- LIT

7.2.2.25 ActiveX Autres

Schéma dentaire : SCHEMA_DENTAIRE_GRAPHIC

: SCHEMA_DENTAIRE_TEXT



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.3 MD Listes des champs calculés

7.3.1 Données de la consultation

7.3.1.1 Calcul de la surface corporelle (SC/BSA) (Information patient/BSA) :

Pour la consultation, la surface corporelle est calculée à l'aide :

- de la méthode d'Haycock, ce qui donne :

Formule utilisée:

0.02426 * Poids en kg 0.5378 * Taille en cm 0.3964

- de la méthode de Mosteller, ce qui donne :

Formule utilisée:

(Poids en kg * Taille en cm /3600) 0.5

Le choix de la formule à utiliser se fait à partir de l'onglet Paramétrages, sous-onglet Diaserveur.

Choix de l'algorithme pour le calcul de la surface corporelle	Formule de Mosteller	4
FormulaBodySurface (Choix de l'algorithme pour le calcul de la surface corporelle)		

Ce calcul n'est possible que si le poids en Kg et la taille en cm du patient sont renseignés (différents de 0). Le résultat est arrondi à trois chiffres après la virgule

La surface corporelle est calculée si :

- Le poids du patient est mis à jour (Information patient/Poids)
- La taille du patient est mise à jour (Information patient/Taille)

7.3.1.2 Calcul de l'IMC/BMI (Information patient/BMI) :

Formule utilisée:

Poids en kilo / ((Taille en cm /100) ²)

Ce calcul n'est possible que si le poids en Kg et la taille en cm du patient sont renseignés. Le résultat est arrondi à trois chiffres après la virgule.

L'IMC est automatiquement calculé si :

- Le poids du patient est mis à jour (Information patient/Poids)
- La taille du patient est mise à jour (Information patient/Taille)

7.3.1.3 Calcul du BMI initial (Information patient/BMI Initial) :

Formule utilisée:

Poids initial en kilo / ((Taille en cm /100) ²)

Ce calcul n'est possible que si le poids initial en Kg et la taille en cm du patient sont renseignés. Le résultat est arrondi à trois chiffres après la virgule.

L'IMC Initial est automatiquement calculé si :

- Le poids initial du patient est mis à jour (Information patient/Poids initial)
- La taille du patient est mise à jour (Information patient/Taille)

7.3.1.4 Calcul du score d'intubation (Intubation/Score) :

1. Si la liste déroulante Mallampati (Intubation.Mallampati) est saisie avec une valeur >= 5 (Refuse d'ouvrir la bouche, Impossible d'ouvrir la bouche, Enfant de moins de 10 ans) ou non renseignée alors le score d'intubation ne peut pas être calculé

Si Mallampati vaut 1, le score d'intubation s'incrémente de 1



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 392 / 419

Si Mallampati vaut 2, le score d'intubation s'incrémente de 2

Si Mallampati vaut 3 ou plus, le score d'intubation s'incrémente de 3

Si la liste est non renseignée et que au moins une autre liste est renseignée, le score s'incrémente de 1

- Si la liste déroulante mobilité vaut Normale, le score s'incrémente de 1
 Si la liste déroulante mobilité vaut Diminuée, le score s'incrémente de 2
 Si la liste déroulante vaut Bloquée ou autre, le score s'incrémente de 3
 Si la liste est non renseignée et que au moins une autre liste est renseignée, le score s'incrémente
 - de 1
 Si la liste déroulante Profil Patient vaut N (Normal), le score d'intubation s'incrémente de 1
- Si la liste déroulante Profil Patient vaut N (Normal), le score d'intubation s'incrémente de 1
 Si la liste déroulante Profil Patient vaut P (Prognathe), le score d'intubation s'incrémente de 2
 Si la liste déroulante Profil Patient vaut autre chose, le score d'intubation s'incrémente de 3
 Si la liste est non renseignée et que au moins une autre liste est renseignée, le score s'incrémente de 1
- 4. Si la liste déroulante Ouverture de la bouche vaut 2 (2 Doigts), le score d'intubation s'incrémente de 3
 - Si la liste déroulante Ouverture de la bouche vaut 1 (2-3 Doigts), le score d'intubation s'incrémente de 2
 - Si la liste déroulante Ouverture de la bouche vaut autre chose, le score d'intubation s'incrémente de 1
 - Si la liste est non renseignée et que au moins une autre liste est renseignée, le score s'incrémente de 1
- 5. Si la liste déroulante Distance ThyroMentonnière (Incisive), vaut O (< 65 mm) le score d'intubation s'incrémente de 2
 - Si la liste vaut autre chose que O le score d'intubation s'incrémente de 1
 - Si la liste est non renseignée et que au moins une autre liste est renseignée, le score d'intubation s'incrémente de 1.

Le score d'intubation est mis à jour à chaque modification des listes déroulants Mallampati, Ouverture de la bouche, Distance ThyroMentonnière, Mobilité cervicale et profil du patient.

7.3.1.5 Poids théorique (Information patient/Poids théorique du patient en kg):

Le poids théorique ou Poids Idéal peut se calculer uniquement avec la taille du patient. Si le sexe n'est pas renseigné, le sexe par défaut est masculin (utile uniquement pour le calcul du poids d'un adulte), si l'âge n'est pas renseigné, on considère que le patient à 20ans.

Si le patient fait moins de 152.4 cm ou qu'il est demandé d'utiliser la formule de Lorentz et que :

- Le patient à moins de 2,5 ans on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : (Taille en cm) 35 ((Taille en cm 34) *0.75)
- Le patient à moins de 6 ans on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient :
 (Taille en cm) -100 ((Taille en cm 123) *0.7)
- Le patient à moins de 14 ans on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : (Taille en cm) -100 ((Taille en cm 125) *0.5)
- Le patient à moins de 18 ans on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : (Taille en cm) -100
- Le patient à 18 ans ou plus et qu'il est de sexe masculin on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : (Taille en cm) -100 ((Taille en cm -150) *0,25)
- Le patient à 18 ans ou plus et qu'il est de sexe féminin on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : (Taille en cm) -100 ((Taille en cm -150) *0,4)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Sinon, on utilise la formule de Devine :

- Si le patient est de sexe masculin on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : 50 + (0.91 * (Taille en cm -152.4))
- Si le patient est de sexe féminin on utilise la formule suivante pour déterminer le poids théorique du patient : 45.5 + (0.91 * (Taille en cm -152.4))

Le résultat est renvoyé avec deux chiffres après la virgule.

Le poids théorique est recalculé si :

- La date de naissance du patient est modifiée (Patient/Date de naissance)
- Le sexe du patient est modifié (Patient/Sexe)
- La taille du patient est modifiée (Information patient/Taille)

7.3.1.6 Volume courant minimal prédit (Information patient/Volume courant minimal prédit):

Cette donnée vaut 6 fois le poids théorique du patient. Cette fois ci pas d'arrondis de valeur. Cette donnée est recalculée à chaque modification du poids théorique (Information patient/Poids théorique du patient en kg).

7.3.1.7 Volume courant maximal prédit (Information patient/Volume courant maximal prédit):

Cette donnée vaut 8 fois le poids théorique du patient. Cette fois ci pas d'arrondis de valeur. Cette donnée est recalculée à chaque modification du poids théorique (Information patient/Poids théorique du patient en kg).

7.3.1.8 Age du conjoint (Informations patient supplémentaires/Age du conjoint) :

L'âge du conjoint de la patiente se calcule si la date de naissance du conjoint est renseignée (Onglet Administratif > Date de naissance du conjoint) (Date système – Date de naissance du conjoint).

Donnée recalculée automatiquement lors de la mise à jour de la date de naissance du conjoint (Informations patient supplémentaires/Date de naissance du conjoint).

7.3.1.9 Poids ajusté du patient (Information patient/Poids ajusté en kg) :

Le poids ajusté du patient se calcule à partir du poids théorique du patient ainsi que la dernière valeur de son poids.

Poids ajusté: Poids théorique +0,4 (poids actuel – poids théorique)

Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Le poids ajusté est mis à jour si :

- Le poids théorique du patient est mis à jour (Information patient/Poids théorique du patient en kg)
- Le poids du patient est mis à jour (Information patient/Poids).

7.3.1.10 Prise ou perte de poids en kilo (Information patient/Prise/Perte de poids (kg)) :

Calcule la prise de poids en kilo du patient en faisant la différence entre le poids initial du patient (**Information** patient/Poids) et la dernière saisie du poids.

Cette donnée est mise à jour à chaque modification du poids du patient.

7.3.1.11 Prise ou perte de poids en % par rapport au poids de base du patient (Information patient/Prise/Perte de poids (%)) :

Calcule la prise de poids en pourcent du patient en faisant la différence entre le poids initial du patient (Information patient/Poids) et sa dernière saisie.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 394 / 419

Cette donnée est mise à jour à chaque modification du poids (Information patient/Poids) du patient.

7.3.1.12 Age du patient (Patient/Age du patient (années)) :

Différence en années entre la date de naissance du patient (**Patient/Date de naissance**) et aujourd'hui. Donnée mise à jour au chargement du dossier et à chaque modification de la date de naissance du patient.

7.3.2 Données liées à l'obstétrique

7.3.2.1 Percentile Poids (diafIdObst1PercPoids):

Le percentile du poids du nouveau-né se calcule si son poids (diafldObst1PoidsNouveauNe) et le nombre de semaine d'aménorrhée sont renseignés (diafldObst1AFFICHESA).

Percentile = percentile (Score)

Score = (LN(PoidsNouveauNe) - moyenne) / Ecart type

Si le bébé est de sexe masculin :

 $0.000109863095^{AFFICHESA(3)}$

AFFICHESA(3)

Sinon: -4.13667133974 + 0.382827233935 * AFFICHESA - 0.01101958925* AFFICHESA(2) + 0.000102753287*

AFFICHESA(3);

 $Moyenne: 10.57756060268 - 0.60716320319*_SA + 0.024851303008* \\ ^{AFFICHESA(2)} - 0.00028027298* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.0002802798* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.0002802798* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.0002802798* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.0002802798* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.00028029* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.000028029* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.00028029* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.0002802* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.00028* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.00028* \\ ^{AFFICHESA(3)} - 0.00028* \\ ^{AFFICHES$

7.3.2.2 Percentile Taille (diafIdObst1PercTaille):

Le percentile de la taille du nouveau née se calcule si sa taille (Information patient/TAILLE) et le nombre de semaine d'aménorrhée sont renseignés (diafldObst1AFFICHESA).

Percentile = percentile (Score)

Score = (LN(Taille) - moyenne) / Ecart_type

Si le bébé est de sexe masculin :

Ecart_type: $-56.0552816179 + 5.194038268674 * AFFICHESA - 0.1506625261 ^{AFFICHESA(2)} + 0.001424420272 * AFFICHESA(3)$

 $Moyenne: 50.06894254422 - 4.00572135523 * AFFICHESA + 0.186686129219 * {}^{AFFICHESA(2)} - 0.00215574049 * {}^{AFFICHESA(2)} - {}^{AFFICHESA(2)}$

AFFICHESA(3)

Sinon

Ecart_type : -59.2880238464 + 5.39802559522 * AFFICHESA - 0.15428184703 * AFFICHESA(2)+ 0.001437350107 *

AFFICHESA(3)

Moyenne: 30.91419685296 - 2.42950191347 * AFFICHESA + 0.142594920869 * AFFICHESA(2) - 0.00175207738 *

AFFICHESA(3)

7.3.2.3 Percentile périmètre crânien (DiafIdObst1PercPC) :

Le percentile du périmètre crânien du nouveau née se calcule si son périmètre crânien (Obst1PCCM) et le nombre de semaine d'aménorrhée sont renseignés (diafldObst1AFFICHESA).

Percentile = percentile (Score)

Score = (LN(PCCM) - moyenne) / Ecart type

Si le bébé est de sexe masculin :

Ecart_type: -24.3709774685 + 2.247143950431 * AFFICHESA - 0.06380758661 * AFFICHESA(2) + 0.000592765847 * AFFICHESA(3)

Moyenne: 2.527172432982 + 0.053793497931 * AFFICHESA(2) - 0.00083642534 * AFFICHESA(3)

Sinon

Ecart_type: -31.7149671255 + 2.892529318957 * AFFICHESA - 0.08237590311 * AFFICHESA(2) + 0.000767371911 *



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Moyenne: 1.722279782298 + 0.054867246533 * AFFICHESA(2) - 0.0008605794 * AFFICHESA(3)

7.3.2.4 Date des dernières règles (Données d'obstétrique 1. DERNIERESREGLESCALC) :

Ce champ prend la valeur du champ diafIdObst1DernieresReglesSaisie si celui-ci est renseigné manuellement sinon on retire 14 jours à la date de Début de Grossesse.

Ce champ est mis à jour à chaque mise à jour de :

- La date de début de grossesse (Obst1DebutGrossesse)
- La saisie des dernières règles (Obst1DernieresReglesSaisie)
- La détermination du terme (Obst1DeterminationTerme)
- La date d'écho du 1^{er} trimestre (ObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1 er trimestre (Obst1MesureLCC)

7.3.2.5 Date accouchement prévu (diafIdObst1AccouchementPrevu) :

Si la date des dernières règles (diafIdObst1DernieresReglesCalc) est renseignée la date d'accouchement prend la valeur DDR + 287 J. Si la date des dernières règles n'est pas renseignée, la date d'accouchement prévu prend la valeur de la DDR c'est-à-dire null (logique car « pas de Date de dernières règles » signifie « pas de date de début de grossesse »).

Donnée mise à jour lors de la mise à jour du champ Date des Dernières Règles (DernieresReglesCalc).

7.3.2.6 Date d'arrêt de travail (diafIdObst1ArretTravail) :

Cette date est calculée en fonction de la Date accouchement prévu (diafIdObst1AccouchementPrevu) et la parité (diafIdObst1Parite) qui correspond au nombre d'enfant déjà née.

La date d'arrêt de travail ne se calcule que si le type de grossesse est renseigné dans le dossier (toujours non null).

- Si le type de grossesse(diafIdIntervTypeGrossesse) est de 1 et que la parité est supérieure ou égale à deux, la date d'arrêt de travail se calcule de la façon suivante : Date accouchement prévu 56 J
- Si le type de grossesse(diafIdIntervTypeGrossesse) est de 1 et que la parité est égale à un, la date d'arrêt de travail se calcule de la façon suivante : Date accouchement prévu 42 J
- Si le type de grossesse est compris entre 2 et 4, la date d'arrêt de travail se calcule de la façon suivante : Date accouchement prévu 84 J
- Si le type de grossesse est compris entre 5 et 10, la date d'arrêt de travail se calcule de la façon suivante : Date accouchement prévu 168 J

Cette donnée est mise à jour si :

- La Date de début de grossesse est modifiée (Obst1AccouchementPrevu)
- La parité est modifiée (Obst1Parite)
- Le type de grossesse est modifié (IntervTypeGrossesse)

7.3.2.7 Mineure (diafIdObst1IsMinor):

La case à cochée « Mineure » que l'on trouve dans l'onglet administratif se coche automatiquement si la patiente est mineure. Pour vérifier cette info il faut que la date de naissance de la patiente soit renseignée. Si la différence d'année entre la date du jour et sa date de naissance est inférieur à 18 la patiente la case à cocher se coche sinon elle se décoche/reste décochée.

Cette donnée est mise à jour si la date de naissance du patient est modifiée (Patient/DATENAISS).



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 396 / 419

7.3.2.8 Antécédent : Nombre enfant né : diafldObst1NbEnfantsNes :

Le calcul du nombre d'enfant née dépend du paramétrage de DianeObst. Il faut que la section TOTAUXOBST clé Fœtus du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une naissance d'enfant vivant (Enfant né vivant. Décès post natal).

Le calcul du nombre d'enfant nés parcourt les antécédents obstétricaux de la patiente à la recherche des issues de grossesse associées à la naissance d'enfant vivant. Un compteur s'incrémente à chaque valeur trouvée pour alimenter par la suite diafIdObst1NbEnfantsNes.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.9 Antécédent : Nombre de grossesse avec pour issue une Mort Fœtal In Utero < 22 semaines aménorrhée (diafldObst1NbMFIUInf22) :

Le calcul du nombre de grossesse avec pour issue une MFIU < 22 dépend du paramétrage de DianeObst. Il faut que la section TOTAUXOBST clé MFIUInf22 du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une MFIU < 22 (MFIU < 22 SA). Le calcul du nombre de mort fœtal in utéro parcourt les antécédents obstétricaux de la patiente à la recherche des issues de grossesse associé à une MFI < 22 SA. Un compteur s'incrémente à chaque valeur trouvée pour alimenter par la suite diafIdObst1NbMFIUInf22. Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.10 Antécédent : Nombre de grossesse avec pour issue une Mort Fætal In Utero > 22 semaines aménorrhée (diafIdObst1NbMFIUSup22) :

Le calcul du nombre de grossesse avec pour issue une MFIU > 22 dépend du paramétrage de DianeObst. Il faut que la section TOTAUXOBST clé MFIUSup22 du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une MFIU > 22 (MFIU > 22 SA). Le calcul du nombre du nombre de mort fœtal in utéro parcourt les antécédents obstétricaux de la patiente à la recherche des issues de grossesse associé à une MFI > 22 SA. Un compteur s'incrémente à chaque valeur trouvée pour alimenter par la suite diafIdObst1NbMFIUSup22

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.11 Antécédent : Nombre d'interruption médicale de grossesse supérieur à 22 semaine d'aménorrhée (diafidObst1NbIMGSup22) :

Le calcul du nombre d'IMG > 22 SA dépend du paramétrage de DianeObst. Il faut que la section TOTAUXOBST clé IMGSup22 du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une IMG > 22 (IMG > 22 SA).

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.12 Antécédent : Nombre d'interruption médicale de grossesse inférieur à 22 semaine d'aménorrhée (diafldObst1NbIMGInf22) :

Le calcul du nombre d'IMG < 22 SA dépend du paramétrage de DianeObst. Il faut que la section TOTAUXOBST clé IMGInf22 du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une IMG < 22 (IMG < 22 SA).

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.13 16 semaines d'aménorrhée (diafldObst116SA) :

Affiche la date de la 16 semaine d'aménorrhée de la grossesse en partant de la DDG et en ajoutant 112 jours. Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.14 Antécédent : Nombre d'IVG (diafldObst1NbIVG) :

Affiche le nombre de grossesse volontairement interrompues de la patiente à condition que le paramétrage de



43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

BOW MEDICAL SAS

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2 Version du dispositif médical: 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 397 / 419

la section TOTAUXOBST clé IVG de DianeObst soit renseigné avec le champ correspondant à un antécédant d'IVG. Le calcul se base sur les saisies du DLM Issue de la grossesse T1(ISSUEGROSSESSEOId) que l'on trouve dans l'onglet ATCD Obstétricaux.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.15 Antécédent : Nombre de césariennes(diafIdObst1NbCesar) :

Affiche le nombre de césarienne qu'a déjà subit la patiente à condition que le paramétrage dans DianeObst > TOTAUXOBST > Césarienne soit correctement paramétré. Le calcul vérifie par la suite si le DLM Issue de grossesse (ISSUEGROSSESSE) contient la donnée paramétrée dans Césarienne (Césarienne).

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.16 Antécédent : Nombre de Menace d'accouchement prématuré (diafIdObst1NbMAP) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé Map de DianeObst avec une donnée du DLM pathogrossesse.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.17 Antécédent : Hypertension artérielle gravidique (diafldObst1NbHTA) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé Hta de DianeObst avec une donnée du DLM pathogrossesse.

Le champ diafIdObst1NbHTA s'incrémente automatiquement en fonction des données renseignées au niveau des antécédents obstétricaux du patient.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.18 Antécédent : Nombre de prématurés (diafIdObst1NbPrema) :

Compte parmi les antécédents de la patient le nombre d'enfant née vivant née entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée. (Il faut que la section TOTAUXOBST clé Fœtus du paramétrage de DianeObst soit complété avec les données du DLM « Issue de grossesse » associé à une naissance d'enfant vivant (Enfant né vivant. Décès post natal))

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.19 Antécédent : Nombre de fausses couches(diafIdObst1NbFc) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé FaussesCouches de DianeObst avec une donnée du DLM ISSUEGROSSEold.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.20 Antécédent : Nombre de grossesse avec Diabète (diafIdObst1NbDiabete) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé Diabète de DianeObst avec une donnée du DLM PATHOGROSSESSE.

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.21 Antécédent : Nombre de grossesse môlaire(diafldObst1NbMole) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé Mole de DianeObst avec une donnée du DLM ISSUEGROSSEold.

Le champ diafIdObst1NbMole se met à jour lors de la modification de l'issue de grossesse au niveau des antécédents obstétricaux.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 398 / 419

7.3.2.22 Antécédent : Nombre de HYPO (diafldObst1NbHypo) :

Compte parmi les enfants nés vivants, lesquels ont un percentile de type poids < 10. Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV EC).

7.3.2.23 Antécédent : Nombre d'enfant malformés (diafldObst1NbMalform) :

Compte les enfants nés vivants avec une malformation (Malformation presence=0).

Donnée mise à jour à la suite de la modification des antécédents obstétriques (diafIdIntervINTERV_EC).

7.3.2.24 Antécédent : Nombre de grossesse extra utérines (diafIdObst1NbGeu) :

Prérequis : Paramétrage de la section TOTAUXOBST, clé Geu de DianeObst avec une donnée du DLM ISSUEGROSSEold.

Le champ diafldObst1NbGeu se met à jour lors de la modification de l'issue de grossesse au niveau des antécédents obstétricaux.

7.3.2.25 Indicateur Prado (diafIdObst1PradoIndic):

Permet le remplissage automatique de la liste déroulante « Eligible Prado » (Prado_Indic) de l'onglet Post partum > Prado/ sortie précoce.

Il suffit que les cases à cocher 1 à 10 de la donnée Prado_mere soient cochées + que les cases à cocher 1 à 10 de la donnée Prado_enf soient cochées pour que la liste déroulante Eligible Prado passe à oui

Champ mis à jour à la suite de modification de :

- diafIdObst1PradoMere
- diafldObst1PradoEnf

7.3.2.26 Indicateur Eligible Sortie Précoce (diafIdObst1SortiePrecIndic) :

Passage automatique de la liste déroulante Eligible Sortie Précoce de l'onglet Post partum > Prado / sortie précoce à la valeur « Oui ».

Si les 15 cases qui composent le bloc « Sortie précoce enfant » et les 11 cases qui composent le bloc « Critères éligibilité mère » sont cochées la liste passe à Oui, sinon elle reste à non.

Champ mis à jour à la suite de modification de :

- diafIdObst1SortiePrecMere
- diafIdObst1SortiePrecEnf

7.3.2.27 AFFICHESA (diafIdObst1):

Le champ AFFICHE SA (SAISIESA) au niveau du suivit de naissance de l'enfant affiche par défaut le nombre de semaines d'aménorrhée (SemainesAmenorrhee) lors de la naissance de l'enfant. Si une valeur est renseignée manuellement dans le champ de saisie **Saisie SA** (SAISIESA) cette valeur est automatiquement reconduite dans le champ AFFICHE SA.

Champ mis à jour si :

 Le nombre de semaine aménorrhée est modifié (diafIdObst1SemainesAmenorrhee ou diafIdObst1SAISIESA)

7.3.2.28 AFFICHEJ (diafIdObst1):

Le champ AFFICHE J (SAISIEJ) au niveau du suivit de naissance de l'enfant affiche par défaut le nombre de jour en complément du nombre de semaines d'aménorrhée (JoursAmenorrhee) lors de la naissance de l'enfant. Si



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 399 / 419

une valeur est renseignée manuellement dans le champ de saisie **Saisie J** (SAISIEJ) cette valeur est automatiquement reconduite dans le champ AFFICHE J.

Champ mis à jour si :

- Le nombre de jour d'aménorrhée est modifié (diafIdObst1JoursAmenorrhee ou diafIdObst1SAISIEJ)

7.3.2.29 Nombre de césarienne (diafIdObst1Cesarienne) :

Ce champ se renseigne automatiquement en fonction des données modalite_travail et acc_cesarienne. Si le travail (modalité_travail) est renseigné avec une valeur valant vaut « e » (Césarienne programmée) ou si le type d'incision est précisé (acc_cesarienne) alors Césarienne passe à « O », sinon elle reste à « N ». Champ mis à jour à la suite de modification de :

- diafIdObst1AccouchementCesarienne
- diafIdObst1Travail

7.3.2.30 Nombre de gestité : (diafIdObst1Gestite) :

Ce champ s'incrément pour chaque intervention du patient de type Obstétrique (1) ou Grossesse arrêtée (3). Champ mis à jour à la suite de modification de :

- diafIdIntervINTERV EC
- diafIdObst1TypeDossierDeprecated

7.3.2.31 Nombre de parité : diafIdObst1Parite :



Le champ parité compte le nombre d'enfant née vivant du patient, le nombre d'interruption médicale de grossesse supérieur à 22 SA (NB_IMG_>_22) et le nombre de mort fœtale In utéro (NB_MFIU_>22).

Champ mis à jour à la suite de la modification de l'issue de grossesse au niveau des antécédents obstétricaux. Champ mis à jour à la suite de modification de :

- diafIdIntervINTERV_EC
- diafldObst1IssueDeLaGrossesse

7.3.2.32 Utérus cicatriciel (diafldObstUterusCicatriciel) :



Utérus Cicatriciel se calcule avec la somme du nombre de césarienne (diafldObst1NbCesar) et le nombre de Cicatrice Gynécologiques (diafldObstCicatriceGyn).

En fonction de cette somme l'affichage du nombre de cicatrice au niveau de l'Utérus s'adapte :

- 0: Non
- 1 : Unicicatriciel
- 2 : Bicicatriciel
- 3 : Tricicatriciel
- 4 : Quadricicatriciel
- 5 : Pentacicatriciel
- 6 ou plus : Supérieur à 5



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Champ mis à jour si :

- Le nombre de césarienne est modifié (diafIdObst1NbCesar)
- Le nombre et le type de Cicatrice gynéco est modifié (diafIdObstCicatriceGyn / diafIdObstNbCicatriceGyn)

7.3.2.33 Total jours d'aménorrhée (diafldObst1JoursTotalAmenorrhee) :

Durée totale en jour depuis l'arrêt des règles de la patiente à la naissance de l'enfant. Correspond à la durée en semaine x 7 + durée en J.

Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.34 Nombre de semaine d'aménorrhée (diafIdObst1SemainesAmenorrhee) :

Le nombre de semaines d'aménorrhée est calculé à partir du champ JoursTotalAmenorrhee divisé par 7. Champ mis à jour à la suite d'une modification de diafldObst1JoursTotalAmenorrhee.

7.3.2.35 Nombre de jours d'aménorrhée en complément du nombre de semaines (diafldObst1JoursAmenorrhee) :

Le nombre de jours d'aménorrhée est calculé à partir du champ JoursTotalAmenorrhee modulo 7. Champ mis à jour à la suite d'une modification de diafIdObst1JoursTotalAmenorrhee.

7.3.2.36 Date Début échographie 1^{er} trimestre (diafldObst1DateDebutEchoT1):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 63 jours (9 semaines). Champ mis à jour si :

- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.37 Date Fin échographie 1^{er} trimestre (diafIdObst1DateFinEchoT1):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 83 jours (11 semaines et 6 jours). Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.38 Date de début de période pour le dépistage de la Ts1 au 1^{er} trimestre (diafldObst1DateDebutDepistageT21T1):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 63 jours (9 semaines).



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafldObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.39 Date de fin pour le dépistage de la Ts1 au 1^{er} trimestre (diafldObst1DateFinDepistageT21T1) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 83 jours (11 semaines et 6 jours). Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.40 Date limite pour l'IVG (diafIdObst1DateLimiteIVG) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 84 jours Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.41 Date limite détection glycémie à jeun (Obstétrique1/DateLimiteGlycemieAJeun) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 97 jours (13 semaines et 6 jours) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.42 Date de l'entretien Prénatal (diafIdObst1DateEntretienPrenatal) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 92 jours (13 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafldObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.43 Date limite de déclaration de grossesse (diafldObst1DateLimiteDeclarationGrossesse) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 98 jours (14 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 402 / 419

- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.44 Date de début de période pour le dépistage de la Ts1 au 2^e trimestre (diafIdObst1DateDebutDepistageT21T2):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 84 jours (9 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.45 Date de fin de période pour le dépistage de la Ts1 au 2^e trimestre (diafIdObst1DateFinDepistageT21T2):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 112 jours (16 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.46 Date de début pour *l'échographie* du second trimestre (diafIdObst1DateDebutEchoT2):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 126 jours (18 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.47 Date de fin pour l'échographie du second trimestre (diafIdObst1DateFinEchoT2) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 161 jours (23 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.48 Date début de détection de l'hyperglycémie provoquée par voie orale (diafIdObst1DebutHPGO75):

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 154 jours (22 semaines) Champ mis à jour si :

La date de début de grossesse est modifiée (diafidObst1DebutGrossesse)



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI: (01)3760404900005(10)040102

- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.49 Date fin de détection de l'hyperglycémie provoquée par voie orale (diafldObst1FinHPGO75) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 182 jours (26 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.50 Date de début pour l'échographie du 3^e trimestre (diafIdObst1DateDebutEchoT3) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 196 jours (28 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.51 Date de fin pour l'échographie du 3eme trimestre (diafldObst1DateFinEchoT3) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 231 jours (33 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)
- diafIdObst1MesureLCC

7.3.2.52 Date de début pour la détection du Strepto B (diafIdObst1DebutStreptoB) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 224 jours (32 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.53 Date de fin pour la détection du Strepto B (diafIdObst1FinStreptoB) :

Cette date se calcule à partir de la Date de début de Grossesse + 252 jours (36 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél: +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.54 Age du patient (Patient/AgeInYearsInteger)

Champ calculé à partir de la date de naissance du patient (PatientDATENAISS). Si cette date est non nulle le champ Age du patient correspond à la différence en année entre la date du jour et la date de naissance du patient.

Champ modifié à la suite de la mise à jour de Patient/DATENAISS

7.3.2.55 Date de début pour la consultation du 3^e mois (diafldObst1ConsultationTroisiemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 84 jours (12 semaines) Champ mis à jour si :

- La date de début de grossesse est modifiée (diafIdObst1DebutGrossesse)
- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.56 Date de fin pour la consultation du 3^e mois (DiafldObst1ConsultationTroisiemeMoisFin):

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 91 jours (13 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafldObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1er trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.57 Date de début pour la consultation du 4^e mois (diafldObst1ConsultationQuatriemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 112 jours (16 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.58 Date de fin pour la consultation du 4^e mois (diafldObst1ConsultationQuatriemeMoisFin) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 140 jours (20 semaines) Champ mis à jour si :



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafldObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.59 Date de début pour la consultation du 5° mois (diafldObst1ConsultationCinquiemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 140 jours (20 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafldObst1MesureLCC)

7.3.2.60 Date de fin pour la consultation du 5^e mois (diafldObst1ConsultationCinquiemeMoisFin) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 168 jours (24 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.61 Date de début pour la consultation du 6° mois (diafldObst1ConsultationSixiemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 196 jours (28 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.62 Date de fin pour la consultation du 6^e mois (diafldObst1ConsultationSixiemeMoisFin):

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 224 jours (32 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafldObst1DeterminationTerme)



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.63 Date de début pour la consultation du 7^e mois (diafldObst1ConsultationSeptiemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 224 jours (32 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.64 Date de fin pour la consultation du 7^e mois (diafldObst1ConsultationSeptiemeMoisFin) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 238 jours (34 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.65 Date de début pour la consultation anesthésique du 7^e mois (diafldObst1ConsultationAnesthSeptiemeMoisDebut):

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 196 jours (28 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.66 Date de fin pour la consultation anesthésique du 7^e mois (diafIdObst1ConsultationAnesthSeptiemeMoisFin) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 224 jours (32 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.3.2.67 Date de début pour la consultation du 8^e mois (diafldObst1ConsultationHuitiemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 196 jours (28 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.68 Date de fin pour la consultation du 8^e mois (diafldObst1ConsultationHuitiemeMoisFin) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 252 jours (36 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.69 Date de début pour la consultation du 9° mois (diafldObst1ConsultationNeuviemeMoisDebut) :

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 252 jours (36 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.70 Date de fin pour la consultation du 9^e mois (diafIdObst1ConsultationNeuviemeMoisFin):

Date calculée à partir de la Date des dernières règles + 266 jours (38 semaines) Champ mis à jour si :

- La date des dernières règles est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- La date d'issue de grossesse est modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)
- Le type de détermination du terme est modifié (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La date d'échographie du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObst1MesureLCC)

7.3.2.71 Nombre d'enfants pour la grossesse actuelle (diafIdObst1NombreEnfants):

Ce champ est égal au nombre de fœtus pour la grossesse en cours. L'état du bébé durant la grossesse/ à la naissance n'est pas pris en compte.



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Champ modifié à la suite de la mise à jour du champ diafIdIntervTypeGrossesse.

7.3.2.72 Nombre de semaines d'aménorrhée au moment de l'échographie du 1er trimestre (diafIdObst1SAEchoT1) :

Calcul du nombre de semaine d'aménorrhée au moment de l'échographie du 1^{er} trimestre à partir du champ date Obst date echo t1.

Champ mis à jour si :

- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée(diafIdObst1MesureLCC)
- La date d'écho du 1^{er} trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)

7.3.2.73 Nombre de jours d'aménorrhée en complément du nombre de semaines au moment de l'échographie du 1er trimestre (diafldObst1JEchoT1) :

Calcul du nombre jour en complément du nombre de semaine d'aménorrhée au moment de l'échographie du 1^{er} trimestre à partir du champ date Obst_date_echo_t1.

Champ mis à jour si :

- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée(diafIdObst1MesureLCC)
- La date d'écho du 1 er trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)

7.3.2.74 Calcul de la DDG selon LCC (diafIdDDGCalc):

Prérequis : la liste déroulante « Déterminé par » (DeterminationGrossesse) doit être initialisé avec la valeur 1 (LLC < 14SA). Dans l'encart Echographie 1^{er} trimestre, la Date échographie (Obstr_date_echo_t1) ainsi que la valeur de LLC (mesure LCC) doivent être complétés.

DDG = (Date écho T1 - ((SALCC *7) +JLCC)) + deux semaines

Les valeurs SALCC + JLCC sont stockées en dur dans Diane :

Mesure de la LCC	SALCC
6 à 9	6
10 à 15	7
16 à 23	8
24 à 32	9
33 à 43	10
44 à 55	11
56 à 68	12
69 à 83	13
84 à 85	14

Mesure de la LCC	JLCC
6, 11, 17, 25, 34, 35, 45, 46, 57, 58, 71, 72	1
18, 26, 36, 47,59, 60, 73, 74	2
7, 12, 19, 27, 28, 37,38, 48, 49, 61, 62, 76, 77	3
13, 20, 29, 39, 50,51, 63, 64, 78, 79	4
8, 14, 21, 22, 30, 40,41, 52, 53, 65, 66, 80, 81	5
9, 15, 23, 31, 32, 42,54, 55, 67, 68, 82, 83	6
43	7

Champ mis à jour si :

- La Détermination du terme est modifiée (diafIdObst1DeterminationTerme)
- La mesure de la LCC au 1^{er} trimestre est modifiée(diafIdObst1MesureLCC)



2025-11-07

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

- La date d'écho du 1 er trimestre est modifiée (diafIdObstDateEchoT1)

7.3.2.75 Phase de Latence (DiafldObstPhaseLatence) :

Durée en minute entre l'événement de début de travail (SA Admission SDN) et la dilatation à 5 (Sa Partogramme). La phase de latence est calculée :

- Si la Dilatation est modifiée/supprimée
- A l'ajout d'un évènement de type début de travail
- A la suppression de l'évènement début de travail
- À la suite de la mise à jour de l'heure de l'événement de type début de travail

7.3.2.76 Phase active (DiafIdObstPhaseActive):

Durée en minute entre la dilatation à 5 (Sa Partogramme) et la dilatation à 10.

La phase Active est calculée :

- Si la dilatation est modifiée/supprimée
- A l'ajout d'un évènement de type début de travail
- A la suppression de l'évènement début de travail
- À la suite de la mise à jour de l'heure de l'événement de type début de travail

7.3.2.77 Durée du Stade 1 : Le travail (diafldObstStade1)

La durée du stade 1 correspond à la différence en minute entre l'événement Début de travail (SA Admission SDN) et l'heure de saisie de la dilatation du col à 10 ou plus de 10 (Sa Partogramme).

Le stade 1 est recalculé :

- Si la dilatation est modifiée/supprimée
- A l'ajout d'un évènement de type début de travail
- A la suppression de l'évènement début de travail
- À la suite de la mise à jour de l'heure de l'événement de type début de travail

7.3.2.78 Durée du Stade 2 : Descente et naissance du bébé (diafldObstStade2)

La durée du stade 2 correspond à la différence en minute entre l'heure de saisie de la dilatation du col à 10 et l'évènement de naissance de l'enfant.

Cette durée est recalculée :

- Si la Date d'issue de Grossesse(diafIdObst1IssueGroDate) est modifiée
- La dilatation est modifiée/supprimée

7.3.2.79 Durée du stade 3 (diafldObstStade3) :

La durée du stade 3 correspond à la différence en minute entre la naissance de l'enfant et la délivrance du placenta (SA Accouchement).

La durée est calculée si :

- L'évènement Délivrance est ajouté
- L'heure de saisie de la délivrance est modifiée
- L'événement Délivrance est supprimé
- La date d'issue de grossesse est saisie/modifiée (diafIdObst1IssueGroDate)



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.3.2.80 Terme de mise en travail (diafIdObstTermeMiseTravailSAJ) :

Terme

41SA + 1J

Ce champ calculé est le résultat de la concaténation de deux champs calculés :

- diafIdObstTermeMiseTravailSA : calculé à partir de la différence en jour entre la Date des Dernières Règles (DernieresReglesCalc) et la date de l'événement Début de travail divisé par 7.
- diafIdObstTermeMiseTravailJ: calculé à partir de la différence en jour entre la Date des Dernières Règles (DernieresReglesCalc) et la date de l'événement Début de travail modulo 7.

Le terme est calculé si :

- La date des dernières règles calculées est modifiée (diafIdObst1DernieresReglesCalc)
- A l'ajout d'un évènement de type début de travail
- A la suppression de l'évènement début de travail
- À la suite de la mise à jour de l'heure de l'événement de type début de travail

7.3.2.81 Ruptures de poche des eaux : diafldObstPerteLADebutTravail

Champ calculé correspond à la durée en minute entre l'événement début de travail (SA Admission SDN) et l'événement de rupture de la poche des eaux. Si plusieurs ruptures de poches des eaux ont lieux (grossesse multiple) le calcul se base sur la plus ancienne.

7.3.2.82 Antécédents : Nombre d'enfant morts nés (diafIdObstNbMortsNés) :

Comptabilise le nombre d'enfant morts nés parmi les antécédents obstétricaux de la patiente. Le calcul se base sur la somme des champs calculés diafidObst1NbMFIUSup22 et diafidObst1NbIMGSup22. Ce champ est calculé si :

- Le nombre de Mort Fœtal inter-utérine supérieure à 22 semaines est mis à jour (diafIdObst1NbMFIUSup22)
- Le nombre d'interruption médicale de grossesse supérieure à 22 semaines est mis à jour (diafldObst1NbIMGSup22)

7.4 Listes des Tags

7.4.1 Tags d'impression

Il est possible d'extraire la liste des tags **Word** en éditant n'importe quelle lettre type **Word** et en cliquant sur le bouton suivant **Exporter la liste des "tags"**.

-ETAPE 2 : Composer votre lettre type à l'aide des Tags de Diane-



Vous pouvez exporter la liste des Tags de Diane vers un fichier texte en diquant sur le bouton ci-contre. Si vous avez sélectionné l'application Word alors ce fichier texte doit-être utilisé tel quel comme source de données rattachée à la lettre type que vous allez saisir. Pour cela lancer Word, sélectionnez dans le menu "Outils/Publipostage" puis créez une "Lettre type" en document principal. Ouvrez le fichier texte (.txt) contenant les Tags de Diane comme source de données. Composez alors votre lettre type en insérant les champs de fusion disponibles directement à partir de la barre d'outil prévu à cet effet dans Word ("PATIENTNOM_PATRONYMIQUE", PATIENTPRENOM", ...).

Si vous n'utilisez pas Word mais le format WordPad RTF, WordPad TXT ou StarOffice/OpenOffice, alors le fichier texte généré contiendra les Tags Diane tels qu'ils doivent être saisis dans la lettre type que vous créez ("Diane[PATIENT-NOM_PATRONYMIQUE]\", "Diane[PATIENT-PRENOM]\", ...).

Le tag d'impression lié à un champ de données DIANE se retrouve facilement en procédant ainsi :

Ouvrir l'outil de configuration.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87
Courriel: contact@bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE** Version **DIANE** : 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 411 / 419

- Ouvrir l'outil « Gestion des champs de données DIANE » (dispo en haut à gauche en cliquant sur le bouton ...).
- Sélectionner le champ concerné.

Informations du champ

Identifiant interne Diane: diafIdPatientNOMMARITAL - 3
Nom du champ: NOMMARITAL
Description du champ: Nom usuel du patient

AX de référence: Patient - raPatient - 12
Identifiant de donnée: 3
Type de donnée: Normale - dfkNormal - 0
Type (base de données): Texte - ddbftString - 6
Tag d'impression associé: PATIENT-NOM_MARITAL

7.4.1.1 Tags d'impressions liés à la traçabilité

Un tag d'impression **INTERV-TRACABILITE** (Traçabilité des différentes mutations du patient au cours du dossier) permet d'afficher la chronologie (Timeline) de l'intervention sélectionnée de la même façon qu'au survol de l'icône présente dans la fenêtre de sélection du patient.

Il existe également un tag d'impression pour chaque catégorie de mutation du patient :

INTERV-TRANSFERT : Période de transfert INTERV-INDUCTION : Période d'induction INTERV-BLOC : Période de passage au bloc

INTERV-REVEIL : Période de réveil

INTERV-REA: Période en réanimation / USC

INTERV-CONSULTOBS : Période en consultation obstétrique

INTERV-SALLENAISS: Période en salle de naissance

INTERV-AMBU: Période en ambulatoire **INTERV-CLOTURE**: Clôture du dossier

Exemple : INTERV-REA \rightarrow 18/09 à 12h00 \rightarrow 19/09 à 18h45 : Réanimation / USC (Lit 1)

18/08 à 11h17 -> 19/08 à 09h32: Réanimation / USC (Lit 1)

7.4.1.2 Tags d'impressions liés aux traitements et prémédications

PREMEDICATIONS_PERSOS_SIGNES_LE : Date/heure de signature des prémédications du patient

PREMEDICATIONS_PERSOS_SIGNES_PAR : Nom/Prénom du médecin ayant signé les prémédications du patient

CPA-PREMEDICATIONS: Prémédications

PRESCR-Premedications_ALD : Prémédications – Affection de longue durée

PRESCR-Premedications_NonALD : Prémédications – Autres que Affection de longue durée

 $\textbf{PRESCR-REA_PREMEDDICCATIONS}: Prescriptions \ de \ r\'eanimation-Import \ depuis \ pr\'em\'edications$

SIGNATURE_IMAGE_MEDECIN_PREMED: Signature du médecin ayant signé les prémédications du patient

TRAITEMENTS_PERSOS_SIGNES_LE: Date/heure de validation les traitements personnels du patient

COMMENTAIRE_TRAITEMENT: Histoire de la maladie

TRAITEMENTS_PERSOS_SIGNES_PAR : Nom/Prénom du médecin ayant validé les traitements personnels du patient

PRESCR-TraitementPersonnel_ALD : Traitement personnel – Affection de longue durée

PRESCR-TraitementPersEtRelais_ALD: Traitement personnel – Autre que Affection de longue durée

PRESCR-TraitementPersEtRelais_NonALD: Traitement personnel et relais – Affection de longue durée

PRESCR-TraitementPersonnel_NonALD : Traitement personnel et relais – Autre que Affection de longue durée **CPA-RELAIS-HORS-HOPITAL** : Traitement personnel – Affichage des substituts liés à la base de données sur les médicaments

CPA-PREMEDICATIONS_HORS_HOPITAL : Prémédications – Affichage des prémédications liées à la base de données sur les médicaments



BOW MEDICAL SAS

43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.4.2 Tags des informations affichées dans le portail DIANE REA (versions antérieures à la V4.8)

Les tags concernent le portail DIANE REA:

Lit 3 ANGELIN Francis J 5

Exploration du thorax après un traumatisme par thoracotomie

Clé "Masque du nom de Patient apparaissant dans la liste des patients présents" dans DianeRea.ini (première ligne) :

ngne/.	
Balise	Action
<patientformatednames></patientformatednames>	Nom du patient formatté tel que paramétré dans la clé "Permet de sélectionner le type d'affichage des noms du patient" du fichier DiaServeur.ini
<patientnompatro></patientnompatro>	Nom de naissance du patient
<patientnommarit></patientnommarit>	Nom usuel du patient
<patientprenom></patientprenom>	Prénom du patient
<patientsexe></patientsexe>	Sexe du patient (M ou F)
<patientage></patientage>	Age du patient (incluant l'unité)
<patientipp></patientipp>	IPP du patient
<patientdatenaiss></patientdatenaiss>	Date de naissance du patient au format régional du système d'exploitation
<patient_height></patient_height>	Taille du patient (incluant l'unité)
<patient_weight></patient_weight>	Poids du patient (incluant l'unité)

Clé "Motif d'admission" dans DianeRea.ini (seconde ligne) :

die moth a damission dans Planenedium (seconde iigne).	
Balise	Action
<motif_admission></motif_admission>	Valeur de l'ActiveX "CPAInterv", Donnée "PATHOLOGIE"=2
<motif_type_interv> et <type_interv></type_interv></motif_type_interv>	Valeur de l'ActiveX "CPAInterv", Donnée "TYPINTER"=5
<motif_chirurgien></motif_chirurgien>	Valeur de l'ActiveX "CPAInterv", Donnée "CHIRURGIEN"=9
<motif_rea_resp></motif_rea_resp>	Nom prénom du médecin responsable de la plage horaire courante de réanimation
<motif_inf_resp></motif_inf_resp>	Nom prénom de l'infirmier responsable de la plage horaire courante de réanimation
<motif_asn_resp></motif_asn_resp>	Nom prénom de l'aide-soignant responsable de la plage horaire courante de réanimation

Clé "Informations additionnelles (si disponible) à ajouter au motif d'admission" dans DianeRea.ini (seconde ligne) :

Balise	Action
<upop_chir></upop_chir>	Nom du chirurgien présent pendant le bloc (utilisé pour l'UPOP)
<upop_anesth></upop_anesth>	Nom de l'anesthésiste présent pendant le bloc (utilisé pour l'UPOP)



BOW MEDICAL SAS
43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.4.3 Tags des informations affichées dans la barre de titre de Visual/DIANE REA/ DIANE OBSTETRIQUE

Les tags concernent la zone de titre (la plus haute de la fenêtre) :

å Lit 3 - ANGELIN Francis - (REPRISE REANIMATION) - Utilisateur: MEDECIN Yves - Version : 4.7.5.2

Clé "Masque des informations de la barre de titre de l'application" pour Visual/ DIANE REA/ DIANE OBSTETRIQUE :

ODSTETNIQUE.	
Balise	Action
<user></user>	Identifiant (=Login) de l'utilisateur connecté
<usernom></usernom>	Nom de l'utilisateur connecté
<userprenom></userprenom>	Prénom de l'utilisateur connecté
<useradeli></useradeli>	Numéro ADELI de l'utilisateur connecté
<currentlocation></currentlocation>	Localisation du patient (nom de la salle ou nom du lit selon les cas)
<patientformatednames></patientformatednames>	Nom du patient formaté tel que paramétré dans la clé "Permet de sélectionner le type d'affichage des noms du patient" du fichier DiaServeur.ini
<patientnompatro></patientnompatro>	Nom de naissance du patient
<patientnommarit></patientnommarit>	Nom usuel du patient
<patientprenom></patientprenom>	Prénom du patient
<patientsexe></patientsexe>	Sexe du patient (M ou F)
<patientage></patientage>	Age du patient (incluant l'unité)
<patientipp></patientipp>	IPP du patient
<patientdatenaiss></patientdatenaiss>	Date de naissance du patient au format régional du système d'exploitation
<typelocation></typelocation>	Mode courant du dossier (Induction, Intervention, Repriseetc.)
<responsable></responsable>	Nom prénom du responsable de l'intervention (uniquement pour le bloc/réveil)

Clé "Titre apparaissant en haut de l'application" pour le module Consultation :

Balise	Action
<user></user>	Identifiant (=Login) de l'utilisateur connecté
<usernom></usernom>	Nom de l'utilisateur connecté
<userprenom></userprenom>	Prénom de l'utilisateur connecté
<useradeli></useradeli>	Numéro ADELI de l'utilisateur connecté
<databasename></databasename>	Nom de l'alias de base de données courant
<patientformatednames></patientformatednames>	Nom du patient formatté tel que paramétré dans la clé "Permet de sélectionner le type d'affichage des noms du patient" du fichier DiaServeur.ini
<patientnompatro></patientnompatro>	Nom de naissance du patient
<patientnommarit></patientnommarit>	Nom usuel du patient
<patientprenom></patientprenom>	Prénom du patient
<patientsexe></patientsexe>	Sexe du patient (M ou F)
<patientage></patientage>	Age du patient (incluant l'unité)
<patientipp></patientipp>	IPP du patient
<patientiep></patientiep>	Numéro de séjour
<patientdatenaiss></patientdatenaiss>	Date de naissance du patient au format régional du système d'exploitation
<patientservresp></patientservresp>	UF Médicale d'accueil du patient.



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : <u>contact@bowmedical.com</u> Site Internet : <u>www.bowmedical.com</u>



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

7.4.4 Tags des informations affichées dans le bandeau Visual/DIANE REA/ DIANE OBSTETRIQUE

Ces tags correspondent à ce qui est affiché dans le bandeau supérieur :



Il s'agit de la clé Masque d'affichage du bandeau supérieur du module.

Il s'agit de la clé Masque d'affichage du bande Balise	Action
<patient_civilite> <patientformatednames></patientformatednames></patient_civilite>	Civilité du patient Nom du patient formaté tel que paramétré dans la clé "Permet de sélectionner le type d'affichage des noms du
	patient" du fichier DiaServeur.ini
<patientnompatro></patientnompatro>	Nom de naissance du patient
<patientnommarit></patientnommarit>	Nom usuel du patient
<patientprenom></patientprenom>	Prénom du patient
<patientautresprenoms></patientautresprenoms>	Autres prénoms du patient
<patientprenomusuel></patientprenomusuel>	Prénom usuel du patient
<patientage></patientage>	Age du patient (incluant l'unité)
<pre><patient_gestational_age></patient_gestational_age></pre>	Age gestationnel
<pre><patient_revised_age></patient_revised_age></pre>	Age corrigé
<patientdatenaiss></patientdatenaiss>	Date de naissance du patient au format jj/mm/aaaa
<currentlocation></currentlocation>	Localisation du patient (nom de la salle ou nom du lit selon les cas)
<patient_interv_day></patient_interv_day>	Nombre de jours (base zéro) depuis le début du dossier (pour le premier jour par exemple, "J 0" sera affiché)
<patient_height></patient_height>	Taille du patient (n'incluant pas l'unité)
<patient_weight></patient_weight>	Poids du patient (n'incluant pas l'unité)
<patient_initial_weight></patient_initial_weight>	Poids initial du patient (à l'admission)
	Poids théorique du patient selon la formule paramétrée
<patient_theoretical_weight></patient_theoretical_weight>	dans le fichier DiaServeur.ini, clé "Choix de l'algorithme
	pour le calcul du poids théorique" (n'incluant pas l'unité)
<patient_adjusted_weight></patient_adjusted_weight>	Poids ajusté calculé selon la formule : Poids théorique+0.4
	× (Poids courant - Poids théorique) (n'incluant pas l'unité)
<patient_birth_weight></patient_birth_weight>	Poids de naissance
<patient_last_presc_weight></patient_last_presc_weight>	Poids de la dernière prescription
<patient_weight_with_date></patient_weight_with_date>	Poids incluant la date
<bmi></bmi>	IMC
<bsa></bsa>	Surface corporelle (n'incluant pas l'unité)
<patient_last_presc_bsa></patient_last_presc_bsa>	Surface corporelle de la dernière prescription
<patientsexe></patientsexe>	Sexe du patient (M, F ou I)
	Unité fonctionnelle de l'entité courante (poste) : L'UF
<uf></uf>	affichée correspond à la première UF trouvée sur les
	entités parentes, récursivement
<ipp></ipp>	IPP du patient
<ins></ins>	INS du patient
<patientstatus></patientstatus>	Statut de l'INS du patient
<bilan_groupe></bilan_groupe>	Groupe sanguin du patient (correspond à la donnée de l'ActiveX "Sanguin", Donnée "GROUPE"=1)
<iep></iep>	Numéro de séjour correspondant au dossier, retrouvé



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel : contact@bowmedical.com
Site Internet : www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

	avec une recherche basée sur la date de début de bloc ou de début de réa (selon le cas)
<obst_saj></obst_saj>	Semaine(s) et Jour(s) d'aménorrhée
<obst_ut_cicat></obst_ut_cicat>	Utérus cicatriciel
<obst_parite></obst_parite>	Parité
<user></user>	Utilisateur courant
<motif_admission> <type_interv> <motif_chirurgien></motif_chirurgien></type_interv></motif_admission>	Motif d'hospitalisation
<patient_date_prise_en_charge></patient_date_prise_en_charge>	Date d'entrée en réa (incluant la date)
<patient_gain_loss_since_admission></patient_gain_loss_since_admission>	Prise ou perte de poids depuis l'admission
<patient_gain_loss_since_last_measure></patient_gain_loss_since_last_measure>	Prise ou perte de poids depuis la dernière mesure

7.4.5 Tags pour les entêtes des documents intégrés (Evolutions, Synthèse...)

Balise	Action
<newline></newline>	Retour à la ligne
<currentroom></currentroom>	Affiche le nom de la salle courante
<currentbloc></currentbloc>	Affiche le nom du bloc courant
<currentbed></currentbed>	Affiche le nom du lit de réveil courant
<currentpc></currentpc>	Affiche le nom du poste
<user></user>	Affiche le login de l'utilisateur connecté
<usernom></usernom>	Affiche le nom de l'utilisateur connecté
<userprenom></userprenom>	Affiche le prénom de l'utilisateur connecté
<userrole></userrole>	Affiche le rôle de l'utilisateur connecté
<userprofil></userprofil>	Affiche le profil/la catégorie de l'utilisateur connecté
<useradeli></useradeli>	Affiche le code ADELI de l'utilisateur connecté
<useridext></useridext>	Affiche l'identifiant externe de l'utilisateur connecté
<useridext:appli></useridext:appli>	Si l'utilisateur a plusieurs identifiants externes :
COSERIDEAT.AFFEI>	Affiche son identifiant pour l'application APPLI
	Affiche la date actuelle
	Le format de date est paramétrable :
<datenow:dd mm="" yyyy=""></datenow:dd>	dd/mm/yyyy pour France (par défaut)
	mm/dd/yyyy pour les USA
	Le séparateur / peut être remplacé.
	Affiche l'heure actuelle (hh:nn:ss par défaut)
<datenow:hh:nn:ss></datenow:hh:nn:ss>	Le format de l'heure est paramétrable :
	Ex : hh:nn pour ne pas afficher les secondes
	Le séparateur : peut être remplacé.

7.5 Listes des paramètres physiologiques

DIANE intègre plus de 1 000 paramètres physiologiques, la liste est disponible en configuration via l'onglet **Paramétrages**, **Visual**, clé ParamList – Configuration de la fenêtre de saisie de donnée manuelle – Liste des paramètres à afficher



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com

Fax: +33 9 72 29 34 87




BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



La liste des paramètres physiologiques est aussi disponible en utilisation via la fenêtre de saisie de données manuelles en cochant la case **Afficher tous les paramètres**.

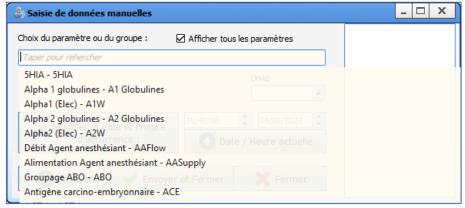

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Symbole	Nom du symbole	Signification du symbole
MD	Medical Device (dispositif médical)	Indique que le produit est un dispositif médical.
***	Fabricant légal	Désigne le fabricant du dispositif médical.
FR	Pays de fabrication Date de fabrication	Désigne le pays de fabrication du dispositif médical (le code FR signifie France).
2025-11-07		Date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
ϵ	Marquage CE	Indique la conformité technique européenne.
\bigcap i	Consulter le manuel	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions pour utiliser le produit.
\triangle	Mise en garde	Indique qu'il faut faire preuve de prudence lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande près de l'endroit où est placé ce symbole, ou que la situation en cours nécessite une sensibilisation de l'opérateur ou une action de l'opérateur pour éviter des conséquences indésirables.
UDI	Identifiant unique du dispositif	Indique un support qui contient des informations d'identifiant unique du dispositif.

BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France Tél : +33 3 60 03 24 68

Fax: +33 9 72 29 34 87 Courriel: contact@bowmedical.com Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102



BOW MEDICAL S.A.S 43 Avenue d'Italie 80000 AMIENS France



DIANE contient des fonctionnalités dispositif médical.



L'utilisateur doit lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation du dispositif médical.



(01)3760404900005(10)040102

La formation au dispositif médical DIANE est fortement recommandée.

Dernière révision: 2025-11-20



BOW MEDICAL SAS 43, Avenue d'Italie 80000 AMIENS France

Tél: +33 3 60 03 24 68 Fax: +33 9 72 29 34 87

Courriel: contact@bowmedical.com
Site Internet: www.bowmedical.com



BM-DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**

Version **DIANE**: 4.14.2

Version du dispositif médical : 4.1.2 UDI : (01)3760404900005(10)040102

Version du document : 1

Page: 419 / 419