

DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.14.5

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-63579 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un problème de gestion de bolus programmé (BBraun HL7).

DKC-63599 - (Associé au dispositif médical)

Ajout des informations patient (nom, prénom, date de naissance, IPP) dans le bandeau de la fenêtre « Détail de la balance liquidienne ».

DKC-63602 - (Associé au dispositif médical)

Correction du calcul de la quantité de diluant dans la fiche guidée, en mode débit et lors de la modification de la durée de perfusion.

DKC-63606 - (Associé au dispositif médical)

Correction de lenteurs à la saisie dans l'ancien composant DiaTraitement.

DKC-63609 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la traduction de la planification journalière dans la fiche de prescription guidée.

DKC-63625 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un message d'erreur indiquant que la prescription sélectionnée ne correspond pas à la prescription en cours, lors du changement de jour de réanimation.

DKC-63638

Correction de lenteurs à l'impression des lettres type possédant un nombre élevé de tags d'impression.

DKC-63660 - (Associé au dispositif médical)

Correction du verrou sur la modification des prescriptions réalisées dans le fiche de prescription guidée à partir d'un favori.

DKC-63700 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une erreur lors de l'utilisation, dans la fiche de prescription guidée, d'une étiquette associée à un médicament supprimé du livret thérapeutique.

DKC-63702

Correction du déclenchement du code CCAM GLLD019.

DKC-63716

Correction de la requête servant à alimenter la liste des patients, qui pouvait provoquer des erreurs sur la base de données.

DKC-63730

Correction d'un message affichant à tort le nom d'un patient lors d'une prise de verrou.

DKC-63745

Correction d'un problème d'initialisation OpenGL sur Windows Server 2022 : modification du moteur graphique de rendu du schéma corporel qui pouvait dysfonctionner avec certains environnements (machines virtuelles, connexions TSE/Citrix,...).

DKC-63746 - (Associé au dispositif médical)

Ajout d'un filtre (case à cocher) pour les accès distants dans les logs Patients/Dossiers de l'historique des modifications des listes (module de configuration).

DKC-63754

Correction d'une erreur sur le DiaReport

DKC-63787 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une anomalie à l'impression du compte-rendu via l'impression centralisée qui pouvait, dans certains cas, superposer deux lignes de texte.

DKC-63810

Correction de la détermination de la date de début de prescription pour les tags d'impression « Prescriptions médicamenteuses en cours » et « Prescriptions médicamenteuses en cours (liaison) ».

DKC-63814 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un problème de mise à jour du contexte lors de la suppression d'un champ de saisie avancée.

DKC-63815 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un problème empêchant l'enregistrement des saisies avancées composées uniquement de sous-scores.

DKC-63835

Correction des verrous de fusion dans le cas de la fusion d'interventions pour un même patient.

DKC-63842 - (Associé au dispositif médical)

Amélioration de l'affichage des champs Ax/Id dans le résumé des saisies avancées lors du survol des occurrences dans l'onglet Surveillance/Bloc.

DKC-63844

Gestion des bases de données Access dans l'outil de fusion.

DKC-63846

Correction de la fusion des paramètres physiologiques provoquant une erreur en cas de doublon.

DKC-63851 - (Associé au dispositif médical)

Lors de la liaison à un PSE, suppression de la ressaisie du contenant volumique et possibilité de valider directement l'étape de dilution.

DKC-63858 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un problème permettant de modifier les saisies avancées d'autres utilisateurs via un double-clic dans l'historique.

DKC-63865

Correction d'une erreur provoquant une attente infinie lors de l'impression du diaReport en présence de paramètres physiologiques.

DKC-63868 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une erreur affectant les favoris d'administration à la demande lorsque le poids et/ou la taille du patient ne sont pas renseignés.

DKC-63901

Ajout de la prise en compte du droit de saisie des administrations directes dans la fenêtre de recherche de médicaments.

DKC-63940

Correction de la génération des codes CCAM/CIM-10 pour certains prélèvements qui n'étaient pas pris en compte.

DKC-63946

Correction du positionnement du focus dans la fenêtre de saisie de la posologie des administrations directes.

DKC-63953

Amélioration de la vérification de la présence d'occurrences afin de mieux gérer les intervalles lors des fusions de dossiers.

DKC-63963 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un déclenchement incorrect de la validation des saisies avancées conditionnées à un rôle lors d'un clic sur le bouton d'impression.

DKC-63975

Correction d'une erreur de conversion lors de la fusion des médicaments, gestion de la fusion d'une entrée de personnel seule et mise au propre des journaux (logs).

DKC-64023

Correction de l'ajout trop restrictif du code CCAM FELF003.

DKC-64026

Correction d'un potentiel cas où l'admission à distance peut être affichée comme échouée alors qu'elle a réussi.

DKC-64039

Correction d'un libellé disparu dans la fenêtre de clôture des PSE et des chronos, à la fermeture d'un dossier.

DKC-64049

Correction de l'affichage de la fenêtre de saisie de balance liquidienne par niveau depuis une saisie multiple.

DKC-64072

Correction d'une requête incorrecte dans l'outil de configuration (création de voie pour les médicaments non structurés).

Drivers

DKC-63934 - (Associé au dispositif médical)

Correction du driver PSE Agilia : résolution d'un problème d'unités et de valeurs erronées dû à des incompatibilités de taille de données.

DKC-63992

Correction du traitement de la source des paramètres mesurés dans les fichiers HL7 : les valeurs provenant de plusieurs sources ne sont plus mélangées dans un seul paramètre.

IOP

DKC-62780

Correction du tag d'impression des séjours.

DKC-63557

Correction d'une erreur du service d'interface intervenant quand le flux INS est activé et que le ZFD contient moins de 5 sous-segments.

DKC-63919

Correction de l'appel contextuel AXCare

DKC-64021

Correction d'un arrêt systématique du service d'interface.

EVOLUTIONS

No epic

DKC-63048

Mise à jour du driver Taema Monnal T60 pour support Monnal T60 Advanced

DKC-63749 - (Associé au dispositif médical)

Remplacement du dialistmémé "Allergie" par le Dia-allergie dans l'onglet de Surveillance. le Di-allergie permettant la saisie d'allergies structurées via appel à la banque des médicaments.

La présence du composant permet également de visualiser l'icône précisant si l'allergie renseignée sera prise en compte ou non dans l'analyse médicamenteuse.

☒ Enregistrer
 ☐ Annuler

Médicaments / Balance liquidienne

Patient Paramètres

Nom **TEST CRIS**
 Nom Usuel
 Prénom **4.14.5** 45 ans
165 cm **58** kg **F**
 Grp Sang / Rh
 ASA
 BSA **1,63** BMI **21,3**

Intervention

Allergies
 Hypersensibilité au paracétamol
 acariens

Anesthésie

Chronos

lundi 22 juin 2026
16:51:31
 Echelle: 4 heures
 Poids **58**
 18/06 09:58:29
 D-ADREN
 SpO2 **95,4**
 18/06 10:00:35
 Fr(ecg)
 PNI
 Fr(ecg)

Saisies

22/06 - 0
 15:15

N.B: Compte tenu de la restriction d'affichage, lorsque des données sont cachées un icône s'affiche afin de le signaler. Et les informations sont disponibles au survol de l'allergie

Paramétrage: Aucun paramétrage nécessaire.

SCORES: gestion des scores intégrés

DKC-62358

Ajout de tags pour imprimer les saisies de l'IGSII :

- FIRST_IGSII : Première saisie avec âge
- FIRST_IGSII_NOAGE : Première saisie sans âge
- LAST_IGSII : Dernière saisie avec âge (Modification du libellé du tag existant pour préciser que l'on part affiche uniquement la dernière saisie)
- LAST_IGSII_NOAGE : Dernière saisie sans âge (Modification du libellé du tag existant pour préciser que l'on part affiche uniquement la dernière saisie)
- REA-IGSII : Toutes les saisies du score IGSII avec âge
- REA-IGSII-NOAGE : Toutes les saisies du score IGSII sans âge
- LAST_SHORT_IGSII : IGSII au format court (pour l'impression des CCAM) avec âge
- LAST_SHORT_IGSII_NOAGE : IGSII au format court (pour l'impression des CCAM) sans âge

SUPPORT

DKC-63610

Ajout d'une légende dans le module de configuration pour expliquer la signification des codes couleur et des différentes polices.

Cette légende est disponible su chacun des sous-onglets.

Configuration - ETABLISSEMENT : Pôle de Réanimation

☒ Masquer utilisateurs

Structure de l'hôpital

- ETABLISSEMENT
 - Pôle Ambulatoire
 - Pôle Anesthésie
 - Pôle de Réanimation
 - Déchocage
 - Réanimation néonatale
 - Réanimation pédiatrique
 - Unité de Réanimation
 - Chambre 1
 - Chambre 2
 - Chambre 3
 - Chambre 4
 - Chambre 5
 - ADVANTECH-HYPPOMED
 - BOW-AP-653
 - Chambre 6
 - Chambre 7
 - Surveillance
 - Unité de Soins Continus
 - SYSDIANE Diane
 - Pôle Gyneco-Obstétrique

Événements visibles dans le secteur sélectionné

Événements
Complications
Donnée Manuelle
Saisies Avancées
Médicaments
Balance Liquidienne
Produits Sanguins
Commentaires
Saisie Multiple

Légende des événements.

Italique : un identifiant externe a été configuré.

L'élément souligné est un sélecteur.

Un ou plusieurs code(s) CIM 10 sont associés à l'élément.

Un ou plusieurs code(s) CCAM sont associés à l'élément.

L'élément est supprimé.

Liste complète des événements

- Balance Liquidienne
- Commentaires
- Complications
- Consommables
- Donnée Manuelle
- Environnements Patient
- Événements
 - Actes périnesthésiques
 - Anêt Cardio-Respiratoire (ACR), Assistance circulatoire, Tonicardiaques
 - Divers
 - Drainage pleural
 - Echographie
 - Echocardiographie TransThoracique (ETT) continue avec épreuve de stress sur lit ergonomique
 - Echocardiographie-Doppler TransOesophagienne (ETO) du cœur et des vaisseaux
 - Echocardiographie-Doppler TransOesophagienne (ETO) per-opérateur pour contrôle de la correction chirurgical
 - Echographie per-opérateur par le chirurgien
 - Echographie-Doppler TransThoracique (ETT) du cœur et des vaisseaux intrathoraciques
 - Guidage échographique
 - Mise en place d'une sonde d'Echographie TransOesophagienne (ETO)
 - Nautius Delta pour guidage et positionnement des cathéters veineux centraux
 - Surveillance hémodynamique continue par doppler oesophagien par 24h
 - Surveillance hémodynamique continue par Echocardiographie TransThoracique (ETT) itérative par 24h
 - Endoscopie en dehors de l'acte d'intubation
 - Examens complémentaires
 - Oxygénothérapie ventri
 - Prélèvement
 - Pression intracrânienne
 - Remplissage Transfusion
 - Rythmologie
 - SpO2
 - Urinas
 - Vole centrale, Etude pression et débit sanguin
 - Alimentation et Hydratation
 - Anesthésie
 - Arthéfact monitoring
 - Chirurgie
 - Commut
 - Forces extérieures

Code(s) CIM10

Code(s) CCAM

Type